

NUK®


NUK elektrická prsná pumpa

Návod na používanie




10.252.142

A

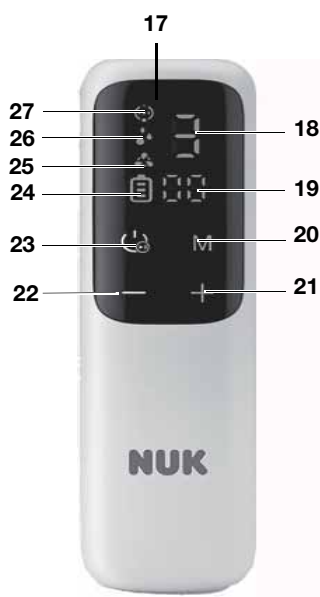

B

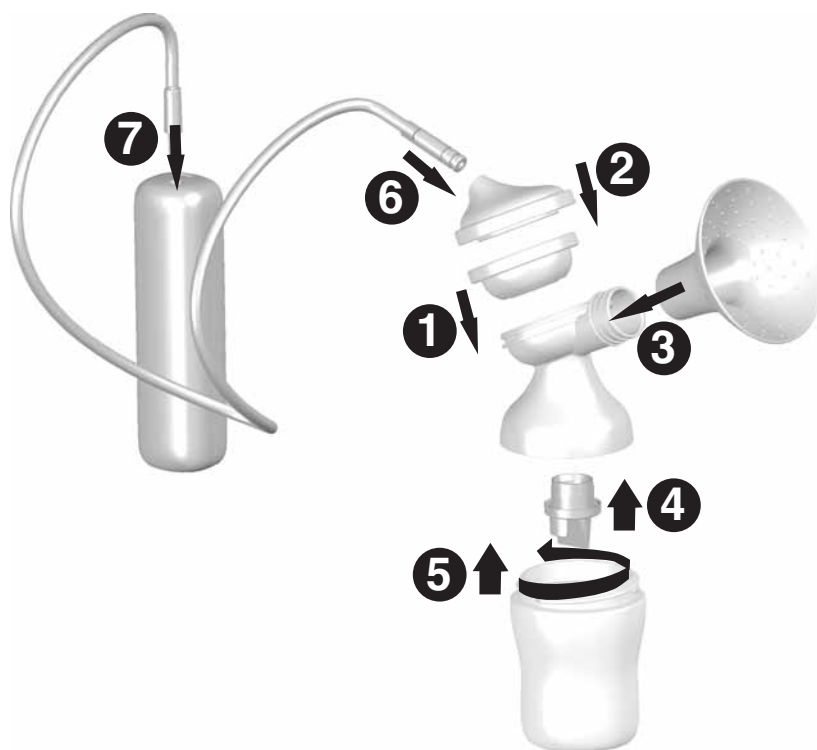

C



D

1. Plug the power cord into a wall outlet and connect the USB cable.

2. Wash the steriliser components with soap and water.

3a. Place the steriliser components in a pot of water for boiling.

3b. Place the steriliser components in the steriliser's basket.

4. Assemble the steriliser components.

5. Plug the power cord into the steriliser.

6. Hold the steriliser over a bottle.

7. Press the power button on the control panel.

8. Press the 'M' button on the control panel.

9. Place the sterilised components in a container for storage.

10. Press the 'M' button on the control panel.

Obsah

1 Dôležité pokyny pred prvým použitím	6
2 Popis prístroja.....	6
2.1 Účel použitia	6
2.2 Varianty	6
2.3 Obsah balenia	6
2.4 Popis funkcie	7
2.5 Označenie na výrobku/obale	7
3 Bezpečnostné pokyny	7
3.1 Vysvetlenie pojmov	7
3.2 Všeobecné upozornenia	7
3.3 Hygiena	8
3.4 Upozornenie k fľaštičke na materské mlieko a k náustku.....	8
4 Označenie súčastí a funkčné prvky (obrázok A)	8
5 Čistenie a dezinfekcia	9
5.1 Čistenie	9
5.2 Dezinfekcia.....	10
6 Zloženie odsávačky	10
6.1 Výber silikónového prsného násadca	10
6.2 Odsávanie s jedným prsným násadcom.....	10
6.3 Odsávanie s dvoma prsnými násadcami (dvojité odsávačka)	11
7 Napájanie	11
8 Obsluha.....	11
8.1 Zapnutie a vypnutie odsávačky, voľba režimu.....	11
8.2 Odsávanie mlieka.....	12
8.3 Po odsávaní	13
8.4 Podávanie odsatého mlieka.....	13
8.5 Uchovávanie odsatého mlieka	13
9 Rady pre úspešné odsávanie	13
10 Rady pre hygienu.....	13
11 Uskladnenie mlieka	14
12 Podpora pri problémoch.....	15
13 Likvidácia	16
14 Záruka	16
14.1 Servisné centrum	16
14.2 Dodávateľ.....	16

Milá mamička,

elektrická odsávačka materského mlieka NUK vám pomôže pripraviť si zásobu materského mlieka pre vaše dieťa.

Pred prvým použitím odsávačky materského mlieka NUK si urobte čas

a pozorne si prečítajte tento návod na používanie.

Stručný návod formou obrázkov, pozri vyobrazenie D.

1 Dôležité pokyny pred prvým použitím



Výstraha! Pred prvým použitím odsávačky materského mlieka NUK vyčistite a dezinfikujte všetky časti odsávačky materského mlieka (pozri 5 Čistenie a dezinfekcia na strane 9).

Pred prvým použitím nabite akumulátor (pozri 7 Napájanie na strane 11).



Pozorne si prečítajte priložené výstražné pokyny a pokyny na používanie fľaštičky na materské mlieko / fľaštičky NUK, náustka a príslušenstva.

2 Popis prístroja

2.1 Účel používania

Elektrická prsná pumpa NUK je pomôckou na odsávanie a zachytenie materského mlieka.

Odsaté materské mlieko možno zachytiť priamo do fľaštičky na materské mlieko NUK, v tejto fľaštičke ho možno uchovávať, zmraziť, ohriať a možno z nej aj kŕmiť.

Odsávačka materského mlieka NUK je určená pre jednotlivé používateľky pre súkromné použitie. Nie je určená na komerčné použitie.

2.2 Varianty

Túto odsávačku materského mlieka NUK ponúkame v dvoch variantoch:

- ako jednotlivú odsávačku
- ako dvojtitú odsávačku

Tento návod na používanie platí pre oba varianty.

Upozornenie: Ponúkame aj rozširovaciu súpravu (č. výr. 10.252.144), ktorou je možné jednotlivú odsávačku rozšíriť na dvojtitú odsávačku.

2.3 Obsah balenia

1 ovládacia jednotka (17)

1 USB pripojovací kábel (14)

1 súprava odsávačky, súčasti:

- 2 silikónové prsné násadce rôznej veľkosti (1)
- membránový uzáver (3)

– membrána (4)

– spojovací prvok (5)

– prietokový ventil (6)

1 nasávacia hadička (15)

1 fľaštička na materské mlieko, súčasti:

– fľaša (7)

– závitový krúžok (10)

– náustok (11)

– prachové ochranné viečko náustka (12)

– uzáver (13)

1 stojan (8)

1 adaptér pre fľaštičky NUK First Choice (9)

1 vrecúško na uskladnenie

1 návod na používanie

U dvojitej odsávačky je priložená rozširovacia súprava. Táto obsahuje:

1 súpravu odsávačky, kompletnú

1 fľaštičku na materské mlieko

1 stojan

1 adaptér pre fľaštičky NUK First Choice
13-ramennú súpravu nasávacích hadičiek

Upozornenie: Rozširovaciu súpravu (č. výr. 10.252.144) na rozšírenie jednotlivéj odsávačky na dvojtitú odsávačku možno kúpiť aj dodatočne.

Upozornenie: USB napájací diel nie je súčasťou balenia. Na nabíjanie akumulátora možno použiť akýkoľvek obvyklý USB napájací diel (nabíjačku mobilného telefónu alebo power banku) s 5 V DC / min. 1 A. Používajte však výhradne dodaný USB pripojovací kábel 14.

2.4 Popis funkcie

Odsávačka materského mlieka NUK pracuje na princípe elektrického nasávania a má tieto prednosti:

- nastaviteľný režim odsávania
- nastaviteľnú intenzitu odsávania
- mäkké silikónové prsné násadce s dvoma priemerami
- Používať ju možno snapájacím dielom alebo s nabíjajúcim akumulátorom integrovaným v odsávačke.
- Všetky použité materiály spĺňajú požiadavky zákonných predpisov a neobsahujú BPA.

2.5 Označenie na výrobku / obale

Symbol	Význam
	Dodržujte návod na použitie
	Pozor! Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v návode na použitie
BP8	Názov modelu
	Vyhlásenie o zhode Sú splnené všetky požiadavky použitých smerníc ES
	Vyhlásenie o zhode Spĺňa všetky príslušné požiadavky pre výrobky predávané vo Veľkej Británii
	Regulatory Compliance Mark (RCM) AU/NZ
	Jednosmerný prúd
	Prístroj nepatrí do komunálneho odpadu
	Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
	Chráňte pred vlhkosťou / skladujte na suchom mieste
Art.	Číslo výrobku
	Označenie šarže

3 Bezpečnostné pokyny

3.1 Vysvetlenie pojmov

V tomto návode na používanie sú použité tieto signálne pojmy:



Výstraha!

Nedodržanie varovania môže spôsobiť závažné poranenie, dokonca usmrtenie.

Upozornenie!

Nedodržanie varovania môže spôsobiť malé poranenie alebo vecné škody.

Upozornenie:

Situácie, na ktoré treba brať ohľad pri manipulácii s prístrojom.

3.2 Všeobecné upozornenia

Výstraha! Malé diely



uchovávajúte mimo dosahu detí:
Nebezpečenstvo prehltnutia a udusenía.



Výstraha! Nebezpečenstvo uškrtenia. Hadičky a káble nikdy neumiestňujte blízko bábätiok a detí.



Výstraha! Akumulátor je pevne priskrutkovaný a nedá sa vymeniť.

Neodborná výmena akumulátora môže spôsobiť zvýšenú teplotu, explóziu alebo požiar.

Upozornenie! Ovládaci jednotku 17 a USB pripojovací kábel 14 nikdy neponárajte do vody, pri vniknutí vody sa môžu poškodiť.

- Pred použitím odsávačky materského mlieka si pozorne prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho. Návod na použitie je súčasťou prístroja a musí byť vždy k dispozícii.

Upozornenie: Ak bude návod na používanie nečitateľný alebo sa stratí, možno si ho stiahnuť na adrese nuk.de, resp. nuk.com.

- Odsávačku materského mlieka NUK a príslušenstvo používajte na uvedené účely použitia (pozri 2.1 Účel použitia na strane 6).
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, plast môže byť následkom pôsobenia UV žiarenia a tepla krehký.
- Pred odsávaním odporúčame odstrániť z prsníka masti obsahujúce tuk a oleje, tieto látky by mohli poškodiť povrch silikónového prsného násadca.
- Používajte iba originálne príslušenstvo NUK.
- Pamätajte, že v prípade použitia dielov príslušenstva, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na používanie, zaniknú všetky nároky vyplývajúce zo záruky.
- V prípade eventuálnych porúch prístroja smie prístroj opraviť iba výrobca. V opačnom prípade zaniknú všetky nároky vyplývajúce zo záruky.
- Nikdy neotvárajte puzdro ovládacej jednotky **17 – inak zaniká záruka.**
- Ak je materské mlieko určené pre predčasne narodené dieťa, potom bezpodmienečne dodržiavajte pokyny vášho lekára.
- Obal nie je hračka pre deti. Nesmie sa dostať do blízkosti detí. Hrozí nebezpečenstvo poranenia a udusení.

3.3 Hygiena



Výstraha!

Aby sa bábätko mohlo zdravo vyvíjať, má pri manipulácii s materským mliekom hygiena veľký význam.

- Pre zabránenie infekcie a kontaminácie baktériami (tvorbe baktérií) a pre zabránenie poškodenia prístroja dodržiavajte pokyny uvedené v časti 5 Čistenie a dezinfekcia na strane 9.
- **Iba dobre vyčistená odsávačka materského mlieka zaručí plný odsávací výkon.**
- **Pred použitím odsávačky materského mlieka si dôkladne umyte ruky.**
- Pred použitím odsávačky materského mlieka odstráňte šperky z prsníka (napr. piercing).

3.4 Upozornenie k fľaštičke na materské mlieko a k náustku



V záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa: POZOR!



Pozorne si prečítajte priložené výstražné pokyny a pokyny na používanie fľaštičky na materské mlieko/fľaštičky NUK, náustka a príslušenstva.

4 Označenie súčastí a funkčné prvky (obrázok A)

Odsávačka (vždy jednotlivá alebo dvojité):

- 1 Silikónové prsné násadce v 2 veľkostiach
- 2 Prípojka hadičky
- 3 Membránový uzáver
- 4 Membrána
- 5 Spojovací prvok
- 6 Prietokový ventil
- 7 Fľaštička na materské mlieko / fľaša
- 8 Stojan

Príslušenstvo fľaštičiek (vždy jednotlivé alebo dvojité):

- 9 Adaptér pre fľaštičky NUK First Choice
- 10 Závitový krúžok
- 11 Náustok

- 12 Prachové ochranné viečko náustka

- 13 Uzáver

Hadičky a vedenie:

- 14 USB pripojovací kábel
- 15 Nasávací hadička

U dvojitej odsávačky dodatočne:

- 16 3-ramenná súprava hadičiek
- 17 Ovládacia jednotka:

- 18 Zobrazenie stupňov

- 19 Zobrazenie času

- 20 Tlačidlo režimu

- 21 Zvýšenie intenzity odsávania

- 22 Zníženie intenzity odsávania

- 23 Vypínač a tlačidlo prestávky /ďalej

- 24 Zobrazenie stavu nabitia
- 25 Zobrazenie režimu vyprázdnenia
- 26 Zobrazenie režimu odsávania
- 27 Zobrazenie režimu stimulácie

5 Čistenie a dezinfekcia



Výstraha! Pri manipulácii s materským mliekom a všetkými časťami prichádzajúcimi do kontaktu s materským mliekom je najdôležitejšie dodržiavať hygienu. **Preto odsávačku používajte iba čistú a dezinfikovanú.**

Pred použitím odsávačky materského mlieka si dôkladne umyte ruky.

Nižšie uvedené časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom, treba **po každom použití ihneď** dôkladne vyčistiť a dezinfikovať (pozri 5.1 Čistenie na strane 9 a tiež 5.2 Dezinfekcia na strane 10):

- 1 Silikónové prsné násadce
- 4 Membrána
- 5 Spojovací prvok
- 6 Prietokový ventil
- 7 Fľaštička na materské mlieko / fľaša
- 9 Adaptér pre fľaštičky NUK First Choice (ak sa používa)
- 10 Závitový krúžok
- 11 Náustok
- 12 Prachové ochranné viečko náustka
- 13 Uzáver

Tieto súčasti sa **nesmú** čistiť a dezinfikovať vodou:

- 14 USB pripojovací kábel
- 17 Ovládací jednotka

5.1 Čistenie



Výstraha! Zvyšky mlieka môžu poškodiť materiál a spôsobiť tvorbu baktérií. Preto je nutné dôkladné vyčistenie.

Upozornenie!

- Prietokový ventil **6** čistite opatrne, aby sa nepoškodil. Prietokový ventil odporúčame iba opláchnuť a vyvariť. Čistiace prostriedky by mohli ventil poškodiť.

- Časti nepatriace do umývačky – inak hrozí poškodenie materiálu pôsobením čistiacich prípravkov!
- Do nasávacej hadičky **15**, resp. 3-ramennej súpravy hadičiek **16** sa nesmie dostať vlhkosť. Vlhká hadička môže poškodiť ovládaciu jednotku. Ak sa v hadičke nachádza vlhkosť, musí sa pred ďalším použitím vysušiť.

1. Prístroj rozložte podľa obrázka **B**. Postupujte v opačnom poradí od č. 7 do č. 1.

2. Nižšie uvedené súčasti vyčistite teplou vodou s malým množstvom čistiaceho prípravku (napr. značky NUK).



Súčasti potom opláchnite pod tečúcou vodou:

- 1 Silikónový prsný násadec
- 4 Membrána
- 5 Spojovací prvok
- 6 Prietokový ventil
- 7 Fľaštička na materské mlieko / fľaša
- 9 Adaptér pre fľaštičky NUK First Choice (ak sa používa)
- 10 Závitový krúžok
- 11 Náustok
- 12 Prachové ochranné viečko náustka
- 13 Uzáver

Upozornenie: Pri oplachovaní spolu s inými predmetmi môžu určité potraviny spôsobiť zafarbenie materiálu (napr. mrkvová šťava) alebo byť zdrojom zápachu (napr. feniklový čaj). To však neznamená žiadne nepriaznivé ovplyvnenie použiteľnosti alebo bezpečnosti výrobku.

3. Potom všetky časti dezinfikujte (pozri 5.2 Dezinfekcia na strane 10).
4. Nasávaciu hadičku **15**, resp. 3-ramennú súpravu hadičiek **16** a ovládaciu jednotku **17** utrite vlhkou handričkou.

5.2 Dezinfekcia

Pred každou dezinfekciou treba prístroj vyčistiť podľa časti 5.1 Čistenie na strane 9.




Výstraha! Pri dezinfikovaní hrozí nebezpečenstvo oparenia.

Upozornenie!

- Časti určené na vyváraie alebo naparovanie (teplota nad 80 °C) musia byť vždy rozložené na jednotlivé diely a musia byť otvorené, pretože inak sa môžu zdeformovať.
- Ovládacia jednotka **17** a USB pripojovací kábel **14** sa v žiadnom prípade nesmú dezinfikovať, pretože pri dezinfikovaní dochádza k deformácii materiálu, resp. k poškodeniu elektroniky.
- Pri chybnnej manipulácii môže dôjsť k poškodeniu častí.
- Pred opätovným použitím a zložením treba dezinfikované časti dobre ochladiť a dosucha osušiť.

- Pri dezinfikovaní sa nesmú používať žiadne chemické dezinfekčné prípravky:

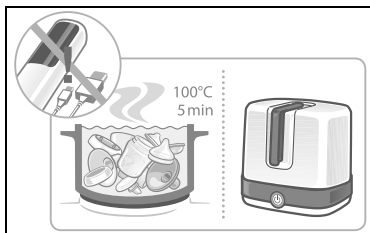

1. Používajte sterilizátor NUK. Dodržujte príslušný návod na používanie prístroja; alebo
2. časti 5 minút varte vo vriacej vode. Pre zabránenie poškodenia dbajte pri vyváraaní na to, aby v hrnci bolo dostatočné množstvo tekutiny; alebo
3. Pri dezinfikovaní v mikrovlnnej rúre používajte iba sterilizátor do mikrovlnných rúr NUK. Pri dezinfikovaní v mikrovlnnej rúre by sa mal použiť výhradne sterilizátor do mikrovlnných rúr NUK. Pri jeho použití dodržujte príslušný návod na používanie.


6 Zostavenie odsávačky

6.1 Výber silikónového prsného násadca

Dodané silikónové prsné násadce **1** majú zvonku označenie 24 mm a 27 mm. Je to označenie priemeru na úzkej strane.


Zvoľte si silikónový prsný násadec, ktorý zodpovedá veľkosti vašej prsnej bradavky. Prsný násadec by mal byť o niečo väčší než prsná bradavka. Prsný násadec, ktorý nepasuje, potom odložte nabok, aby nedošlo k zámene.

6.2 Odsávanie s jedným prsným násadcom

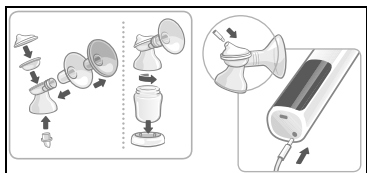

1. Prístroj zostavte podľa obrázka **B**, kroky 1 až 7.

2. Ak chcete odsávať len s jedným prsným násadcom, na spojenie však používate trojramennú súpravu hadičiek **16** dvojitej odsávačky, nepoužívanú hadičku musíte nasadiť do krížového kusa, aby nedochádzalo k nasávaniu vzduchu.

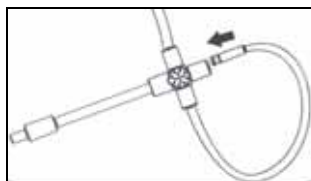

Upozornenie: Pomocou dodaného adaptéra pre fľaštičky **9** môžete odsávačku materského mlieka používať aj s fľaštičkami z programu NUK First-Choice.

Upozornenie: Dbajte na to, aby silikónový prsný násadec **1** úplne priliehal k spojovaciemu prvku **5** a aby prietokový ventil **6** bol správne namontovaný, inak by odsávačka mohla nasávať vzduch a mohla by sa ovplyvniť jej funkcia.

6.3 Odsávanie s dvoma prsnými násadkami (dvojitá odsávačka)

1. Rozširovaciu súpravu zostavte podľa popisu v časti 6.2 Odsávanie s jedným prsným násadcom na strane 10.
2. Obe prípojky hadičiek 2 spojte s ovládacou jednotkou 17 pomocou trojramennej súpravy hadičiek 16 (pozri obrázok C).

7 Napájanie

Ovládacía jednotka 17 obsahuje pevne vstavaný lítiový akumulátor s kapacitou 1400 mAh. Kapacita plne nabitého akumulátora vystačí na cca 3 až 4 procesy odsávania.

Stav nabitia akumulátora sa zobrazí na ovládacej jednotke pomocou indikácie 24.



Pre nabitie akumulátora pripojte ovládaciu jednotku 17 dodaným USB nabíjacím káblom 14 k USB napájacímu dielu (nabíjačka mobilného telefónu, powerbanka) s 5VDC/2A.

Keď sa akumulátor nabíja, zobrazuje to prebiehajúci pruh v zobrazení nabíjania 24.



Upozornenie: Akumulátor možno nabíjať aj pri odsávaní.

8 Obsluha

Upozornenie: Pri obsluhu je dôležité, aby ste sa zvislo dotýkali iba požadovaného tlačidla. Z bezpečnostných dôvodov sa nič nestane, ak sa nechcene dotkniete dvoch tlačidiel naraz.

8.1 Zapnutie a vypnutie odsávačky, voľba režimu

1. Dotknite sa vypínača 23 aspoň na 2 sekundy, až kým sa nerozsvieti displej ovládacej jednotky 17.



Odsávačka sa teraz nachádza v režime prestávky. Svieta indikácia 18.

2. Pre zmenu režimu sa dotknite tlačidla režimu M 20.



Výber režimu:

	Režim stimulácie	Režim odsávania	Režim vyprázdnenia
Popis	V režime stimulácie sa prsia jemne stimulujú pre lepší prietok mlieka. Mlieko začne tečť. Prístroj po 2 minútach automaticky prejde do režimu odsávania.	Pri vyprázdnení prsníka odsávačka pracuje s dlhými cyklami odsávania. Vyvolá sa reflex toku mlieka a mlieko tečie.	Režim vyprázdnenia slúži na konci procesu odsávania na to, aby sa prsník úplne vyprázdnil. Odsávačka odsáva 3x krátko a 1x dlho. V tomto režime môže byť podporovaná ďalšia tvorba mlieka.
Porovnanie s dojčením	Simulácia počiatočného rýchleho pitia dieťaťa z prsníka, keď pije. Trvanie 2 minúty.	Simulácia druhej fázy cicania dieťaťa. V ďalších cykloch dieťa pije pokojnejšie.	Ak sa prietok mlieka znižuje, dieťa začne piť rýchlejšie, aby sa stimuloval prietok mlieka.
Symbol na displeji			
Počet stupňov	9	9	9
Voľba stupňa	Pomocou tlačidiel 21 + a 22 -		

3. Pre zastavenie odsávačky a prepnutie do režimu prestávky sa znova dotknite vypínača **23**.

Odsávačku úplne vypnete dotykom vypínača **23** na aspoň 2 sekundy.

Automatické vypnutie

Odsávačka materského mlieka sa automaticky vypne, ak sa viac ako 30 minút nepoužíva.

8.2 Odsávanie mlieka

Výstraha!



Hygiena je veľmi dôležitá. Preto si pred odsávaním dôkladne umyte ruky.



8.2.1 Odsávanie jednotlivou odsávačkou

1. Silikónový prsný nasadec 1 nasadíte na prsník tak, aby sa prsná bradavka nachádzala v strede násadca. Silikónový prsný nasadec pritom zľahka pritlačte, aby pri odsávaní bola zaručená tesnosť. **Silikónový prsný nasadec s namontovanou fľaštičkou na materské mlieko 7 držte, pokiaľ možno, vo zvislej polohe.**



2. Znova stlačte vypínač **23**.



Prístroj spustí režim stimulácie s intenzitou odsávania 1.

Intenzita odsávania sa zobrazuje v indikácii **18**.

Upozornenie: Začnite s intenzitou odsávania **1** a podľa potreby intenzitu zvyšujte. Ak je odsávanie bolestivé, odporúčame znížiť stupeň odsávania.

3. Tlačidlami **21** + a **22** - vyberte z 9 stupňov intenzitu, ktorá je vám príjemná.

Zvolená intenzita odsávania sa zobrazuje v zobrazení stupňov **18**.

4. Ak chcete zvýšiť intenzitu odsávania, stlačte tlačidlo plus **21**, ak ju chcete znížiť, stlačte tlačidlo mínus **22**.



Prístroj automaticky po 2 minútach prejde do režimu odsávania.

Zvolená intenzita odsávania sa zobrazuje v zobrazení stupňov **18**.

5. Ak chcete zvýšiť intenzitu odsávania, stlačte tlačidlo plus **21**, ak ju chcete znížiť, stlačte tlačidlo mínus **22**.

Zvolená intenzita odsávania sa zobrazuje v zobrazení stupňov **18**.



6. Ak spozorujete, že prietok mlieka slabne, dotknite sa tlačidla režimu M 20 a prejdite do režimu vyprázdnenia (pozri 8.1 Zapnutie a vypnutie odsávačky, voľba režimu na strane 11).
7. Tlačidlami 21 + a 22 - vyberte z 9 stupňov intenzity, ktorá je vám príjemná.
Zvolená intenzita odsávania sa zobrazuje v zobrazení stupňov 18.

8.2.2 Odsávanie dvojistou odsávačkou

1. Postupujte podľa vyššie uvedeného odseku pre jednotlivú odsávačku.
2. Odsávačku však najprv zapnite.
3. Až potom nasadte oba silikónové prsné násadce 1 na oba prsníky.

Upozornenie: Ak chcete mať voľné ruky, silikónové prsné násadce vložte do špeciálnej odsávacej podprsenky. Táto podprsenka má otvor v oblasti prsnej bradavky, kam možno upevniť prsné násadce. Dbajte na to, aby podprsenka dostatočne pritlačila prsné násadce k prsníku, aby odsávačka nenasávala vzduch a mohla správne odsávať.

8.3 Po odsávaní

1. Vypnite odsávačku: Stlačte vypínač 23 aspoň na 2 sekundy, až kým displej nezhasne.
2. Odsávačku s namontovanou fľaštičkou na materské mlieko 7 odložte do stojana 8.

3. Stiahnite hadičku 15 z prípojky hadičky 2.
4. Odskrutkujte spojovací prvok 5 s prsným násadcom 1 a membránovým uzáverom 2 z fľaštičky na materské mlieko 7.
Fľaštičku na materské mlieko pritom držte, pokiaľ možno, zvislo.
5. Ihneď po odsávaní vyčistite jednotlivé časti okrem fľaštičky na materské mlieko (pozri 5 Čistenie a dezinfekcia na strane 9).

8.4 Podávanie odsátého mlieka

Nástok 11 pomocou závitového krúžka 10 naskrutkujte na fľaštičku na materské mlieko 7.



8.5 Uskladnenie odsátého mlieka

Ak chcete materské mlieko uskladniť, potom musíte naplnenú fľaštičku na materské mlieko 7 dobre zatvoriť uzáverom 13 a závitovým krúžkom 10 a uskladniť do chladničky alebo zmraziť (pozri 11 Uskladnenie mlieka na strane 14).

9 Rady pre úspešné odsávanie

Príjemné a správne odsávanie je vecou cviku. Podľa dennej formy a naplnenia prsníka sa proces odsávania môže líšiť.

Vyskúšajte rôzne režimy a zistite, ktorý je pre vás najlepší. Najprv si na novú odsávačku musíte zvyknúť.

10 Rady pre hygienu

Pri používaní odsávačky materského mlieka je veľmi dôležité dodržiavať hygienu. To platí pre jednotlivé časti odsávačky, aj pre osobnú hygienu. Odporúčame pravidelné umývanie prsných bradaviek čistou vodou. Pritom by sa, pokiaľ možno, nemalo používať mydlo, ktoré by mohlo bradavky podráždiť.


11 Uskladnenie mlieka

11.1 Vo fľaštičke na materské mlieko

Materské mlieko možno priamo vo fľaštičke na materské mlieko **7** chladiť, zmraziť a tiež rozmraziť.

Fľaštičku na materské mlieko **7** možno používať aj pri ohrievaní a priamo z nej kŕmiť.

V každom prípade dodržujte pokyny pre manipuláciu s materským mliekom uvedené v časti 11.2 Dôležité pokyny pre manipuláciu s materským mliekom na strane 14.

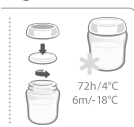

Upozornenie! Pre zabránenie poškodenia:

- Do chladničky sa nesmie uložiť celá odsávačka materského mlieka, ale len fľaštička na materské mlieko **7** so závitovým krúžkom **10** a uzáverom **13**.
- Pri zmrazení materského mlieka nenapĺňajte fľaštičku viac ako 150 ml, lebo pri zmrazení sa materské mlieko rozpína (nebezpečenstvo roztrhnutia!).

Riešenie, ktoré ponúka úsporu miesta pri zmrazení a skladovaní cenného materského mlieka, je vrecúško NUK na materské mlieko.



Výstraha! Z hygienických dôvodov dodržujte:

Ak sa materské mlieko ihneď nespotrebuje, potom naplnenú fľaštičku na materské mlieko treba dobre zatvoriť a uskladniť do chladničky alebo zmraziť.

Vhodným perom poznačte na fľaštičku na materské mlieko dátum a čas, kedy bolo mlieko odsaté, alebo použite etikety. Bezpodmienečne dodržujte lehoty uskladnenia uvedené v časti 11.2 Dôležité pokyny pre manipuláciu s materským mliekom na strane 14.

11.2 Dôležité pokyny pre manipuláciu s materským mliekom

Materské mlieko	Miesto uskladnenia	Lehoty uskladnenia
Čerstvo odsaté	Pri izbovej teplote	Max. 3 až 4 hodiny
	Chladnička (nie vo dverách)	72 hodín pri teplote 4 °C
	Mraziaci box v chladničke	2 týždne
	Mraznička	6 mesiacov pri teplote -18 °C
Rozmrazené uzavreté	Chladnička (nie vo dverách)	24 hodín pri teplote 4 °C
Rozmrazené otvorené	Chladnička (nie vo dverách)	12 hodín pri teplote 4 °C
Rozmrazenie mlieka	Šetrne v chladničke	cca 24 hodín pri teplote 4 °C
	Pri izbovej teplote, potom ihneď skonzumovať	
	Ak nie je čas: Fľaštičku s materským mliekom rozmrazte pod tečúcou studenou alebo vlažnou vodou (max. 37 °C), potom ihneď spotrebujte.	



Výstraha! Vždy zaistíte dostatočnú hygienu: Ak budete materské mlieko prepravovať, zaistíte, aby nikdy nedošlo k prerušeniu chladenia. Inak by sa mlieko mohlo skaziť a spôsobiť ujmu na zdraví dieťaťa. Použite napr. izolačnú tašku s chladiacimi akumulátormi.

Materské mlieko sa nesmie rozmrazovať v mikrovlnnej rúre, mohli by sa zničiť cenné látky v mlieku a okrem toho sa poškodiť aj materiál fľaštičky (nebezpečenstvo explózie). Nebezpečenstvo oparenia pri nerovnomernom ohrievaní!

Rozmrazené, ohriate alebo nespotrebované mlieko sa už nesmie zmraziť, musí sa zlikvidovať.

1. Pre dosiahnutie správnej teploty vhodnej na pitie (cca 37 °C) postavte fľaštičku s rozmrazeným materským mliekom do ohrievača detskej stravy NUK.

Upozornenie! Fľaštička musí byť otvorená, aby sa pri ohrievaní nevytvoril pretlak.

2. Pred podávaním mlieko mierne pretrepte, aby sa dobre premiešalo mlieko a mliečny tuk.

3. Ak počas 24 hodín odsávate niekoľkokrát, potom môžete čerstvo odsaté materské mlieko pridať k už schladenému materskému:

Teplota musí byť rovnaká (studené k studenému). Preto sa čerstvo odsaté mlieko musí najprv schladiť a až potom pridať k už chladenému mlieku.

Upozornenie:

- Presné pokyny pre dlhodobé uskladnenie získate od laktačnej poradkyne, pôrodnej asistentky, lekára alebo lekárničky.

12 Podpora pri problémoch

Problém	Príčina	Náprava
Odsávačka sa nespustí	Nebol správne stlačený vypínač 23	Dotknite sa vypínača 23 centrálné a zhora aspoň na 2 sekundy. Pri dotyku niekoľkých tlačidiel naraz prístroj nereaguje
	Žiadne napájanie	Ak je akumulátor prázdny, pripojte USB kábel (pozri 7 Napájanie)
Slabý tlak odsávania	Zalomená hadička	Skontrolujte hadičku a odstráňte zalomenie
Žiadny tlak odsávania	Hadička nie je správne usadená na prípojke hadičky	Hadičku opäť nasuňte na prípojku hadičky
	Pri použití trojramennej súpravy hadičiek len s jednou fľaštičkou je jedna prípojka otvorená	Zatvorte druhý prístup k hadičke (pozri 6.2 Odsávanie s jedným prsným násadcom)
	Prietokový ventil chýba 6 , je zle nasadený alebo poškodený	Skontrolujte správne usadenie. Pri poškodení použite dodaný náhradný ventil
	Súčasti sú chybné zložené	Skontrolujte správne zloženie (pozri 6 Zloženie odsávačky)
Odsávačka pracuje, ale neodsáva	Silikónový prsný násadec 1 nie je správne spojený so spojovacím prvkom 5 (netesnosť)	Ubezpečte sa, že silikónový prsný násadec je vzduchotesne spojený so spojovacím prvkom
	Silikónové prsné násadce 1 nepriliehajú vzduchotesne k prsníku	Silikónový prsný násadec vzduchotesne nasadíte na prsník (pozri 8.2 Odsávanie mlieka)

Problém	Príčina	Náprava
Odsávačka odsáva príliš slabo	Príliš slabo nastavená intenzita odsávania	Dotykom tlačidla plus 21 zvýšte intenzitu odsávania (pozri 8.2 Odsávanie mlieka)
Odsávačka odsáva príliš silno	Príliš silno nastavená intenzita odsávania	Dotykom tlačidla mínus 22 znížte intenzitu odsávania (pozri 8.2 Odsávanie mlieka)
Akumulátor sa nenabíja	Používate nesprávny USB kábel	Používajte výhradne dodaný USB pripojovací kábel
Potrebujem náhradné diely		Kontaktujte servisné centrum

13 Likvidácia

Všetky diely okrem ovládacej jednotky a USB pripojovacieho kábla môžete likvidovať v rámci domáceho odpadu.



Ovládaciu jednotku a USB pripojovací kábel treba odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov.

14 Záruka

Pri opatrnom zaobchádzaní s prístrojom a pri dodržiavaní návodu na používanie poskytuje výrobca záruku 24 mesiacov od okamihu prevzatia prístroja.

Pri vyplatenom zaslaní prístroja do našej firmy sa zaväzujeme prístroj bezplatne opraviť, ak ide o chybu materiálu alebo konštrukcie. Ďalšie nároky sa riadia platnými zákonmi.

Škody spôsobené neodborným použitím prístroja nebudú uhradené.

Prívodný kábel a zástrčka sú zo záruky vylúčené, ak ide o ich opotrebenie.

V prvých 24 mesiacoch od dátumu zakúpenia odstránime uznané opodstatnené nedostatky bez vyúčtovania vzniknutých vedľajších nákladov.

Zaslanie prístroja musí byť v každom prípade doložené zaslaním tohto vyplneného záručného listu alebo pokladničného dokladu, na ktorom je dátum zakúpenia prístroja, alebo dátum zakúpenia treba preukázať iným spôsobom.

Bez doloženého dátumu zakúpenia sa náklady budú účtovať bez spätných otázok a prístroj sa vráti na dobierku.

Záručný list nechajte vyplniť hneď po zakúpení a záručný list alebo pokladničný doklad, ktorý dokazuje zakúpenie tohto prístroja, dobre uschovajte. Stratené záručné listy nebudú nahradené.

Pre prípad reklamácie: Odložte si adresu, č. výrobku a č. šarže.

14.1 Servisné centrum

Mapa Spontex CE s. r. o.
Prodašice 4
294 04 Dolní Bousov
Česká republika

14.2 Dodávateľ

Pozor, táto adresa **nie je servisná adresa**.

MAPA GmbH
Industriestraße 21-25
27404 Zeven
Nemecko
www.nuk.com