

**Návod na použitie**

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uschovajte ho pre neskoršie použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riaďte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené.

**Obsah balenia**

- Odsávačka materského mlieka (jednotka motora)
- Silikónový vankúšik (bežná veľkosť)
- 2 x adaptér pre fľašku Avent + NUK
- Sieťová zástrčka
- Nadstavec na odsávačku so silikónovou membránou a silikónovým ventilom
- Tento návod na použitie
- Silikónová hadička
- Fľaštička
- Skrutkový uzáver
- 4x batérie AA 1,5 V

**Vážená zákazníčka, vážený zákazník,** ďakujeme, že ste sa rozhodli pre jeden z našich produktov. Naša značka je synonymom pre vysoko kvalitné, dôkladne vyskúšané výrobky na použitie v oblastiach určovania energetickej spotreby, jemnej manuálnej terapie, krvného tlaku / diagnostiky, hmotnosti, masáže, vzduchovej terapie a starostlivosti o krásu a dieťa. Prečítajte si pozorne tento návod na použitie, uschovajte ho pre neskoršie použitie, poskytnite ho aj ostatným užívateľom a riaďte sa pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. S pozdravom Váš tím Beurer.

**1. Vysvetlenie symbolov**

V návode sú použité nasledujúce symboly:

	<b>VAROVANIE</b> Varovné upozornenia na nebezpečenstvo poranenia alebo riziko ohrozenia zdravia		Prípustná prevádzková teplota a vlhkosť vzduchu.
	<b>POZOR</b> Bezpečnostné upozornenie na možné poškodenie zariadenia / príslušenstva		Prípustná teplota a vlhkosť vzduchu pri skladovaní.
	<b>Upozornenie</b> Upozornenie na dôležité informácie	<b>IP 21</b>	Ochrana proti vniknutiu cudzích telies $\geq 12,5$ mm a proti zvisle kvapkajúcej vode.
	Dodržujte návod na použitie		Uvádza, že obal podľa nariadenia 1935/2004 obsahuje produkty, ktoré sú určené na to, aby prichádzali do styku s potravinami.
	Aplikačná časť typu BF	<b>SN</b>	Sériové číslo
	Jednosmerný prúd	<b>REF</b>	Katalógové číslo výrobcu
	Likvidácia podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)		Značka CE potvrdzuje zhodu so základnými požiadavkami smernice 93/42 / EEC pre zdravotnícke pomôcky.
	Výrobca		Prístroj má dvojnásobnú ochrannú izoláciu a zodpovedá ochrannej triede 2.

**2. K zoznámení**

Pomocou odsávačky materského mlieka BY 40 si môžu dojčiacie ženy jednoducho a v pohodlí domova odsávať materské mlieko. Pokiaľ nie sú prsia dojčiacich žien dostatočne vyprázdňované, môže to viesť k bolestivému hromadeniu mlieka, ktoré sa môže v najhoršom prípade vyvinúť v zápal prsníka (mastitída). Pomocou odsávačky materského mlieka je možné zabrániť hromadeniu mlieka cieľeným odsávaním materského mlieka. Odsávačky materského mlieka navyše poskytujú úľavu aj v prípade popraskaných alebo poranených bradaviek. Pomocou zabudovanej stimulačnej funkcie môžete tiež povytiahnuť ploché alebo vpadnuté bradavky, čím sa uľahčí následné odsávanie materského mlieka. Odsávačka mlieka vám tiež umožní uchovávať materské mlieko vo fľaši, napr. na cestách alebo ak musíte bábätko na dlhšiu dobu opustiť. Odsávačkou materského mlieka sa tiež môže materské mlieko bábätkám, ktoré zo zdravotných dôvodov (predčasný pôrod, rúžštep podnebia) nemôžu sať priamo z prsníka matky.

**3. Použitie v súlade s určením**

Odsávačku materského mlieka používajte výlučne na odsávanie materského mlieka z prs do dojčiacich žien. Odsávačku materského mlieka nepoužívajte u zvierat! Odsávačka materského mlieka je určená len na použitie v domácom / súkromnom prostredí, nie v komerčnej oblasti. Tento prístroj sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vytvorený, a spôsobom uvedeným v tomto návode. Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí za škody vzniknuté neodborným alebo nevhodným používaním.

#### **4. Pokyny**



#### **VAROVANIE**

##### **Bezpečnostné pokyny**

- Obalový materiál udrzte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
  - Drobné diely nenechávajte v dosahu detí.
  - Dbajte na to, aby káble neboli v dosahu dieťaťa.
  - Používajte len sieťový adaptér dodávaný spolu s prístrojom.
  - Deti si s prístrojom nesmú hrať.
  - Čistenie a užívatel'skú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
  - Za sieťové kábel neťahajte, nekrúťte s ním a nelámate ho.
  - Pred uvedením odsávačky do prevádzky sa uistite, že technické údaje na sieťovom adaptéri súhlasia s technickými údajmi na jednotke motora.
  - Vytiahnite sieťový adaptér zo zástrčky v prípade prevádzkových porúch, pred čistením a ak nie je prístroj používaný.
  - Odsávačka materského mlieka sa nesmie dostať do kontaktu s predmetmi, ktoré majú horúci povrch alebo ostré hrany.
  - Nepoužívajte žiadne doplnkové diely, ktoré výrobca neodporučil, prípadne neponúkol ako príslušenstvo.
  - Odsávačku materského mlieka používajte z hygienických dôvodov iba u jednej osoby. Nedel'te sa o odsávačku s ostatnými dojčiacimi matkami.
  - Odsávačku materského mlieka je možné používať len na prsiach dojčiacich žien.
  - Nikdy nepoužívajte odsávačku materského mlieka, ak sa cítite ospalo alebo počas spánku.
  - Nikdy nepoužívajte odsávačku materského mlieka vo vani ani v sprche.
  - V prípade nesprávnej činnosti alebo prevádzkovej poruchy odsávačku v žiadnom prípade neotvárajte ani s ňou netraste.
- Prečítajte si kapitolu "Čo robiť v prípade problémov", ak tu váš problém nebude popísaný, obráťte sa na zákaznícky servis alebo na predajcu.
- Opravy môžu vykonávať len zákaznícke servery alebo autorizovaní predajcovia. V žiadnom prípade nesmiete odsávačku materského mlieka sami otvárať alebo opravovať, inak sa už nedá zaručiť jej správne fungovanie. V prípade nedodržania týchto pokynov záruka zaniká.
  - Nikdy nevkładajte odsávačku mlieka do vody.
  - Na odsávačku mlieka nikdy nesiahajte vlhkými alebo mokrymi rukami.
  - Nesiahajte pre odsávačku materského mlieka, keď spadne do vody. Okamžite vytiahnite sieťový adaptér odsávačky mlieka zo zásuvky, ak spadne do vody.
  - Ak používate odsávačku materského mlieka, položte ju na stabilnú a rovnú plochu.
  - Úplne rozviňte sieťový kábel, aby ste zabránili prehriatiu.
  - Nekladte odsávačku materského mlieka a sieťový adaptér nikdy do mikrovlnnej rúry.
  - Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky, ak odsávačku mlieka nepoužívate. Odsávačku materského mlieka nenechávajte v zásuvke.
  - Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla odsávačky materského mlieka, musíte kábel odstrániť.
  - Nikdy neohrievajte materské mlieko v mikrovlnnej rúre, pretože by sa mohlo nerovnomerne ohriať a dieťa by sa mohlo pri jeho pití spáliť.
  - Udržujte sieťový kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov.
  - Tento prístroj nesmú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
  - U odsávačky materského mlieka nie je potrebné vykonávať kalibráciu.
  - Odsávačku materského mlieka a príslušenstvo je zakázané upravovať.



#### **POZOR**

- Nikdy nevlhčíte odsávačku materského mlieka vodou. Nie je chránená proti striekajúcej vode a kvapalinám.
- Udržujte odsávačku materského mlieka v dostatočnej vzdialenosti od elektromagnetického poľa, pretože môže dôjsť k elektromagnetickej interferencii a mohlo by nastať negatívne ovplyvnenie jej funkcie.
- Odsávačku materského mlieka a príslušenstvo chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, nečistotou, silnými teplotnými výkyvmi a priamym slnečným žiarením.
- Neťahajte za hadice odsávačky materského mlieka.
- Sieťový adaptér nevyťahujte zo zásuvky za kábel.



#### **POZOR**

##### **Pokyny pre prepravu fľaštičky**

- Pri preprave materského mlieka vo fľaštičke (napr. za jazdy alebo na cestách), dbajte na to, aby bol uzáver fľaštičky vždy pevne zatiahnutý.
- Odporúčame neukladať naplnené fľaštičky počas prepravy v kufri ani v taške.



#### **VAROVANIE**

##### **Pre bezpečnosť vášho dieťaťa!**

- Deti môžu tento prístroj používať iba pod dohľadom dospelých.
- Neustále a dlhšie satie tekutín cumlíkom (nie je súčasťou balenia BY 40) spôsobuje kazy.

- Nepoužívajte cumlíky (nie je súčasťou balenia BY 40) na kŕmenie ani ako cumlík.
- Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu.
- Pred každým použitím prístroj skontrolujte a roziahnite cumlík (nie je súčasťou balenia BY 40) do všetkých strán.
- Pri prvom náznaku poškodenia či opotrebenia ho odstráňte.
- Nevystavujte cumlík (nie je súčasťou balenia BY 40) priamemu slnečnému žiareniu a teplu a nekladte ho do dezinfekčného prípravku ("sterilizačného roztoku") dlhšie, ako je nutné, pretože to môže viesť k poškodeniu cumlíka.
- Udržujte cumlík (nie je súčasťou balenia BY 40) v dostatočnej vzdialenosti od sladkých látok, ktoré by mohli spôsobiť vznik kazov.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne látky alebo antibakteriálne čističe.
- Sterilizujte všetky súčasti, ktoré prichádzajú do styku s materským mliekom, vo vriacej vode po dobu piatich minút.
- Prístroj pred každým použitím vyčistite.
- Dbajte na to, aby tekutina v fľaštičke nemala nikdy teplotu viac ako 50 ° C.



## VAROVANIE

### Pokyny pre zaobchádzanie s batériami

- Ak by sa tekutina z článku batérie dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami, opláchnite postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekára.
- **⚠ Nebezpečenstvo prehltnutia!** Malé deti by mohli batérie prehltnúť a udusiť sa. Batérie preto uchovávajte mimo dosahu detí!
- Dbajte na označenie polarít plus (+) a mínus (-).
- Ak batéria vytečie, použite ochranné rukavice a vyčistite priehradku na batérie suchou utierkou.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom.
- **⚠ Nebezpečenstvo výbuchu!** Batérie nehádzte do ohňa.
- Batérie nesmú byť nabíjané alebo skratované.
- V prípade, že sa zariadenie nebude dlhšiu dobu používať, vyberte batérie z priehradky.
- Používajte rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií.
- Vymieňajte vždy všetky batérie zároveň.
- Nepoužívajte dobíjacie akumulátory!
- Batérie sa nesmú rozoberať, otvárať alebo drviť.

## 5. Popis prístroja

	1. Odsávačka materského mlieka s displejom
	2. Nadstavec na odsávačku vrátane silikónovej membrány a silikónového ventilu
	3. Silikónová hadička
	4. Fľaštička (180 ml)
	5. Skrutkovací uzáver na fľaštičku
	6. Adaptér pre NUK
	7. Adaptér pre Avent
	8. Silikónová membrána
	9. Silikónový ventil
	10. Silikónový vankúšik

## Popis displeja a tlačidiel

	1. Stav batérií (pri prevádzke bez sieťovej zástrčky)
	2. Režim odsávania (materské mlieko sa odsáva)
	3. Zobrazenie času (odpočítavanie stimulácie / dĺžky používania režimu odsávania)
	4. Úroveň stimulácie alebo odsávania
	5. Režim stimulácie (prsna bradavka je stimulovaná, materské mlieko sa neodsáva)
	6. Tlačidlo + (zvýšenie úrovne stimulácie alebo odsávania)
	7. Tlačidlo ZAP / VYP
	8. Tlačidlo – (zníženie úrovne stimulácie alebo odsávania)
	9. Tlačidlo REŽIM (striedanie medzi režimom odsávania a stimulácie)

## 6. Uvedenie do prevádzky



### Upozornenie

Skontrolujte, či je odsávačka materského mlieka uložená v neporušenom obale a či je kompletná. Pred použitím sa uistite, či prístroj a jeho príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a či sú odstránené všetky obaly. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo zákaznícky servis. Adresy servisných stredísk sú uvedené v návode.

### 6.1 Zostavenie odsávačky materského mlieka

Po vybratí odsávačky materského mlieka z obalu skontrolujte predovšetkým prípadné praskliny plastových obalov, aby elektrické komponenty neboli nechránene vystavené kvapalinám.

<p>1. Naskrutkujte na flaštičku nastavac odsávačky. Dbajte na to, aby bol nastavac flaštičky pevne nasadený, aby tekutina nemohla vytekať.</p>	
<p>2. Zasuňte silikónovú hadičku do nástavca odsávačky a do odsávačky</p>	
<p>3. Prepojte odsávačku mlieka so sieťovým káblom a zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.</p>	
<p>4. Odsávačku materského mlieka môžete alternatívne prevádzkovať tiež s batériami. Otvorte kryt batérií na zadnej strane jednotky motora. Vložte štyri batérie AA (sú súčasťou balenia). Bezpodmienečne dbajte na to, aby boli batérie vložené podľa označenia so správnou polaritou. Dbajte na grafické znázornenie v priehradke na batérie. Potom priehradku na batérie uzavrite tak, aby počuteľne a citelne zapadla do správnej polohy. Nabitie batérií štyrmi novými batériami AA vystačí na cca 60 minút prevádzky (na najvyššiu úroveň).</p>	

## 6.2 Čistenie a sterilizácia odsávačky materského mlieka



### VAROVANIE

**Sterilizujte a čistíte jednotlivé komponenty odsávačky materského mlieka (s výnimkou jednotky motora a silikónovej hadičky), ktoré sa dostanú do priameho kontaktu s materským mliekom, samostatne pred prvým a každým ďalším použitím! Nikdy nesterilizujte jednotku motora!**

Pre správnu sterilizáciu odsávačky materského mlieka postupujte podľa nasledujúcich bodov:






1. Vyskrutkujte z fľaštičky nastavac odsávačky.
2. Vytiahnite z nastavca odsávačky a z jednotky motora silikónovú hadičku.
3. Odstráňte z nastavca odsávačky silikónovú membránu a silikónový ventil.
4. Sterilizujte fľaštičku a nastavac odsávačky (so silikónovou membránou a silikónovým ventilom) počas piatich minút vo vriacej vode alebo parným sterilizátorom. Odsávačku materského mlieka znovu použite až vtedy, keď budú všetky súčasti suché. Nepoužívajte antibakteriálne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť plast odsávačky mlieka.
5. Vyčistite jednotku motora opatrne iba ľahko navlhčenou utierkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. V žiadnom prípade nesmiete jednotku motora umývať pod vodou, pretože by sa do nej mohla dostať kvapalina a poškodiť ju. Ak odsávačku mlieka nehodláte dlhšiu dobu používať, vyberte z nej batérie.

## 7. Obsluha

### 7.1 Tipy pre lepší tok materského mlieka

- Zvoľte pre odsávanie miesto, kde sa môžete čo najviac uvoľniť.
- Zvoľte pre odsávanie dobu, kedy sa môžete čo najviac uvoľniť.
- Ak má matka svoje dieťa pri sebe alebo sa pozerá na jeho fotografiu, má to pozitívny vplyv na tok mlieka.
- Ak dojčíte dieťa z jedného prsníka, použite súčasne odsávačku mlieka u druhého prsníka.
- Teplo a pohoda podporujú tok materského mlieka. Používajte odsávačku mlieka po sprche alebo po kúpeli.
- Ak sú vaše prsia naliate alebo vás bolia, položte na ne na niekoľko minút teplú utierku. Má to priaznivý vplyv na tok mlieka.
- Pokiaľ z prs ihned' netečie materské mlieko, pokúste sa uvoľniť a skúste to znova o niekoľko minút neskôr.
- Ak pomocou odsávačky materského mlieka ani po piatich minútach netečie z prs žiadne materské mlieko, prerušte aplikáciu a skúste to neskôr ešte raz.
- Ak vám používanie odsávačky mlieka pôsobí silné bolesti, obráťte sa na lekára.

### 7.2 Obsluha odsávačky materského mlieka

1. Pred používaním si umyte dôkladne ruky a prsia.	
2. Posadte sa tak, aby vaša horná časť tela bola mierne ohnutá dopredu. Pre lepšiu podporu chrbta môžete použiť vankúš.	
3. Umiestnite prsný klobúčik so silikónovým vankúšikom opatrne na prsia. Dbajte na to, aby bola pokrytá celá prsná bradavka a aby nevznikali vzduchové bubliny. Pre zaistenie bezchybnej funkcie musí byť prsný klobúčik pevne prisáty k prsníku.	
4. Odsávačku materského mlieka zapnete stlačením tlačidla ZAP / VYP. Odsávačka mlieka začína teraz automaticky pracovať v režime stimulácie ( ) a na displeji sa objaví 2 minútové odpočítavanie. Po túto dobu 2 minút bude vaša prsná bradavka stimulovaná, čím sa pripraví na odsávanie materského mlieka. Pomocou tlačidiel + / - nastavte požadovanú intenzitu stimulácie.	 <p>1. Zapnúť režim stimulácie 2. Intenzita</p>
5. Po uplynutí 2 minút začne na displeji blikať ( ). Pre začatie odsávania materského mlieka stlačte tlačidlo stimulácie. Pomocou tlačidiel + / - nastavte intenzitu odsávania tak, aby bola pre vás príjemná. Akonáhle bude vo fľaštičke 180 ml materského mlieka, prerušte aplikáciu.	 <p>3. Spustiť odsávanie 4. Intenzita</p>

6. Ak chcete znova prepnúť do režimu stimulácie, stlačte tlačidlo pre stimuláciu. Stimulácia a 2 minútové odpočítavanie začne plynúť od začiatku.



Odsávačka materského mlieka disponuje funkciou "Memory", to znamená, že akonáhle zapnete odsávačku, bude aktívna posledná nastavená úroveň stimulácie, odsávania.



5. Späť do režimu stimulácie

7. Odsávačku materského mlieka vypnete stlačením tlačidla ZAP / VYP.

### 7.3 Skladovanie materského mlieka

Odsaté materské mlieko môžete určitú dobu skladovať v chladničke alebo v mrazničke.

- Ak chcete skladovať materské mlieko, dbajte na to, aby boli odsávačka a "nádoby na uskladnenie" pred použitím dezinfikované. Materské mlieko skladujte výhradne v dezinfikovaných nádobách.
- Ak chcete skladovať materské mlieko, dajte ho po odsatí ihneď do chladničky alebo mrazničky. Nenechávajte materské mlieko stáť pri izbovej teplote.
- Ak chcete materské mlieko skladovať v mrazničke, odporúčame fľašu opatriť dátumom odsatia.



### VAROVANIE

Bezpodmienečne dodržujte doby trvanlivosti uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	<b>POKOJOVÁ TEPLOTA</b>	<b>CHLADNIČKA (cca 3-5 °C)</b>	<b>MRAZNIČKA (cca -16 °C)</b>
<b>Čerstvo odsaté materské mlieko</b>	trvanlivosť 6 hodín	trvanlivosť 24 hodín (Neskladovať vo dverách chladničky, pretože tu nie je dostatočne chladno)	trvanlivosť 3 mesiace
<b>Rozmrazené materské mlieko (ktoré bolo predtým zmrazené)</b>	ihneď spotrebovať	10 hodín	Znovu nezamrazovať!

### 7.4 Kŕmenie materským mliekom

- Skôr, než zalejete skladované materské mlieko pred kŕmením do fľaštičky, dbajte na to, aby bola fľaštička dezinfikovaná.
- Pri rozmrazení mrazeného materského mlieka nechajte mlieko cez noc v chladničke. Týmto spôsobom zostanú zachované živiny. Akonáhle sa materské mlieko rozmrazí, musí byť do 24 hodín spotrebované.
- Rozmrazovanie materského mlieka v teplej vode by malo prebiehať len v mimoriadne naliehavých prípadoch.
- Ak materské mlieko nepríjemne zapácha, ihneď ho zlikvidujte.
- Nikdy neohrievajte materské mlieko v mikrovlnnej rúre, pretože by sa mohlo nerovnomerne zahriať a dieťa by sa mohlo po jeho pití spáliť.
- Pri ohreve materského mlieka skontrolujte teplotu mlieka, než ho bude dieťa piť.

### 8. Čo robiť v prípade problémov?

<b>Problém</b>	<b>Možné riešenie</b>
Odsávačka mlieka nesaje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či sú diely odsávačky mlieka správne navzájom zložené.</li> <li>• Skontrolujte, či je nástavec odsávačky správne priložený k prsníku.</li> </ul>
Nedochádza k odsávaniu materského mlieka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je silikónová hadička správne nasadená, či nie je nastavená sila odsávania na minimum a či je zapnutá odsávačka.</li> <li>• Presvedčte sa, že sa v silikónovom ventile nenachádzajú zvyšky mlieka, ktoré môžu tok mlieka obmedziť.</li> </ul>
Odsávanie materského mlieka spôsobuje bolesť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokúste sa uvoľniť a skúste to znova. Čím väčšiu prax budete mať, tým lepšie sa vám bude odsávanie materského mlieka dariť.</li> <li>• Znížte nastavenú silu odsávania tlačidlom mínus.</li> <li>• Poradte sa s lekárom.</li> </ul>
Materské mlieko vyteká pod silikónovým vankúšikom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstráňte silikónový vankúšik a nasadte ho znova. Dbajte na to, aby bol silikónový vankúšik správne umiestnený a aby nadstavec odsávačky pevne dosadal.</li> <li>• Predložte sa hornou polovicou tela mierne dopredu.</li> </ul>
Komponent odsávačky materského mlieka sa zmenil alebo je poškodený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepoužívajte žiadne žieravé či plynne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.</li> <li>• V niektorých prípadoch môžu silné výkyvy teplôt poškodiť plast odsávačky materského mlieka.</li> <li>• Pokiaľ bude jedna zo súčastí poškodená, odsávačku už nepoužívajte.</li> </ul>
Odsávačku materského mlieka sa nedá zapnúť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je odsávačka mlieka riadne zložená a zapnutá.</li> <li>• Uistite sa, že je sieťový adaptér správne prepojený s odsávačkou materského mlieka.</li> </ul>

### 8.1 Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebeniu

Výrobok	Číslo položky
Nástavec odsávačky vrátane silikónového vankúšika (bežná veľkosť), silikónová membrána, silikónový ventil, silikónová hadička, fľaštička a viečko fľaštičky	953.15
Fľaštička s cumlíkom a viečkom fľaštičky	163.719
Adaptér pre fľaštičku Avent a NUK	163.720
2 silikónové vankúšiky (malý a normálny)	163.721
Nástavec ručnej odsávačky vrátane silikónového vankúšika (Bežná veľkosť)	163.722
Stojanček na fľaštičku	163.723

### 9. Likvidácia

Použité, úplne vybité batérie sa likvidujú prostredníctvom špeciálne označených zberných nádob, v zberniach pre zvláštne odpady alebo u predajcov elektrotechniky. Podľa zákona ste povinní batérie likvidovať.

Na batériách s obsahom škodlivých látok sa nachádzajú nasledujúce značky:

Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť.

V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po ukončení jeho životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom. Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine.

Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.



### 10. Technické údaje

Model	BY 40
Napájanie	4 x 1,5 V batéria AA (alkalické batérie)
Napätie (vstup)	100-240 V (AC~) 50/60 Hz
Napätie (výstup)	6 V (DC ---) 1,0 A
Rozmery	168 x 100 x 53 mm
Hmotnosť	310 g (bez batérie)
Maximálny sací výkon	0,32 bar
Prípustné prevádzkové podmienky	+5 °C až +40 °C, relatívna vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca) 30% až 85 %, vnútorný tlak 700-1 060 hPa
Prípustné podmienky pre uloženie	-20°C až +60 °C, relatívna vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca) 10 až 95 %, vnútorný tlak 700-1 060 hPa
Očakávaná životnosť	500 hodín
Intervalové použitie	30 minút ON / 30 minút OFF
Trieda ochrany	Prístroj má dvojnásobnú ochrannú izoláciu a zodpovedá ochrannej triede 2. <input type="checkbox"/>
Elektromagnetická kompatibilita podľa EN 60601-1-2	
Bezpečnostné požiadavky podľa EN 60601-1	
Výrobky pre starostlivosť o dieťa - výrobky pre tekutú detskú stravu podľa EN 14350	
Zariadenie na odsávanie materského mlieka	
Prístroj s jemným vákuom a malou možnosťou toku	
Aplikačná časť typu BF	
Prístroj na použitie v neprítomnosti zápalných alebo jedovatých plynových zmesí alebo oxidu dusného (rajský plyn)	

Zmeny technických údajov bez predchádzajúceho oznámenia sú z dôvodu aktualizácie vyhradené

Tento prístroj zodpovedá európskej norme EN60601-1-2 a podlieha špeciálnym bezpečnostným opatreniam z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. Nezapudnite, prosím, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na tento prístroj. Presnejšie údaje si môžete vyžiadať na uvedenej adrese zákazníckeho servisu alebo prečítať na konci predloženeho návodu na použitie.

### 11. Sieťový adaptér

Model č.	LXCP12 - 06
Vstup	100 - 240 V, 50 -60 Hz 0.3 A max
Výstup	6V DC, 1 A
Výrobca	Shenzhen longxc power supply co., ltd
	Polarita prípojky jednosmerného napätia
<input type="checkbox"/>	Ochranná izolácia / trieda ochrany 2
Puzdro a ochranné kryty	Kryt adaptéra chráni pred dotykom časti, ktoré sa nachádzajú alebo môžu nachádzať pod prúdom (prsty, ihlička, kontrolné háčiky). Užívateľ sa nesmie súčasne dotýkať pacienta a výstupnej zástrčky sieťového adaptéra (AC / DC).

**KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:**

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

**BORGY CZ, a.s.**

Reklamace / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz)

[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)

Chyby a zmeny vyhradené 21.3.2016