

Instrukce k použití



made for me®

nositelná odsávačka



Hands down, hands-free is best

Naše nositelná odsávačka mateřského mléka má veškerý výkon, který očekáváte od běžné elektrické odsávačky, a přitom se pohodlně vejde do podprsenky, takže se můžete zcela svobodně věnovat svému dni.

Otázka?

Pro další otázky navštivte naše webové stránky
tommeetippee.com



Nebo sledujte naše sociální sítě




Stáhněte si Tommee Tippee aplikaci na iOS nebo Android

1. Rychlý průvodce připojením

Pokud se nemůžete dočkat, až začnete s novou odsávací prací, přinášíme vám praktického průvodce, který vám pomůže získat z ní maximum.



Stáhněte si aplikaci na iOS nebo Android

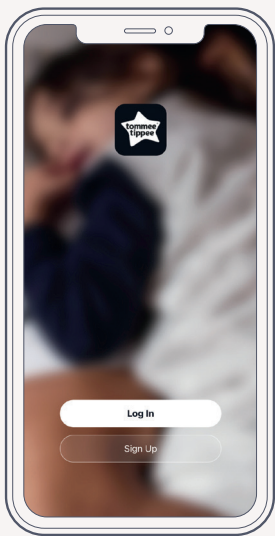

iOS

Použijte QR kód



Android

Použijte QR kód




Odsávacíku lze používat i v režimu offline. Jednoduše stisknete tlačítko napájení a použijte levé a pravé tlačítko pro nastavení intenzity 

V režimu offline se tlačítko napájení zobrazuje trvale bíle.

Spárování

Jakmile si stáhnete aplikaci Tommee Tippee a zaregistrujete svůj účet, párování je opravdu jednoduché. Každou odsávačku musíte spárovat zvlášť. Při párování zařízení postupujte podle níže uvedených pokynů.

1

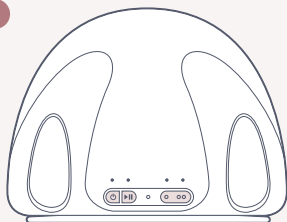


Zmáčkněte tlačítko  na vrchní části odsávačky



Tip:

Předtím než použijete odsávačku poprvé, doporučujeme ji plně nabít kabelem, který je v balení.

2

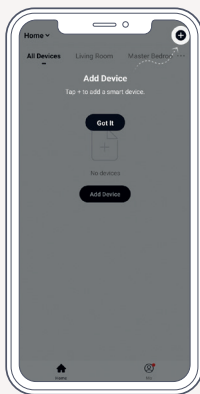

Odsávačka by se měla objevit jako vyskakovací okno na domovské obrazovce aplikace a umožnit spárování klepnutím na tlačítko. Pokud se žádné vyskakovací okno nezobrazí, stačí stisknout tlačítko v pravém horním rohu a vybrat vaši odsávačku. Telefon ji vyhledá a spáruje. Po spárování je odsávačka připravena k použití.


2. Průvodce komfortem a výkonem

Využijte odsávačku na maximum!

Víme, že pro maximální využití vaší odsávačky je velmi důležité pohodlí a přizpůsobení. Vaše odsávačka Tommee Tippee je vybavena jedinečnými funkcemi, které vám k tomu pomohou.


Průvodce pro správné umístění bradavek

Vodítkem pro zarovnání bradavek je červené světlo, které při prvním zapnutí odsávačky svítí na váš prs. Toto světlo vám pomůže navést bradavku do středu nástavce, což je, jak víi důležité pro pohodlí i výkon.

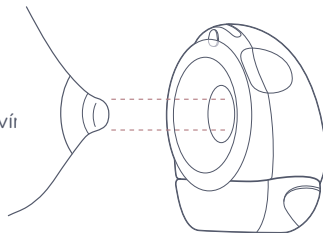

Velikost prsního nástavce

Věděli jste, že uložení bradavky v nástavci může ovlivnit pohodlí i tok mléka? Přiložili jsme 24mm a 28mm nástavce, doporučujeme vám vyzkoušet oba, abyste zjistili, který vám více vyhovuje. Doporučujeme změřit průměr vaší bradavky, abyste byl obeznámeni se svou velikostí. Případně použijte obrysy zde a změřte si bradavku.

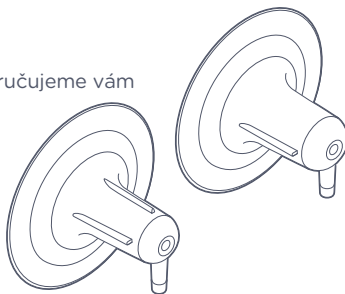


24mm

28mm



Úpravy podprsenky

Dalším důležitým faktorem je umístění odsávačky v podprsence. Příliš velká komprese může být nepohodlná, příliš malá může vyvolat pocit nejistoty. Pro případ, že byste je potřebovali, jsme do balení přibalili nastavovací prvky pro podprsenku. Připevněte je na kojící podprsenku a rozšířte si košíček.

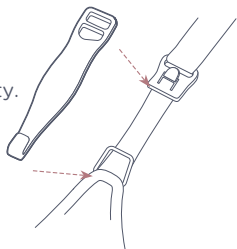

Intenzita a režim

Jakmile je odsávačka seřízená, dobře sedí a pohodlně se nosí, zbývá jen zvolit preferované nastavení. Nabízíme dva režimy, masážní a expresní.

Masážní režim (nazývaná také stimulace) podporuje počáteční spouštění mléka. Tlak je nižší a frekvence vyšší, podobně jako když se děti poprvé přisají.

Expresní režim účinně a efektivně odsává mléko po spuštění při nižší frekvenci stejným způsobem, jako to dělají děti při pití mléka. Vyberte si mezi 8 úrovněmi tlaku, abyste našli nej pohodlnější a nejefektivnější nastavení.



V aplikaci můžete kdykoli přepínat mezi masážním a expresním režimem, protože každá maminka i situace je jiná.

3. Části


a. Popis produktu

Nositelná odsávačka mateřského mléka Tommee Tippee je dodávána se vším, co potřebujete k přípravě, odsávání, krmení a uchovávání mléka.

	Single	Double
A	1 x 24mm prsní nástavce	2 x 24mm prsní nástavce
B	1 x 28mm prsní nástavce	2 x 28mm prsní nástavce
C	2 x nastavovače podprsenky	2 x nastavovače podprsenky
D	1 x savička s pomalým průtokem	2 x savička s pomalým průtokem
E	1 x šroubovací kroužek	2 x šroubovací kroužek
F	1 x tělo odsávačky	2 x tělo odsávačky
G	2 x horní víčko	4 x horní víčko
H	2 x sestava membrány	4 x sestava membrány
I	2 x spodní víčka	4 x spodní víčka
J	2 x ventilký	4 x ventilký
K	2 x sběrné láhve	4 x sběrné láhve
L	1 x Nabíjecí kabel USB a multiregionální zástrčka	1 x Nabíjecí kabel USB se 2 hlavicemi (na obrázku) a multiregionální zástrčkou
M	1 x přepravní taška	1 x přepravní taška

Tip: Před prvním použitím odsávačky doporučujeme provést úplné nabití pomocí dodaného kabelu a zástrčky.


b. Součásti

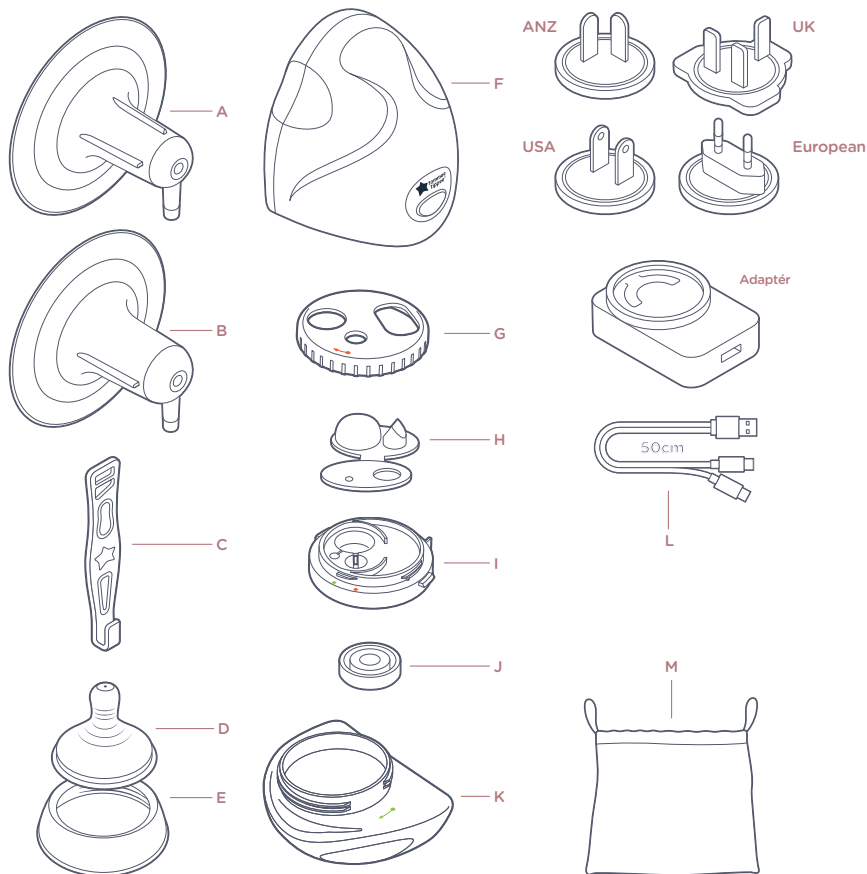


4. Začínáme

a. Montáž

Odsávačka vám přijde smontovaná. Před prvním použitím ji prosím demontujte, vyčistěte a sterilizujte. Pokyny k čištění a sterilizaci naleznete v následující části.

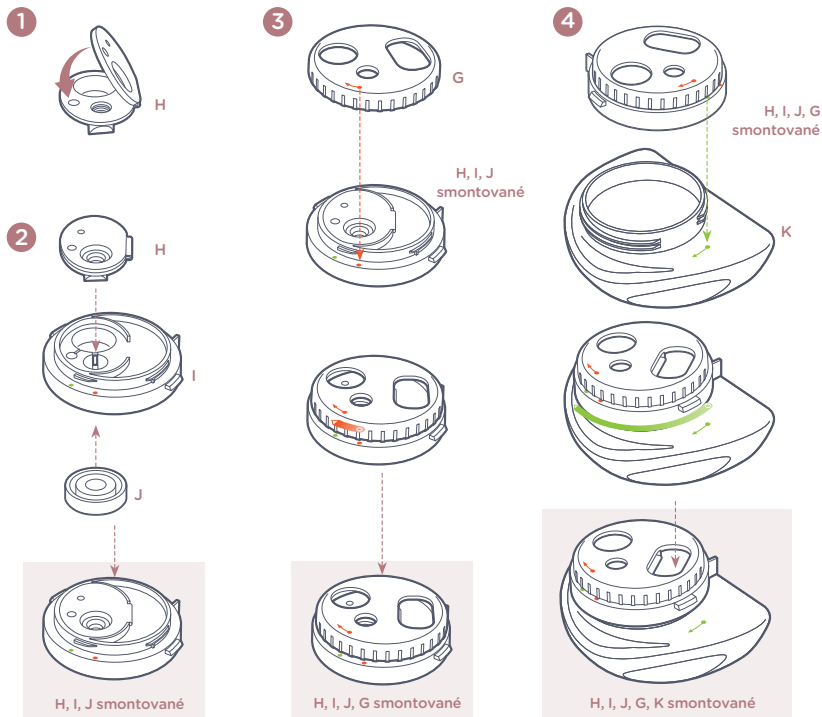

Při montáži si zvolte požadovaný prsní nástavec (průměr savičky 24 mm nebo 28 mm) a vložte jej do těla odsávačky (1). Sestavené součásti sběrné láhve připevněte ke spodní části těla odsávačky (2).

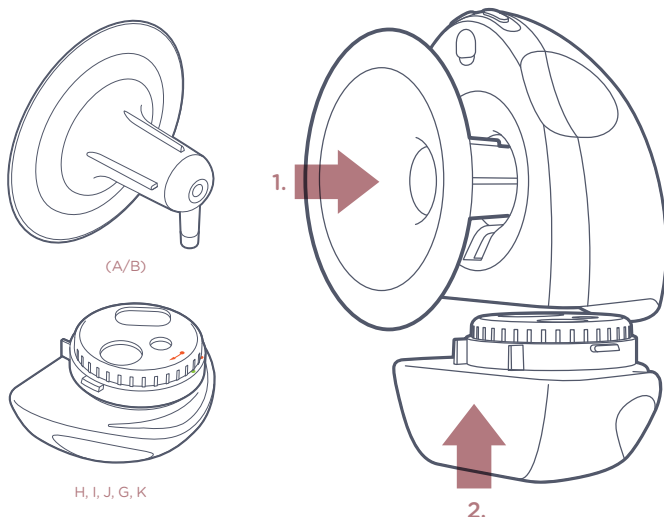

b. Čištění a sterilizace

Nositelnou odsávačku mateřského mléka je třeba před prvním použitím vyčistit a sterilizovat. Před čištěním nebo sterilizací vždy rozeberte součásti. Všechny součásti určené k mytí lze vložit do horního stojanu myčky nádobí a lze je sterilizovat (mikrovlnná trouba, pára, UV záření, vaření). Viz tabulka níže. Tělo odsávačky (F) by se nemělo mýt ani sterilizovat. Obsahuje elektroniku, která musí být uchovávána v suchu. V případě potřeby ji otřete čistým vlhkým hadříkem.


c. Nabíjení

Když je baterie vybitá (indikuje to červená kontrolka), je důležité ji plně nabít. Při nabíjení odsávačky počkejte, až se kontrolka baterie rozsvítí zeleně. To znamená, že je plně nabitá a připravená k použití. Během nabíjení nelze odsávačku používat. Měli byste používat pouze kabel a zástrčku dodanou s tímto výrobkem. Plné nabití nabízí až 4 hodiny používání jedné pumpy. Před připojením kabelu USB k nabíjení se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Zařízení se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.




Komponenty, které mohou být sterilizovány a umývány

Part	Single	Double
A	1 x 24mm prsní nástavce	2 x 24mm prsní nástavce
B	1 x 28mm prsní nástavce	2 x 28mm prsní nástavce
C	2 x nastavovače podprsenky	2 x nastavovače podprsenky
D	1 x savička	2 x savička
E	1 x šroubovací kroužek	2 x šroubovací kroužek
G	2 x vrchní víčko	4 x vrchní víčko
H	2 x sestava membrány	4 x sestava membrány
I	2 x spodní víčka	4 x spodní víčka
J	2 x ventilký	4 x ventilký
K	2 x sběrné lahvičky	4 x sběrné lahvičky

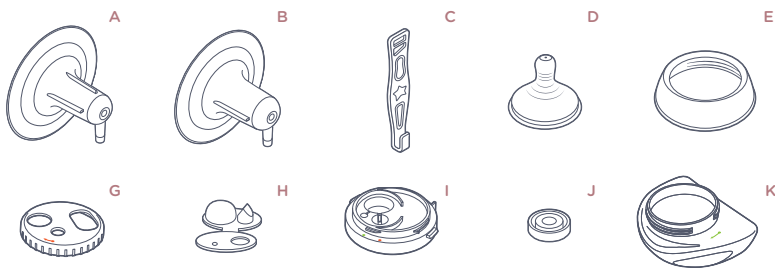

d. Prsní nástavce

Standardně dodáváme 24mm a 28mm prsní nástavce, takže si můžete vybrat ten, který vám nejvíce vyhovuje. Když je prsní nástavce, odmontována z těla odsávačky, přiložte si ji na prs a posuďte, zda vám sedí. Doporučujeme změřit průměr vaší bradavky, abyste byli obeznámeni se svou velikostí. Případně použijte nákresy zde, abyste si bradavku změřili.

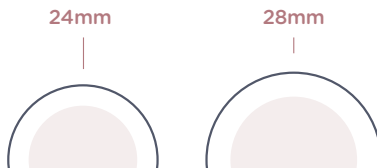

5. Používání odsávačky

b. Kontrolky

1. Zapnutí

světlo svítí bíle (offline)
nebo modře (při párování)



2. Párování

stisknutím a podržením tlačítka napájení přejděte do režimu párování (bliká modrá kontrolka).



3. Vyberte které prso

světlo na pravé nebo levé straně
pro označení prsou



4. Zmáčknete start/stop

světlo ukazující bílou barvu



5. Baterie

(zelená nebo červená pulzující barva)




6. Baterie (nabíjení)

(zelená nebo červená pulzující barva)



7. Intenzita

přepínání vlevo nebo vpravo
- bez změny osvětlení

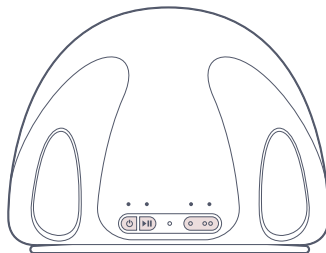


b. Zapnutí

Po úplném sestavení odsávačku zapněte stisknutím tlačítka napájení. 

c. Vyrovnání bradavek

Správné zarovnání bradavek je skutečně klíčovým faktorem pro tvorbu mléka, podobně jako hluboké přisátí při kojení. Vaše nová odsávačka obsahuje jedinečné vodící světlo pro zarovnání bradavek, které usnadňuje zarovnání bradavek i při slabém osvětlení. Zapněte odsávačku a nasměrujte červený reflektor a bradavku.

Druhou rukou si přidržíte prso a přiblížíte odsávačku k bradavce, přičemž dbejte na to, aby střed reflektoru zůstal uprostřed bradavky, dokud není odsávačka na svém místě.

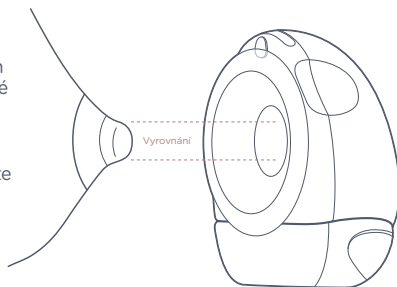

d. Zahájení relace

Jakmile je odsávačka zapnutá a v poloze, s tisknete tlačítko play/pause a spustíte odsávání. Pokud potřebujete při odsávání kdykoli přerušit, stisknete tlačítko play/pause.

e. Volba intenzity a režimu

Vaše nositelná odsávačka mateřského mléka nabízí dva režimy - masážní a expresní. Víme, že každá maminka a každý den je jiný, takže v aplikaci můžete kdykoli během sezení přecházet mezi režimy stisknutím tlačítka. Masážní režim (známý také jako stimulační režim) používá vyšší frekvenci a nižší intenzitu sání, která napodobuje způsob, jakým vaše dítě poprvé stimuluje prs, aby podpořilo tok mléka. Expresní režim používá pomalejší sání, aby účinně vytáhl vaše mléko do sběrných lahví. Někteří dávají přednost střídání, jiní si najdou jedno nastavení a toho se drží. V expresním režimu je k dispozici 8 nastavení intenzity. Vyberte si úroveň, která je pro vás pohodlná pro vás nejvhodnější. Nezapomeňte, že se může měnit v závislosti na sezení a dokonce i na prsu. Pamatujte, že vyšší nastavení intenzity neznamená vždy větší množství mléka. Důležitější je vaše pohodlí.

f. Automatické funkce

Nositelná odsávačka mateřského mléka se automaticky zastaví, když je láhev plná. Pokud chcete v odsávání pokračovat, musíte relaci odeslat, aby byla zaregistrována na stránce analýzy v aplikaci, než vyprázdníte sběrač a zahájíte novou relaci. Jako bezpečnostní prvek jsme také omezili délku trvání relace na 30 minut, po jejímž uplynutí se odsávačka pozastaví a vy ji nebudete moci znovu spustit. Pokud budete chtít pokračovat, budete muset zahájit novou relaci. Odsávačka se také pozastaví, pokud se příliš nakloníte, aby se snížilo riziko úniku. Při běžném používání k tomu pravděpodobně nedojde, ale pokud ano, jednoduše se posadte/postavte zpět rovně a pokračujte v odsávání. Kontrolky na odsávačce (zarovnění bradavek)


(světla reflektorů a tlačítek) se během používání automaticky vypnou po 1 minutě. Stisknutím libovolného tlačítka se světla znovu rozsvítí.

g. Konec relace

Jakmile ukončíte cyklus, pozastavte jej a podle pokynů v aplikaci odeberte všechny kapky a na chvíli se předkloněte, než prstem přerušíte těsnění mezi odsávačkou a prsem. V této fázi můžete také ručně změnit objem, pokud zjistíte, že množství zobrazené v aplikaci zcela neodpovídá množství ve sběrné lahvičce. Přední mléko má lehčí konzistenci než zadní mléko, což může ovlivnit přesnost údaje. Po přidání relace na stránku analýzy můžete odsávačku jednoduše vypnout, umýt a sterilizovat části, které to vyžadují, a podle potřeby nabit tělo odsávačky. Když jste připraveni sběrnou láhev vyjmout, jednoduše stisknete velké tlačítko v přední části odsávačky a uvolníte západku, která drží láhev na místě.

h. Přímé krmení a skladování

Aby krmení mateřským mlékem bylo ještě snazší, je sběrač mléka kompatibilní s našimi savičkami, takže jej můžete používat jako láhev. Jednoduše nasadíte savičku na šroubovací kroužek, připevníte ke sběrači mléka a můžete krmit. Pro uskladnění jednoduše vyjměte podsestavu sběrače s lahví z odsávačky a vložte ji do chladničky nebo mrazničky podle svých preferencí. V případě mrazení se ujistěte, že láhev není přeplněná a nepřesahuje maximální kapacitu. Případně uchovávejte mateřské mléko v souladu s pokyny zdravotnické péče.

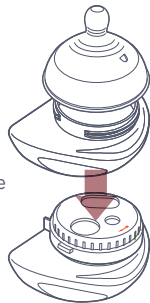

6. Řešení potíží

Proč se množství, které mi aplikace ukazuje, liší od množství, které je ve sběrné lahvi?

Odsávačka používá senzor k měření množství mléka ve sběrné lahvi. To může být ovlivněno řadou věcí, jako je konzistence mléka (přední mléko vs. zadní mléko), pohyb, úhel použití a rušení senzoru. Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že je malý černý senzor bez nečistot a že na konci sezení stojí vzpřímeně a nehybně.

Jak mohu sběrnou láhev přeměnit na láhev na krmení?

Jednoduše sejměte membránu a víčko z horní části sběrné láhve, nasadte savičku a šroubovací kroužek a zašroubujte na místo.

Jak uchovávat mléko ve sběrné lahvi?

Balení je dodáváno s náhradními díly, takže celou sestavu sběrné láhve můžete uložit do lednice nebo mrazáku, dokud nebudete připraveni s ní krmit.

Proč se moje odsávačka nespáruje s aplikací?

Odsávačka používá Bluetooth pro připojení k telefonu. Stáhněte si aplikaci TommeeTippee, zaregistrujte si účet a přihlaste se. Otočte čerpadlo, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud LED dioda nezačne blikat modře. V aplikaci Tommee Tippees se objeví nabídka a poté přidejte odsávačku. Prosím, nezapomeňte, že je tento proces je nutný pro každou odsávačku zvlášť, když máte verzi Double.

Co když nemám dostatek mléka?

Existuje mnoho důvodů, proč produkce mléka v průběhu času kolísá, ale pokud víte, že se vám tvoří méně mléka, než je "normální", můžete vyzkoušet několik věcí.

- Zkontrolujte zarovnání vsuvky v odsávačce - je důležité, aby byl střed vsuvky zasunut ve středu nástavce,
- Zkontrolujte velikost nástavce kterou používáte - je důležité, aby byl nástavec pohodlný a nezatahoval příliš mnoho prsní tkáně.
- Zkontrolujte těsnění za chodu odsávačky - po spuštění programu by měla být odsávačka velmi bezpečná
- Zkontrolujte, zda vám odsávačka sedí v podprsence - pokud vám připadá, že se odsávačka na prsou "mačká", vyzkoušejte jeden z přiložených regulátorů podprsenky, abyste ji mírně uvolnili.
- Zkontrolujte nastavení intenzity - nalezením nastavení, které je pohodlné a účinné, dosáhnete nejlepší kombinace pohodlí a výkonu.

Jak mohu aktualizovat firmware?

Odsávačka Tommee Tippee je inteligentní, což znamená, že se může časem vyvíjet, a to i po jejím zakoupení. Tam, kde to vede k zlepšení zkušeností spotřebitelem, budeme aplikaci pravidelně aktualizovat. Je důležité, abyste aplikaci udržovali aktuální, abyste měli přístup k nejnovějším funkcím. V aplikaci se zobrazí oznámení, pokud je k dispozici aktualizace, takže doporučujeme mít aplikaci staženou v telefonu.

Proč není sání takové jako dřív?

V sestavě sběrné láhve na mléko jsou dva ventily. Pokud nejsou správně vyčištěny, mohou se zničit, proto doporučujeme je před montáží zmáčknout, abyste se ujistili, že se dají otevřít. Další věcí, kterou je třeba zajistit, je pevné zasunutí sběrné láhve do spodní části odsávačky. Nakonec zkontrolujte odsávačku plně nabit a zjistěte, zda se tím problém vyřeší.

7. Bezpečnostní informace

CLOSER TO NATURE® DUDLÍK S POMALÝM PRŮTOKEM A KROUŽEK

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte

Pročtete si prosím následující instrukce.

VAROVÁNÍ

- Vždy používejte tento výrobek pod dohledem dospělých osob.
- Nikdy nepoužívejte savičky na krmení jako dudlík.
- Nepřetržitě a dlouhodobě sání tekutin způsobuje vznik zubního kazu. U malých dětí může dojít ke vzniku zubního kazu i při používání neslažených tekutin. Může k němu dojít, pokud je dítě dovoleno používat láhev po dlouhou dobu přes den a zejména v noci, kdy je snížený tok slin, nebo pokud je používána jako dudlík.
- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu jídla. Ohřev v mikrovlnné troubě může způsobit vysoké teploty. Při ohřevu v mikrovlnné troubě dbejte zvýšené opatrnosti. Ohřívání jídlo vždy promíchejte, abyste zajistili rovnoměrné rozložení tepla, a před podáváním vyzkoušejte teplotu.
- Nepoužívané součásti uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při prvních známkách poškození vyhodte.
- Nikdy nepřipevňujte ke šňůram, stuhám, tkačikám nebo volným částem oděvu. Dítě by se mohlo uškrtit.
- Hygienický uzávěr může představovat nebezpečí udušení

STERILIZACE

- Před prvním použitím vložte nádobu na 5 minut do vroucí vody.
- Před každým použitím vyčistěte.
- Výrobek vždy umyjte ihned po použití.
- Umyjte v teplé mýdlové vodě a opláchněte v čisté vodě nebo použijte mýčku na nádobí (pouze horní police).
- Nečistěte rozpouštědly ani drsnými chemikáliemi.
- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s olejem na potravinové bázi (např. omáčkami na bázi oleje/rajčat), protože by mohlo dojít ke vzniku skvrn.
- Při čištění neobracejte savičku/nádobu naruby.

USKLADNĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

- Před každým použitím zkontrolujte.
- Neskladujte ani nenechávejte na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla.
- Neskladujte s rozpouštědly nebo drsnými chemickými látkami ani nedovolte, aby se s nimi dostaly do kontaktu.
- Není vhodné používat v běžné troubě nebo kombinované mikrovlnné troubě se zapnutou funkcí grilu.
- Nenechávejte kojítko na přímém slunečním světle nebo v teple ani je nenechávejte v dezinfekčním prostředku ("sterilizačním roztoku") déle, než je doporučeno, protože by mohlo dojít k jejich oslabení.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů se doporučuje vyměnit savičku nejmeně každé 2 měsíce.

Neohřívejte v mikrovlnné troubě se zavřenou lahví.

Vymějte savičku, pojistný kroužek a kopulovitý uzávěr.

MADE FOR ME® WEARABLE BREAST PUMP DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití, protože obsahuje důležité informace.

K ochraně před požárem, úrazem elektrickým proudem a poraněním neponořujte tělo odsávací kabel USB, adaptér ani vzduchové trubice do vody nebo jiné kapaliny.

- Neumísťujte pohonnou jednotku do mikrovlnné trouby nebo parní trouby sterilizátoru.

- Vzduchové trubice ani adaptér NEUMÝVEJTE. To by mělo za následek hromadění bakterií a mohlo by vést ke selhání čerpadla.

Mytí nebo sterilizace vzduchových trubic vede ke ztrátě záruky a poškození pohonné jednotky.

- Vzduchové trubice nevkládáte do mikrovlnné trouby, elektrického párního sterilizátoru ani do vroucí vody, protože by se roztavily.

- Nesprávné používání spotřebiče může vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a/nebo zranění osob.

- Přístroj nečistěte rozpouštědly ani drsnými chemikáliemi.

- Tento spotřebič by neměli používat ani si s ním hrát děti. Odsávací kabel, její vzduchové trubice a kabel USB uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Spotřebič mohou používat osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byli poučeni o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Údržba uživatelem, kromě čištění a sterilizace, není nutná.

- Napájecí jednotku neotvírejte, neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Došlo by ke ztrátě záruky.

- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem USB nebo krytem motoru. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo byl poškozen, kontaktujte prosím společnost tomteetippee.com.

- Pokud je přístroj poškozen jako nový, je třeba jej vrátit výrobci.

- Nenechávejte spotřebič na přímém slunečním světle.

- Neskladujte pod bodem mrazu nebo při teplotě nad 45 °C.

- Pokud dojde k poškození během maloobchodní záruční doby, tento spotřebič by měl být vyměněn v místě nákupu.

- V takovém případě bude výrobce upozorněn.

- Nepoužívejte žádné jiné příslušenství než to, které je součástí dodávky s tímto spotřebičem.

- Spotřebič by neměl být používán vedle sebe nebo na sobě.

s jiným zařízením, protože by se oba spotřebiče mohly vzájemně rušit.

- Nedovolte, aby spotřebič přišel do styku s potravinami na bázi oleje (např. s omáčkami na bázi oleje/rajčat), protože by došlo k potřísnění spotřebiče dojde ke znečištění.

- Tento spotřebič je výrobek pro osobní péči, a proto nelze po otevření vrátit, pokud není vadný.

Mayborn (UK) Ltd
Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle Upon Tyne NE12 8EW
UNITED KINGDOM

Mayborn USA Inc.
1010 Washington Boulevard, 11th Floor, Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

EU Representative
Mayborn France Sarl, 56 Rue de paris, Boulogne Billancourt, 92100
FRANCE

Mayborn ANZ Pty Ltd.
(ABN 66 154 703 134) PO Box 475, Mt Waverley VIC 3149
AUSTRALIA

Newborn Brands (NZ) Ltd.
PO Box 47-677, Ponsonby, Auckland 1144
NEW ZEALAND

Dejte nám vědět, co si myslíte

Rádi bychom slyšeli, co si myslíte o naší nositelné odsávače mateřského mléka.
Podělte se o své fotografie, recenze a sdělte nám své zkušenosti
na našich sociálních sítích.



Máte otázky?
Navštivte náš web: tommeetippee.com