

Návod k obsluze
Dvoufázová elektronická odsávačka mateřského mléka LOVI Prolactis
Profesionální ochrana laktace

ÚVOD

Blahopřejeme Vám k výběru dvoufázové elektronické odsávačky LOVI! Odsávačka Prolactis je profesionálním pomocníkem při řešení problémů s laktací. Simuluje přirozený proces sání dítětem. Její výhody oceníte zejména při častém odsávání. Je rovněž určena aktivním a pracujícím matkám, které využívají alternativní formy krmení dítěte mateřským mlékem. Umožňuje bezbolestné, pohodlné a rychlé odsávání mléka. Odsávačka je klinicky testována*.

Odsávačka pracuje v dvoufázovém rytmu, který odpovídá přirozenému sání dítětem: stimulace a hlubokého sání.

Fáze stimulace - kopíruje rychlé sací pohyby dítěte, které povzbuzují produkci a vytékání mléka.

Fáze hlubokého sání - simuluje volnější, hlubší sání dítěte. Mléko již vytéká a dítě se nemusí tak namáhat s jeho vysáním. Pomalu se stává hustší, sytější a tempo sání se zpomaluje.

Rozsah rytmu a síly sání odsávačky Prolactis byl vytvořen na základě procesu změn rytmu a způsobu sání dítěte během kojení.

Kombinací dvou fází odsávání odsajete více mléka v kratším čase.

Příložená membrána a rukojeť umožňují rovněž ruční odsávání mléka (změna odsávačky Prolactis na ruční odsávačku Protect), které oceníte v případech, kdy se např. nemůžete připojit k elektrické síti.

Mateřské mléko je nejzdravější a nejhodnotnější pokrm novorozence a nemluvňat. Je doporučováno jako výhradní pokrm pro prvních 6 měsíců života. Po 6-tém měsíci může být doplněno o příkrmy.

Upozornění! Odsávačka není určena k odsátí mléka pro dítě, které nemůže samo pít z prsu, tj. ve všech případech zánětu mléčných žláz.

*Testování odsávaček LOVI Prolactis a LOVI Protect se zúčastnilo 40 matek pod dozorem porodních a laktačních asistentek.

PRAKTICKÉ RADY

Kdy používat odsávačku?

Pokud je to možné počkejte s použitím odsávačky do doby, kdy se ustálí tvorba mléka, což je obvykle 2-4 týdny po porodu. Výjimky z výše uvedeného pravidla:

- Pokud máte příliš mnoho mléka, prsy jsou nalité a tvrdé. Odsátí nadbytečného mléka před nebo v průběhu kojení uvolní přeplněný prs a usnadní dítěti přisátí k prsu.
- Bradavka je schovaná v prsu z důvodu dlouhé pauzy mezi kojením.
- Máte vpáčené, ploché nebo poraněné bradavky (odsávání pomáhá formovat vpáčené nebo ploché bradavky).

- Pokud mezi krmením cítíte náhlé přeplnění prsu a nechcete budít dítě.
- Dítě je nemocné a nemůže sát.
- V případě malé tvorby mléka – používání odsávačky stimuluje činnost mléčných žláz.
- Pokud nastoupíte zpět do zaměstnání a nechcete přerušit kojení – je nutné simulovat přirozený proces kojení používáním odsávačky.

Jak často odsávat mléko odsávačkou?

Pokud matka nemůže kojít, doporučujeme odsávat mléko 8x denně. To udrží proces laktace na správné úrovni. Zpočátku můžete mít problémy s odsátím většího množství mléka, ale po několika dnech bude již odsátého mléka více. Při stabilizované laktaci se množství jednorázově odsátého mléka pohybuje mezi 30-60ml, proto bude k získání jedné porce zapotřebí více pokusů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝROBKU

Odsávačka PA203S

Elektronické zařízení na odsávání mléka, dále jen odsávačka, je určeno k odsávání mléka kojících matek. Odsávačka pomáhá udržet laktaci, nakrmit dítě v nepřítomnosti matky a v případě nemocných bradavek.



- ❖ Odsávačka je předmětem osobní potřeby.
- ❖ Na odsávačku se poskytuje zákonná záruka.
- ❖ Před použitím se seznamte s návodem k použití a dodržujte zásady bezpečného používání.
- ❖ Návod k obsluze uchovejte pro případné pozdější použití.
- ❖ Předpokládaná životnost výrobku je 5 let. Životnost silikonových dílů je max. 2 roky. Silikonové díly podléhají trvalému odbarvení. Tyto díly vyměňte za nové po jejich odbarvení nebo před uplynutím životnosti.

Na škody vzniklé použitím odsávačky v rozporu s návodem k použití nenese výrobce zodpovědnost a nemohou být předmětem reklamace nebo záruční opravy. Jakékoliv opravy nebo zásahy do výrobku neautorizovanými osobami mají za následek ztrátu nároku na záruku a mohou ohrozit zdraví a život uživatele.






OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- V případě problémů s kojením nebo při bolesti u kojení, vždy kontaktujte lékaře před tím, než použijete odsávačku.
- Doporučujeme první použití odsávačky pod dohledem odborníka.
- Doporučujeme seznámit se s odbornou literaturou týkající se zásad kojení.

Upozornění! Malý podtlak může být příčinou odsátí menšího množství mléka, ale příliš vysoký podtlak může působit bolest při odsávání a snížit tvorbu mléka. Pokud pozorujete tento problém, upravte sílu sání (viz kapitola SÍLA SÁNÍ).

- Udržujte výrobek v čistotě. Zabraňte vzniku usazenin a jiných nečistot, protože mají vliv na správnou funkci výrobku.
- Péče o čistotu a hygienu výrobku je důležitá pro bezpečnost matky i dítěte.
- Díly výrobku, které nejsou určeny k umývání, chraňte před vodou a vlhkem.
- Výrobek zapínejte do sítě s přepětovou ochranou.
- Mimo uzavřené místnosti můžete výrobek používat jen a pouze s napájením na baterie.

<p>Tento symbol znamená, že výrobek nemůžete likvidovat společně s domácím odpadem. Likvidací výrobku v souladu s předpisy předcházíte eventuálnímu negativnímu vlivu na přírodní zdroje a zdraví lidí, které by mohlo nastat v případě nesprávného nakládání s těmito odpady. Pro další informace kontaktujte místní orgány, vývozce odpadu nebo výrobce.</p>	
<p>Výrobce prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicemi Evropské unie a harmonizovanými normami. Výsledkem posouzení této shody je toto označení výrobku.</p>	
<p>Výrobek spadá do II. třídy ochrany.</p>	
<p>Výrobek není hračka. Všechny díly uchovávejte mimo dosah dítěte. Informace o výrobku uchovejte pro případné pozdější použití. Číslo série a datum spotřeby je uvedeno na obalu.</p>	

NEDOVOLENÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ VÝROBKU

- Není dovoleno používat poškozený výrobek se zjevnými vadami.
- Není dovoleno používat výrobek během koupele.
- Není dovoleno používat výrobek tam, kde může dojít ke kontaktu s vodou: např. okolo vany, umyvadla, dřezu nebo sprchovacího koutu.
- Není dovoleno používat výrobek, pokud existuje možnost usnutí uživatele.
- Není dovoleno používat výrobek zapojený do elektrické sítě mimo uzavřené místnosti.
- Není dovoleno používat výrobek, který upadl na tvrdý povrch. Takový výrobek nechte zkontrolovat v servisu.
- Není dovoleno používat výrobek v rozporu s jeho určením a návodem k použití.

TECHNICKÁ DATA

Napájení na baterie	4 x AA 1,5 V – alkalické
Napájení ze sítě	230 V / 50 Hz / 0,4A max; výstup: =12V / 1A
Maximální výkon	12 W
Hmotnost výrobku s adaptérem (bez baterií)	516g

UPOZORNĚNÍ!

DŮLEŽITÉ!

1. Ujistěte se, že polarita vkládaných baterií (+) a (-) je shodně se schématem.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte (více než 25 hodin), vyjměte baterie.
3. Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy.
4. Všechny baterie měňte současně.
5. **Pokud odsávačku nebudete nepoužívat v následujících 24 hodinách, vyjměte baterie.**
6. Sami výrobek neopravujte.

ODSÁVAČKA PROLAKTIS OBSAHUJE

Obr. 1 – DÍLY SADY PROLAKTIS

1. Ovládací panel
2. Síťový adaptér
3. Silikonová hadička se spojkou
4. Odsávačka
5. Sada k uchování pokrmu
 - a. Šroubovací víčko
 - b. Těsnicí disk
 - c. Víčko/hrníček
6. Díly odsávačky Protect (k ručnímu odsávání)
 - a. Trn s regulátorem podtlaku
 - b. Membrána
 - c. Rukojeť
 - d. Kryt membrány
7. Náhradní díly
 - a. Zpětný ventil – 2 ks
 - b. Těsnění kruhové – 2 ks
 - c. Silikonová masážní vložka – 1 ks
 - d. Membrána elektronické odsávačky – 1 ks
8. Kufřík na odsávačku
9. Tampónů Day & Night LOVI – 10 ks

Obr. 2 – DÍLY ODSÁVAČKY PROLAKTIS



1. Kryt
2. Membrána
3. Držák membrány
4. Silikonová masážní vložka
5. Trychtýř odsávačky
6. Zpětný ventil
7. Adaptér na láhev
8. Láhev

Obr. 3 – OVLÁDACÍ PANEL


1. LCD display
2. Otočný ovládač sací síly
3. Uvolňující tlačítko
4. Paměťové tlačítko
5. Zapínání/vypínání On/Off
6. Vkládání baterií
7. Otvor pro silikonovou hadičku
8. Otvor pro síťový adaptér

Obr. 4 – DISPLAY


1. Ukazatel sací síly
2. Ukazatel stimulačního cyklu
3. Ukazatel odsávacího cyklu
4. Ukazatel času
5. Ukazatel napájení
6. Paměť
7. Alarm

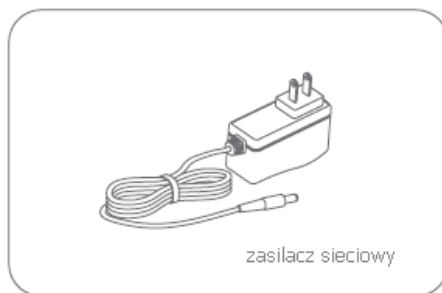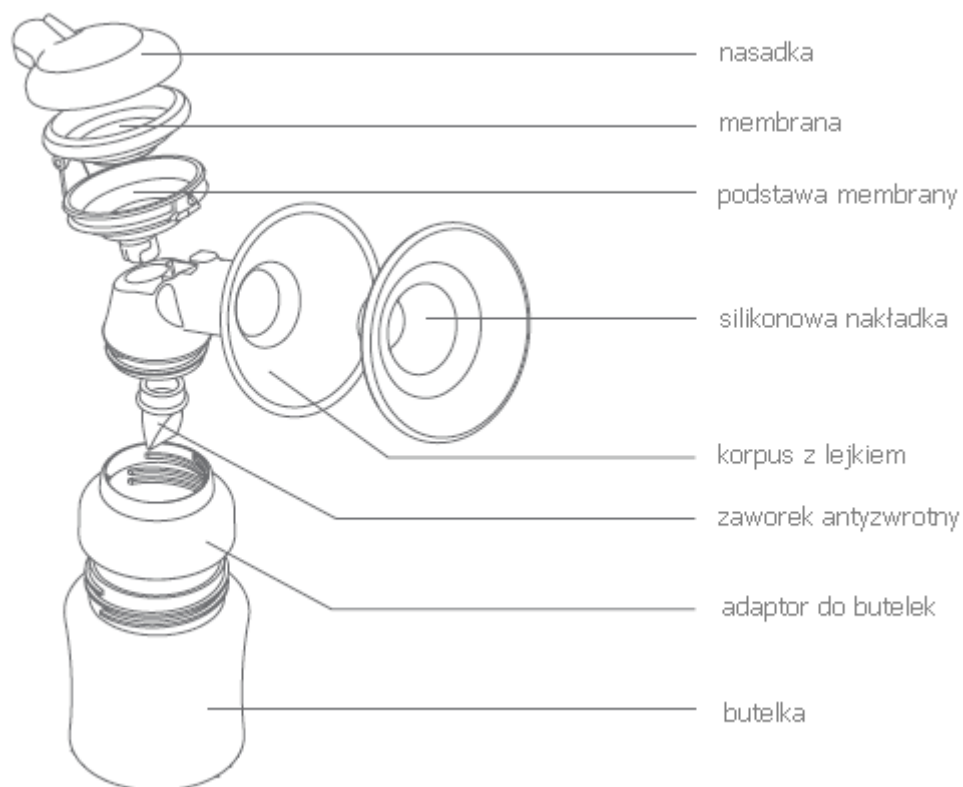

HORNÍ POHLED

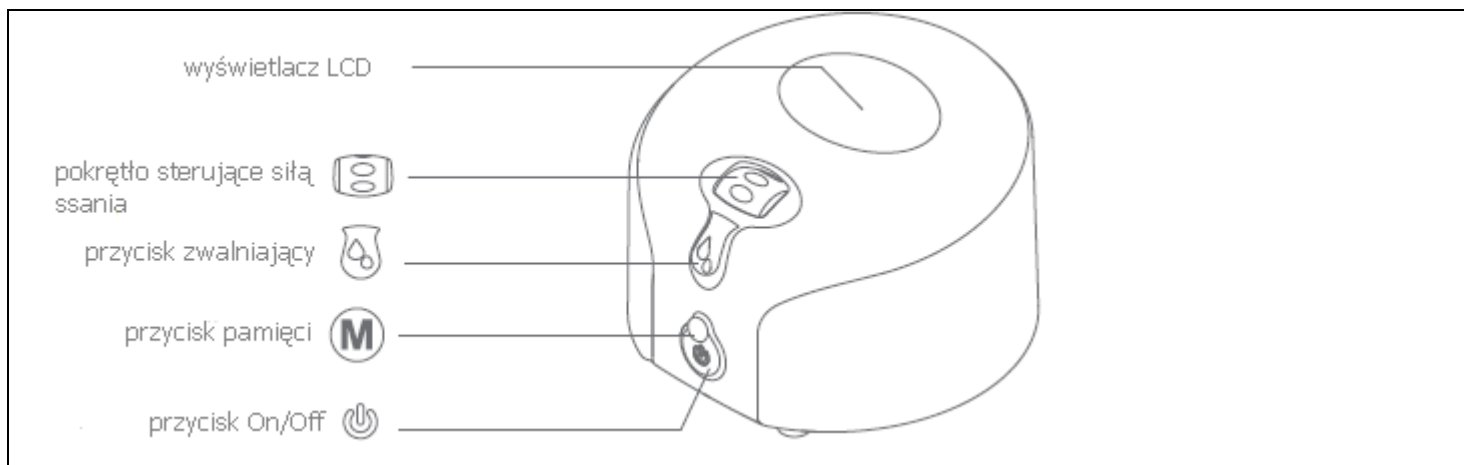

DOLNÍ POHLED

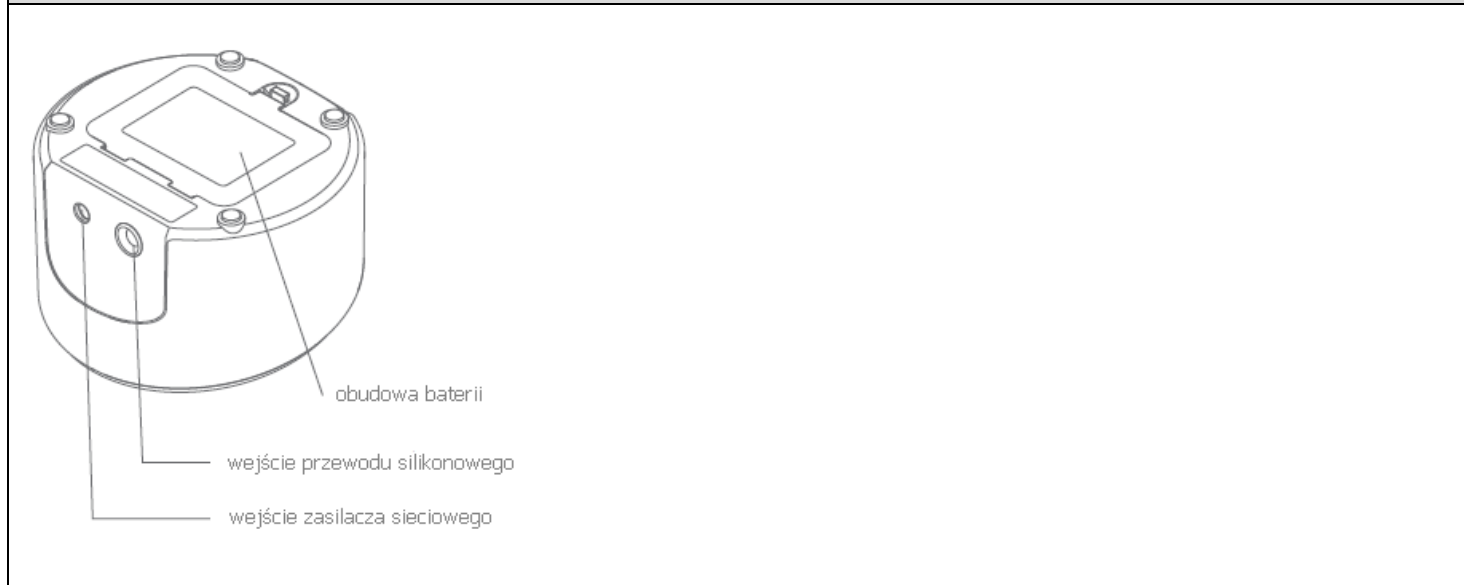

LCD DISPLAY



MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ ODSÁVAČKY PROLACTIS

Uchopte trychtýř odsávačky dle obrázku. Otvor se závitem musí směřovat vzhůru.




Nasadte zpětný ventil. Ujistěte se, že těsně přiléhá k okrajům otvoru, neroztáhl se, nezavinul se ani se nezkroutil. Ukazováčkem odstraňte případné nerovnosti.

Upozornění! Směrování koncovky zpětného ventilu nemá vliv na správnou činnost odsávačky. **Důležité je, aby ventil dobře těsnil.**

Okragła podstawa - kulatá základna

Czubek - koncovka

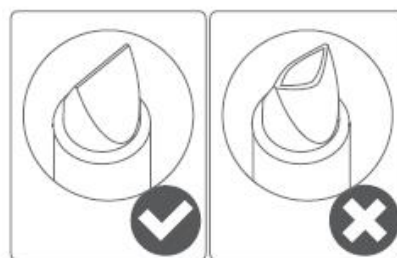

Našroubujte adaptér láhve na trychtýř se zpětným ventilem.

Upozornění! Neporušte polohu již dříve nasazeného zpětného ventilu. Pokud k tomu dojde, opakujte výše uvedený postup.



Přišroubujte trychtýř s adaptérem na láhev.



Umístěte membránu do podstavy membrány (přizpůsobte ji tvaru podstavy). Dotlačte okraje membrány, odstraňte případné nerovnosti. Ujistěte se, že membrána těsně přiléhá k okrajům podstavy.



Nasad'te kryt na závěs (viz obrázek).


Nasadka –
Kryt

Zawias -
Závěs



Spojte oba dva díly dle vyobrazení.

Část s membránou dotáhněte ve směru hodinových ručiček.

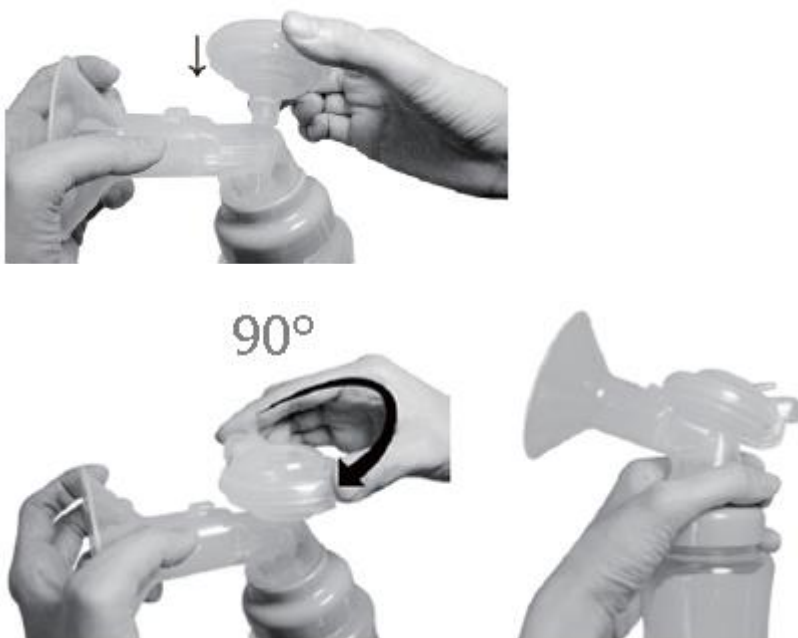

Umístěte silikonovou masážní vložku hluboko do trychtýře tak, aby dobře přiléhala k jeho stěnám. Okraj vložky přetáhněte přes okraj trychtýře.

Upozornění! Odsávačka může být použita i bez silikonové masážní vložky. Její použití závisí na individuálních potřebách spotřebitele.



MOŽNOSTI NAPÁJENÍ

Odsávačka může být napájena dvěma způsoby.

Prostřednictvím síťového adaptéru.

Vložte koncovku síťového adaptéru do zdířky ovládacího panelu a poté zapněte do sítě.

Z bezpečnostních důvodů může být odsávačka napájena pouze prostřednictvím přiloženého síťového adaptéru. Použití jakéhokoli jiného adaptéru může způsobit poškození výrobky a bezprostředně ohrozit jeho uživatele.

Je možné používat odsávačku napájenou síťovým adaptérem bez vyjmutí baterií.

Upozornění! Pokud v odsávačce nejsou baterie, po odpojení adaptéru od sítě se všechna dříve nastavená data ztratí.


Upozornění! Zástrčka adaptéru odsávačky se může lišit podle země použití.



Pomocí 4 alkalických baterií typu AA 1,5V

Upozornění!

- Vždy vyměňujte všechny 4 baterie současně.
- Vyjměte baterie pokud odsávačku delší dobu nepoužíváte.
- Vybité baterie likvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí a recyklace.
- Nesprávně použité alkalické baterie mohou vzplanout nebo způsobit popáleniny kyselinou. Nikdy nerozebírejte baterie ani akumulátor. Nenechávejte baterie poblíž tepelných zdrojů a ohně. Nevhazujte baterie do ohně. Nenechávejte baterie v dosahu dítěte.

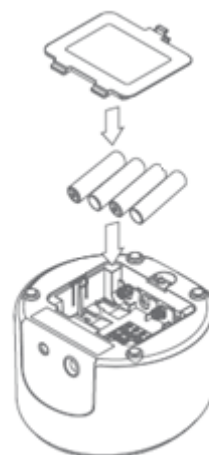

Otevřete kryt.



Pokud vyměňujete baterie, vyjměte staré.



<p>Vložte 4 nové alkalické baterie AA.</p> <p>Upozornění! Ujistěte se, že baterie vkládáte správně (dle schématu).</p>	
<p>Zavřete kryt baterií, ujistěte se, že zapadl do otvoru.</p>	

NÁVOD K POUŽITÍ

Před každým použitím:

- Než začnete používat odsávačku důkladně si umyjte ruce.
- Přesvědčte se, že odsávačka je umytá a vysušená. Pokud ne, pokračujte dle níže uvedeného návodu.
- Ujistěte se, že v silikonové hadičce se nenachází žádná tekutina ani známky vlhkosti. Nikdy nezapojujte odsávačku do sítě, pokud se v silikonové hadičce nachází voda.

Upozornění! Nefukujte hadičku ústy, aby jste ji zbavili vody!

Uchopte otevřený konec silikonové hadičky a nasad'te ho na trubičku v horní části krytu. Dotlačte hadičku na konec trubičky a ujistěte se, že těsně přiléhá.

Upozornění! Zkontrolujte, že v hadičce není žádná tekutina (např. voda z předchozího mytí).

Tulejka –

Trubička




Druhý konec hadičky zasuňte do otvoru v ovládacím panelu.




Přiložte odsávačku k prsu tak, aby se bradavka nacházela hluboko v trychtýři odsávačky (ideálně uprostřed).

Upozornění! Důležité je, aby silikonová masážní vložka těsně přiléhala k prsu. Jinak dochází ke snížení sací síly.




Zapněte tlačítko On/Off.  a začněte odsávat.



LCD display několik sekund ukazuje dobu posledního odsávání, odsávačka automaticky začne fungovat v režimu stimulace. 



Přesuňte otočný ovládač nahoru (+) nebo dolů (-) , upravte sílu sání


ve fázi stimulace dle vlastních potřeb.



Pokřetlo sterujúce síť ssania – Ovladač regulace síly sání

pokřetlo sterujúce síť ssania



Pokud chcete fázi stimulace přeskočit  nebo mléko začíná vytékat dříve než za 2 minuty po startu, stlačte uvolňující tlačítko



a začnete fázi hlubokého odsávání. 

Przycisk zwalniający – Uvolňující tlačítko

przycisk
zwalniający



Po dvou minutách se cyklus stimulace automaticky nastaví na cyklus hlubokého odsávání. Na obrazovce se objeví ikona.



Faza stymulacji – Fáze stimulace


Faza ssania głębokiego – Fáze hlubokého sání

faza stymulacji



faza ssania głębokiego



Přesuňte otočný ovládač nahoru (+) nebo dolů (-) , upravte sílu sání


ve fázi stimulace dle vlastních potřeb.



Pokrętko sterujące siłą ssania – Ovladač regulace síly sání

pokrętko sterujące
siłą ssania



Když skončíte odsávání, stlačte tlačítko On/Off  a vypněte odsávačku.

On/Off



Po vypnutí odsávačky se na obrazovce na několik sekund objeví celková doba odsávání. Pak display automaticky přepne do pohotovostního režimu hodin nebo budíku, pokud byl nastaven ZVUKOVÝ alarm.

Upozornění! Od prsu odkládejte pouze vypnutou odsávačku bez sací síly. Pokud je nutné odložit odsávačku během odsávání, vložte mezi trychtýř a prs prst (stejně, jako odstavuje dítě od prsu).



Upozornění! Odsávačka se automaticky vypne po 30 minutách pouze tehdy, pokud nebylo v průběhu odsávání měněno nastavení.



SÍLA SÁNÍ

Pokaždé, když si nastavíte odpovídající sílu sání (ve fázi stimulace i hlubokého odsávání), si odsávačka tato data uloží až do okamžiku, kdy je znovu změníte. Při každém dalším použití odsávačka automaticky nastaví sílu sání dle předchozího použití.

Sílu sání nastavíte:

1. Ve fázi stimulace nastavte sílu sání přesutím ovladače  nahoru (+) nebo dolů (-).
2. Ve fázi hlubokého odsávání nastavte sílu sání rovněž přesutím ovladače  nahoru (+) nebo dolů (-).



Pokud se mléko dostává pod silikonovou masážní vložku, snižte sílu sání tak, aby mléko vtékalo do láhve.

Upozornění! Pokud se Vám zdá, že síla sání nastavená na nejvyšší úroveň je stále nedostačující, zkuste odsávat mléko bez silikonové masážní vložky.

PAMĚŤOVÉ FUNKCE

Jednou z hlavních výhod odsávačky jsou její paměťové funkce. Pomocí paměťového tlačítka (M) si můžete snadno nastavit individuální okamžik změny jednotlivých fází (stimulace a hlubokého sání).

Nastavení změn fází:

1. Po několika odsáváním zjistíte, že mléko začíná vytékat zhruba za stejnou dobu.
2. Začněte odsávat stejně, jako doposud. Odsávačka automaticky začne pracovat ve fázi stimulace s dříve uloženou silou sání.
3. Jakmile začne mléko vytékat, stlačte uvolňující tlačítko . Odsávačka začne pracovat ve fázi hlubokého odsávání rovněž s dříve uloženou silou sání.
4. Stlačte a cca 3 sekundy držte paměťové tlačítko (M) až do okamžiku, kdy ikona  začne blikat. Okamžik změny jednotlivých fází odsávání zůstal nastaven.
5. Pokračujte v odsávání.






Využití paměťové funkce při odsávání:



1. Zapněte odsávačku.
2. Stlačte paměťové tlačítko (M) (ne déle než 3 sekundy).
3. Odsávačka začne pracovat ve fázi stimulace, pak se automaticky přepne do fáze hlubokého odsávání (dle dřívějšího nastavení).

Upozornění! Při využití paměťové funkce není možné regulovat sílu sání ani přepínat odsávačku z fáze stimulace do fáze hlubokého odsávání. Pokud je to potřeba, vypněte paměť opětovným stlačením paměťového tlačítka (M).


NASTAVENÍ HODIN

Pro nastavení hodin:

1. V pohotovostním režimu /hodin stlačte paměťové tlačítko (M)  a držte ho cca 3 sekundy. Aktivuje se režim nastavení hodin. Ozve se zvukový signál a ikona AM/PL začne blikat.
2. Pro výběr času AM/PM otočte ovladačem  nahoru nebo dolů.
3. Stiskněte uvolňující tlačítko , které umožní změnu v nastavení hodiny. Číslce začnou blikat.
4. Pro nastavení hodin točte ovladačem  nahoru (+) nebo dolů (-).
5. Stiskněte uvolňující tlačítko , které umožní změnu minut na hodinách. Číslce začnou blikat.

6. Pro nastavení minut točte ovladačem  nahoru (+) nebo dolů (-).
7. Naposledy stiskněte uvolňující tlačítko , pro uložení nastaveného času.

Upozornění! Pokud v době 10 sekund od započetí režimu nastavení hodin nezůstane nastavení dokončeno, odsávačka se vrátí do pohotovostního režimu.

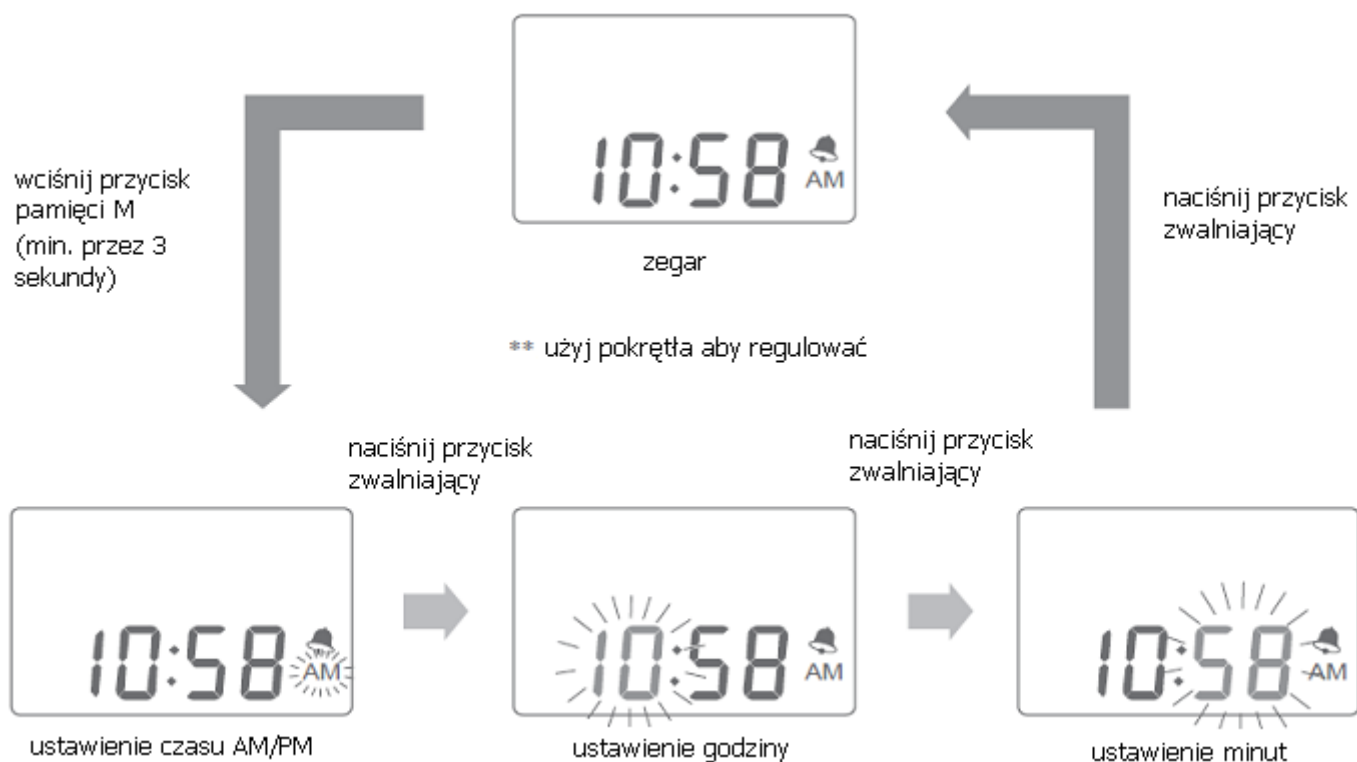

Wciśnij przycisk pamięci M (min. Przez 3 sekundy) – Stlačte paměťové tlačítko M (min. na dobu 3 sekund)

Ustawienie czasu AM/PM – Nastavení času AM/PM

Naciśnij przycisk zwalniający – Stiskněte uvolňující tlačítko

Zegar – hodiny

** użyj pokrętki aby regulować – Pro regulaci použijte ovladač



Ustawienie godziny – Nastavení hodiny

Ustawienie minuty – Nastavení minut




NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO ALARMU

Z důvodu udržení odpovídající úrovně laktace je doporučováno pravidelné odsávání mléka. Funkce zvukového alarmu byla vytvořena právě z tohoto důvodu – připomíná, že nastal čas k dalšímu odsávání. Pokud si nastavíte časový interval mezi jednotlivými odsáváním, hodiny v alarmu začnou automaticky odměřovat čas po ukončení odsávání. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový alarm.


Pro nastavení zvukového alarmu:

1. V pohotovostním režimu/hodin stiskněte paměťové tlačítko (M)  (nedržte ho). Aktivuje se režim nastavení zvukového alarmu.
2. Na LCD obrazovce se objeví dvě informace k nastavení: časový interval mezi dvěma odsáváním a hodina následujícího odsávání (hodina, o které se spustí zvukový alarm).
3. Pro nastavení časového intervalu mezi odsáváním použijte přesouvání ovladače  nahoru (+) nebo dolů (-). Interval může nastavit s přesností 15 minut. Hodina následujícího odsávání se automaticky nastaví s ohledem na čas, kdy byly odsávačka naposledy použita

Upozornění! Časový interval mezi odsáváním se počítá od začátku předcházejícího odsávání, ne od jeho ukončení.

4. Stiskněte uvolňující tlačítko , které umožní změnu v nastavení alarmu .
5. Otočte ovladačem  nahoru (+) nebo dolů (-) pro zapnutí (On) nebo vypnutí (Off) funkce alarmu.
6. Stiskněte uvolňující tlačítko  pro uložení nastavení.

Upozornění! Pokud v době 10 sekund od započetí režimu nastavení zvukového alarmu nezůstane nastavení dokončeno, odsávačka se vrátí do pohotovostního režimu.

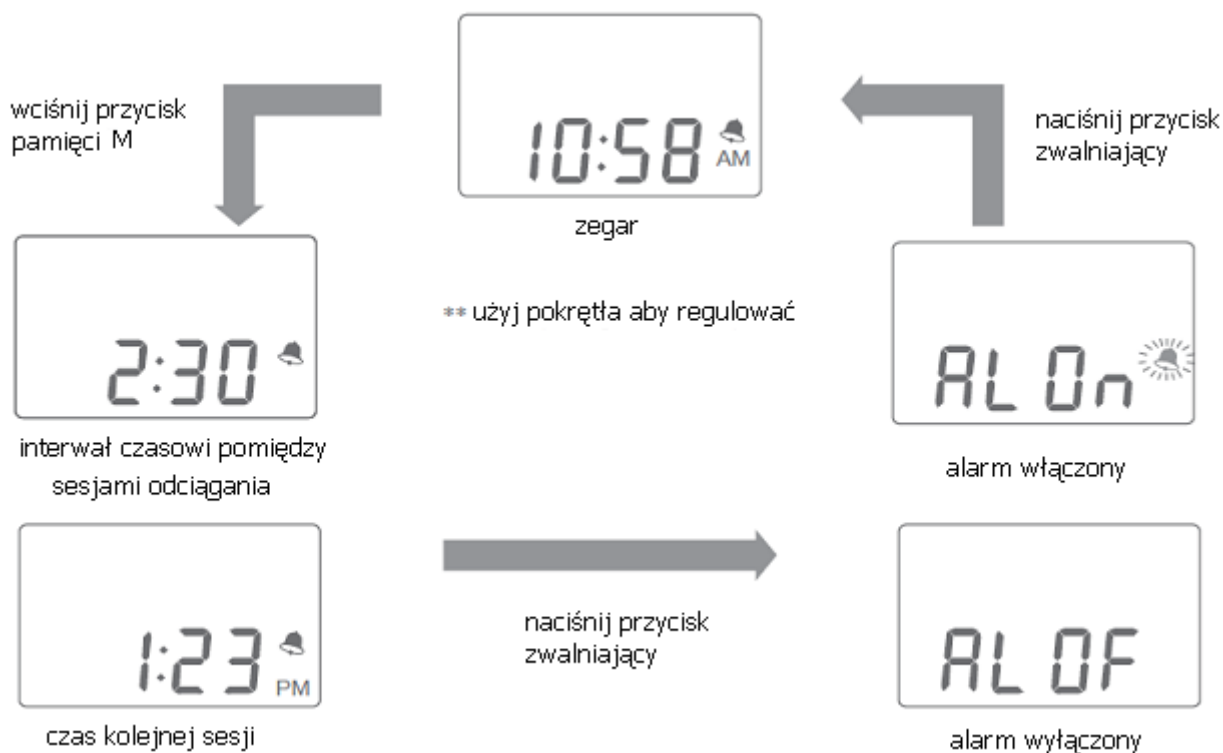

Wciśnij przycisk pamięci M – Stlačte paměťové tlačítko M

Interwał czasowy pomiędzy sesjami odciągania – Časový interval mezi odsáváním

Czas kolejnej sesji – Hodina následujícího odsávání

** użyj pokrętki aby regulować – Pro regulaci použijte ovladač

Naciśnij przycisk zwalniający – Stiskněte uvolňující tlačítko

Alarm włączony – Alarm zapnutý

Alarm wyłączony – Alarm vypnutý

RUČNÍ ODSÁVÁNÍ MLÉKA

Změna na dvoufázovou ruční odsávačku LOVI Protect

V sadě se nachází také díly, které umožňují ruční odsávání mléka. Díky nim se elektronická odsávačka LOVI Prolactis změní na dvoufázovou ruční odsávačku LOVI Protect.

Před složením a použitím odsávačky LOVI Protect se důkladně seznáme s přiloženým návodem.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ

Před prvním použitím:

Před prvním použitím rozmontujte všechny díly odsávačky, které se odstávají do kontaktu s mlékem, umyjte je a ponořte do studené vody. Ohřívejte až k varu a následně převarujte po dobu 5 minut.

- Nezapomeňte použít dostatek vody. V průběhu vyvařování musí být všechny díly trvale ponořeny.
- **Nevyvařujte silikonovou hadičku ani spojku.**
- Ihned po vyvaření vyjměte všechny díly z vody.
- Před montáží a použitím všechny díly důkladně osušte.



K osušení použijte čistý ručník. Osušené díly uchovávejte v uzavřeném pouzdru nebo sáčku. Můžete také použít čistý ručník.

Nedostatečně osušené díly odsávačky mohou negativně ovlivnit funkci odsávačky. Proto se před použitím ujistěte, že všechny díly jsou důkladně osušeny.

Mytí odsávačky:

- Vytáhněte z odsávačky silikonovou hadičku se spojkou. Tento díl není potřeba umývat, protože se nedostává do kontaktu s mlékem.
- **Všechny díly odsávačky myjte pouze ručně v horké vodě šetrným mycím prostředkem.**
- Nepoužívejte silné detergenty ani ostré čisticí prostředky, které mohou poškrábat povrch jednotlivých dílů.
- Vypláchněte čistou horkou vodou.
- **Ovládací panel čistěte vlhkým hadříkem, používejte čistou vodu nebo vodu s malým množstvím šetrného čisticího prostředku.**
- **Neumývejte** silikonovou hadičku se spojkou, protože spojuje elektrické díly.
- Zpětný ventil myjte velmi šetrně a nedopusťte, aby v něm zůstalo zaschlé mléko.

Upozornění! Zpětný ventil vyjímajte vždy dvěma prsty za kulatou podstavu. Nikdy ho nedejte za koncovku, protože ji můžete poškodit a snížit tak sílu sání.

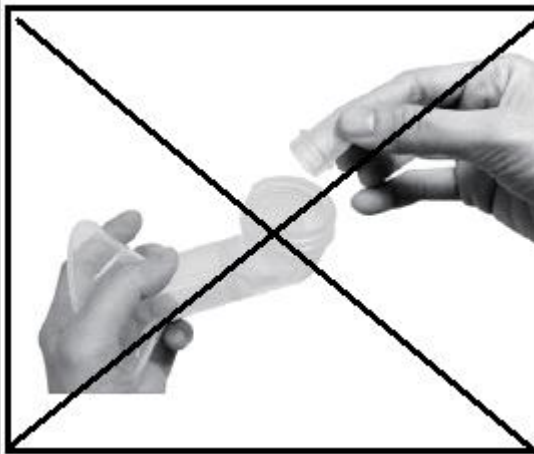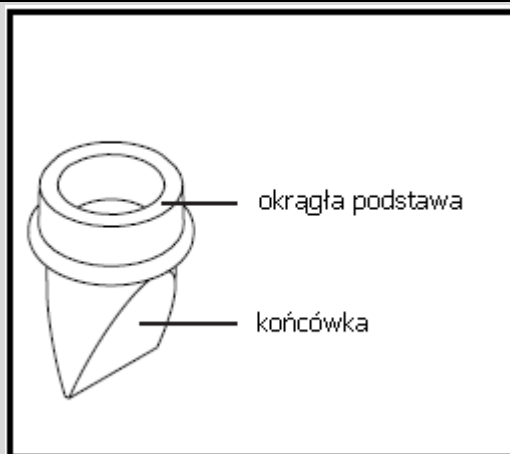

Upozornění! Před každým použitím zkontrolujte stav jednotlivých dílů. Popraskané, zpuchřené, zabarvené nebo zničené díly mohou negativně ovlivnit funkci odsávačky.

VYŘEŠTE SAMA JEDNODUCHÉ PROBLÉMY

Při používání odsávačky se můžete potkat s několika drobnými problémy. Pokuste se je odstranit sama.

Problém s napájením:

Pokud v průběhu používání odsávačky nastane problém s napájením, např. odsávačka přestala pracovat z důvodu poklesu napětí, proveďte následující úkony:

- Vytáhněte adaptér ze sítě a počkejte 5 sekund.
- Zapněte adaptér zpět do sítě.
- Pokud odsávačka stále nepracuje, zapněte adaptér do jiné síťové zásuvky.

Rádiové vlny:

Toto zařízení může rušit přístroje přijímající rádiové vlny. Pokud není používáno dle návodu, může rušit jiné přístroje nacházející se v jeho blízkosti. Zkuste:


- Změňte polohu nebo nasměrování rušeného přístroje.
- Zvětšete vzdálenost mezi odsávačkou a rušeným přístrojem.
- Zapněte adaptér odsávačky do jiného obvodu sítě, než ve kterém je zapnut rušený přístroj.
- Konzultujte problém s výrobcem nebo servisním technikem.
- Není zaručeno, že rušení přístrojů se opět nedostaví.

Snížení síly sání:

Pokud pozorujete snížení síly sání:

- Vytáhněte silikonovou hadičku z ovládacího panelu a přiložte palec na zdírku (nachází se na zadní části ovládacího panelu).
 - Pokud cítíte podtlak, ovládací panel (pumpa) funguje.
 - Pokud problém přetrvává, zapněte adaptér do jiné síťové zásuvky.
- Ujistěte se, že je odsávačka správně složená.

- Zkontrolujte, že není poškozený zpětný ventil, např. nepraskl na okrajích. Tento díl má zásadní vliv na dosažení správné síly sání. Pokud je poškozený, vyměňte ho za nový. Náhradní ventily jsou součástí balení.

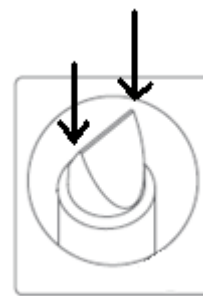

- Zkontrolujte, že membrána je nasazena správně, mezi držákem membrány a membránou nejsou žádné netěsnosti.
- Ujistěte se, že držáku membrány je nasazeno těsnění a že držák membrány je správně umístěná v trychtýři odsávačky.
- Ujistěte se, že prs těsně přiléhá k odsávačce.

Mléko se hromadí v silikonové masážní vložce:

- Pokud mléko vytéká z prsu příliš rychle a nestačí vtékat do láhve, snižte sílu sání.
- Ujistěte se, že odsávačku držíte správně. Láhev se musí nacházet ve svislé poloze.

UCHOVÁVÁNÍ ODSÁTÉHO MLÉKA

- ✓ Odsáté mléko můžete uchovávat v láhvi nebo speciálních sáčcích na uchovávání mléka.
- ✓ Zmrazujte pouze čerstvě odsáté mléko. Láhev nikdy nenaplňujte po okraj, aby se mohl zvětšit objem mléka při zmrazování.
- ✓ Zmražené mléko rozmrazujte zvolna přirozeným způsobem jako jiné potraviny, nikdy nepoužívejte mikrovlnou troubu. Můžete změnit strukturu mléka a zbavit ho jeho hodnotných látek.
- ✓ Zmražené mléko můžete rozmrazovat přes noc v ledničce a pak ho ohřát v ohřívači nebo horké vodě.
- ✓ Mléko protřepejte, aby jste promíchali oddělený tuk.
- ✓ Rozmražené mléko spotřebujte do 24 hodin. Po tuto dobu uchovávejte mléko v ledničce. Rozmražené mléko
- ✓ **NIKDY** znovu nezmrazujte.
- ✓ **NIKDY** nemíchejte čerstvě odsáté mléko s rozmraženým mlékem.
- ✓ **NIKDY** nemíchejte čerstvě odsáté mléko s zmraženým mlékem.
- ✓ Zmražené mléko nepřevařujte ani neohřívejte v mikrovlné troubě.
- ✓ **Vždy** zkontrolujte teplotu podávaného pokrmu.
- ✓ Nespotřebované rozmražené mléko více nepoužívejte.

	Čerstvě odsáté mléko	Rozmražené mléko
Pokojeová teplota	12h	neuchovávat
Lednička (+4 ⁰ C)	2-5 dní	24h
		Rozmražené mléko NIKDY znovu

Chladicí box v ledničce (-10 ⁰ C)	2 týdny	nezmrazujte.
Hluboké mražení (-18 ⁰ C až -20 ⁰ C)	6 měsíců	Rozmražené mléko NIKDY znovu nezmrazujte.

Odsávačka je předmětem osobní potřeby, nepodléhá výměně ani vrácení. Na odsávačku se vztahuje zákonná záruka, v případě poruchy kontaktujte prodejnu, ve které jste odsávačku zakoupili nebo přímo distributora. Nezapoměňte, že podkladem k uplatnění reklamace je předložení dokladu o nákupu a orazítkovaný záruční list.

DŮLEŽITÉ!

- Není dovoleno používat odsávačku k jiným účelům, než jsou uvedeny v návodu k použití.
- Nenechávejte výrobek v blízkosti tepelných zdrojů a ohně.
- Před použitím zkontrolujte, že všechny díly byly správně složeny.
- Pokud cítíme v průběhu odsávání nepříjemný pocit v prsou, okamžitě přestaňte odsávačku používat.
- Před každým použitím si důkladně umyjte ruce.
- Uchovávejte mimo dosah dítěte.
- Chraňte výrobek před nárazem a pádem.
- Nedotýkejte se vyvařených dílů holýma rukama.

DEKLARACE VÝROBCE

Výrobce deklaruje, že výrobek splňuje požadavky stanovené předpisy pro označování výrobku znakem CE.

ZÁRUČNÍ LIST

1. Firma Canpol sp. z o.o. poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců od data nákupu (dokladu o nákupu a orazítkovaný a podepsaný záruční list je nutný pro uplatnění reklamace) v případě, že výrobek byl používán v souladu s jeho určením a návodem k použití, není mechanicky poškozen a nemá poškozené plomby. Výrobek reklamujte u prodejce.
2. Kupující musí výrobek reklamovat v originálním balení a zajistit ho před poškozením. Poškození způsobená nedostatečnou ochranou nepodléhají reklamaci ani záruční opravě.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.
4. Záruční oprava nezahrnuje činnosti uvedené v návodu, které má vykonat kupující ve vlastním čase a na vlastní náklady (čistění).
5. Případné vyčištění výrobku bude kupujícímu naúčtováno dle cenníku autorizovaného servisu a nebude na něj pohlíženo jako na záruční opravu.
6. Záruka se nevztahuje na:
 - a) Mechanické poškození výrobku v době jeho používání nebo transportu do servisu.
 - b) Poškození a vady vzniklé:

- používáním výrobku k jiným účelům, než jsou uvedeny v návodu k použití,
- nesprávným použitím nebo použitím v rozporu s návodem k použití, údržbou, skladováním nebo instalací,
- použitím neoriginálních spotřebních dílů,
- opravami prováděnými neoprávněnými osobami. Zjištění této skutečnosti nebo otevřením přístroje má za následek okamžitou ztrátu záruky.
- úpravami, konstrukčním změnami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů.

c) sklenění díly, žárovky a osvětlení.

d) spotřební díly.

7. Bez dokladu o prodeji a potvrzeného záručního listu s datem nákupu, razítkem a podpisem prodejce nemůže být reklamáce přijata.
8. Výše uvedená záruka je platná na území České republiky.

Nezapomeňte, že podkladem pro uplatněné reklamace je předložení dokladu o nákupu a orazítkovaný a podepsaný záruční list.

Název výrobku:

Dvoufázová elektronická odsávačka mateřského mléka LOVI Prolactis

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

Podpis prodejce:

Do medycznego

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek popsany v tomto návodu

k použití splňuje náležitosti požadavků na zdravotnické prostředky Směrnice Rady

93/42/EHS a Směrnice 2007/47/ES třídy II a.

