


NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÁ NOSNÍ ODSÁVAČKA MODEL Č. DQ22

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtete tento návod. Uchovejte pro budoucí použití.

UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím se ujistěte, že je zařízení a hlava dobře sestavena.
2. Pokud dojde k jakékoli abnormalitě, vypněte zařízení.
3. Před prvním použitím si pozorně přečtete návod.
4. Důležité!
 - Uchovávejte mimo dosah dětí, když se nepoužívá.
 - Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla a nevystavujte extrémním teplotám, vysoké vlhkosti nebo prachu.
 - Vyhněte se skladování s chemikáliemi nebo hořlavými plyny.
5. Pokud je zařízení poškozeno, okamžitě kontaktujte výrobce.
6. Neměňte nastavení zařízení.
7. Údržba:
 - Pravidelně kontrolujte zařízení a veškeré jeho příslušenství.
 - Vyhněte se dlouhodobému používání. Před každým použitím zařízení zkontrolujte.
8. Nevkládejte špičku do nosních dírek příliš hluboko.
9. Nikdy nepoužívejte na uši, ústa nebo oči.
10. Pouze pro domácí použití. Tato nosní odsávačka slouží pouze k odstraňování nosních sekretů. Nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku.
11. K nabíjení použijte přiložený adaptér.

Části zařízení, Obr. 1

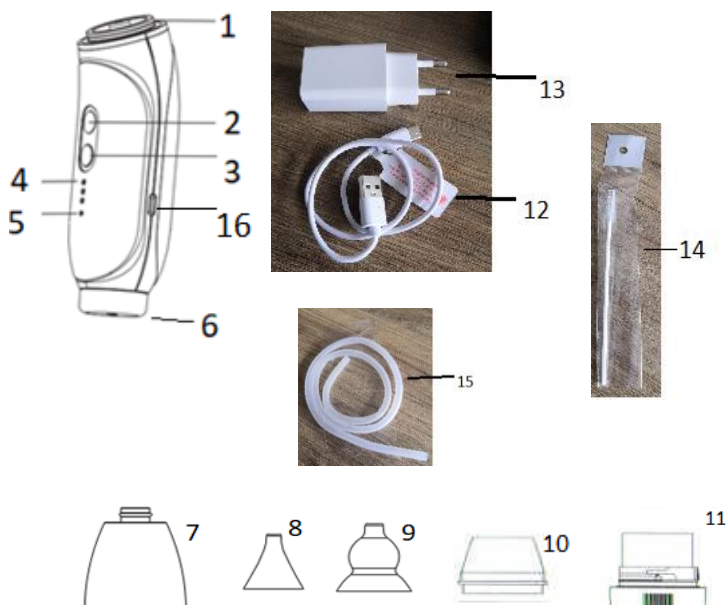

1. Konektor
2. ON/OFF tlačítko
3. Tlačítko nastavení režimu
4. Indikátor nastavení režimu
5. Kontrolka stavu baterie
6. Plastový kryt
7. Sběrná nádoba
8. Úzký nástavec
9. Široký nástavec
10. Kryt
11. Hlava
12. USB kabel
13. Adaptér
14. Čistící kartáček
15. Silikonová hadička
16. Vstup pro nabíječku


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Zkontrolujte odsávačku, zda není zjevně poškozena a zda nechybí některé části. Pokud je zařízení poškozeno nebo některé části chybí, kontaktujte výrobce zařízení.

- Nízké nabití baterie je indikováno kontrolkou stavu baterie (5). Pokud indikátor svítí červeně, připojte zařízení ke zdroji napájení.
- Připojte USB kabel, který je součástí sady, k originálnímu 5V/1A adaptéru.

- Zapojte kabel USB do portu zařízení.
- Zapojte adaptér do zásuvky 230V AC. Během nabíjení zařízení nepoužívejte.
- Jakmile je zařízení plně nabito, kontrolka stavu baterie (5) se rozsvítí zeleně.
- Zařízení se automaticky vypne po 2 minutách od spuštění.

NÁVOD NA MONTÁŽ, Obr. 2

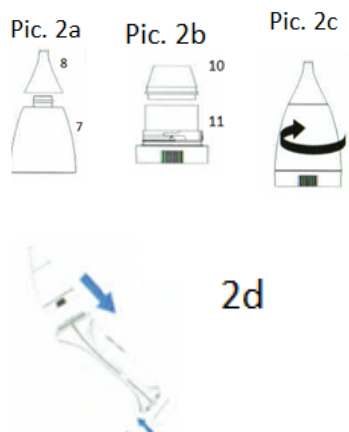

1. Spojte nástavec (8) se sběrnou nádobou (7). Obr. 2a.
2. Umístěte kryt (10) na hlavu (11). Obr. 2b.
3. Utáhněte ve směru hodinových ručiček Obr. 2c.
4. Vložte sací hlavu (2c) do konektoru odsávačky.
5. Spojte hlavu se základnou Obr. 2d.

Vyberte si vhodný nástavec.

1. Úzký nástavec (8) se doporučuje používat, když je hlen uvolněný a v tekuté formě.
2. Široký nástavec (9) se doporučuje používat, když je hlen v hustší a pevnější formě.

Vložte sestavenou sací hlavu do konektoru a otočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte v základně. Ujistěte se, že je hlava správně připojena.

ČIŠTĚNÍ

Ruční čištění

Demontujte všechny díly. Očistěte všechny části hlavy v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem a po každém použití důkladně opláchněte. Pro lepší efekt použijte čisticí kartáček. Silikonové prvky (obr. 1, díly 8 a 9) lze spařit v horké vodě.


Varování! Po každém použití se ujistěte, že jste kvůli čištění rozebrali všechny části hlavy. Zařízení není vodotěsné. Základnu nikdy neponořujte do kapaliny. Očistěte hadříkem.

Automatické čištění

Sestavte nosní odsávačku podle pokynů k montáži. Odstraňte plastový kryt (6). Poté připojte silikonovou vypouštěcí hadičku (15). Připravte si do nádoby čistou vodu. Umístěte konec hadičky do dřezu. Stisknutím tlačítka ON/OFF (2) zahájíte proces čištění (obr. 3). Pro zajištění hygieny čistěte po každém použití. Nečistěte zařízení, když je zapojeno do sítě!

JAK POUŽÍVAT

Používejte nosní odsávačku v pohodlné poloze. Viz obr. 4.

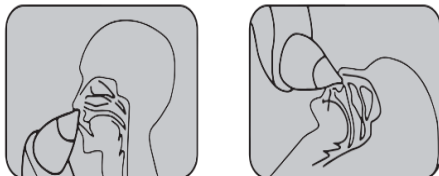

UPOZORNĚNÍ:

Vyberte si jednu ze tří různých intenzit sání stisknutím tlačítka režimu. Zkontrolujte sílu sání na indikátoru režimu: nízká – 1 kontrolka, střední – 2 kontrolky, vysoká – 3 kontrolky. Upravte sílu sání podle svých potřeb.

VAROVÁNÍ!!! Položte své dítě na záda nebo se pokuste držet jeho hlavičku během používání. Nevkládejte špičku do nosních dírek příliš hluboko. Nikdy nepoužívejte na uši, ústa nebo oči. Jak účinněji odstranit hlen? Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí zařízení. Vložte sací nástavec do nosní dírk. Jemně pohybujte špičkou v malých kruzích, abyste odstranili hlen účinněji. Ke změkčení zasklého nosního hlenu doporučujeme použít fyziologický roztok. Stříkejte fyziologický roztok do nosních dírek dítěte. Počkejte 3-4 minuty. Poté odsajte hlen pomocí odsávačky. Nízký tlak se tvoří, pokud se vzduch nemůže dostat do nosní dírk, takže je snazší odsát nosní hlen, pokud je sací nástavec blízko nosní dutiny.

Během používání vždy sledujte sběrnou nádobku a hlavičku. Pokud je hlenu příliš mnoho, může se dostat do sacího otvoru, což může způsobit poruchu zařízení. Pokud si všimnete, že je ve sběrném kelímku nebo nástavci hodně hlenu, ihned přístroj vypněte a vyčistěte. Pomocí vatového tamponu osušte sací port a odstraňte hlen. Pokud odsávací otvor nasál hodně hlenu, vytřeste ho nebo vyfoukejte fénem.

Před čištěním sejměte hlavovou část.

UPOZORNĚNÍ:

Nosní odsávačka vytváří podtlak k odstranění nosního sekretu. Často ucpaný nos a rýma způsobené infekcemi nebo alergiemi mohou vyvolat rýmu. V případě onemocnění nebo nachlazení se prosím poraďte s lékařem.

Držte mimo dosah dětí.

Likvidujte dle předpisů o odpadech elektrických a elektronických zařízení.