


GIO perfect Neck Brace

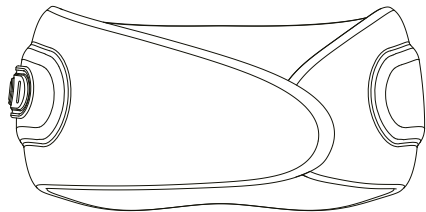

MANUAL DE INSTRUCCIONES


Para evitar daños causados por un uso incorrecto, lea atentamente las instrucciones y utilice este producto siguiendo estrictamente las indicaciones del manual.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Funda exterior

Núcleo del
collarínPanel de
control

Cable de carga

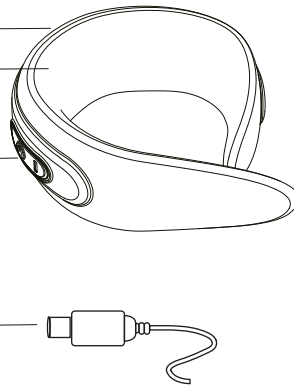

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Unidad principal
- Cable de carga USB-C
- Manual de usuario

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos para encenderlo (la luz verde indica que está encendido).
2. Pulse brevemente para alternar entre los 3 modos (verde, azul, rojo).
3. Haga doble clic para activar/desactivar la función de calentamiento (55 °C; desactivada por defecto).
4. Las funciones de calentamiento y vibración pueden funcionar simultáneamente.
5. El dispositivo se apaga automáticamente después de 15 minutos. Reinicie manualmente si es necesario.
6. Mantenga pulsado durante 1,5 segundos para apagarlo durante el uso.
7. Recargue cuando la batería esté baja.
8. Utilice únicamente el cable de carga original.
9. No utilice el dispositivo mientras se está cargando.
10. Una carga completa tarda entre 3 y 4 horas (la luz verde indica que se ha completado). Desenchúfelo antes de utilizarlo.
11. Los accesorios están diseñados exclusivamente para este dispositivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no se inicia	Batería baja	Cargar y reiniciar
Se detiene durante el uso	El temporizador ha terminado o la batería está baja	Recargue y reinicie

AVISO DE SEGURIDAD

- Este producto incluye una función de calentamiento; utilícelo con precaución, especialmente si es sensible al calor.
- Cargue la batería al menos una vez cada 1-2 meses para mantener un rendimiento óptimo.
- Utilice únicamente un cargador certificado de 5 V y 1 A. Un voltaje superior podría dañar el dispositivo.
- Asegúrese de que el voltaje de entrada coincida con las especificaciones del producto.
- No utilice accesorios no originales ni sustitutos.
- No cargue el dispositivo durante fluctuaciones de voltaje.
- No cargue ni utilice el producto en baños o entornos húmedos.
- Evite el contacto con el enchufe con las manos mojadas.
- Evite la exposición prolongada del dispositivo a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- Los niños o las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas deben utilizar el dispositivo bajo supervisión.
- No deseche la batería de litio incorporada con los residuos domésticos. Siga las normativas medioambientales locales para su correcta eliminación.



PRECAUCIONES DEL PRODUCTO

No lo utilice si:

- No se inicia.
- La batería se agota durante el modo de espera.
- La sesión finaliza debido al temporizador o al agotamiento de la batería.

Consulte a un médico antes de utilizarlo si:

- Está recibiendo tratamiento médico o no se encuentra bien.
- Padece una enfermedad aguda o crónica.
- Está bajo los efectos del alcohol.
- Es menor de edad.

Carga y eliminación de la batería:

- Cargue la batería al menos una vez cada 1-2 meses para mantener su rendimiento.
- Utilice un cargador certificado de 5 V y 1 A. Un voltaje más alto podría dañar el dispositivo.
- No deseche la batería con los residuos domésticos.

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: GIOperfect Neck Brace

Modelo: GIO-750

Dimensiones: 180-x -210-x -90 mm

Consumo de energía: 8 W

Voltaje de carga: 5 V

Corriente de carga: 0,5 A

Capacidad de la batería: 1200 mAh

Tiempo de carga: 3-4 horas

- Scan the QR code to download the manual
 Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
 Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
 Scannez le code QR pour télécharger le manuel
 Escanee el código QR para descargar el manual
 Digitalize o código QR para descarregar o manual
 Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
 Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
 Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
 Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
 Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
 Scanează codul QR pentru a descărca manualul
 Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
 Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
 Lae juhend alla, skannides QR-koodi
 A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
 لي ليدل ليزننل عيوسل عباستال زمر حسم



innOGIO

Fabricado en China para **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.

Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia

www.innogio.es



@innOGIO.official



@innogio_com