

GIO-356

innoGIO



GIOmum Line

Wearable Electric Breast Pump

USER MANUAL


Read this user manual before using your wearable breast pump
and keep this user manual for future reference.

InnoGIO GIOmumLine Handy- tiralatte elettrico indossabile GIO-356i e GIO-356

ISTRUZIONI


Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per necessità future.

Contenuto della confezione

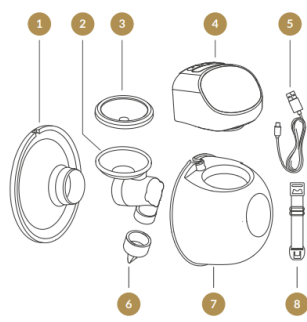

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Coppa | 5. Cavo di ricarica USB |
| 2. Linker | 6. Valvola |
| 3. Diaframma in silicone | 7. Contenitore di latte |
| 4. Motore del dispositivo | 8. Fibbia di regolazione del reggiseno |

Descrizione del display a led e della funzione dei pulsanti

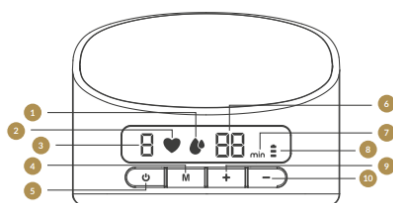

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Modalità estrazione | 6. Tempo di lavoro |
| 2. Modalità stimolazione | 7. Indicazione tempo |
| 3. Livello intensità di lavorazione | 8. Livello batteria |
| 4. Selezione della modalità | 9. Tasto aumento intensità |
| 5. Accensione/Spengimento | 10. Tasto diminuzione |

Assemblaggio

Per assemblare il dispositivo, attenersi alla seguente procedura.

PRECAUZIONI

- ◆ Assicurarsi di pulire ogni parte come indicato in questo manuale utente.
- ◆ Assicurarsi di assemblare correttamente il dispositivo come indicato in questo manuale utente.
- ◆ Per evitare perdite, rimuovere i residui attorno al bordo del contenitore di latte prima del montaggio.
- ◆ Lavarsi accuratamente le mani prima di assemblare i componenti.

1. Posizionare il diaframma in silicone nel linker e premerlo con le mani per fissare saldamente i bordi e garantire una perfetta tenuta.



2. Installare la valvola nella parte inferiore del linker; assicurandosi che sia installata nella direzione corretta.
- 3.



4. Inserire il linker assemblato nel contenitore del latte, con la parte "orecchio" del linker allineata con la fessura interna del raccoglitore di latte, e premere la parte del disco del linker con entrambe le mani per fissare saldamente i bordi e garantire la completa tenuta.



5. Installare il coperchio sul contenitore di latte, allineare la fessura posta sul coperchio con la stessa fessura posta sul contenitore di latte e premere i bordi con entrambe le mani per assicurarsi che si adattano alla posizione.



6. Premere il dispositivo sul contenitore di latte e assicurarsi che si adatti perfettamente.



AVVERTENZE


Il tiralatte non funziona durante la ricarica con caricabatterie.

Per iniziare la lavorazione


1. Premi saldamente la coppa contro il seno, non lasciare spazi vuoti e assicurati che il capezzolo sia centrato. Mantenere il dispositivo in posizione verticale. Fare attenzione a non distorcere la posizione del prodotto e del torace, altrimenti il tiralatte potrebbe non aspirare correttamente.



2. Premere brevemente il pulsante di accensione per avviare il tiralatte.

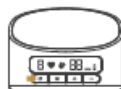


3. Premere brevemente il pulsante "M" per passare alla modalità di stimolazione. Questa modalità ha 9 livelli. Puoi scegliere il livello di intensità di stimolazione con cui ti senti a tuo agio premendo brevemente il pulsante "+" per aumentarla e il pulsante "-" per ridurla. Nel primo periodo post partum, indurre la produzione di latte a volte non è semplice e questa modalità può essere utilizzata per stimolare il seno e promuovere selettivamente la secrezione di latte.

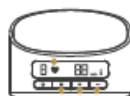

4. Premere brevemente il pulsante "M" per passare alla modalità estrazione. Questa modalità ha 9 livelli. Puoi scegliere il livello di intensità di estrazione con cui ti senti a tuo agio premendo brevemente il pulsante "+" per aumentarla e il pulsante "-" per ridurla.



5. Premere brevemente il pulsante di accensione "M" per passare alla modalità automatica. In questa modalità, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità di stimolazione al livello 1, aumentando autonomamente l'intensità ogni 15 secondi, fino a posizionarsi stabilmente livello massimo (9). Questo processo richiede 2 minuti. Successivamente passerà sempre in automatico alla modalità estrazione livello 1, aumentando l'intensità ogni 15 secondi, fino a posizionarsi stabilmente livello massimo (9). La funzione automatica verrà interrotta entrando in funzione manuale se si preme un pulsante durante il funzionamento. In caso di spegnimento del dispositivo, dopo il passaggio al funzionamento manuale, verrà memorizzata la modalità corrente.

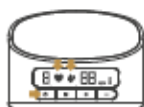

6. Dopo aver terminato la lavorazione, premere brevemente "⏻" per spegnere il dispositivo.



Suggerimenti:

1. Questo dispositivo ha una funzione di memoria integrata; alla nuova accensione, riprenderà automaticamente la lavorazione dalla modalità di lavoro e dal livello selezionati l'ultima volta. Quando si spegne il dispositivo durante la modalità automatica, alla nuova accensione, si riavvierà dal primo livello della modalità di stimolazione per impostazione predefinita.
2. Il tiralatte si arresta automaticamente dopo 20 minuti di lavorazione.

Posizione seduta per l'allattamento al seno

Rilassati e siediti su una sedia comoda, inclinati leggermente in avanti (usa un cuscino per il supporto della schiena). Assicurati di tenere il tiralatte e la coppa del seno in posizione verticale.



Postura seduta

Pulizia

Pulizia e manutenzione

	Primo utilizzo	Dopo ogni utilizzo
Corpo motore	Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di accensione.	Pulire con un panno umido pulito con alcool etilico al 70% o alcool isopropilico secondo necessità. Non immergere il motore in acqua.
Coppa, membrana in silicone, linker, valvola e raccoglitore di latte	Bollire in acqua per 5 minuti. Non introdurre in microonde.	Pulire con sapone delicato per lavastoviglie o acqua pura.

AVVERTENZE

- ♦ Fare attenzione a quando si rimuove e si pulisce la valvola; se la valvola è danneggiata, il dispositivo non funzionerà correttamente.
- ♦ Per pulire la valvola, strofinare delicatamente in acqua tiepida con alcune gocce di un liquido detergente. Non inserire oggetti nella valvola che potrebbero danneggiarla.

Pulire a mano

- ♦ Posizionare le parti della coppa in un lavabo pulito ed igienizzato. Non posizionare le parti della coppa direttamente nel lavandino.
- ♦ Aggiungere sapone e acqua calda.
- ♦ Pulire le parti utilizzando una spazzola pulita normalmente utilizzata solo per articoli per l'alimentazione dei neonati.
- ♦ Risciacquare tenendo le parti sotto l'acqua corrente o immergendole in acqua dolce in un contenitore separato.
- ♦ Asciugare accuratamente all'aria. Posizionare le parti della coppa su un canovaccio pulito o un tovagliolo di carta in un'area protetta da sporco e polvere. Non utilizzare un canovaccio per strofinare o tamponare gli oggetti asciutti.

Istruzioni per la fibbia di regolazione del reggiseno

Regola la lunghezza delle cinghie del reggiseno per rendere l'aspirazione più confortevole. Un'estremità della fibbia di regolazione del reggiseno dovrebbe essere appesa alla fibbia interna del reggiseno. Regolare la lunghezza della fibbia del reggiseno sull'altra estremità della fibbia di regolazione.

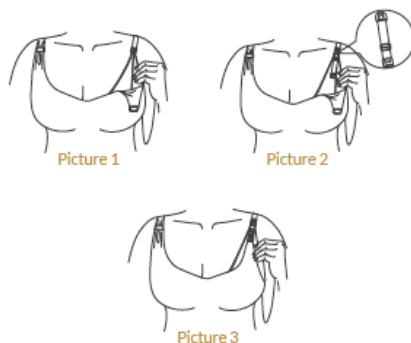


Illustrazione dell'indicatore di stato della batteria

Indicatore di stato della batteria visualizzato	Tempo di autonomia
La spia di livello tre è accesa	100 minuti
La spia di livello due è accesa	65 minuti
La spia di livello uno è accesa	25 minuti
La spia di livello uno lampeggia	5 minuti

Terminare il ciclo di lavorazione

Terminata l'estrazione, rimuovere il tiralatte dal seno. Tenere il tiralatte in posizione verticale e rimuovere il motore tenendo il raccoglitore di latte per versare il latte materno nel biberon. Assicurarsi che la fessura del raccoglitore sia allineato con la bocca del biberon per evitare la fuoriuscita del latte materno.

1. Terminata l'estrazione, premi a lungo il pulsante di accensione per spegnere il motore ed interrompere l'adesione creatasi tra il seno e la coppa, quindi rimuovere con attenzione e delicatezza la coppa dal seno.



2. Separare il contenitore di latte dal motore; il latte raccolto è pronto per l'alimentazione/conservazione. Pulire le altre parti utilizzate come sopra indicato.



3. Versare il latte nella bottiglia di conservazione; assicurarsi che la fessura sia allineata con la bottiglia.



Conservare il latte materno

Conservazione del latte materno

1. Conservare solo il latte materno raccolto utilizzando tiralatte sterilizzati.
2. Il latte estratto può essere posto in un sacchetto di conservazione del latte pulito e sterilizzato o in una bottiglia di latte ermeticamente chiusa e immediatamente posto in frigorifero per refrigerare o congelare.

Congelamento del latte materno

1. Il latte materno non deve essere congelato più di una volta,
2. Non mescolare latte materno fresco con latte materno congelato.
3. Assicurati di scartare il latte materno avanzato.
4. Il latte estratto può essere refrigerato in frigorifero per 48 ore (all'interno del frigorifero) o congelato nel congelatore per tre mesi. Sulla bottiglia o il sacchetto per la conservazione del latte apporre un'etichetta che indichi chiaramente la data e l'ora di raccolta.

Scongelamento del latte materno

Mettere il latte materno congelato in frigorifero per una notte per farlo scongelare. Se hai bisogno di scongelare velocemente il latte, puoi immergere a bagno maria il biberon o la sacca che lo contiene. Dopo lo scongelamento, il latte materno deve essere consumato entro 24 ore.

Riscaldamento del latte materno

1. Immergere verticalmente il biberon a bagno maria o riscaldare il latte materno in modo sicuro e veloce con un biberon e uno scaldavivande.
2. Attenzione! Prima di nutrire il bambino, assicurarsi sempre di controllare la temperatura del latte materno.

3. Non utilizzare un forno a microonde per riscaldare il latte materno, perché questo potrebbe distruggere preziosi nutrienti e anticorpi.
4. Il riscaldamento irregolare può causare un surriscaldamento parziale del liquido, che a sua volta può causare ustioni.
5. Non immergere la bottiglia di conservazione del latte in acqua bollente per riscaldare - la bottiglia potrebbe rompersi o danneggiarsi.

innoglo

Importer: INNOGIO sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

www.innoglo.com



@innoglo.official



@innoglo_com

CE RoHS  