
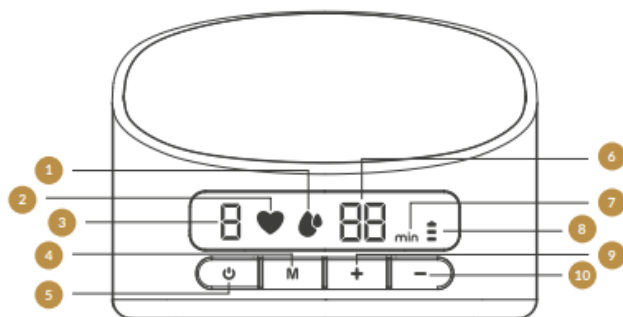


Dříve, než začnete výrobek používat, pozorně si přečtěte tento návod.

Návod si uchovejte pro budoucí potřebu

POPIS VÝROBKU

- 1 - prsní košík 24mm
- 2 – hlavice
- 3 – silikonová membrána
- 4 – základna odsávačky
- 5 – nabíjecí USB-C kabel
- 6 – ventil
- 7 – sběrač mléka
- 8 – pásek pro nastavení podprsenky

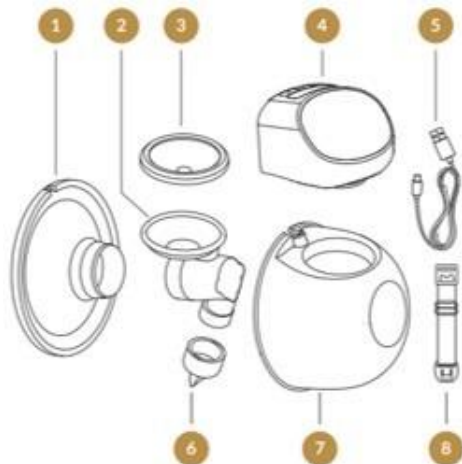

- 1 – fáze odsávání
- 2 – fáze stimulace
- 3 – zobrazení úrovně
- 4 – tlačítko volby režimu
- 5 – tlačítko ON/OFF
- 6 – zobrazení doby
- 7 – minuta
- 8 – ukazatel úrovně nabití
- 9 – tlačítko pro zvýšení
- 10 – tlačítko pro snížení

SESTAVENÍ ODSÁVAČKY

Při sestavování odsávačky postupujte podle následujících pokynů.



! UPOZORNĚNÍ

- Vždy se ujistěte, že jste správně vyčistili základnu odsávačky a všechny její části.
- Vždy se ujistěte, že máte odsávačku správně sestavenou.
- Aby nedocházelo k únikům mléka, odstraňujte pravidelně veškeré usazeniny.
- Před sestavováním vyčištěných částí odsávačky si vždy řádně umyjte ruce.




1. Umístěte silikonovou membránu do hlavice odsávačky a přitlačte ji, aby okraje pevně přilnuly a zajistily dokonalé utěsnění.

2. Do spodní části hlavice nainstalujte ventil. Ujistěte se, že je nasazen ve správném směru.

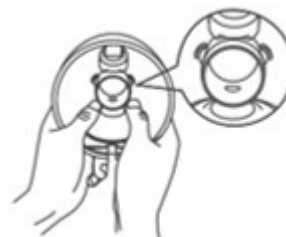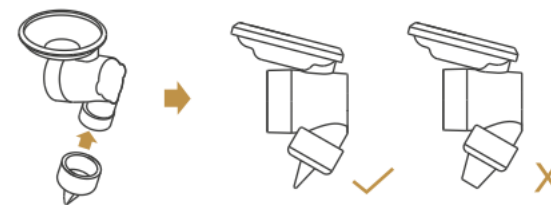

3. Vložte sestavenou hlavici do sběrače mléka – membránou směrem ke kulaté části – oběma rukama přitlačte, aby byly okraje pevně spojeny a aby bylo zajištěno úplné utěsnění.

4. Na sběrač mléka nasadte prsní košík. Drážku na košíku zarovnejte s drážkou na základně odsávačky. Oběma rukama košík přitlačte, aby byl řádně nasazen.

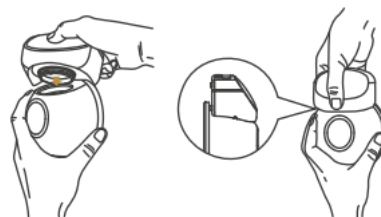


5. Přitlačte základnu na sběrač mléka a ujistěte se, že dokonale zapadá.




UPOZORNĚNÍ

Odsávačka mateřského mléka nefunguje, když se zařízení nabíjí pomocí nabíječky.


JAK ODSÁVAT

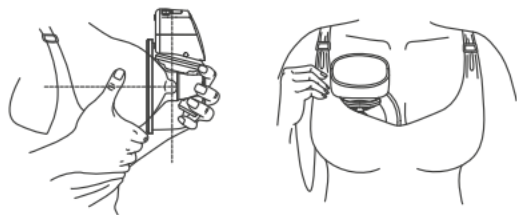


1. Přitiskněte prsní košík těsně k prsu a ujistěte se, že je bradavka uprostřed. Držte košík vzpřímeně. Dávejte pozor, abyste nezměnili polohu odsávačky nebo prsu – odsávačka by nemusela správně fungovat.

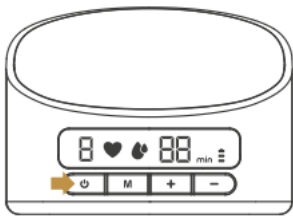


2. Krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF odsávačku zapnete.

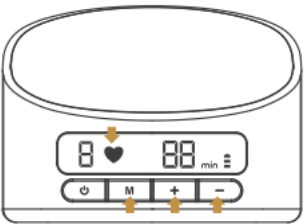

3. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepnete do fáze stimulace. Tento režim má 9 úrovní. Pomocí tlačítek +/- si upravíte intenzitu stimulace dle potřeby. V prvním období po porodu není někdy snadné vyvolat tvorbu mléka a tento režim lze použít ke stimulaci prsu a podpořit tak tvorbu mléka.

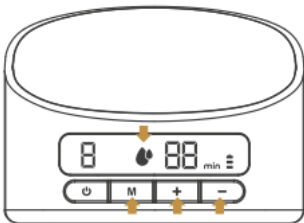

4. Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepnete do fáze režimu odsávání. Tento režim má 9 úrovní. Pomocí tlačítek +/- si upravíte intenzitu sání dle potřeby.

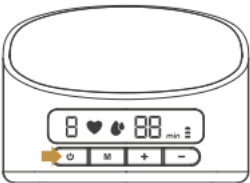


6. Krátkým stisknutím tlačítka “⏻” se odsávačka vypne.

TIPY

- 1. Tento model má paměťovou funkci; po opětovném zapnutí se odsávačka automaticky přepne do režimu a úrovně, kterou jste naposledy použili.
- 2. Odsávačka se po 20 minutách automaticky vypne.

POLOHA PŘI KOJENÍ

Uvolněte s a posaďte se na pohodlnou židli a mírně se předkloňte (použijte polštářek pro podporu zad). Dbejte na to, aby odsávačka a sběrač mléka byly ve svislé poloze.

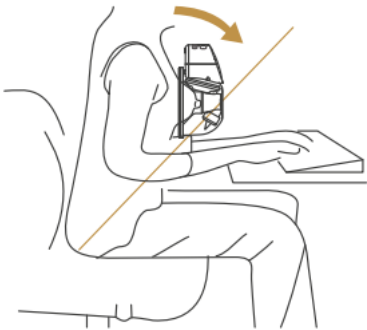

ÚDRŽA A ČIŠTĚNÍ

	První použití	Po každém použití
Základna odsávačky	Vypněte odsávačku stisknutím tlačítka ON/OFF.	Podle potřeby očistěte čistým, vlhkým hadříkem s 70% etylalkoholem. Odsávačku nikdy nevkládějte do vody, ani pod tekoucí vodu.
Prsní košík, membrána, hlavice, ventil, sběrač mléka	Vyvařte ve vodě po dobu 5 minut. Části neohřívejte v mikrovlnné troubě.	Čistěte jemným hadříkem spolu s jemným čistícím prostředkem.