


innoGIO

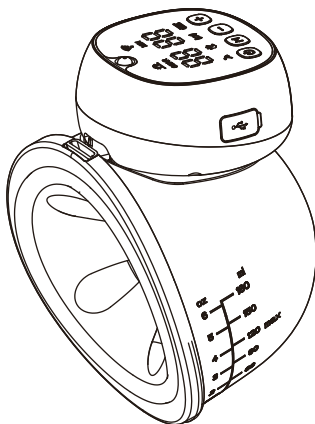

GLÖmum Line Comfort

Tragbare elektrische Milchpumpe

BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Muttersein! Wenn dies Ihre erste Erfahrung mit einer Milchpumpe ist, benötigen Sie möglicherweise etwas Zeit, um sich an deren Funktionsweise zu gewöhnen. Es ist wichtig, dass Sie während des Vorgangs entspannt bleiben, auch wenn Sie anfangs nicht so viel Milch abpumpen können, wie Sie möchten. Ihr Körper wird sich entsprechend anpassen, und nach mehreren Versuchen werden Sie mehr Milch abpumpen können.

BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

Beschränken Sie die Anwendung auf maximal 15 Minuten pro Sitzung. Es ist völlig normal, wenn anfangs innerhalb dieser Zeit nicht viel Milch abgepumpt wird. Wenn Sie die Pumpe regelmäßig verwenden, wird sich Ihr Körper schließlich anpassen und mehr Milch produzieren.

Forschungen haben gezeigt, dass Sie für eine optimale Milchproduktion völlig entspannt sein sollten. Entspannung hilft Ihnen, Oxytocin freizusetzen, ein Hormon, das Ihren Milchspendereflex für den Milchausstoß stimuliert. Lehnen Sie sich also auf Ihrer Lieblingscouch zurück, hören Sie Ihre Lieblingsmusik, versuchen Sie Atemübungen oder lassen Sie sich von Ihrem Partner massieren!

Das Gerät verfügt über eine Massagefunktion, die Sie vor dem Abpumpen (1-3 Min.) verwenden können. Dies hilft Ihrem Körper, Oxytocin freizusetzen und die Milchproduktion zu steigern.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Reinigen Sie alle Pumpenteile, die mit Ihrer Muttermilch in Kontakt gekommen sind, und waschen Sie Ihre Hände vor und nach jedem Gebrauch.

Wählen Sie die richtige optimale Saugstufe. Erhöhen Sie die Saugkraft der Milchpumpe allmählich, bis sie leicht unangenehm wird, und reduzieren Sie sie dann um eine Stufe. Die Pumpe startet beim Neustart mit der zuletzt verwendeten Saugstufe.


Da es sich um eine tragbare Milchpumpe handelt, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Still-BH verwenden.

PRODUKTBESCHREIBUNG


Typ-C-Kabel - 2 Stk.



BH-Verstellschnalle - 2 Stk.

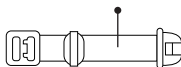


Pumpenmotor - 2 Stk.

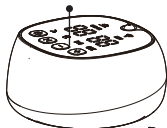


Silikon-Massagekissen 24 mm - 2 Stk.

Silikon-Membran - 2 Stk.

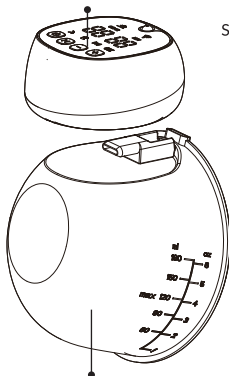

Milchauffangbehälter - 2 Stk.

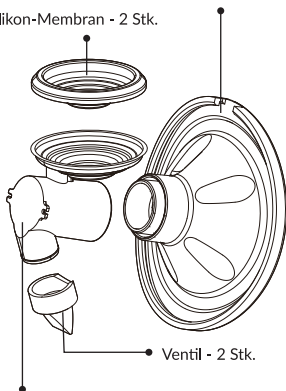

Ventil - 2 Stk.


Verbindungsstück - 2 Stk.

Zubehör beinhaltet:

Fernbedienung - 1 Stk.

Aufbewahrungstasche - 2 Stk.

BEDIENFELD

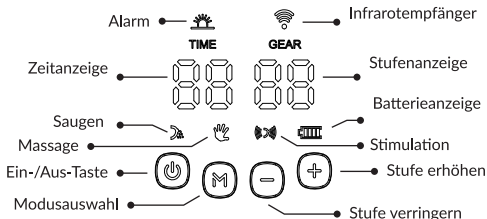

3 Modi Verwenden Sie die Massagefunktion vor dem Tiefenpumpen.

Massagefunktion: 12 Stufen (Zuerst massieren, um die Milchproduktion anzuregen.)

Saugfunktion: 12 Stufen (Wählen Sie die optimale Stufe; der Saugmodus ist sowohl für langsames als auch für tiefes Saugen ausgelegt.)

Stimulation: 6 Stufen (Massage und Saugen gleichzeitig angewendet ist hervorragend bei Hohlwarzen oder

für Erstgebärende; der Milchfluss wird durch einen 3+1 Modus angeregt: 3 kurze Frequenzmassagen und 1 tiefes Saugen.)

Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Moduswechsel: Drücken Sie die Modustaste M.

Stufenwechsel: Drücken Sie "+" und "-", um die Stufe zu erhöhen oder zu verringern.

Bateria i wskaźnik poziomu baterii

Batterie- und Ladeanzeige

Blinkend Weiß: Schwache Batterie (Aufladen erforderlich)

Dauerhaft Weiß: Batterie ist vollständig geladen (blinkt weiß während des Ladevorgangs)

Milchwarnung: Der Alarm blinkt alle 10 Minuten rot. Wenn es Zeit ist, den Milchauffangbehälter zu entnehmen, schaltet sich die Pumpe alle 30 Minuten automatisch aus.

REINIGUNGSANWEISUNGEN


Vor dem Gebrauch

- Entfernen Sie den Pumpenmotor.
- Legen Sie **alle** Silikonteile für 3 bis 5 Minuten in kochendes Wasser.
- Waschen Sie den Milchauffangbehälter und das Verbindungsstück mit warmem Seifenwasser und spülen Sie sie gut ab.
- Wischen Sie die Teile mit einem Tuch trocken oder lassen Sie sie vor dem Gebrauch an der Luft trocknen.

Nach dem Gebrauch


- Spülen Sie den Milchauffangbehälter, das Ventil und das Verbindungsstück sofort nach Gebrauch ab.
- Legen Sie **alle** Silikonteile für 3 bis 5 Minuten in kochendes Wasser.
- Wischen Sie die Teile mit einem Tuch trocken oder lassen Sie sie vor der Lagerung an der Luft trocknen.
- Tauchen Sie den elektrischen Teil des Geräts nicht in Wasser ein.

ZUSAMMENBAUEN DES GERÄTS

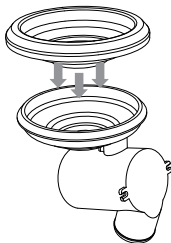



SCHRITT 1

Setzen Sie die Silikon-Membran in das Verbindungsstück ein und drücken Sie sie mit den Händen fest, um sicherzustellen, dass die Ränder fest sitzen und eine perfekte Abdichtung gewährleisten.

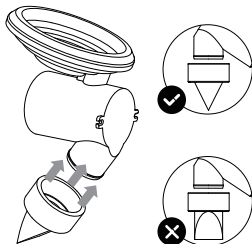

SCHRITT 2

Installieren Sie das Ventil an der Unterseite des Verbindungsstücks. Stellen Sie sicher, dass es in der richtigen Richtung installiert ist.

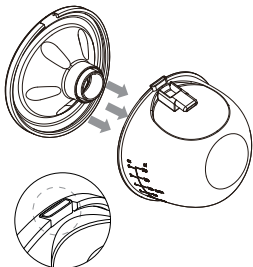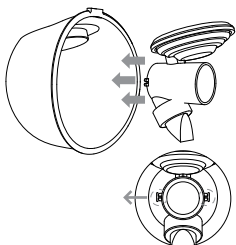


SCHRITT 3

Schieben Sie das zusammengebaute Verbindungsstück in den Milchauffangbehälter. (Bild: Richten Sie die Schnalle aus und installieren Sie sie fest.)

SCHRITT 4

Legen Sie das Silikon-Massagekissen in den Milchauffangbehälter und stellen Sie sicher, dass es richtig abdichtet, um Undichtigkeiten zu vermeiden.

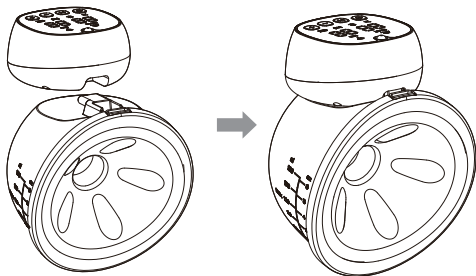


SCHRITT 5

Installieren Sie den Hauptpumpenmotor.


ANWENDUNGSHINWEISE

Platzieren der Pumpe im BH

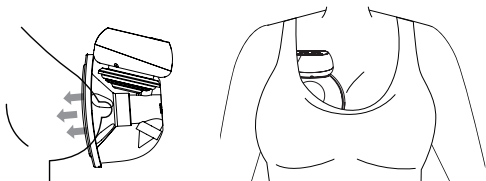

Drücken Sie das Silikon-Massagekissen fest gegen die Brust, lassen Sie keine Lücken und stellen Sie sicher, dass Ihre Brustwarzen zentriert sind. Halten Sie das Gerät aufrecht. Achten Sie darauf, die Position des Produkts und Ihrer Brust nicht zu verändern, da die Milchpumpe sonst nicht die notwendige Saugkraft hat.

Ausschalten und Entfernen der Pumpe

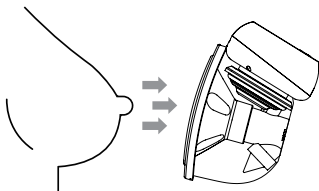

Schalten Sie die Pumpe aus und entfernen Sie sie vorsichtig.

Hinweis: Legen Sie sich nicht hin, während Sie die Milchpumpe verwenden. Wenn Sie während des Abpumpens Unbehagen verspüren oder Blasen/Wundscheuern an Ihrer Brustwarze oder Brust bemerken, versuchen Sie, die


SITZPOSITION FÜR DAS SAUGEN

Entspannen Sie Ihren Körper, setzen Sie sich auf einen bequemen Stuhl und lehnen Sie sich leicht nach vorne (verwenden Sie ein Kissen zur Unterstützung Ihres Rückens). Achten Sie darauf, die Milchpumpe und den Milchauffangbehälter aufrecht zu halten.




MILCH UMFÜLLEN

THalten Sie die Milchpumpe aufrecht und entfernen Sie vorsichtig den Pumpenmotor vom Pumpenkörper. Achten Sie beim Umfüllen der Milch in die Flasche auf die Öffnung des Milchauffangbehälters (MILK COLLECTOR GAP).

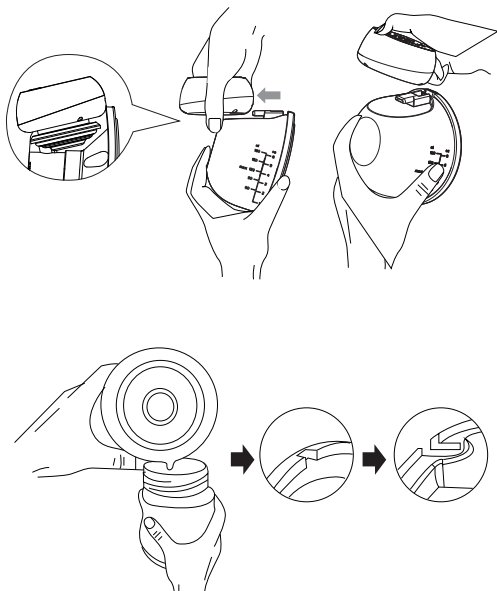

ANLEITUNG FÜR DIE BH- VERSTELLSCHNALLE

Passen Sie die Länge Ihrer BH-Träger an, um das Saugen angenehmer zu gestalten. Hängen Sie ein Ende der BH-Verstellschnalle in die innere Schnalle des Still-BHs ein. Die Länge des BHs kann angepasst werden, indem die Schnalle des Still-BHs am anderen Ende der BH-Verstellschnalle eingehängt wird.

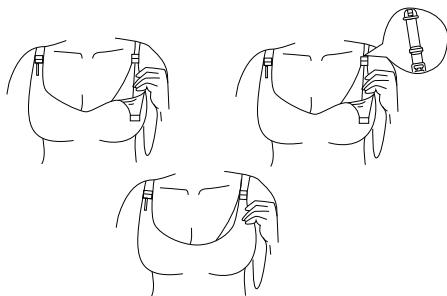

FEHLERBEHEBUNG


Schwache Saugkraft oder keine Saugkraft	1. Überprüfen Sie, ob das Ventil richtig installiert ist.
 2. Laden Sie das Gerät vor Gebrauch auf.
 3. Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig platziert ist, da die Milchpumpe sonst keine Saugkraft hat.
Schmerzen der Brustwarze	1. Massieren Sie zuerst und wählen Sie eine angenehme Saugstufe.
 2. Konsultieren Sie eine Stillberaterin.
Keine / wenig Milch abgepumpt	1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einer bequemen Position befinden.
 2. Wenn Sie 5-10 Minuten gepumpt haben, machen Sie eine Pause und versuchen Sie es zu einem anderen Zeitpunkt erneut.
 3. Stellen Sie während des Gebrauchs eine optimale Saugstufe sicher.
 4. Entspannen Sie sich und versuchen Sie es erneut.

Handbuch zur Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass die Milchpumpe richtig im Still-BH positioniert ist und eng an Ihren Brüsten anliegt. Platzieren Sie den Empfänger über Ihrer Brust und drücken Sie die EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung, um die Milchpumpe einzuschalten; Schalten Sie den Modus entsprechend dem Symbol auf der Fernbedienung frei um, um den Arbeitspegel zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie nach dem Gebrauch die ON/OFF-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.

Kommentare:

Die Fernbedienung ist ein zusätzliches Steuerungstool. Bei Beschädigung oder Verlust können die Geräte weiterhin über die Tasten an der Milchpumpe bedient werden.

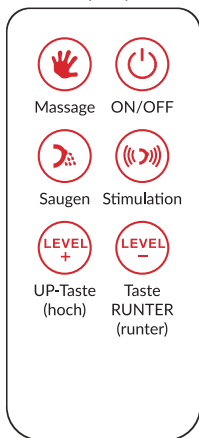

Vielen Dank, dass Sie sich für InnoGIO-Produkte entschieden haben!

Um das Produkt ordnungsgemäß zu verwenden,
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch
und bewahren Sie es für den Fall auf
wenn Sie in Zukunft Fragen haben.

Die im Handbuch enthaltenen Zeichnungen sind charakteristisch
Nur zur Veranschaulichung.
Falls es Unstimmigkeiten gibt
zwischen Zeichnung und Produkt,
Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

innoGIO

Importer: **INNOGIO** sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H
03-289 Warszawa, Polska
www.innogio.pl

 @innoGIO.official  @innogio_com

