

GIO-350PRO

innoGIO



GIO momPRO

Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka


Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili tuto odsávačku mateřského mléka. Vaše nová odsávačka mateřského mléka je kompaktní a diskrétní, můžete si ji vzít s sebou kamkoli, abyste si mohli dle vlastního uvážení odsát mléko a udržet si jeho zásobu. Tento návod obsahuje různá opatření a základní postupy pro používání této dvojitě elektrické odsávačky mateřského mléka. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

DISPLAY


úroveň sání displej levé odsávačky

masážní režim
bionický režim
režim odsávání

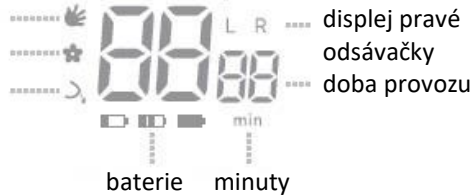

displej pravé
odsávačky
doba provozu


baterie minuty

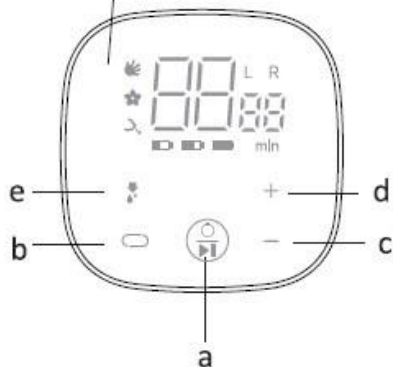

- a. pauza / tlačítko ON/OFF
- b. tlačítko jednostranného/dvojitého režimu
- c. tlačítko snížení
- d. tlačítko zvýšení
- e. tlačítko pro volbu režimu

POPIS ČÁSTÍ

- 1. masážní prsní polštářek
- 2. prsní košík
- 3. hlavice odsávačky
- 4. membrána
- 5. krytka hlavice
- 6. vzduchová hadička
- 7. ventil
- 8. láhev
- 9. savička
- 10. USB kabel
- 11. hlavní jednotka

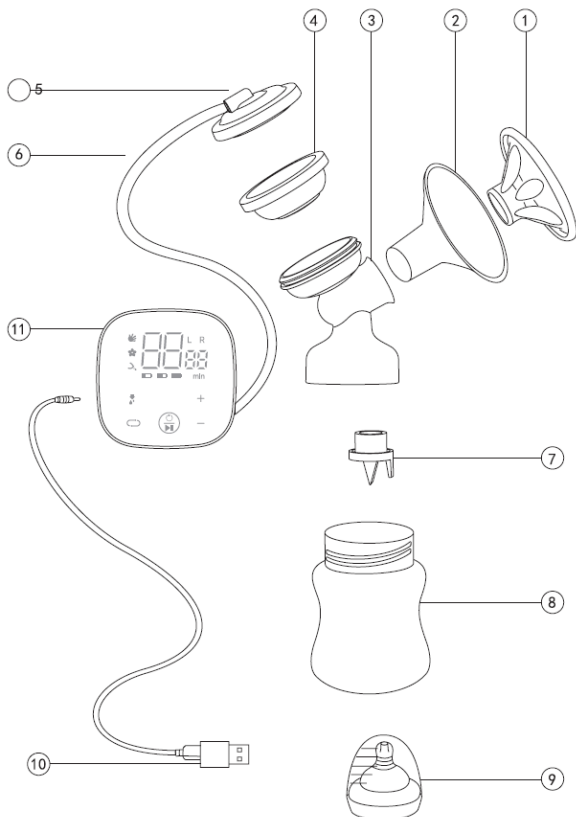


SESTAVENÍ ODSÁVAČKY

Všechny části kromě hlavního jednotky vyžadují čištění po každém použití a dezinfekci před každým použitím, jak je uvedeno v části Čištění a údržba.

Důležité: Ujistěte se, že jste vyčistili a vydezinfikovali všechny části odsávačky (kromě hlavní jednotky). Než se dotknete čistěných částí, důkladně si umyjte ruce. Buďte opatrní! Vyčištěné části mohou být stále velmi horké.

Pozorně si přečtěte následující schéma:

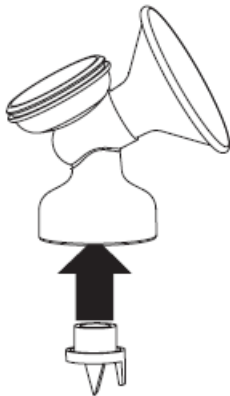


1. Zasuňte ventil do spodní části hlavice odsávačky a dostatečně na něj zatlačte.




2. Nasadíte hlavici na láhev a důkladně ji zašroubujete.



3. Umístíte silikonovou membránu shora do hlavice odsávačky. Ujistěte se, že je membrána správně a rovnoměrně nasazena.

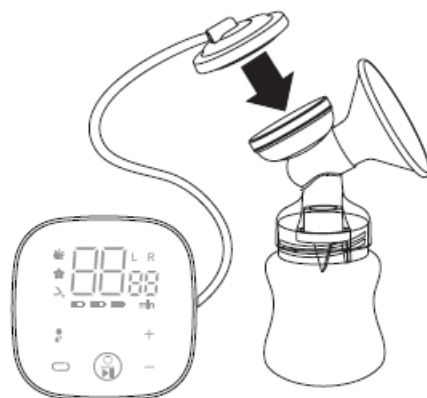


4. Nasadíte krytku hlavice a utěsníte. Zasuňte vzduchovou hadičku do krytky a hlavní jednotky.

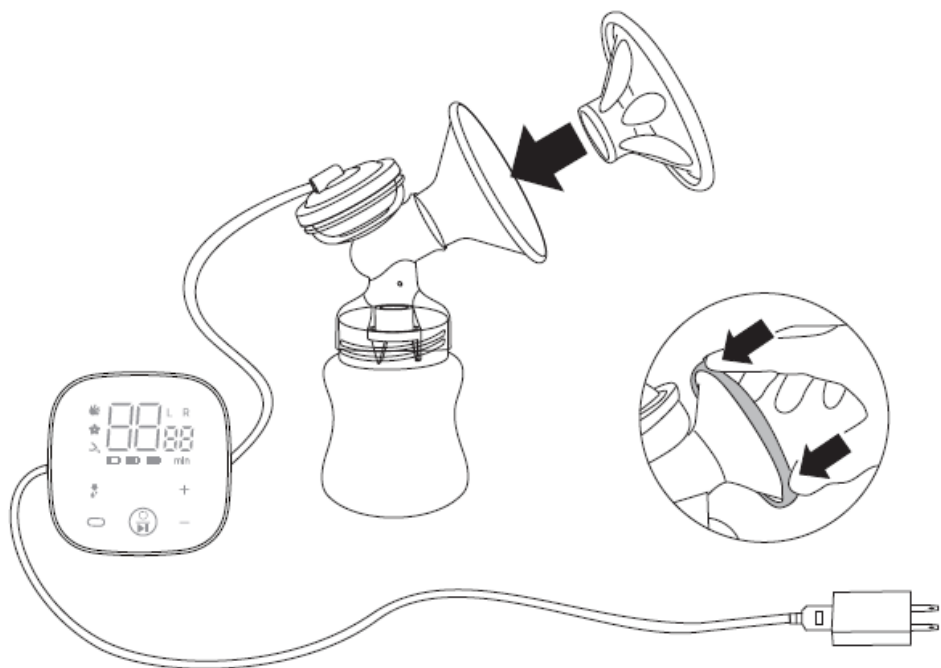

5. Vložte masážní prsní polštářek do prsního košíku. Ujistěte se, že je polštářek nasazený zcela přes okraj košíku, abyste zajistili těsné přilnutí. Zatláče mezi okvětní lístky, abyste odstranili veškerý zachycený vzduch. Zasuňte USB kabel do hlavní jednotky, poté můžete odsávačku začít používat.





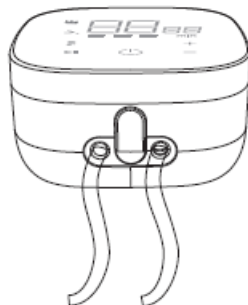

6. Pro jednostranné čerpání vložte 1 vzduchovou hadičku do spodní části hlavní jednotky (druhý vstup vzduchu lze ucpat).



7. Pro oboustranné čerpání vložte 2 vzduchové hadičky do spodní části hlavní jednotky.

STAV BATERIE



-  při plném nabití je doba provozu 2,5 hodiny 61-100%)
-  částečná úroveň nabití (31-60%)
-  nízká úroveň nabití (5-30%)
-  při nabíjení kontrolka bliká

Důležité: Nenabíjejte odsávačku déle než 24 hodin – mohlo by dojít k poškození přístroje.

MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Nedostatečné sání

Zkontrolujte, zda jsou díly odsávačky správně smontovány a zkontrolujte, zda není poškozený ventil. (Poznámka: S ventilem manipulujte velmi opatrně). Ujistěte se, že silikonová membrána a masážní polštářek jsou správně nainstalovány a jsou správně utěsněny.

Nelze odsávat mléko

Ujistěte se, že je odsávačka je správně sestavena. Uvolněte se a zkuste to znovu, mléko se po opakovaných pokusech odsaje. Věnujte pozornost tipům pro úspěšné odsávání.

Pocitíování bolesti při používání

Možnou příčinou je nadměrná úroveň sání. Nemusíte používat nejvyšší režim sání, který je k dispozici. Pro masážní stimulaci použijte masážní režim, poté přepněte na expresní, sací režim. V případě potřeby se poraďte s odborníkem na kojení.

Odsávačku nelze zapnout

Zkontrolujte, zda USB napájení odpovídá standardu 5V 1A. Pokud je baterie zcela vybitá, odsávačku před použitím nabijte.

Zpětný tok

V případě, že zjistíte přítomnost mléka nebo vody v membráně nebo vzduchové hadičce, zařízení vypněte, vyčistěte a osušte na vzduchu. Je-li silikonová membrána poškozená, vyměňte ji.

NÁVOD K POUŽITÍ

Kdy začít odsávat mateřské mléko

Doporučuje se počkat (nedoporučí-li zdravotník/laktační poradkyně jinak), dokud se vám neupraví přísun mléka a režim kojení (obvykle cca 2 až 4 týdny po porodu).

Výjimky:

Pokud odsáváte mléko pro dítě v nemocnici.

Pokud jsou vaše prsa nalitá (bolestivá nebo oteká): můžete před kojením nebo mezi kojením odsát malé množství mléka, abyste zmírnili bolest a pomohli dítěti snadněji se přisát.

V případě bolavých nebo popraskaných bradavek.

V případě odloučení od svého dítěte se doporučuje pravidelně odsávat mléko, abyste si zajistili přísun mléka pro další kojení.

Tipy pro úspěšné odsávání mléka

Vyberte si nejlepší denní dobu pro odsávání mléka, např. ráno, když máte mléka hodně. Pracující matky mohou odsávat mléko během pracovní doby. Používání odsávačky mateřského mléka vyžaduje cvik, možná ji budete muset zkusit použít několikrát, abyste uspěli. Naštěstí se tato odsávačka snadno sestavuje a používá, brzy se ji naučíte správně používat.

Před prvním použitím se seznámte s odsávačkou a jejím ovládním. Vyberte si čas, kdy nebudete ve spěchu a nebudete rušeni. Fotografie vašeho dítěte může pomoci podpořit spouštěcí reflex. Pomoci může i teplo: zkuste odsávat po koupeli nebo sprše nebo si na prso položte na pár minut teplý hadřík. Může být snazší odsávat mléko ve chvíli, když krmíte dítě z druhého prsu, nebo bezprostředně poté, co jste ho nakrmili.

Je-li pro vás odsávání velmi bolestivé, přerušete odsávání a poraďte se se svým laktačním poradcem nebo zdravotníkem.

POUŽITÍ

Stisknutím tlačítka ON/OFF po dobu 1,5 sekundy spustíte odsávačku (automaticky se spustí režim masáže), dalším stisknutím tlačítka ON/OFF odsávačku vypnete.

Stisknutím tlačítka „e“ nastavíte požadovaný režim (masážní/bionický/odsávání). Každý z těchto režimů má celkem 10 úrovní.

Stisknutím a podržením tlačítka „e“ pro přepínání režimu přejdete do smíšeného režimu (masáž + odsávání, masáž + bionický režim).

Pomocí tlačítek +/- nastavíte požadovanou úroveň režimu. Pokud číslo nepřetržitě bliká, znamená to, že bylo dosaženo maximální/minimální úrovně.

Stisknutím tlačítka „b“ přepnete mezi jednoduchým a dvojitým odsáváním.

Při odsávání na levé straně se na displeji zobrazí "L", při odsávání na pravé straně se na displeji zobrazí „P“. Při dvojitém odsávání se na displeji zobrazí „L R“.



Výchozí provozní doba odsávačky je 30 minut, poté se automaticky vypne (pamatuje si váš předchozí režim odsávání před vypnutím).



Mléko v láhvi nesmí dosáhnout na úroveň ventilu – mohlo by dojít k přetečení mléka.

1. Důkladně si umyjte ruce a ujistěte se, že máte čistá prsa. Pohodlně se posadte (příp. si polštářem podepřete záda). Ujistěte se, že máte poblíž sklenici vody.
2. Přitlačte prsní polštářek k prsu. Ujistěte se, že je vaše bradavka vycentrovaná, aby masážní polštářek vytvořil vzduchotěsné těsnění.
3. Stiskněte tlačítka ON/OFF, odsávačka se automaticky spustí v masážním režimu, pomocí tlačítek +/- můžete úroveň upravit.

Když začne mateřské mléko téct, můžete stisknout tlačítka pro převod režimu z odsávání na masáž a vybrat si nejpohodlnější režim.

Upozornění: Nemusíte vždy používat maximální úroveň odsávání, zvolte si vždy režim, který vám nejvíce vyhovuje.

- Po dokončení odsávání vypněte odsávačku a opatrně ji sejměte z prsu.
- Odšroubujte láhev z těla pumpy; láhev je připraven ke krmení/skladování. Ostatní části odsávačky mateřského mléka vyčistěte podle pokynů v části Čištění a údržba.
- Vypněte a odpojte hlavní jednotku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1.1 Před prvním použitím

Před použitím odsávačky vyčistěte a vydezinfikujte všechny součásti kromě hlavního motoru.



Upozornění:

K čištění používejte pouze pitnou vodu z vodovodu nebo balenou vodu.

Odsávačku rozeberte a ihned po použití umyjte všechny části, které přijdou do styku s prsem a mateřským mlékem, abyste zabránili vysychání zbytků mléka a zabránili růstu bakterií.

1.2 Po každém použití

Vyčistěte všechny části, které přicházejí do styku s vaším prsem a mateřským mlékem; nečistěte hlavní motor. Rozložte odsávačku na jednotlivé díly. Opláchněte všechny oddělené části, které přišly do kontaktu s vaším prsem a mateřským mlékem, studenou vodou, abyste odstranili zbytky mateřského mléka.

Je zapotřebí:

Jemný čisticí prostředek / čistý dřez nebo mísu / čistá utěrka nebo měkký kartáč / čistá voda.

Mytí v dřezu:

Všechny části namočte na 5 minut do teplé mýdlové vody.

Čistěte čistým hadříkem nebo měkkým kartáčkem.

Všechny části opláchněte čistou vodou a nechte je uschnout na čistém místě.

Pokud odsávačku nepoužíváte, skladujte jednotlivé díly v suchu.

Upozornění:

Po každém použití umyjte všechny části odsávačky mateřského mléka, 1x denně je dezinfikujte.

Dávejte pozor, abyste během čištění díly nepoškodili.

Pokud se jednotlivé díly čistí v myčce nádobí, může dojít k zabarvení dílů potravinářskými pigmenty. To nemá žádný vliv na funkci zařízení.

Sadu pumpy uchovávejte v čistém sáčku/nádobě až do dalšího použití.

1.3 Sterilizace

Důkladně si umyjte ruce

Oddělte všechny části, které přicházejí do styku s vaším prsem nebo mateřským mlékem.

Naplňte hrnc dostatečným množstvím vody, aby byly pokryty všechny části.

Přiveďte vodu k varu.

Vložte díly do vroucí vody na 10 minut.

Nechte vodu vychladnout a pomocí kleští jemně vyjměte díly z vody.

Umístěte díly na čistý povrch nebo ručník.

Pokud odsávačku nepoužíváte, skladujte jednotlivé díly v suchu. Nikdy neskladujte mokré nebo vlhké díly.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstup napájecího adaptéru: 100-240V – 50/60 Hz

Výstup napájecího adaptéru: 5 V  1000mA

Napětí: 5 V

lithiová baterie: 3.7 V 2600 mAh

Výkon: 5 W

životnost produktu: 1,5 roku

Automatické vypínání: po 30 minutách

hlučnost: <50 dB

Sací síla: 60 mmHg – 280 mmHg

úroveň IP: Ip22

Podmínky pro provoz: 10-30°C, RH 15%-93%, 700-1060 hPa

Podmínky pro skladování: -25-50°C, RH 15%-93%, 700-1060 hPa

Standard: GB4706.1-2005

RECYKLACE

Baterie obsahují látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu; místo toho je zlikvidujte na oficiálním sběrném místě pro baterie. Spotřebič nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických výrobků. Likvidací spotřebiče správným způsobem pomáháte zabránit poškození životního prostředí a lidského zdraví.

UPOZORNĚNÍ

Kontraindikace: žádné nejsou známy.



Upozornění:

Tento výrobek není určen pro používání více uživateli. Použití více než jednou osobou může představovat zdravotní riziko a zneplatnit záruku.

Pokud se vnější kryty napájecího adaptéru uvolní nebo se oddělí, přestaňte zařízení používat a okamžitě kontaktujte výrobce zařízení. Oddělení krytu může způsobit úraz elektrickým proudem.

Pokud je odsávání nepříjemné nebo způsobuje bolest, vypněte přístroj a opatrně oddělte masážní polštářek z prsu.

Odsávání může vyvolat předčasný porod. Odsávejte až po porodu. Pokud otěhotníte, poraďte se s laktčním odborníkem o vhodnosti odsávání.

Pokud jste infikováni hepatitidou B, hepatitidou C nebo virem HIV, odsávání nesníží ani neodstraní riziko přenosu viru na vaše dítě prostřednictvím mateřského mléka.

Mateřské mléko neohřívejte v mikrovlnné troubě. Mikrovlnná trouba může způsobit vážné popáleniny úst vašeho dítěte od horkých míst, která se vytvoří v mléce během ohřevu v mikrovlnné troubě. Mikrovlnná trouba může také změnit složení mateřského mléka.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ihned po použití vždy elektrické produkty odpojte, s výjimkou nabíjení.

Neumísťujte ani neskladujte výrobek v blízkosti vody.

Odsávačka mateřského mléka a její příslušenství nejsou odolné: vždy je uchovávejte mimo dosah horkých povrchů nebo otevřeného ohně.

Nepoužívejte odsávačku v blízkosti hořlavých materiálů.

Odsávačka mateřského mléka by nikdy neměla zůstat bez dozoru, když je zapojena do zdroje napájení.

Nikdy nepoužívejte elektrické zařízení, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku, nefunguje správně nebo pokud spadlo nebo bylo poškozeno. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, okamžitě jej přestaňte používat, obraťte se na servis.

Nepoužívejte zařízení do elektrické zásuvky, které bylo vystaveno vodě nebo jiným kapalinám.

Výrobek nepoužívejte při koupání nebo sprchování.

Nikdy přístroj nevkládejte do vody ani pod tekoucí vodu. Pokud bylo zařízení vystaveno vodě nebo jiným kapalinám, nedotýkejte se jej; odpojte jej z elektrické zásuvky a vypněte jej.

Toto zařízení nelze servisovat ani opravovat. Neopravujte jej sami. Zařízení neupravujte.

Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení. Vyměňte poškozené nebo opotřebované díly.

Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s odsávačkou mateřského mléka.

Odsávačku mateřského mléka používejte pouze k účelu, ke kterému je určena, jak je popsáno v tomto návodu.

Odsávačku nepoužívejte, když spíte nebo když se cítíte příliš ospalí.

Před každým použitím zkontrolujte všechny součásti odsávačky.

Pokud hadička plesniví, přestaňte ji používat a vyměňte ji.

Před prvním použitím očistěte a dezinfikujte všechny části, které přicházejí do styku s vaším prsem a mateřským mlékem.

Po každém použití umyjte všechny části, které přijdou do styku s vaším prsem a mateřským mlékem.

Při použití odsávačky mateřského mléka nebo příslušenství v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.

Děkujeme, že jste si zakoupili InnoGIO výrobek!

Abyste mohli produkt dobře a dlouho používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Obrázky jsou pouze ilustrativní.

innoGIO

Importer: **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com



Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz