


GIO-362I

ES

innoGIO

GIOluna Maxi Flow


Sacaleches eléctrico portátil

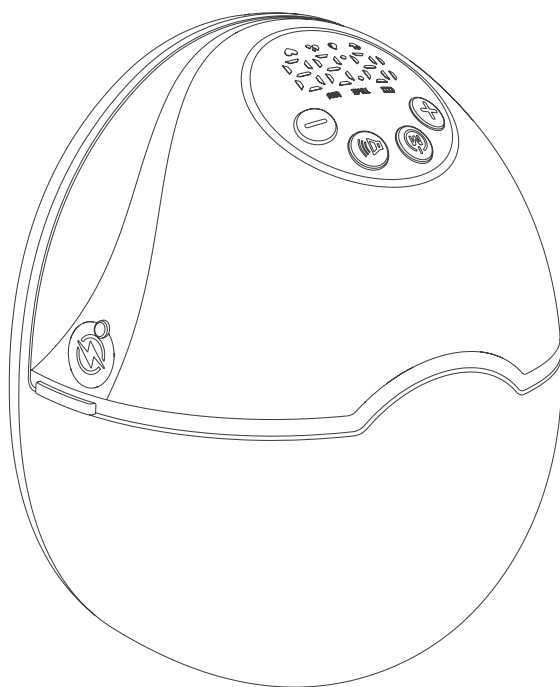

MANUAL DE USO

Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar el producto;
guárdelo en un lugar seguro después de su uso, ¡gracias!


Estructura del producto

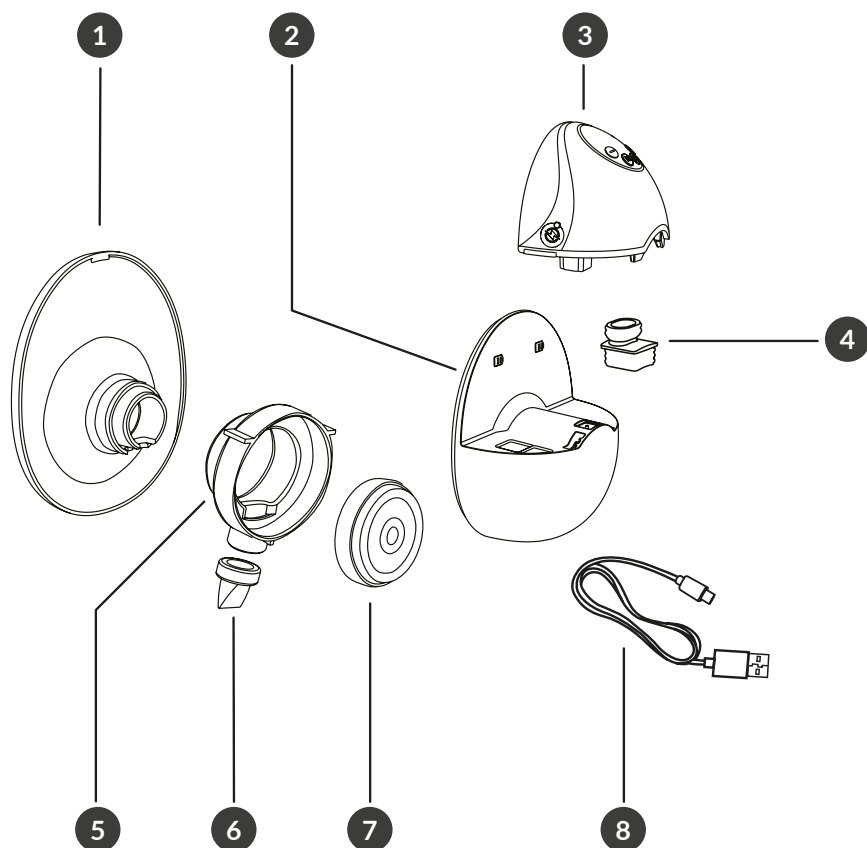

Lista de piezas:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Protector de silicona para el pecho x1 | 5. Unión en T x1 |
| 2. Contenedor de leche x1 | 6. Válvula x1 |
| 3. Motor del extractor x1 | 7. Diafragma x1 |
| 4. Tapón de silicona x1 | 8. Cable de carga USB-C x1 |

Panel de control

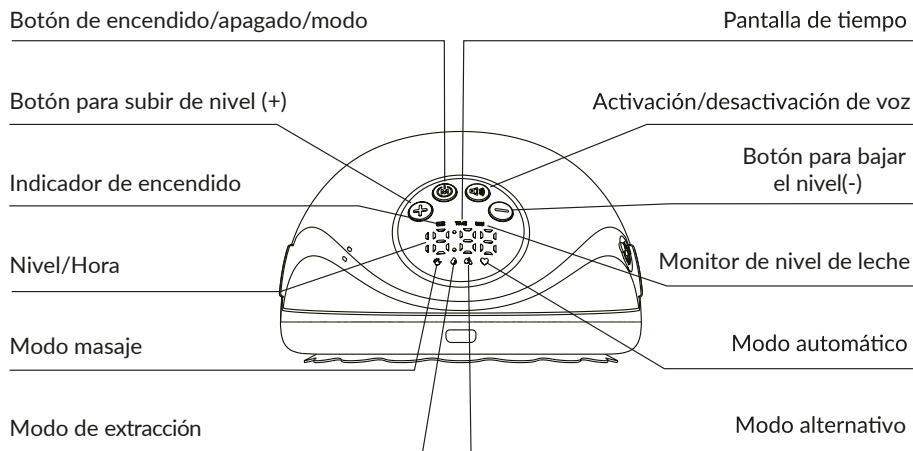

Nota. Este dispositivo tiene una batería de litio incorporada. Cuando la luz indicadora de la batería parpadee en azul, le recomendamos que utilice una fuente de alimentación certificada de 5 V --- 1 A para cargar la unidad principal lo más rápido posible.

Limpieza y desinfección


1. Antes de cada uso, desmonte, lave y desinfecte las piezas que entran en contacto con la leche materna (colector de leche, protector de silicona para el pecho).
2. La válvula no debe desmontarse ni lavarse por separado para evitar perder la pieza, ya que esto afectaría al uso normal del sacaleches.
3. Desmonte y limpie las piezas que entran en contacto con el pecho y la leche materna inmediatamente después de terminar de utilizar el dispositivo para evitar residuos de leche materna y la proliferación de bacterias.
4. Se recomienda limpiar el dispositivo con agua potable.

Precauciones de uso

1. Nunca lave ni desinfecte el motor del extractor, ya que la leche materna no entra en contacto con él. Puede limpiar esta parte con un paño suave.
2. Limpie cuidadosamente la copa de silicona para el pecho, ya que si la daña, el sacaleches no funcionará correctamente.
3. Limpie el colector de leche. No lo frote ni introduzca nada en su interior, ya que podría dañarlo. Se recomienda limpiarlo con agua potable.
4. No es necesario desmontar y lavar por separado la válvula para evitar perder la pieza, ya que esto afectaría al uso normal del sacaleches.


Montaje del dispositivo

1. Monte la válvula y el diafragma en su sitio, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Asegúrese de que la válvula está correctamente colocada e inserte la unión en T en el colector de leche, tal y como se muestra en la siguiente imagen. (Asegúrese de que está correctamente colocada).

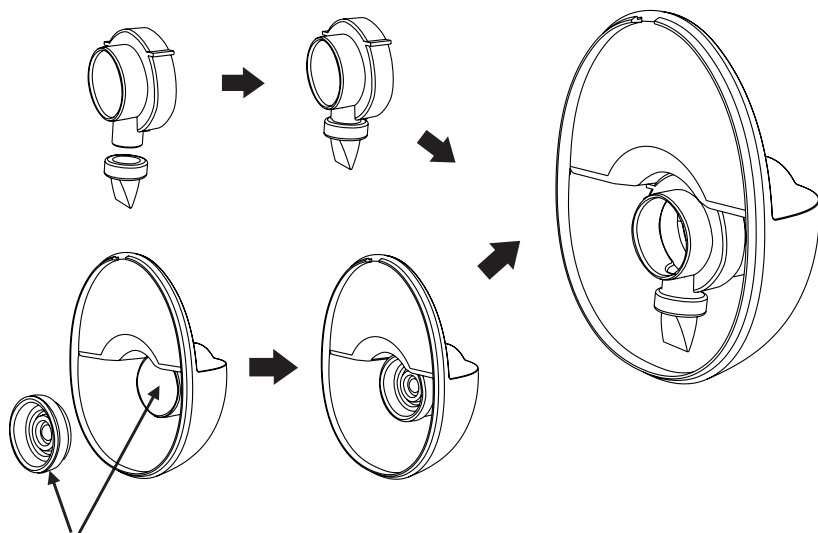


Nota: Asegúrese de que el interior del diafragma y el colector de leche estén secos.


2. **Nota:** Asegúrese de que el interior del diafragma y el colector de leche estén secos. Para instalar la copa de silicona en un colector de leche, asegúrese de que la ranura de desviación de la copa de silicona esté alineada con la ranura de retorno del colector de leche y presione los bordes con ambas manos para asegurarse de que el sello esté en su lugar.

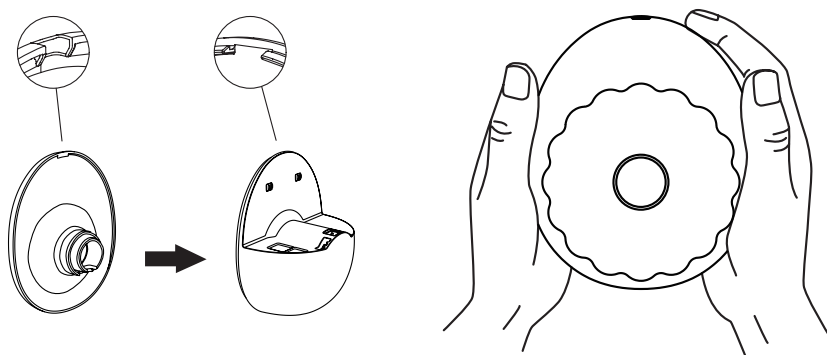


3. Inserte el tapón de silicona en el colector de leche y presione hacia abajo para que las superficies queden alineadas y se cree un sellado perfecto.

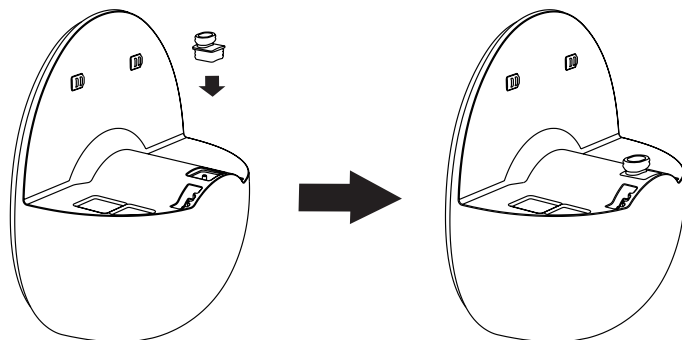

4. Monte el motor del extractor en el colector de leche, alinee la ranura situada debajo del motor del extractor con el colector de leche y empuje el colector de leche hacia abajo para garantizar un sellado perfecto.

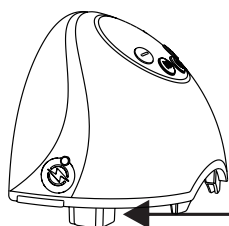


Nota:
Mantenga el sensor seco
(esta función es opcional).

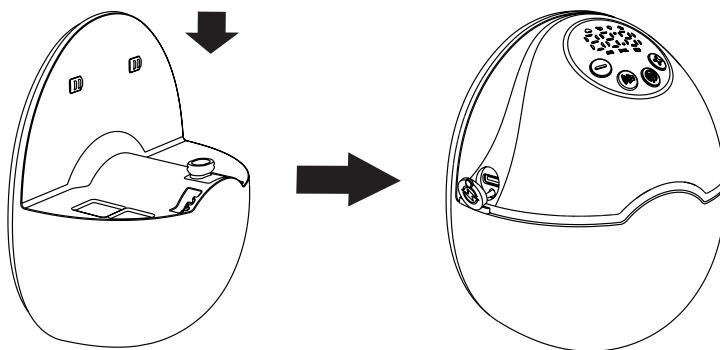


Nota: Los adaptadores de corriente son un accesorio estándar que se puede adquirir fácilmente. No se incluyen con el sacaleches y si es necesario, se pueden comprar por separado.
Especificaciones del adaptador de corriente: 5 V $\rightarrow$ 1 A.

Guía de extracción


1. Presione firmemente la copa de silicona contra el pecho y asegúrese de que el pezón quede centrado. Manténgala en posición vertical. Tenga cuidado de no cambiar la posición del dispositivo y del pecho, ya que de lo contrario el sacaleches no tendrá succión.

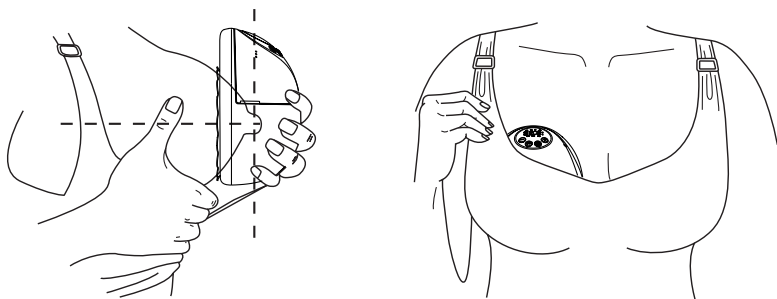


2. Mantenga pulsado durante ☺ dos segundos para encender el sacaleches y, a continuación, mantenga pulsado de nuevo durante dos segundos para apagarlo. El sacaleches se apagará automáticamente después de 20 minutos de funcionamiento y la pantalla se apagará después de 15 segundos de funcionamiento. Al pulsar cualquier botón, el dispositivo se activará.

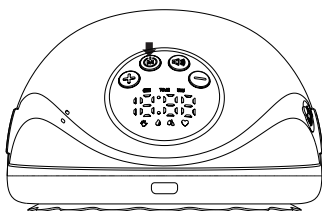


3. Pulse brevemente el botón ☹ para seleccionar el modo de masaje ☹. Este modo es más rápido que el modo de extracción y tiene una potencia de succión menor. Durante la lactancia posparto, los senos son propensos a hincharse, doler, presentar bultos y otras causas de malestar. El uso de este modo puede ayudar a aliviar estos problemas.

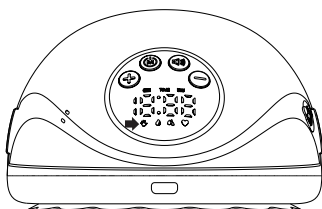


4. Pulse brevemente el botón  para seleccionar el modo de extracción . Este modo es más lento que el modo de masaje, pero tiene mayor potencia de succión y simula con precisión la succión del bebé, lo que ayuda a estimular una producción de leche aún más fluida.

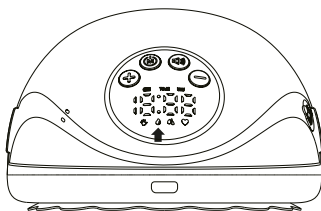


5. Pulse brevemente el botón  para seleccionar el modo alternativo . Este modo consiste en un tirón largo y nueve cortos. En el periodo posparto temprano, los conductos mamarios no son fáciles de abrir. El sacaleches puede estimular sus pechos y promover la secreción de leche materna utilizando este modo.

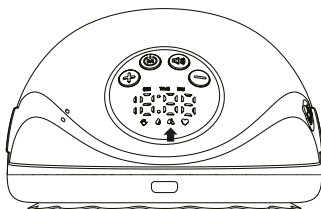


6. Pulse brevemente el botón  para seleccionar el modo automático . Este modo se encuentra entre el modo de masaje y el modo de extracción. La potencia de succión es estable. En este modo, la potencia aumentará un nivel cada 15 segundos y luego se mantendrá en el nivel 9. Durante el proceso de aumento, puede utilizar los botones de subir y bajar de nivel para detener el aumento.

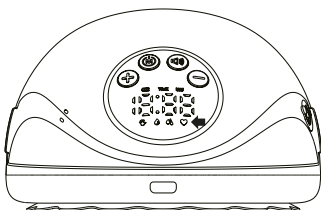


7. Botón de activación/desactivación de voz: De forma predeterminada, la voz está desactivada después de encender el dispositivo. Pulse brevemente  para activar o desactivar el sonido. Después de pulsar el botón de modo o los botones de subir y bajar nivel, se emitirá un mensaje de voz . Si mantiene pulsado el mismo botón de subir o bajar nivel, no se comunicará. Si el nivel se mantiene durante más de un segundo, se comunicará de nuevo un mensaje de voz. El tiempo de extracción se comunicará cada 10 minutos y el dispositivo se apagará automáticamente con o sin mensaje de voz tras el final de la extracción.

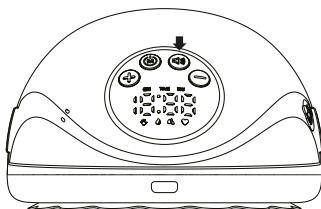


8. Monitor de nivel de leche: mantenga pulsado el botón de activación/desactivación de voz para activar la detección del sensor, se iluminará el icono  y el tiempo de extracción se comunicará una vez cada 10 minutos. Se apagará automáticamente cuando esté lleno. (Esta función es opcional).

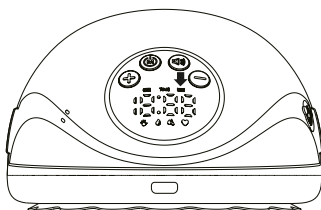


9. Pantalla de nivel/tiempo: el cambio ascendente predeterminado es de 1 nivel y la pantalla muestra «1». Hay un total de 12 niveles. Se recomienda comenzar con el modo de masaje durante el primer uso y aumentar el nivel según su propio nivel de comodidad. Después de que el nivel seleccionado esté activado durante 5 segundos, pasa al modo temporizador, la pantalla se enciende la pantalla «TIME» y el tiempo se mide en «minutos/segundos».

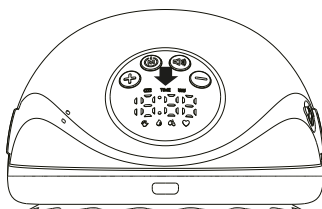

10. Una vez que haya terminado de extraer la leche, apague el dispositivo con el botón de encendido, inclínese ligeramente hacia delante y retire con cuidado el sacaleches. Si queda una pequeña cantidad de leche materna en la copa de silicona, incline el sacaleches y vierta con cuidado la leche restante de la copa de silicona al biberón.

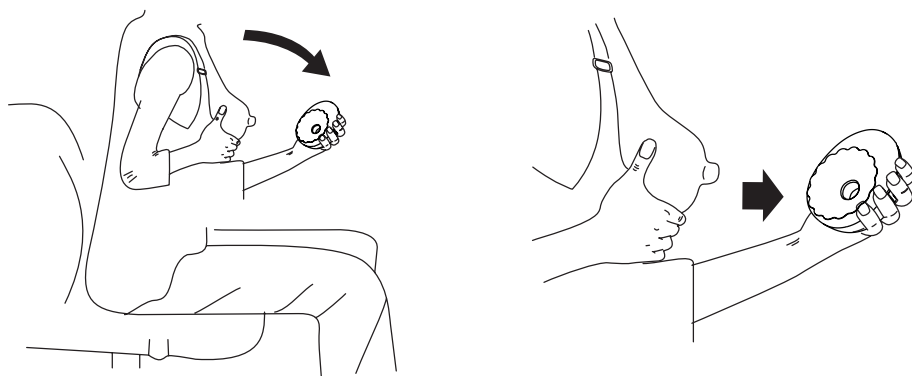


Relájese y siéntese en una silla cómoda inclinandose ligeramente hacia delante (utilice cojines para apoyar la espalda). Esta posición permite que la parte superior del protector de silicona se incline ligeramente hacia arriba, lo que facilita el flujo de leche materna hacia el colector y reduce la cantidad de leche residual en el protector de silicona.

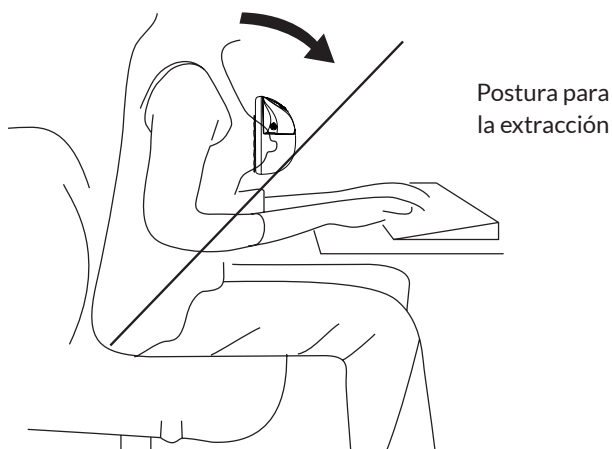


Indicador de energía:

1. La luz azul parpadea (cuando el voltaje de la batería es de 3,2 V), lo que indica que el dispositivo debe cargarse lo antes posible; cuando la energía es demasiado baja, el dispositivo se apagará automáticamente (cuando el voltaje de la batería es de 3 V);
2. Durante la carga, las luces azul y verde parpadean alternativamente; la luz se vuelve verde cuando el dispositivo está completamente cargado.
3. Cuando la batería está cargada, la luz verde permanece encendida; la luz azul se enciende cuando el nivel de carga está entre el 30% y el 70%.

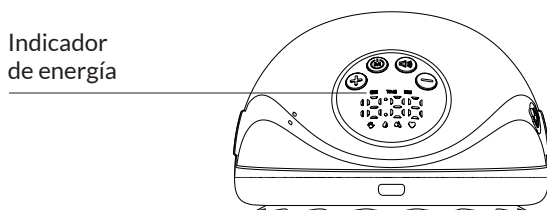

Abra la tapa del USB para insertar el cable USB y conecte el adaptador en el otro extremo para cargar el motor.

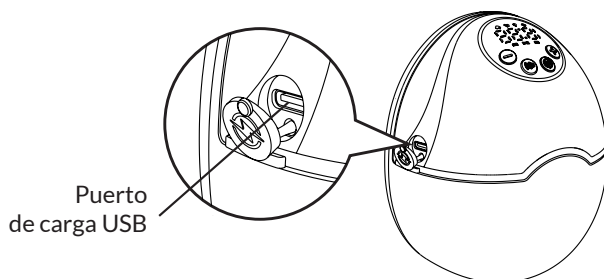

Nota:

1. No puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando.
2. Este dispositivo tiene una función de memoria: cuando lo enciendas, entrará automáticamente en el modo de funcionamiento y el nivel de succión utilizados más recientemente.
3. El dispositivo se apaga automáticamente después de funcionar durante 20 minutos.
4. El tiempo de funcionamiento continuo varía en función de la batería o las condiciones de trabajo.
5. El tiempo de carga puede variar en función de la energía restante, la temperatura o las condiciones de carga.
6. El adaptador de corriente USB es un accesorio estándar que se puede adquirir fácilmente. No está incluido y se puede comprar por separado si es necesario. Especificaciones del adaptador de corriente: 5 V = 1 A.

Instrucciones para verter la leche materna

Después de extraer la leche, retire el sacaleches del pecho y manténgalo en posición vertical. A continuación, retire el motor del sacaleches y vierta la leche materna extraída en el biberón, asegurándose de que la parte ranurada del colector de leche quede alineada con la boca del biberón para evitar que se derrame la leche.

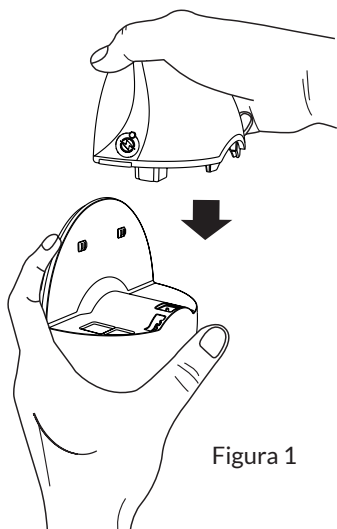


Figura 1

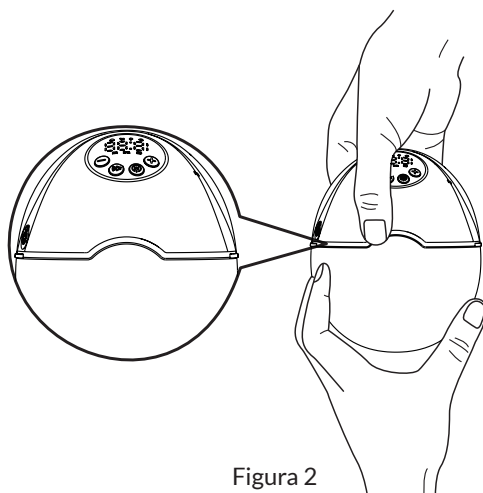


Figura 2


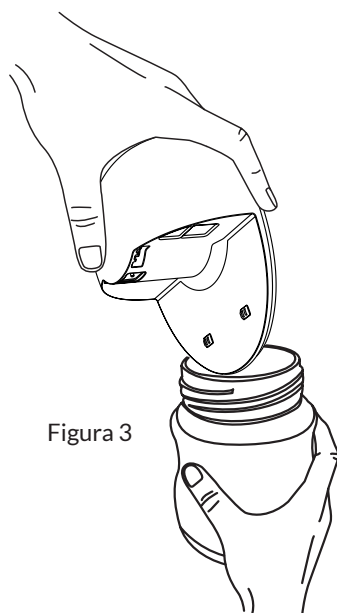


Figura 3

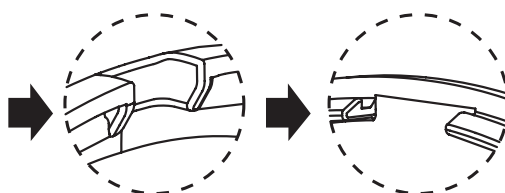

Contenedor de
leche Espacio

Parámetros del dispositivo

Nombre del producto	InnoGIO GIOluna Maxi Flow: sacaleches eléctrico
Modelo del producto	GIO-362I
Voltaje de carga	DC5V = 1A
Corriente de carga	730 mA
Tipo de batería	Batería de polímero
Capacidad de la batería	1200 mAh
Voltaje nominal	3,7 V
Corriente nominal	1 A máx.
Tiempo de funcionamiento	>2 h
Límite de ruido	≤50 dB
Límite de intensidad de extracción	40 mmHg-300 mmHg
Entorno de trabajo	10-30°C, HR 15%-93%, 700-1060 hPa
Entorno de almacenamiento y transporte	-25-50°C, HR 15%-93%, 700-1060 hPa

Almacenamiento de la leche materna

Precaución

1. No congele la leche materna repetidamente.
2. No mezcle leche materna fresca con leche materna congelada.
3. Deseche cualquier resto de leche materna después de la alimentación.

Nota: Almacene únicamente leche materna extraída con un sacaleches esterilizado.

Almacenamiento de la leche materna

La leche extraída se puede colocar en una bolsa o biberón limpio y esterilizado con cierre hermético. Refrigere o congele inmediatamente.

Precaución: La leche extraída se puede refrigerar hasta 48 horas o congelar hasta tres meses. Etiquete claramente el biberón o la bolsa de almacenamiento con la fecha y la hora de la extracción.
Consuma primero la leche extraída más recientemente.

Descongelación de la leche materna

Para descongelar la leche materna congelada, guárdela en el congelador de su frigorífico durante toda la noche. En caso de emergencia, puede descongelar la leche materna en un recipiente con agua caliente. Una vez descongelada, la leche materna debe consumirse en un plazo de 24 horas. Para calentar la leche materna, coloque el biberón en posición vertical en un recipiente con agua caliente o utilice un calentador de biberones y alimentos para calentarla de forma segura y rápida.

Advertencia

1. ¡Recuerde! ¡Compruebe siempre la temperatura de la leche materna antes de alimentar a su bebé!
2. No calientes la leche materna en el microondas, ya que esto puede destruir nutrientes y anticuerpos importantes.
3. Además, un calentamiento desigual puede provocar un sobrecalentamiento localizado, lo que puede causar quemaduras.
4. No caliente el biberón de leche sumergiéndolo en agua hirviendo, ya que esto podría provocar grietas.

-  Scan the QR code to download the manual
-  Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
-  Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
-  Scannez le code QR pour télécharger le manuel
-  Escanee el código QR para descargar el manual
-  Digitalize o código QR para descarregar o manual
-  Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
-  Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
-  Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
-  Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
-  Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
-  Scanează codul QR pentru a descărca manualul
-  Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
-  Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
-  Lae juhend alla, skannides QR-koodi
-  A használati utasítás letöltéséhez olvasd be a QR-kódot
-  لتنزيل الدليل (QR) امسح رمز الاستجابة السريعة



innoGIO

Fabricado en China para **InnoGIO GLOBAL** Sp. z o.o.
Calle Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia

www.innogio.es



@innoGIO.official



@innogio_com