


GIO-360 RO

innoGIO

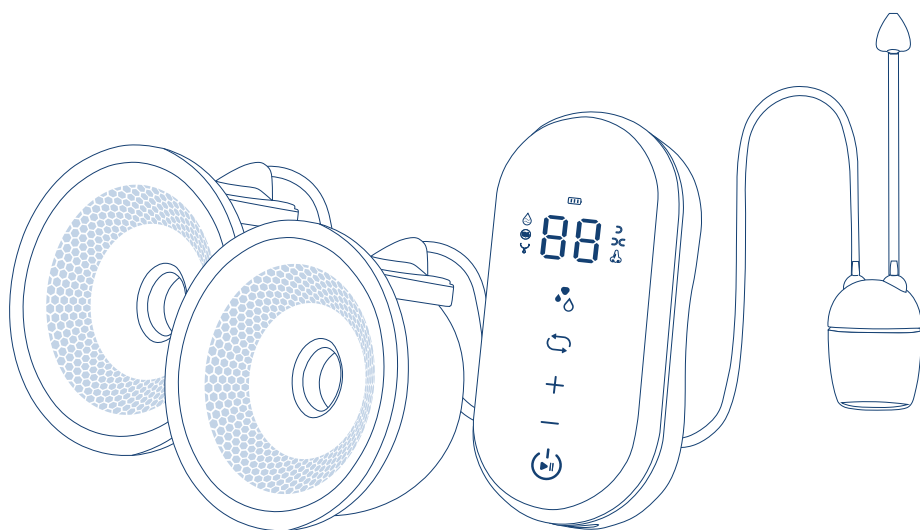

GIOmum Line Soft

Pompă electrică dublă pentru
sân cu aspirator nazal

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul și să păstrați manualul pentru consultări viitoare.

INTRODUCERE

Cel mai bun mod de a asigura sănătatea bebelușului dumneavoastră este să-l hrăniți zilnic cu lapte matern. Totuși, uneori nu este convenabil ca mama să alăpteze direct; puteți alege pompa electrică dublă pentru sân cu aspirator nazal **GIOMum Line Soft GIO-360**.

GIOMum Line Soft – pompă electrică dublă pentru sân cu aspirator nazal, imită suptul bebelușului, poate stimula secreția de lapte matern, calmează durerile de sân (din cauza umplerii cu lapte). Extrageți laptele pentru a-l congela și hrăni exclusiv bebelușul în absența mamei, fie că este la serviciu sau în afara casei. Susține aspirarea nazală în perioadele în care bebelușul este bolnav.

CARACTERISTICI

- Pompa dublă crește eficiența și reduce timpul de pompare.
- Pâlnie hands-free, se fixează în sutien, nu este nevoie să o țineți în mână în timpul utilizării.
- Poate funcționa cu aspirare simplă sau dublă. Simboluri intuitive, ușor de utilizat.
- 2 în 1: Pompă pentru sân cu funcție de aspirare nazală, dotată complet, ușor de instalat și curățat.
- Aspirator nazal din silicon moale, confortabil pentru bebeluș.
- Control LED cu butoane tactile.
- Pompare puternică și delicată cu 3 moduri de aspirare: Modul masaj / Modul stimulare / Modul expresie (9 nivele).
- Baterie reîncărcabilă cu capacitate mare de până la 2200 mAh pentru o utilizare îndelungată.
- Dispozitiv anti-reflux cu supapă unidirecțională.
- Baterie reîncărcabilă.

3 MODURI DE ASPIRARE

•Modul Masaj:

Toate nivelele din modul masaj funcționează într-un ritm regulat și moderat, cu o aspirație puternică pentru a stimula eficient laptele. Pompa are 9 nivele de masaj; cu cât nivelul este mai mare, puterea de aspirație va crește, iar aspirația va deveni mai blândă și mai viguroasă, iar durata fiecărei aspirații va fi mai lungă. Creșterea nivelului de aspirație se face prin apăsarea butonului de pornire.


•Modul Exprimare:

Toate nivelele din acest mod funcționează la un ritm regulat și moderat, cu o aspirație puternică pentru a extrage eficient laptele. Sunt disponibile 9 nivele; cu cât nivelul este mai mare, cu atât aspirația devine mai puternică, mai relaxată și de durată mai lungă.

•Modul Stimulare:


În modul stimulare, pompa oferă 9 niveluri de selecție. La fiecare nivel, se utilizează trei aspirații ușoare consecutive și una puternică, într-un ritm stimulat — adică trei masaje și o exprimare. Acest model ajută la declanșarea eliberării laptelui.

MODUL

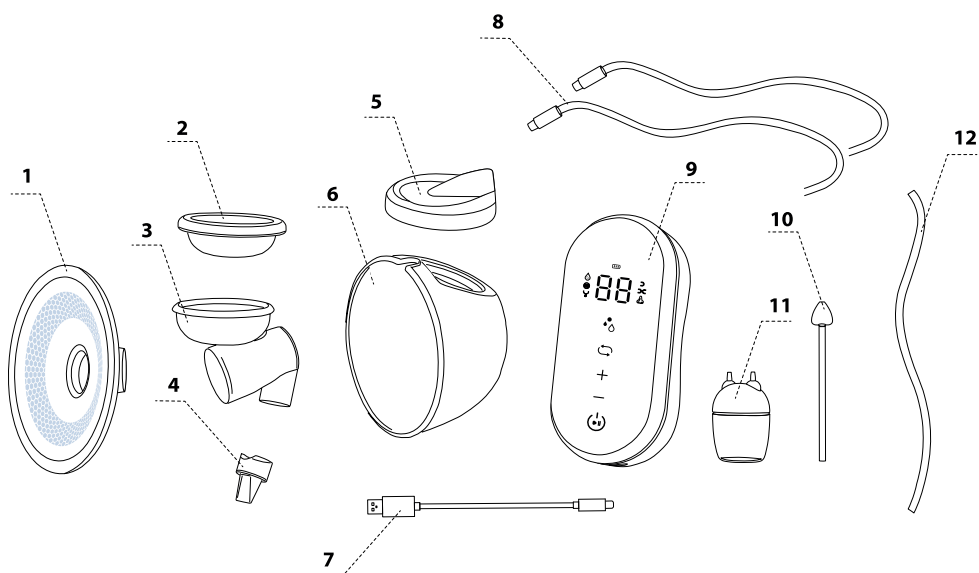

Număr	Nume	Cantitate	Material	Rezistență la căldură
1	Pâinii pentru sân 24mm	2	Silicon	~180
2	Aspiatoare din silicon	2	Silicon	~180
3	Conectori	2	Polipropilenă	~120
4	Supape de aspirație	2	Silicon	~180
5	Capace superioare	2	Polipropilenă	~120
6	Recipient pentru colectarea laptelui	2	Polipropilenă	~120
7	Cablu USB	1	xx	xx
8	Tuburi de aer	2	Clorură de polivinil	~120
9	Motor	1	xx	xx
10	Tub de aspirație nazală	1	Silicon	~180
11	Recipient pentru lichid nazal	1	Polipropilenă	~120
12	Tub de aer nazal	1	Clorură de polivinil	~120

ECRAN LED



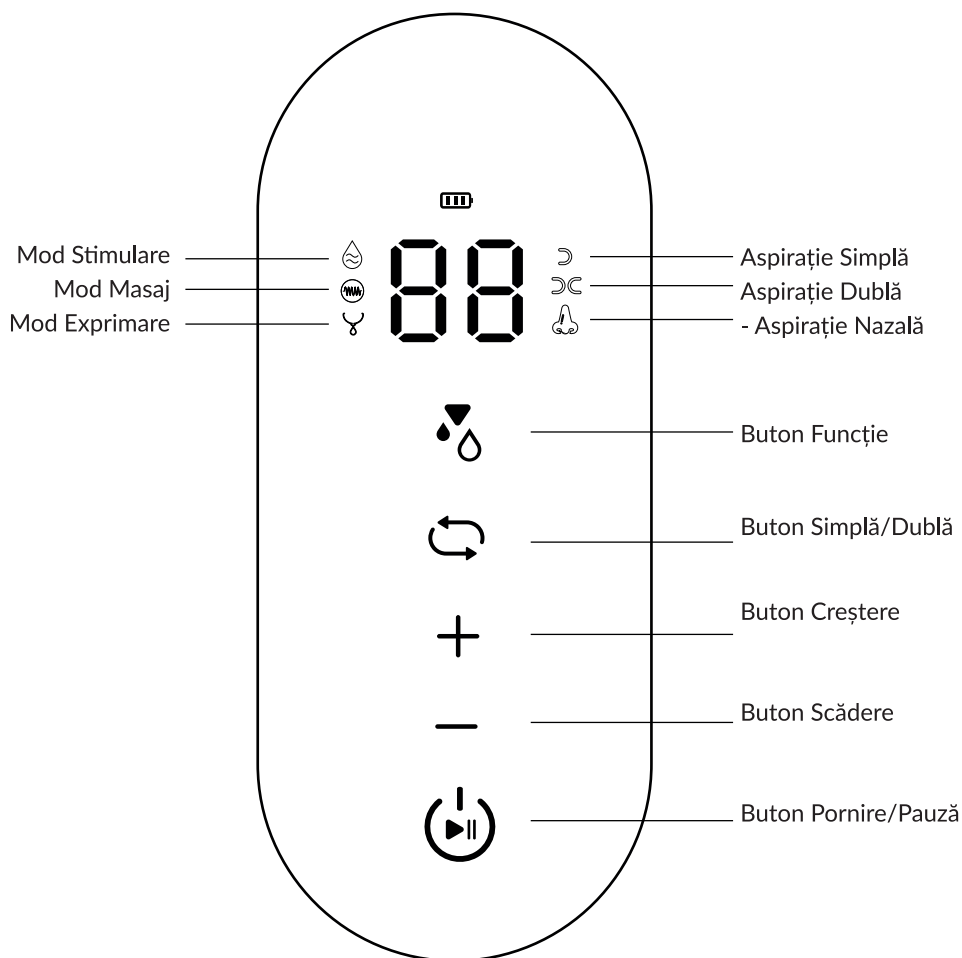


SPECIFICAȚII:

- Surse de alimentare: 100–240V ~50/60 Hz cu adaptor de curent AC DC 5V–1A (neinclus)
- Putere: 5W; Capacitate baterie: 2200 mAh
- Vacuum max.: 315 mmHg $\pm$ 7,5 mmHg
- Greutate: 0,63 kg
- Temperatură de depozitare: 5° – 40°C
- Umiditate de depozitare: 10% – 90% RH
- Presiune atmosferică: 850 HPa – 1060 HPa






PAȘII DE ASAMBLARE

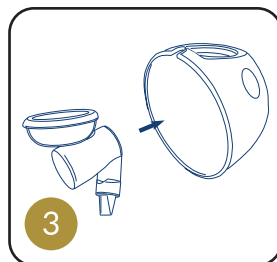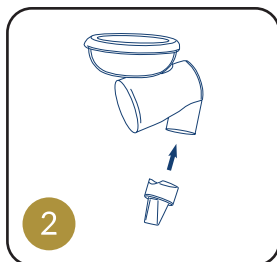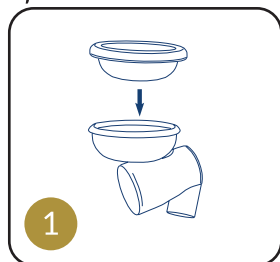

Pasul 1 Așezați aspirațiile din silicon (2) pe conector (3). Apăsăți în jurul marginilor siliconului pentru a acoperi complet conectorul.

Pasul 2 Atașați ferm supapa de aspirație (4) pe tija conectorului (3).




Pasul 3 Introduceți conectorul (3) în fanta interioară a recipientului pentru lapte (6).

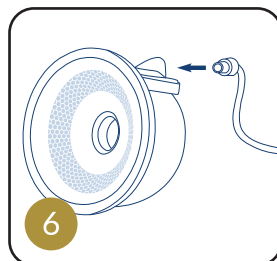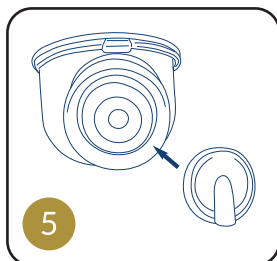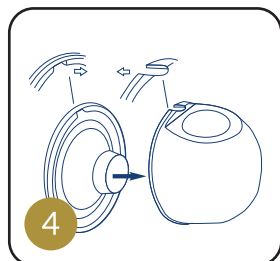

Pasul 4 Montați pâlnia pentru sân (1) pe recipientul pentru lapte (6). Aliniați gura pâlniei cu cea a recipientului.

Pasul 5 Așezați capacul superior (5) pe recipientul pentru lapte (6).

Pasul 6 Conectați un capăt al primului tub de aer (8) la capacul superior (5) al primului recipient pentru lapte.

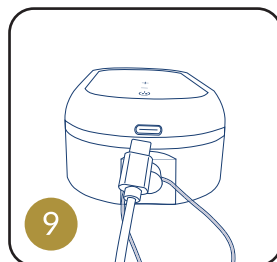
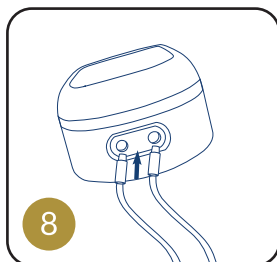
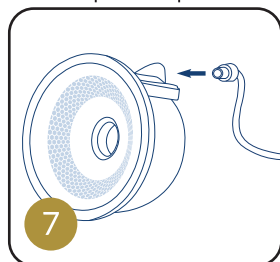


Pasul 7 Conectați un capăt al celui de-al doilea tub de aer (8) la capacul superior (5) al celui de-al doilea recipient pentru lapte.

Pasul 8 Conectați celelalte 2 capete ale ambelor tuburi de aer (8) la cele 2 orificii de aer ale motorului (9).

Pasul 9 Utilizați cablul USB (7) pentru a încărca motorul (9) înainte sau după fiecare utilizare.

PAȘII DE ASAMBLARE

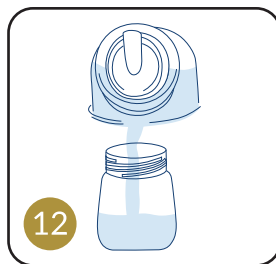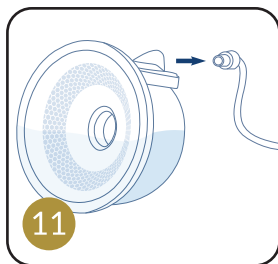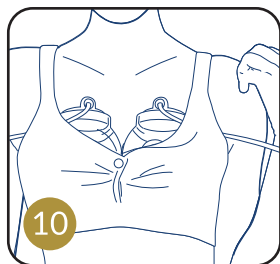


Step 10 Așezați cele două pâlnii pentru sân în sutien. Asigurați-vă că pâlnia este bine lipită de pieptul mamei și că tubul de aer nu este blocat.

Step 11 După pompare, scoateți tuburile de aer (8).


Step 12 Turnați laptele matern din recipientul pentru lapte (6) într-un biberon de stocare.

Note:


- Pentru aspirație simplă , conectați la orificiul de aer din stânga. Aceasta este poziția implicită pentru aspirația simplă; orificiul din dreapta nu poate fi utilizat pentru aspirație.
- Simbolurile de aspirație sunt afișate clar lângă fiecare orificiu.

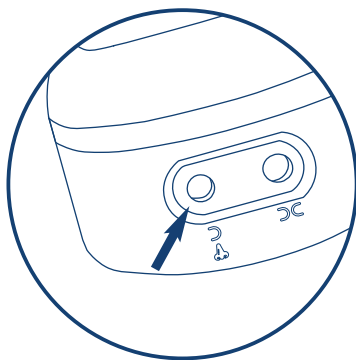


VERIFICAREA ASPIRAȚIEI ȘI SOLUȚII

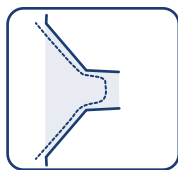

Vă rugăm să vă asigurați că pâlnia pentru sân acoperă bine sânul.

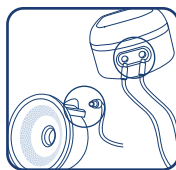

Asigurați-vă că tuburile de aer sunt conectate ferm.

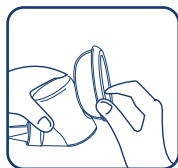




Verificați dacă siliconul de aspirație (2) este bine fixat pe conector (3).



Verificați dacă supapa de aspirație (4) este montată corect și poziționată corespunzător pe tija conectorului (3).

AVERTISMENT IMPORTANT

Pentru a evita scurgerile, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos.

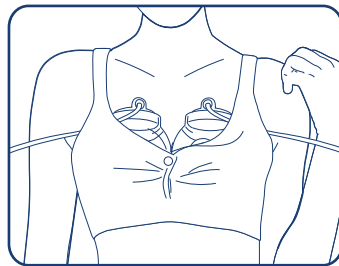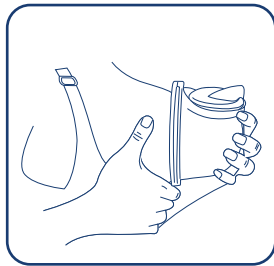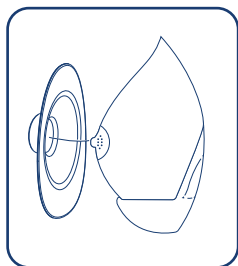

Alinierea corectă a mamelonului în pâlnia pentru sân este esențială pentru confort, eficiență și performanță.

Mamelonul trebuie să fie corect poziționat în tunelul pâlniei înainte de pompare, pentru a evita disconfortul.

Instrucțiuni privind postura în timpul utilizării

Cea mai bună poziție pentru alăptare este să stați în poziție verticală și să vă aplecați ușor înainte.

Atunci când stați jos sau în picioare și vă aplecați înainte, laptele poate fi extras mai ușor.

În această poziție, mama se poate simți mai confortabil.

Stând culcată în timpul pompei schimbă poziția pâlniei pe sân, ceea ce face ca partea de acoperire a sânelui să fie mai jos decât orificiul de scurgere al laptelui — laptele va curge înapoi și nu va putea fi extras corect.

Mai jos este prezentat un grafic al posturilor recomandate pentru utilizarea pompei de sân.



Stând în poziție verticală este de asemenea o poziție bună pentru pomparea laptelui și poate fi aleasă în funcție de confortul personal.



Aplecarea pe spate nu permite o pompare eficientă și poate cauza scurgeri de lapte matern — această poziție nu este recomandată.



Stând drept și ușor aplecată înainte este cea mai ideală poziție pentru extragerea laptelui matern.



Alăptarea sau pomparea în poziție culcată sau culcată pe o parte nu este posibilă și nu trebuie utilizată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Sterilizați componentele pompei de sân care intră în contact cu laptele.
2. Spălați-vă pe mâini, apoi asamblați componentele sterilizate urmând pașii din secțiunea ASAMBLARE.
3. Așezați-vă într-o poziție cât mai confortabilă, cu partea superioară a corpului ușor aplecată în față.
4. Masați ușor sânii sau comprimați zona cu un prosop cald.
5. Introduceți mamelonul în pernita de masaj astfel încât pâlnia să acopere ferm sânul

● GHID DE POMPARE

● Mod Masaj / Stimulare / Exprimare:

- Atingeți și mențineți apăsat butonul  timp de 2 secunde pentru a aprinde lumina LED și pompa va porni automat în modul simplu  cu nivelul de aspirație memorat de la ultima utilizare. Ecranul LED afișează „00” și începe să cronometreze timpul de funcționare. Atingeți butonul Simplă/Dublă  a comuta la Aspirație Dublă .
- Atingeți butonul de funcție  pentru a alege modul de stimulare și pentru a începe cu nivelul memorat din modul de stimulare anterior, cu simbolul .
- Utilizați butoanele  și  pentru a selecta nivelul de aspirație în această etapă (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9).
- Apăsați scurt butonul  pentru a pune pompa pe pauză.
- Atingeți butonul de funcție  pentru a comuta la modul de masaj și pentru a începe cu nivelul memorat din modul de masaj anterior, cu simbolul .
- Utilizați butoanele  și  pentru a selecta nivelul de masaj în această etapă (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9).
- Există 9 nivele de masaj.
- Apăsați butonul  pentru a pune pompa pe pauză.
- Atingeți butonul de funcție  pentru a comuta la modul de exprimare și pentru a începe cu nivelul memorat din modul de exprimare anterior, cu simbolul .

Utilizați butoanele  și  pentru a selecta nivelul de exprimare în această etapă (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9).

Există 9 nivele de exprimare. Apăsați butonul  pentru a pune pompa pe pauză.

Pompa se oprește automat după 30 de minute de funcționare.

Țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde pentru a opri pompa.

ATENȚIONARE!

1. Sterilizați toate componentele separate înainte și după fiecare utilizare.
2. Încercați să vă familiarizați cu controlul de aspirație al pompei de sân înainte de utilizare. Plasând pâlnia împotriva mâinii sau a brațului, puteți exersa utilizarea pompei de sân.
3. Vă rugăm să vă asigurați că toate piesele sunt fără fisuri și că nu există nicio nepotrivire, mai ales capul supapei care se potrivește cu corpul pâlniei, deoarece acest lucru va afecta aspirația pompei de sân.
4. Contactați specialistul în îngrijirea sănătății sau un consultant în alăptare dacă reușiți să exprimați doar o cantitate minimă de lapte sau dacă exprimarea este dureroasă.
5. Acesta nu este un jucărie, vă rugăm să-l păstrați departe de copii.
6. NU plasați produsul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele, feronierile expuse la soare etc.

SFATURI:

Dacă laptele nu curge, relaxați-vă și re poziționați pâlnia pe sân, apoi continuați pomparea.


Nu continuați să pompați mai mult de 5 minute dacă nu reușiți să exprimați niciun lapte. Încercați să pompați într-un alt moment.

Consultați-vă cu consilierul în lactație sau cu medicul dacă simțiți disconfort sau durere în timpul pomparii.

Este mai eficient și mai bine pentru sâni dumneavoastră să pompați frecvent (la fiecare 2 - 3 ore).

Folosiți întotdeauna un adaptor AC atunci când este posibil, în loc de funcționarea cu baterii, pentru cele mai bune rezultate.

Ghid de aspirație nazală

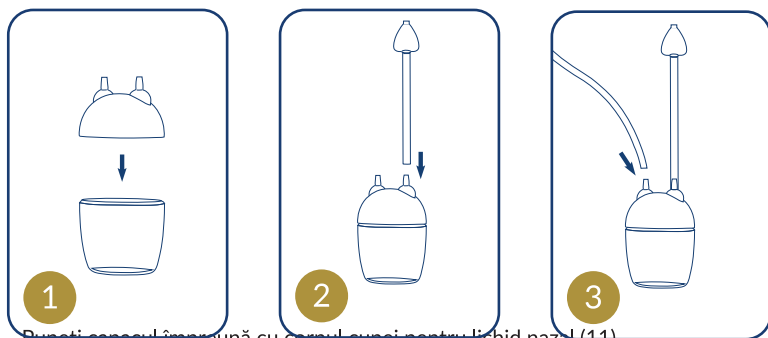

Puneți capacul împreună cu corpul cupei pentru lichid nazal (11).


Pasul 1

Introduceți tubul de aspirare nazală (10) în primul orificiu al cupei pentru lichid nazal (11).

Pasul 2

Pasul 3

Introduceți tubul de aer nazal (12) în orificiul rămas al cupei pentru lichid nazal (11).

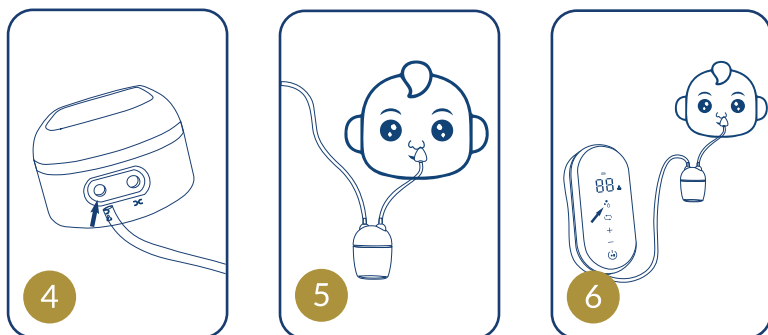

Pasul 4

Conectați celălalt capăt al tubului de aer pentru nas (12) la orificiul de aer din stânga

Pasul 5

Introduceți celălalt capăt al tubului de aspirare pentru nas (10) în nasul bebelușului, în

Pasul 6

Atingeți butonul , apoi butonul funcțional  pentru a selecta modul de aspirație pentru nas .


Funcția de aspirație nazală:

1. Asigurați-vă că tubul de aspirație nazală, tubul de aer nazal și cupa pentru lichid nazal sunt sterilizate înainte și după aspirarea nasului bebelușului.
2. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt strânse pentru a crește eficiența aspirației.
3. Orificiul de aer din stânga este setat implicit pentru modul de aspirație nazală, orificiul de aer din dreapta nu poate fi utilizat.
4. Atingeți butonul Power / Pause , apoi atingeți butonul de funcție  pentru a selecta modul de aspirație nazală . Reglați nivelul de aspirație pentru a se potrivi cu nevoile bebelușului, dar asigurați-vă că efectul de aspirație rămâne eficient. Utilizați butoanele  și  pentru a selecta nivelul de aspirație. Există 9 nivele de aspirație nazală (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9).

Atingeți butonul  pentru a pune pompa pe pauză

CURĂȚAREA POMPEI

Desfaceți toate componentele pompei de sân și spălați-le temeinic cu apă caldă și săpun curat. Recomandăm sterilizarea produsului prin introducerea acestuia în apă clocotită timp de aproximativ 2 - 3 minute sau utilizând un sterilizator cu aburi / sterilizator UV / microunde. Apoi uscați toate piesele și păstrați-le într-un loc răcoros și uscat.

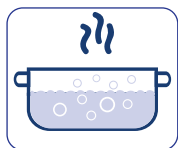

Apă clocotită



Sterilizator cu aburi



UV Sterilizer



Microunde



Piesele din plastic pot fi deteriorate sau deformează dacă sunt expuse la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.

ALIMENTARE

Introduceți conectorul DC al cablului USB în adaptorul de priză USB, apoi introduceți conectorul adaptorului în priza de alimentare.

Folosiți doar adaptorul AC original. Alte adaptoare pot provoca daune unității.

BATERIE LITHIUM-ION

Acest model dispune de o baterie reincărcabilă integrată de tip Lithium-ion, ceea ce face transportul mult mai ușor, deoarece o puteți încărca simplu atunci când este necesar. Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte de prima utilizare. Nu încărcați bateria pentru perioade lungi de timp. O încărcare de 4 ore poate fi folosită mai mult de 2 ore (bateria lithium nu poate fi scoasă). Când simbolul bateriei clipește, înseamnă că nivelul de energie este scăzut, vă rugăm să o încărcați la timp.

Observații:

- Când motorul funcționează fără alimentare principală, starea de alimentare va fi afișată.
- Dacă bateria lithium-ion nu este utilizată o perioadă lungă de timp, aceasta poate duce la descărcarea profundă a bateriei.
- Dacă pompa de sân rămâne fără baterie, aceasta trebuie conectată la sursa de alimentare pentru a fi activată. Așteptați aproximativ 10 minute pentru ca ecranul să se aprindă și să înceapă să se încarce. Dacă bateria nu este activată după mai mult de jumătate de oră, consultați serviciul de asistență clienți InnoGIO.

Acest produs utilizează modul de încărcare USB și poate fi încărcat cu adaptor / computer și power bank. Este mai ușor de utilizat când sunteți afară și mai convenabil pentru mămici.

CUM SĂ STOCAȚI LAPTELE MATERNE

Bucata de colectare a laptelui este gata pentru utilizare. În cazul în care nu este posibil să hrăniți direct bebelușul, laptele matern proaspăt trebuie păstrat într-un recipient curat, sigilat. Se pot utiliza sticle pentru lapte sau pungi pentru lapte.

Linii directe pentru timpul maxim de stocare a laptelui matern.

	Congelator (~ -18°C)	Frigider (~ -4°C)	Pachet cu gheață (~ -15°C)	Temperatura camerei (22~26°C)
Proaspăt	3 luni	1 zi	8 ore	3-4 ore
Dezghețare în frigider	Nu recongelați	1 zi	Nu depozitați	3-4 ore
Dezghețare în apă caldă	Nu recongelați	1 ore	Nu depozitați	Hrăniți bebelușul într-un timp scurt până când hrănirea se termină

Note:

- Nu depozitați laptele în vreme caldă.
- Nu folosiți apă încălzită la o temperatură mai mare de 60°C pentru a dezgheța laptele matern.
- Nu încălziți laptele matern în cuptorul cu microunde.
- Nu adăugați lapte proaspăt la laptele matern congelat.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

	Cauze	Verificări și soluții
Motor care nu funcționează	Putere	Verificați dacă adaptorul AC este conectat ferm la sursa principală de alimentare și la unitatea principală. Verificați dacă alimentarea este pornită. Contactați distribuitorul InnoGIO dacă pompa nu funcționează când alimentarea este pornită.
	Baterie	Verificați dacă simbolul clipește, vă rugăm să încărcați bateria.
Aspirație slabă sau inexistentă	Asamblare incorectă	Verificați dacă nu lipsesc piese. Asigurați-vă că perna de silicon este etanș fixată pe marginea pâlniei de sân. Montați setul de vacuum și pâlnia de sân strâns. Verificați dacă inelul de silicon este poziționat corect. Supapa de silicon este fixată ferm. Verificați dacă tubul de silicon este conectat la unitatea principală. Înșurubați pompa strâns pe sticlă.
	Piese deteriorate	Verificați dacă toate piesele sunt intacte și fără defecte, cum ar fi crăpăturile; verificați frecvent supapa de silicon. Pentru piese de schimb, contactați InnoGIO pentru a obține înlocuirea.
	Scăpare de aer între sân și pâlnie	Apăsăți ferm pâlnia de sân cu perna de silicon pe sânul dumneavoastră. Repoziționați pâlnia de sân pe sânul dumneavoastră.
Disconfort sau durere	Reglați presiunea de aspirație mai mică. Schimbați poziția pâlniei de sân pe sânul dumneavoastră. Dacă durerea persistă, consultați consilierul de alăptare sau medicul dumneavoastră.	

Acest aparat nu trebuie aruncat la gunoii menajer la sfârșitul duratei sale de viață, ci trebuie predat unui punct central pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice de uz casnic.

innoGIO

Importator: InnoGIO sp. z o. o.
Ostródzka Street 74H, 03 – 289 Warsaw, Poland
www.innogio.com



 @innoGIO.official

 @innogio_com