


GIO-360

LV

innoGIO

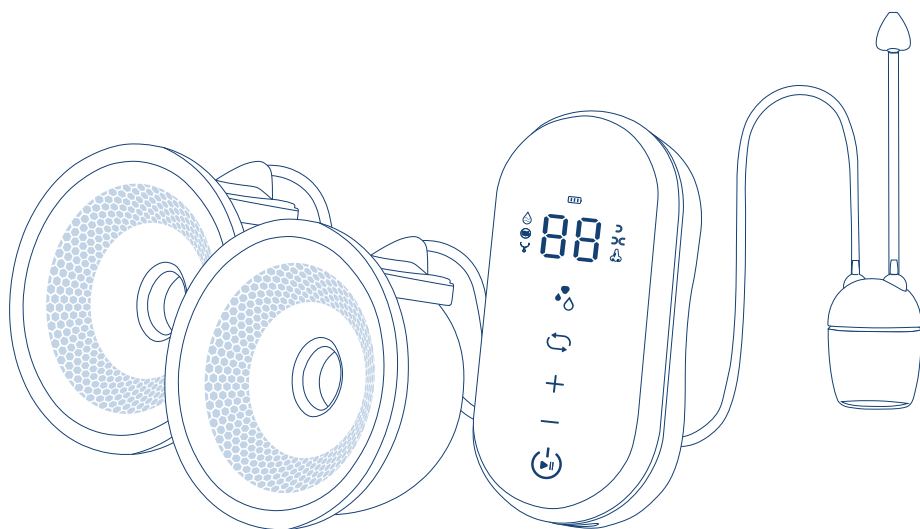

GIOmum Line Soft

Dubultā elektriskā laktatora
ar deguna aspiratoru

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠO ROKASGRĀMATU PIRMS PRODUKTA LIETOŠANAS UN SAGLABĀJIET TO NĀKOTNES ATSAUCĒM

IEVADS

Labākais barības avots bērna veselībai ir mātes piens. Tomēr, ja dažreiz nav iespējams barot bērnu tieši, varat izmantot **GIOmum Line Soft GIO-360 dubulto elektrisku krūts sūkni ar deguna aspiratoru**.

GIOmum Line Soft – dubultā elektriskā krūts sūkņa ar deguna aspiratoru ir mīksta, bērna sūkšana stimulē piena izdalīšanos no krūts, kā arī mazina sāpes krūtīs (ko izraisa krūšu pietūkums). Nosūciet pienu un sasaldējiet to, lai bērns varētu baroties tikai ar mātes pienu, arī tad, ja māte nav klāt. Produktam ir arī deguna aspiratora funkcija gadījumam, ja bērns saslimst.

IERĪCES ĪPAŠĪBAS

- Dubultā laktators nodrošina lielāku efektivitāti un īsāku sūkšanas laiku. Piltuve ietilpst krūšturī un nav jātur rokās sūkšanas laikā.
- Piena sūkknēšana no vienas vai abām krūtīm. Intuitīvi un ērti lietojami simboli.
- 2 in 1: Laktators ar deguna aspiratora funkciju ir daudzfunkcionāls, viegli uzstādāms un tīrāms.
- Mīkstais silikona deguna aspirators ir ērts bērnam. LED vadības elementi ar pieskārienu pogām.
- Spēcīga un vienmērīga sūkšana 3 sūkšanas režīmos: masāžas režīms/stimulācijas režīms/sūkšanas režīms (9 līmeņi).
- Liela uzlādējama baterija ar jaudu līdz 2200 mAh nodrošina ilgu lietošanas laiku.
- Vienvirziena vārsts novērš atpakaļplūsmu. Uzlādējama baterija.

3 SŪKŠANAS REŽĪMI

• Masāžas režīms:

Visi masāžas režīma līmeņi darbojas regulārā un maigā ritmā, ko papildina vidēja intensitāte sūkšana, lai efektīvi stimulētu piena ražošanu. Masāžas režīmā ir pieejami 9 līmeņi; augstākajos līmeņos sūkšanas intensitāte palielinās, sūkšana kļūst mierīgāka un enerģiskāka, kā arī pagarinās sūkšanas laiks. Nospiežot ieslēgšanas pogu, sūkšanas intensitāte palielināsies.


• Piena sūkšanas režīms:

Visi izsūkknēšanas līmeņi darbojas regulārā un maigā ritmā, kam seko vidēja sūkšana, lai efektīvi izsūktu pienu. Izsūkknēšanas režīmā ir pieejami 9 līmeņi; augstākajos līmeņos sūkšanas spēks palielināsies, sūkšana kļūs mierīgāka un enerģiskāka, turklāt pagarināsies sūkšanas laiks.

● **Stimulācijas režīms:**


Stimulācijas režīmā ir pieejami 9 līmeņi. Katram līmenim ir savs ritms ar trim viegliem sūkšanas kustībām pēc kārtas, kam seko viena spēcīga stimulācija, kas nozīmē trīs masāžas un vienu atvilkšanu. Ritms palīdz stimulēt piena izdalīšanos.

REŽĪMS

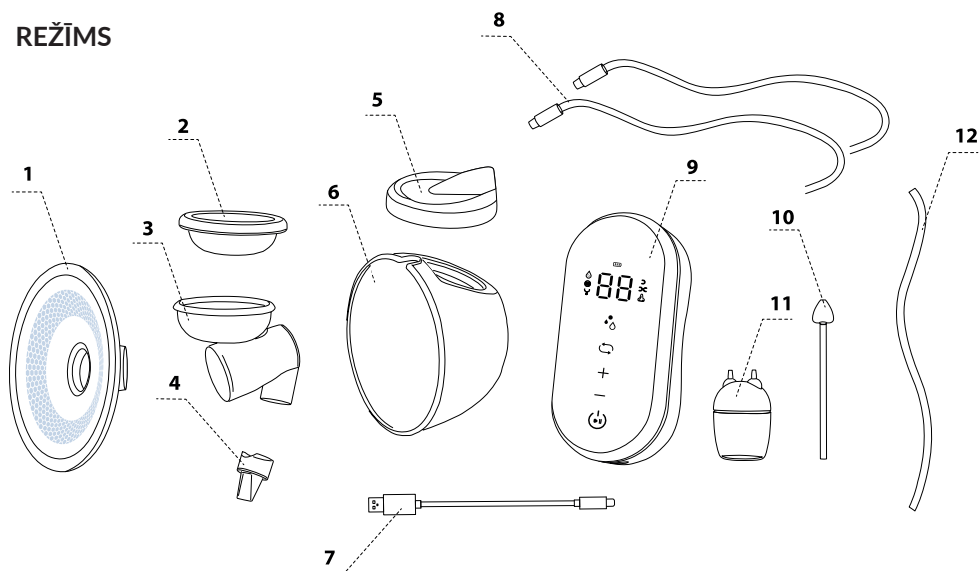

No.	Nosaukums	Daudzums	Materiāls	Siltuma izturības temperatūra
1	Krūšu uzlikas 27 mm	2	Silikons	~ 180°C
2	Silikona uzlikas	2	Silikons	~ 180°C
3	Savienotājs	2	Polipropilēns (PP)	~ 120°C
4	Sūkšanas vārsts	2	Silikons	~ 180°C
5	Virsējais vāks	2	Polipropilēns (PP)	~ 120°C
6	Savākšanas čaula	2	Polipropilēns (PP)	~ 120°C
7	USB kabelis	1	xx	xx
8	Gaisa vadi	2	Polivinilhlorīds (PVC)	~ 60°C
9	Motors	1	xx	xx
10	Deguna aspiratora vads	1	Silikons	~ 180°C
11	Deguna izdalījumu tvertne	1	Polipropilēns (PP)	~ 120°C
12	Gaisa vads degunai	1	Polivinilhlorīds (PVC)	~ 60°C

LED EKRĀNS


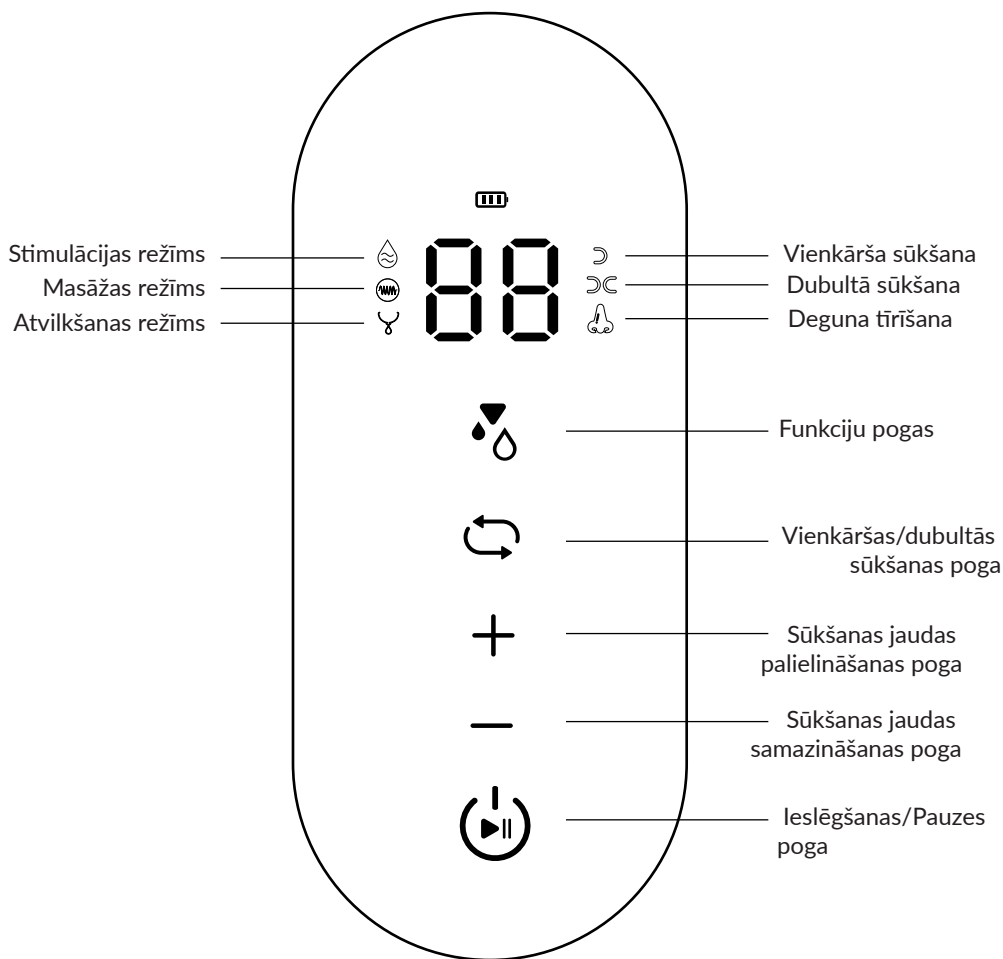


TEHNISKIE DATI

- Barošanas avots: 100–240 V ~ 50/60 Hz ar DC 5 V – 1 A barošanas bloku (nav iekļauts).
- Jauda: 5 W; Akumulatora jauda: 2200 mAh.
- Maksimālais spiediens: 315 mmHg± 7,5 mmHg
- Kopējais svars: 0,63 kg
- Uzglabāšanas temperatūra: 5° līdz 40°C
- Uzglabāšanas mitrums: 10% – 90%RH
- Atmosfēras spiediens: 850 Hpa – 1060 Hpa






MONTAŽAS SOLIS

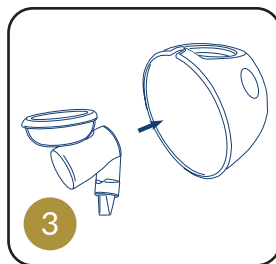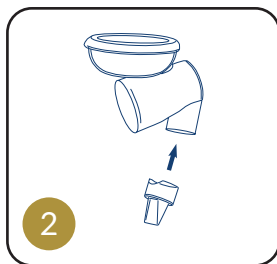

1.solis Pievienojiet silikona uzsūcošo uznavu (2) savienotājam (3). Nospiediet silikona uzsūcošās uznavas malas, lai pilnībā nosegtu savienotāju.

2.solis Novietojiet sūkšanas vārstu (4) tā, lai tas pieskartos savienotāja (3) malai.




3.solis Ievietojiet savienotāju (2) savākšanas čaulas (6) iekšējā atvērumā. Iespiediet savienotāju un pārliecinieties, ka tas ir pareizi nostiprināts atvērumā.

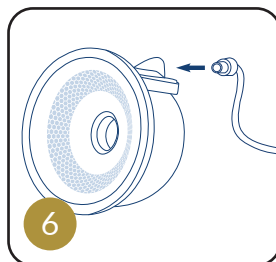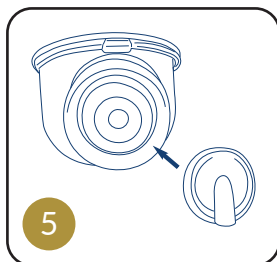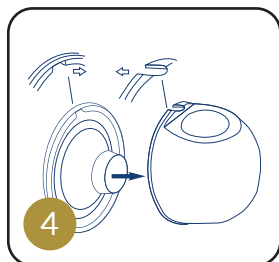

4.solis Uzlieciet krūšu uzliku (1) uz savākšanas čaulas (6). Sasveriet krūšu uzlikas iecirtumu ar savākšanas čaulas iecirtumu.

5.solis Uzlieciet augšējo vāku (5) uz savākšanas čaulas (6).

6.solis Pievienojiet pirmā gaisa vada (8) galu pie pirmā savākšanas korpusa augšējā vāka (5).

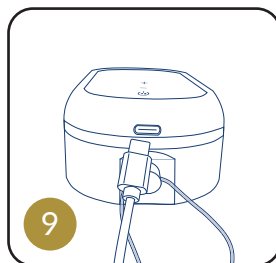
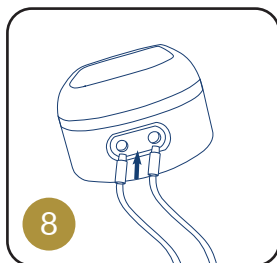
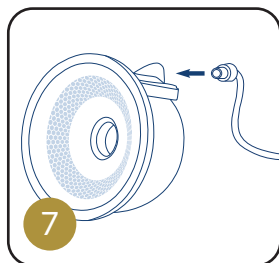


7.solis Pievienojiet otrā gaisa vada (8) galu pie otrā savākšanas korpusa augšējā vāka (5) otrā savākšanas čaulas.

8.solis Ievietojiet divus atlikušos gaisa vadu (8) galus divās gaisa atvērumos uz motora (9).

9.solis Izmantojiet USB kabeli (7), lai uzlādētu motoru (9) pirms vai pēc katras lietošanas reizes.

MONTĀŽAS SOLIS

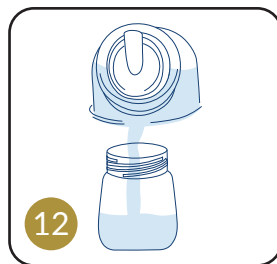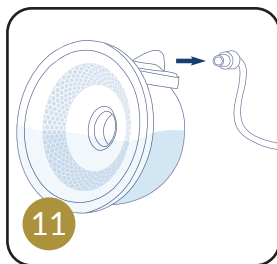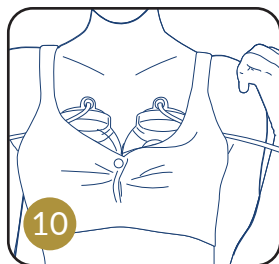


10.solis Ievietojiet divus krūšu uzlikus krūštūrī. Pārļiecinieties, ka katrs uzliks cieši pieguļ krūti un gaisa vadi nav bloķēti.

11.solis Pēc sūkšanas atvienojiet gaisa vadus (8).


12.solis Pārlejiet pienu no savākšanas trauka (6) pudelē.

Piezīme:


- Lai izmantotu vienkāršās iesūkšanas funkciju , izmantojiet kreiso gaisa atveri motorā. Tā ir standarta atvere vienkāršai iesūkšanai, labā gaisa atvere šim nolūkam nevar tikt izmantota.
- Atsevišķie iesūkšanas simboli atrodas blakus attiecīgajām gaisa atverēm.

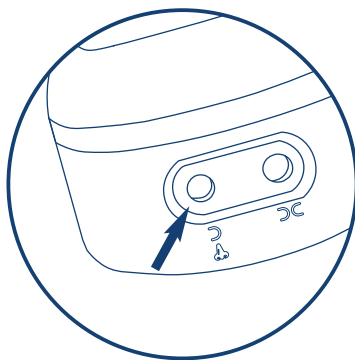


FEJĒS UN RĒĶINĀŠANAS PĀRBAUDE

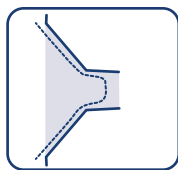

Pārļiecinieties, ka krūšu uzlikas ir cieši tās pilnībā.

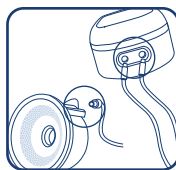

Pārļiecinieties, ka gaisa vadi ir cieši pievienoti.

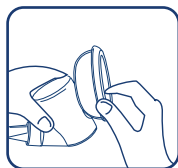




Pārbaudiet, vai silikona iesūkšanas uzlikas (2) cieši pieguļ pie cauruļu savienotāja (3).



Pārbaudiet, vai iesūkšanas vārsts (4) ir pareizi uzstādīts un atrodas uz caurules savienotāja (3) malām.

SVARĪGI

Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem, lai novērstu piena noplūdi.

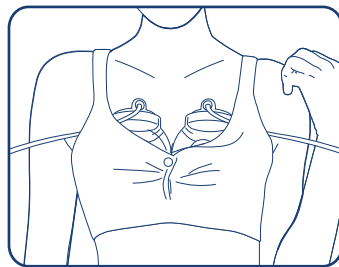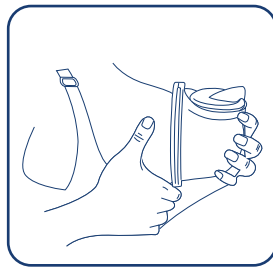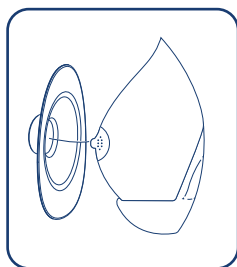

Pareiza krūtsgala novietošana uz krūts uzlikas ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu komfortu, efektīvu piena sūkņēšanu un produktivitāti. Lai izvairītos no diskomforta, krūtsgalam jābūt pareizi novietotam uz krūts uzlikas pirms sūkņēšanas sākšanas.

Ievērojiet pareizo stāju

Labākā pozīcija zīdīšanai ir sēdus stāvus un nedaudz uz priekšu noliekties. Noliekties uz priekšu sēdus vai stāvēt var atvieglot piena izsūkņēšanu. Šī pozīcija var būt ērtāka mātei. Piena izsūkņēšana guļus pozīcijā izmainīs uzlikas uz krūts novietojumu. Izsūkņēšana guļus pozīcijā izraisīs to, ka uzlikas uz krūts atradīsies zemāk nekā piena izplūdes atvere, notiks piena atpakaļplūsma un tas netiks pienācīgi izsūkņēts.

Zemāk ir attēlota pozīcija, lietojot krūts sūkni:



Sēžot taisnā stāvoklī arī ir pareiza poza piena sūkšanai, izvēlieties pozīciju atbilstoši savām vēlmēm.



Izvairieties no atliešanās atpakaļ, izsūcot pienu, jo tas var tas var izraisīt piena izlīšanu.



Labākā pozīcija zīdīšanai ir sēdēt taisni un nedaudz noliekties uz priekšu.



Nedrīkst izsūkt pienu guļus stāvoklī.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Sterilizējiet laktatora daļas, kas nonāk saskarē ar pienu.
2. Nomazgājiet rokas un pēc tam salieki sterilizētās detaļas, ievērojot MONTĀŽAS SOĻUS.
3. Apsēdies visērtākajā pozā, augšdaļu nedaudz nolieciet uz priekšu.
4. Viegli masējiet krūti vai spiediet to ar siltu dvieli.
5. Ievietojiet krūtsgalu masāžas spilventiņā tā, lai uzliktne cieši aptvertu krūti.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Masāžas/ Stimulācijas/ Sūkņēšanas režīms:

- Nospiediet un turiet pogu  2 sekundes, lai ieslēgtu LED apgaismojumu. Sūknis automātiski sāks vienreizējas sūkšanas režīmu  un ar iepriekš saglabāto līmeni. Laika LED displejs rādīs "00" un sāks skaitīt darbības laiku. Nospiediet pogu Vienreizējā/Divkārsā sūkņēšana , lai pārslēgtos uz divkārsās sūkņēšanas režīmu .
- Nospiediet pogu , lai izvēlētos stimulācijas režīmu. Tas sāksies no iepriekš saglabātā stimulācijas līmeņa . Izmantojiet pogas  un , lai izvēlētos sūkšanas līmeni šajā režīmā (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9). Kopā pieejami 9 stimulācijas līmeņi. Lai apturētu motoru, īsi nospiediet pogu .
- Nospiediet pogu , lai pārslēgtos uz masāžas režīmu. Tas sāksies no iepriekš saglabātā masāžas līmeņa, ko norāda  simbols. Izmantojiet pogas  un , lai izvēlētos masāžas līmeni šajā režīmā (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9). Kopā pieejami 9 masāžas līmeņi. Nospiediet pogu , lai apturētu motoru.
- Nospiediet pogu , lai pārslēgtos uz sūkņēšanas režīmu. Tas sāksies no iepriekš saglabātā sūkņēšanas līmeņa, ko norāda  simbols. Izmantojiet pogas  un , lai izvēlētos sūkņēšanas līmeni šajā režīmā (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9). Kopā pieejami 9 sūkņēšanas līmeņi. Nospiediet pogu , lai apturētu motoru.

2. Motors automātiski izslēdzas pēc 30 minūtēm lietošanas.

3. Nospiediet un turiet pogu 2 sekundes, lai izslēgtu motoru.


UZMANĪBU!

1. Pirms un pēc katras lietošanas visas detaļas pēc izņemšanas ir jāsterilizē.
2. Pirms laktatora lietošanas iepazīstieties ar pieejamajiem sūkšanas režīmiem. Laktatoru var pārbaudīt, uzliekot piltuvi uz rokas vai pleca.
3. Pārlicinieties, ka nevienai detaļai nav plīsumu vai izvērztu elementu, īpaši vārsta galvas savienojumā ar ierīces vāku, jo tas ietekmēs laktatora sūkšanu.
4. Sazinieties ar ārstu vai laktācijas konsultantu, ja izsūcat tikai nelielu daudzumu piena vai vispār neizsūcat, vai ja izsūkšana ir sāpīga.
5. Šī ierīce nav rotālieta, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
6. NEDRĪKST novietot ierīci siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie radiatoriem, saulē sildītiem logiem utt.


PADOMES:

- Ja piens neizplūst, atslābinieties un atkārtoti uzlieciet uzgali uz krūts, pēc tam turpiniet sūkt.
- Ja neizdodas izsūkt pienu, neizmantojiet krūts sūkni ilgāk par piecām minūtēm. Mēģiniet izsūkt pienu citreiz.
- Ja izsūcot pienu, jūtat diskomfortu vai sāpes, konsultējieties ar laktācijas konsultantu vai ārstu.
- Bieža piena sūkņēšana (ik pēc 2–3 stundām) ir efektīvāka un labvēlīgāka krūtīm.
- Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pēc iespējas vienmēr izmantojiet barošanas bloku, nevis baterijas.


DZĪSNU IZSMĒĶŠANAS FUNKCIJA

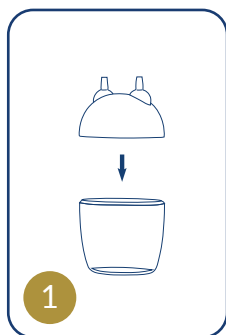


1.solis: Uzlieciet vāku uz deguna izdalījumu tvertnes (11).

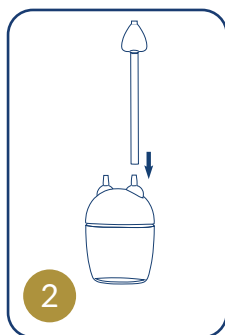


2.solis: Pievienojiet aspiratora cauruli (10) pirmajam deguna izdalījumu konteinera atvērsumam (11).

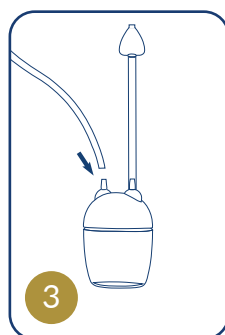


3.solis: Pievienojiet gaisa vadu degunam (12) otrajai deguna izdalījumu tvertnes atverei (11).

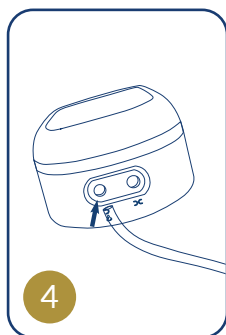

4.solis: Ievietojiet aspiratora otru galu (12) kreisajā gaisa atverē uz motora (9).

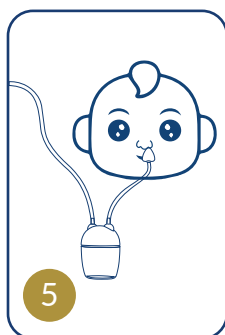

5.solis: Ievietojiet otru aspiratora galu (10) bērnam ērtākajā deguna atverē.

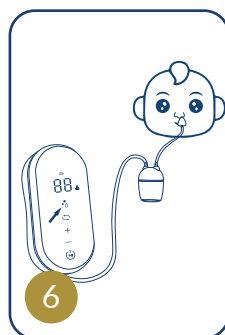

6.solis: Nospiediet pogu , pēc tam nospiediet funkciju pogu , lai izvēlētos  deguna sūkšanas režīmu


Deguna sekrēcijas atsūkšanas funkcija:

- Pārliecinieties, ka deguna aspiratora caurule, gaisa caurule un deguna sekrēcijas trauks ir sterilizēti pirms un pēc bērna deguna tīrīšanas.
- Pārliecinieties, ka visas detaļas ir cieši samontētas, lai palielinātu sūkšanas efektivitāti.
- Kreisais gaisa atvads ir noklusējuma režīms deguna tīrīšanai, labais gaisa atvads šim nolūkam nav izmantojams.
- Nospiediet pogu , pēc tam nospiediet funkcijas pogu , lai izvēlētos deguna tīrīšanas režīmu . Pielāgojiet aspiratora darbības līmeni tā, lai tas būtu ērts bērnam, bet vienlaikus nodrošinātu efektīvu tīrīšanu. Izmantojiet pogas  un , lai iestatītu aspiratora darbības līmeni. Pieejami 9 deguna aspiratora darbības līmeņi (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9). Turiet nospiestu pogu , lai apturētu atsūkšanu.

LACTATOR TĪRĪŠANA

Izjauciet visas laktatora detaļas un rūpīgi nomazgājiet tās ar tīru, siltu ūdeni un ziepēm. Ieteicams sterilizēt produktu, iemērcot tā detaļas verdošā ūdenī uz 2–3 minūtēm vai izmantojot tvaika sterilizatoru / UV sterilizatoru / mikroviļņu krāsni.

Pēc tam visas detaļas nosusiniet un glabājiet vēsā un sausā vietā.

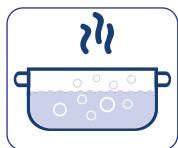

Vārošs ūdens



Tvaika sterilizators



UV sterilizators



Mikrovlnā krāsns



Plastmasas detaļas var tikt bojātas vai deformētas ilgstošas saskares ar augstām temperatūrām rezultātā.

BAROJUM

Pievienojiet DC savienotāju USB kabelim un ievietojiet to USB ligzdā, ievietojiet barošanas bloka spraudni barošanas ligzdā.



Lietotājs var izmantot arī citu digitālo ierīču tīkla adapteri, piemēram, tālruna vai power bank lādētāju. Tomēr mēs iesakām izmantot adapteri ar jaudu 5V-2A.

LITIJA-JONA BATERIJA

Šim modelim ir iebūvēta atkārtoti uzlādējama litija jonu baterija, kas atvieglo transportēšanu, jo nepieciešamības gadījumā ierīci var pievienot strāvas padevei. Pirms pirmās lietošanas baterija ir jāuzlādē pilnībā. Nelādējiet bateriju ilgstoši.

4 stundu uzlāde nodrošina vairāk nekā 2 stundu darbību (neizņemiet iekšējo litija bateriju).

Ja baterijas simbols mirgo, tas nozīmē, ka baterijas uzlādes līmenis ir zems; uzlādējiet to pirms pilnīgas izlādes.

Piezīme:

- Kad motors darbojas, nav pieslēgts galvenajam barošanas avotam, tiek parādīts baterijas stāvoklis.
- Ja litija baterija netiek lietota ilgāku laiku, tā var izlādēties.
- Ja laktators ir izlādējies, pieslēdziet to strāvas padevei, lai to aktivizētu. Pagaidiet apmēram 10 minūtes, līdz ekrāns iedegsies, pēc tam turpiniet uzlādēšanu. Ja baterija neaktivizējas ilgāk par pusstundu, sazinieties ar InnoGIO klientu apkalpošanas dienestu.

Šo produktu var uzlādēt ar USB kabeli, to var uzlādēt arī ar strāvas padevi / datoru un power banku. Viegļāk lietot ceļojumos, ērtāk lietot mājām.

KĀ UZGLABĀT SAVĀKTU PIENU

Piena pudele ir gatava bērnam. Ja nav iespējams barot bērnu uzreiz pēc piena sūknēšanas, mātes piens jāuzglabā tīrā un hermētiski noslēgtā traukā ar uzlīmi, uz kuras norādīts piena sūknēšanas datums. Var izmantot arī piena pudeles vai maisījumus.

Pamatnostādnes par piena maksimālo uzglabāšanas laiku

	Saldētava (~ -18°C)	Ledusskapis (~ -4°C)	Ledus komprese (~ -15°C)	Istabas temperatūra (22~26°C)
SVAIGS	3 mēneši	1 diena	8 stundas	3-4 stundas
ATKAUSĒŠANA LEDUSSKAPĪ	Neatstāt atkārtoti	1 diena	Neuzglabāt	3-4 stundas
ATKAUSĒŠANA SILDĪTĀ ŪDENĪ	Neatstāt atkārtoti	4 stundas	Neuzglabāt	Pēc barošanas drīz pabarotiet bērnu; pēc barošanas izmetiet atlikušo barību

Piezīme:

- Neuzglabājiet pienu karstā laikā.
- Piena atkausēšanai nelietojiet ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 60 °C.
- Pienu nedrīkst sildīt mikroviļņu krāsnī.
- Svaigu pienu nedrīkst sajaukt ar saldētu pienu.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

	Iemesls	Pārbaude un risinājums
Motors nedarbojas	Veiktspēja	• Pārlicinieties, ka barošanas adapteris ir pareizi pievienots barošanas blokam un galvenajai ierīcei. • Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta. • Ja motors nedarbojas, kad ierīce ir ieslēgta, sazinieties ar InnoGIO izplatītāju.
	Akumulators	Pārbaudiet, vai akumulators ir uzlādēts, un, ja nepieciešams, uzlādējiet to.
Zema sūkšanas jauda vai nesūc vispār	Montāžas kļūda	• Pārbaudiet, vai nav pazudusi kāda detaļa. • Pārlicinieties, ka silikona masāžas spilventiņš ir pareizi piestiprināts pie krūšu uzgāļa malas. • Cieši piestipriniet vakuuma komplektu un krūšu uzgāli. • Pārbaudiet, vai silikona membrāna ir pareizi novietota. • Silikona vārstam ir jāpiestiprinās cieši. • Pārbaudiet, vai silikona caurule ir pareizi pievienota galvenajai ierīcei. • Piespiediet krūšu sūkni cieši pie krūts. • Pārbaudiet visu silikona detaļu novietojumu. • Akumulatora uzlādes samazinoties, var pakāpeniski samazināties arī krūšu sūkšanas jauda
	Bojātas detaļas	Pārbaudiet, vai visi detaļi ir veseli un bez defektiem, piemēram, vai uz tiem nav plīsumu. Vārsta noliešana dēļ var samazināties iesūkšanas jauda. Regulāri pārbaudiet silikona vārstu. Vārsts tīrīšanas laikā var viegli sabojāties, tādēļ to tīrīt uzmanīgi. Silikona detaļas ir patērējamas detaļas (vārsts, membrāna utt.), kuras var iegādāties kā rezerves detaļas. Lai iegādātos rezerves detaļas, sazinieties ar InnoGIO, lai veiktu nomainītu.
	Gaisa noplūde pie krūts uzgāļa	• Novietojiet krūts uzgāli pareizi un cieši pie krūts, lai novērstu gaisa noplūdi. • Pārlicinieties, ka krūts uzgālis atgriežas sākotnējā formā pēc lietošanas.
Neērta sajūta vai sāpes krūts rajonā	• Samaziniet sūkšanas jaudu. • Pārlicinieties, ka krūts uzgālis ir pareizi novietots uz krūts. • Ja sāpes saglabājas, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar speciālistu.	

Pēc lietošanas termiņa beigām šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā jānodod centrālajā sadzīves elektropreču un elektronisko ierīču pārstrādes punktā.



innoGIO

Ražots Ķīnā pēc **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Varšava, Polija
www.innogio.com

 @innoGIO.official

 @innogio_com