


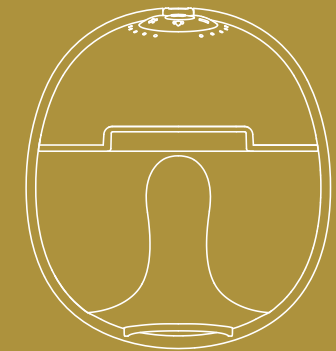

GIOmum Linea Premium Warm


Tiralatte elettrico indossabile
con funzione di impacco caldo

MANUALE UTENTE

Leggere il manuale d'uso prima di utilizzare il tiralatte
e conservarlo per future consultazioni.

Diagramma della struttura del prodotto

01

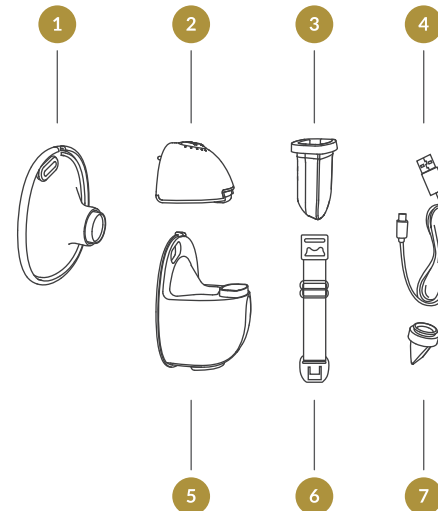


Elenco delle parti:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 Flangia | 4 Cavo di ricarica USB |
| 2 Motore della pompa | 5 Coppa Raccogli latte |
| 3 Diaframma in silicone | 6 Fibbia di regolazione del reggiseno |
| | 7 Valvola |

Descrizione del display a LED e della funzione dei pulsanti

02

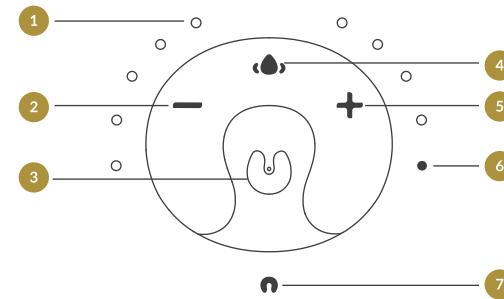

- 9 luci corrispondono a 9 livelli di espressione (da sinistra a destra)
- Pulsante di abbassamento del livello
- Pulsante di accensione/tasto di selezione della modalità
- Pulsante di compressione a caldo
- Pulsante di salita di livello
- Indicatore di impacco caldo
- Indicatore di alimentazione

Cosa c'è nella scatola

- Flangia
- Motore della pompa
- Diaframma in silicone
- Valvola
- Cavo di ricarica USB
- Coppa Raccogli latte
- Fibbia di regolazione del reggiseno

Montaggio

03

Per assemblare la pompa, seguire i passaggi indicati di seguito.


AVVERTENZE

- Assicurarsi di pulire il tiralatte come indicato nel presente manuale d'uso.
- Assicurarsi di assemblare correttamente il tiralatte come indicato nel presente manuale d'uso.
- Per evitare perdite, rimuovere i residui intorno al bordo prima di assemblarlo.
- Lavarsi accuratamente le mani prima di assemblare i componenti puliti


- Montare la valvola sulla coppa raccogli latte, prestando attenzione all'angolo di montaggio.




- Inserire il diaframma in silicone nella coppa raccogli latte e premere con le mani per far aderire bene i bordi e garantire una tenuta perfetta.

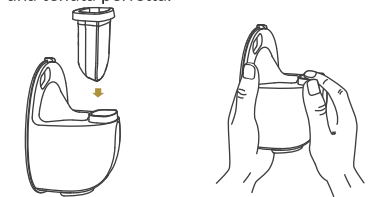

- Per montare la flangia sul collettore del latte, assicurarsi di allineare la scanalatura di deviazione sulla flangia con la scanalatura di riflusso sulla coppa raccogli latte. Assicurarsi che l'elemento magnetico sulla flangia sia allineato con la scanalatura dell'elemento magnetico sulla coppa raccogli latte, quindi premere i bordi con entrambe le mani per garantire la tenuta.

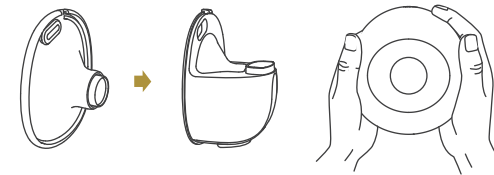

- Montare il corpo principale del tiralatte sulla coppa raccogli latte, allineare la tacca sotto il corpo principale con il diaframma in silicone e assemblarlo verso il basso per adattarlo alla coppa raccogli latte e garantire una tenuta completa.

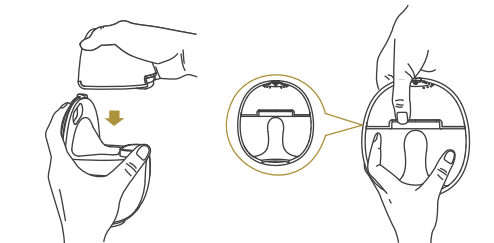


AVVERTENZE

Il tiralatte non funziona durante la carica.


Guida all'estrazione

05


- Premere saldamente la flangia contro il seno, senza lasciare spazi vuoti e assicurandosi che i capezzoli siano centrati. Mantenere il dispositivo in posizione verticale. Fate attenzione a non distorcere la posizione del dispositivo e del vostro torace, altrimenti il tiralatte non potrà aspirare..

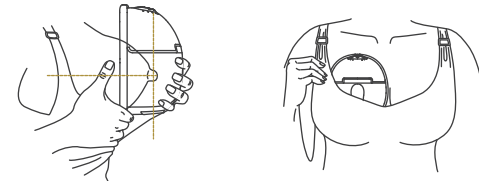


- Premere a lungo il pulsante di accensione per avviare il tiralatte finché non si accende lo schermo.

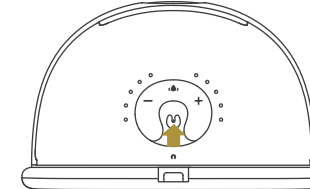


- Premere brevemente il pulsante "M" dopo l'accensione del tiralatte per passare da una modalità all'altra. Con questo pulsante è possibile passare da una modalità all'altra (modalità di estrazione, modalità massaggio). La spia lampeggia in modalità massaggio e rimane accesa in modalità estrazione.

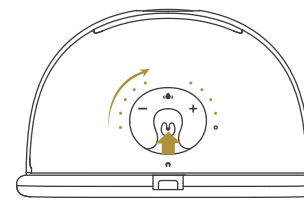


- Per ogni modalità sono disponibili 9 livelli. Ogni luce corrisponde a uno dei 9 livelli di estrazione (aumento da sinistra a destra). È possibile selezionare il livello di aspirazione più comodo premendo brevemente il pulsante "+" per aumentare il livello e il pulsante "-" per diminuirlo.

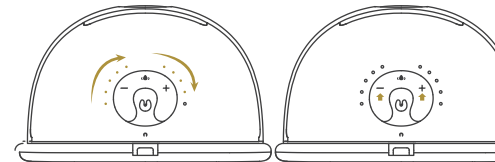

- Premere brevemente il pulsante "H" per attivare/disattivare la funzione di compressione a caldo. Quando la funzione di compressione a caldo è attivata, l'indicatore di compressione a caldo è acceso (il lampeggiamento indica che si sta riscaldando, la luce continua indica che si sta mantenendo caldo). Se l'indicatore di compressione a caldo non è acceso, verificare che l'elemento magnetico della flangia sia allineato con il motore del tiralatte. Dopo aver utilizzato la funzione di compressione a caldo, premere brevemente il pulsante "H"; se l'indicatore di compressione a caldo non si accende, significa che la funzione è disattivata.

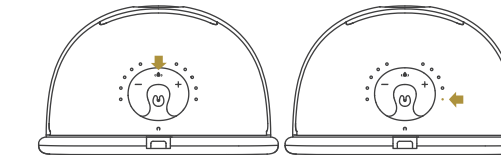


- Premere a lungo il pulsante di accensione "M" per spegnere il tiralatte.

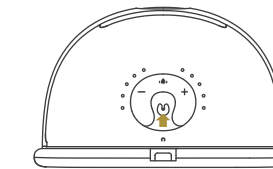


Suggerimenti:

- Questo modello è dotato di una funzione di memoria incorporata; quando si accende il dispositivo, questo inserisce automaticamente la modalità di stimolazione e il livello di aspirazione utilizzati più di recente.
- Il tiralatte si arresta automaticamente dopo 20 minuti di funzionamento.


1. Durante l'utilizzo del tiralatte, quando il dispositivo è completamente carico, l'indicatore del livello di potenza è verde e rimane acceso; quando il livello di potenza è basso, l'indicatore diventa rosso. Caricare il dispositivo in tempo.

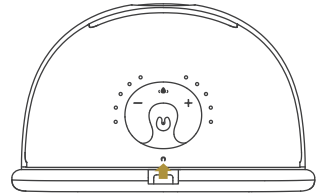

2. Il dispositivo non può essere utilizzato durante la carica; in questo momento l'interfaccia del display mostra solo il livello di potenza attuale. Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso, la luce verde lampeggia quando il dispositivo è quasi completamente carico e rimane accesa quando è completamente carico.

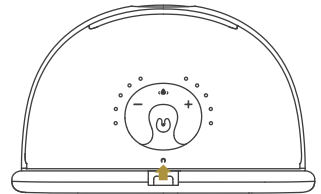

Rilassatevi e sedetevi su una sedia comoda, quindi piegatevi leggermente in avanti (usate un cuscino per sostenere la schiena). Assicuratevi di tenere il tiralatte e la coppa del seno in posizione verticale.

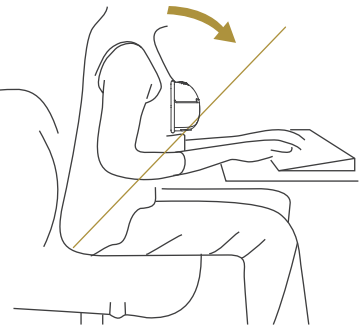

Posizione di allattamento

Pulizia e manutenzione

	Primo utilizzo	Dopo ogni utilizzo
Corpo principale	Accendere la pompa premendo il pulsante di accensione.	Se necessario, pulire con un panno pulito e umido con alcol etilico al 70% o alcol isopropilico. Non immergere il tiralatte in acqua.
Flangia, diaframma in silicone, valvola e coppa raccogli latte	Bollire in acqua per 5 minuti. Non inserire i seguenti componenti in un forno a microonde: Flangia, diaframma in silicone, valvola e collettore del latte.	Pulire con un detergente delicato per piatti o con acqua pulita.

AVVERTENZE

- fare attenzione quando si smonta e si pulisce la valvola; se la valvola è danneggiata, il tiralatte non funzionerà correttamente.
- Per pulire la valvola, strofinarla delicatamente in acqua calda con qualche goccia di detergente. Non inserire oggetti nella valvola per non danneggiare il dispositivo.

Pulizia a mano

- Collocare le parti del tiralatte in una bacinella pulita utilizzata solo per l'alimentazione dei bambini. Non mettere le parti del tiralatte direttamente nel lavandino.
- Aggiungere il detersivo e l'acqua calda nella bacinella.
- Pulire gli articoli con una spazzola pulita usata solo per gli articoli per l'alimentazione dei bambini.
- Sciacquare gli oggetti sotto l'acqua corrente o immergerli in acqua pulita in una bacinella separata.
- Asciugare accuratamente all'aria. Posizionare le parti del tiralatte, la bacinella e lo spazzolino per biberon su un canovaccio pulito e inutilizzato o su un tovagliolo di carta in un'area protetta da sporco e polvere. Non utilizzare l'asciugapiatti per strofinare o tamponare gli oggetti.
- Pulire la bacinella e lo spazzolino per biberon. Sciacquarli bene e lasciarli asciugare all'aria dopo ogni utilizzo. Lavarli a mano almeno ogni pochi giorni.

Regolare la lunghezza delle spalline del reggiseno per rendere più confortevole l'aspirazione. Agganciare un'estremità della fibbia di regolazione alla fibbia interna del reggiseno per l'allattamento. La lunghezza del reggiseno può essere regolata agganciando la fibbia del reggiseno da allattamento all'altra estremità della fibbia di regolazione del reggiseno.

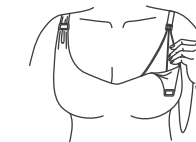


Immagine 1

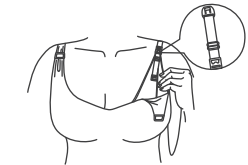


Immagine 2

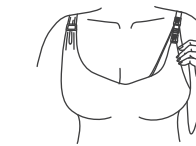



Immagine 3

Al termine dell'estrazione, rimuovere il tiralatte dal seno. Tenere il tiralatte in posizione verticale e rimuovere la parte del motore. Tenere la coppa raccogli latte per versare il latte materno nel biberon. Assicurarsi che la fessura della coppa raccogli latte della coppa del seno sia allineata con l'imboccatura del biberon per evitare di versare il latte materno.

1. Al termine dell'estrazione, premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo e rompere con un dito il sigillo tra il seno e l'imbuto del tiralatte, quindi rimuovere con cautela il tiralatte dal seno.



1. Separare il flacone dal motore della pompa per prepararlo alla somministrazione/conservazione. Pulire le altre parti utilizzate seguendo le istruzioni.

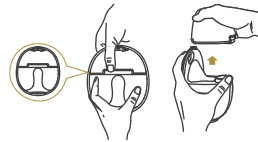

1. Versare il latte nel biberon; assicurarsi che sia allineato con l'imboccatura del biberon.



Conservazione del latte materno

1. Conservare solo il latte materno raccolto con tiralatte sterilizzati.
2. Il latte estratto può essere messo in un sacchetto per la conservazione del latte pulito e sterilizzato o in una bottiglia per il latte con un cuscinetto di chiusura e posto immediatamente in frigorifero.

Come conservare il latte materno

1. Non congelare il latte materno più di una volta.
2. Non mescolare il latte materno fresco con quello congelato.
3. Assicurarsi di gettare il latte materno avanzato dopo la poppata.
4. Il latte estratto può essere conservato in frigorifero per 48 ore o nel congelatore per un massimo di tre mesi. Etichettare la bottiglia o il sacchetto di conservazione del latte con una data e un'ora chiaramente indicate.

Come scongelare il latte materno

Mettere il latte materno congelato nello scomparto del frigorifero per una notte per scongelarlo. Se è necessario utilizzare il latte congelato con urgenza, è possibile utilizzare una bacinella di acqua calda per scongelare il latte materno. Una volta scongelato, il latte materno deve essere consumato entro 24 ore.

Come scaldare il latte materno

1. Mettete il biberon in una ciotola di acqua calda o riscaldate il latte materno in modo sicuro e veloce utilizzando uno scaldabiberon e uno scaldavivande.
2. Attenzione! Prima di allattare il vostro bambino, controllate la temperatura del latte materno.

3. Non usare il forno o il microonde per scaldare il latte materno, perché potrebbe distruggere importanti sostanze nutritive e anticorpi.
4. Inoltre, un riscaldamento non uniforme può causare un parziale surriscaldamento del liquido, con conseguenti ustioni.
5. Non immergere la bottiglia di conservazione del latte in acqua bollente per riscaldarla, perché potrebbe rompersi o incrinarsi.

innogIO

Prodotto in Cina per INNOGIO sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia

www.innogio.com

@innogIO.official @innogio_com

