


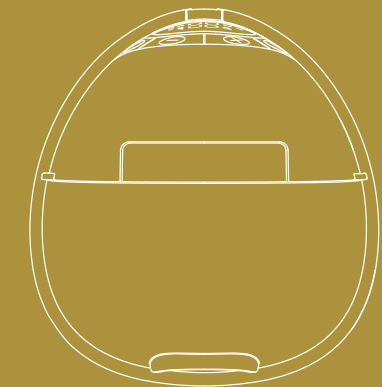

GIOmum Linea Discreet

Tiralatte elettrico doppio indossabile

MANUALE UTENTE

Prima di utilizzare il tiralatte indossabile, leggere il presente manuale d'uso e conservarlo per future consultazioni.

Descrizione del prodotto 01

In primo luogo, il tiralatte può simulare il modello di suzione di un neonato, aiutare a succhiare il seno, promuovere la secrezione ipofisaria di prolattina e stimolare la secrezione di latte dal seno per aumentare la produzione di latte, contribuendo così a soddisfare le esigenze del bambino.


In secondo luogo, il tiralatte può favorire la contrazione dell'epitelio mammario per promuovere l'espulsione del latte dai dotti mammari, assicurare lo svuotamento del seno e alleviare l'ingorgo mammario. Inoltre, l'uso regolare del tiralatte può favorire l'estrazione del latte in eccesso dai dotti mammari, contribuendo a prevenire la mastite acuta.

In terzo luogo, l'uso del tiralatte può migliorare il tasso di allattamento diretto al seno e aumentare la fiducia delle madri nell'allattamento, a vantaggio sia loro che dei bambini.

In quarto luogo, questo dispositivo è adatto per l'uso personale a casa e non è raccomandato per l'uso come strumento ausiliario da parte di istituzioni mediche.

Attenzione: se la potenza di aspirazione è ridotta, probabilmente è necessario sostituire la valvola o il diaframma. Le parti in silicone sono soggette a usura e devono essere sostituite quando sono usurate.


Diagramma della struttura del prodotto 02

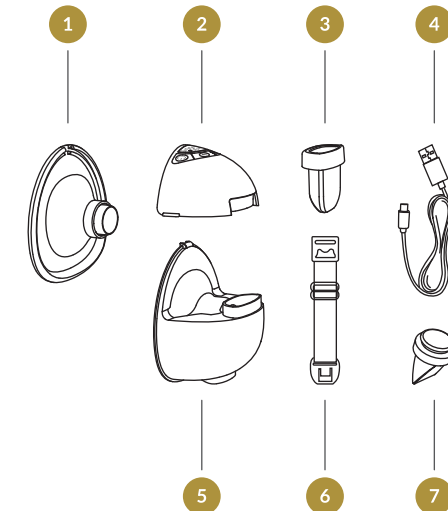

Parts list:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 Flangia | 4 Cavo di ricarica USB |
| 2 Motore del tiralatte | 5 Coppa Raccogli latte |
| 3 Diaframma in silicone | 6 Fibbia di regolazione del reggiseno |
| | 7 Valvola |

Descrizione del display a LED e della funzione dei pulsanti 03

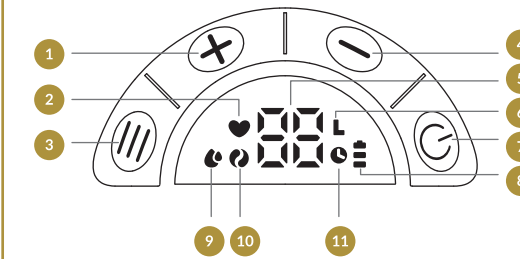


- | | |
|---|--|
| 1 Pulsante di salita di livello | 7 Pulsante di accensione/
Pulsante di commutazione della modalità |
| 2 Modalità di stimolazione | 8 Display di potenza |
| 3 Pulsante di pausa/avvio | 9 Expression mode |
| 4 Pulsante di abbassamento del livello | 10 Modalità di estrazione |
| 5 Visualizzazione del livello/
Visualizzazione dell'ora (minuti) | 11 Icona dell'orologio |
| 6 Simbolo di livello | |

Montaggio 04


Per assemblare il tiralatte, seguire i passaggi indicati di seguito.

- ATTENZIONE!** ⚠
- Assicurarsi di pulire il tiralatte come indicato nel presente manuale d'uso.
 - Assicurarsi di assemblare correttamente il tiralatte come indicato nel presente manuale d'uso.
 - Per evitare perdite, rimuovere i residui intorno al bordo prima di assemblarlo.
 - Lavarsi accuratamente le mani prima di assemblare i componenti puliti.

- Montare la valvola sulla coppa raccogli latte, prestando attenzione all'angolo di montaggio.

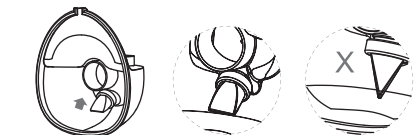


- Inserire il diaframma in silicone nella coppa raccogli latte del latte e premere con le mani per far aderire bene i bordi e garantire una tenuta perfetta.

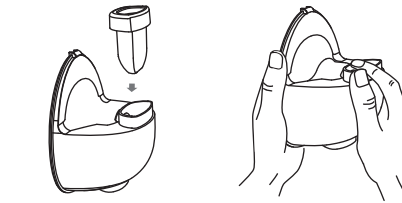

- Per montare la flangia sulla coppa raccogli latte, assicurarsi di allineare la scanalatura di deviazione sulla flangia con la scanalatura di riflusso coppa raccogli latte, quindi premere i bordi con entrambe le mani per garantire la tenuta.




- Montare il corpo principale del tiralatte sulla coppa raccogli latte, allineare la tacca sotto il corpo principale con il diaframma in silicone e montarlo verso il basso per adattarlo al coppa raccogli latte per garantire una tenuta completa.

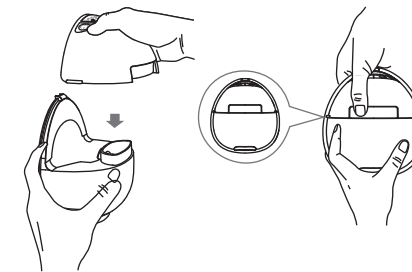


Guida all'estrazione 06


- Premere saldamente la flangia contro il seno, senza lasciare spazi vuoti e assicurandosi che i capezzoli siano ben posizionati al centro della flangia. Mantenere il dispositivo in posizione verticale. Fate attenzione a non distorcere la posizione del dispositivo e del vostro torace, altrimenti il tiralatte non potrà aspirare.

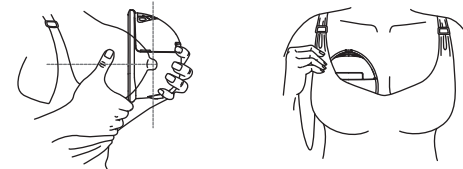


- Premere a lungo il pulsante di accensione per avviare il tiralatte finché non si accende lo schermo.

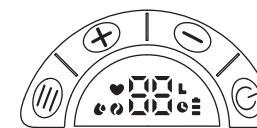


- È possibile avviare o mettere in pausa il funzionamento del tiralatte premendo brevemente il pulsante . Premere brevemente il pulsante per cambiare modalità dopo l'avvio del tiralatte. Con questo pulsante è possibile passare da una modalità all'altra (modalità di estrazione, modalità di stimolazione e modalità di massaggio). Quando è acceso, significa che il dispositivo è in modalità di estrazione; Quando è acceso, significa che la modalità di stimolazione è attiva; Quando è illuminato, significa che la modalità massaggio è attiva.

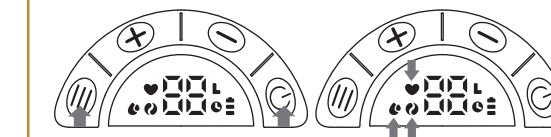


- Sono disponibili 9 livelli per ogni modalità. È possibile selezionare il livello di aspirazione desiderato premendo brevemente il pulsante "+" per aumentare il livello e il pulsante "-" per diminuirlo.

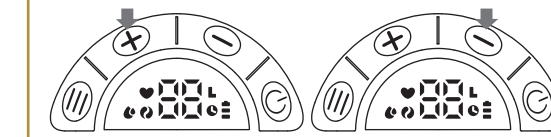

5. Il simbolo del livello **L** sul display si accende contemporaneamente. Se non si preme il pulsante entro 2 secondi, la visualizzazione del livello sullo schermo passa alla visualizzazione dell'ora e l'icona dell'orologio  sul display si accende contemporaneamente.

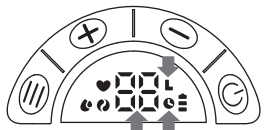

6. Premere a lungo il pulsante di accensione  per spegnere il tiralatte.

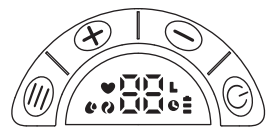


Suggerimenti

1. Questo modello è dotato di una funzione di memoria incorporata: quando si accende il dispositivo, questo inserisce automaticamente la modalità di stimolazione e il livello di aspirazione utilizzati più di recente.
2. Quando il funzionamento del dispositivo è in pausa e non viene premuto alcun pulsante entro 5 minuti, il tiralatte si spegne automaticamente.
3. Il tiralatte si arresta automaticamente dopo 20 minuti di funzionamento.


Display a LED del livello di carica della batteria

09


1. Sul tiralatte sono visualizzati tre livelli di potenza.

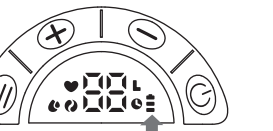

2. Durante l'uso, se l'indicatore di potenza è a solo 1 bar e lampeggia, significa che la batteria si sta scaricando. Assicurarsi di caricarla in tempo.

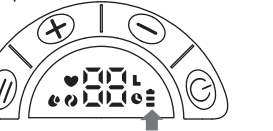

3. Il dispositivo non può essere utilizzato durante la carica; in questo momento l'interfaccia del display mostra solo il livello di potenza attuale. Quando il livello della batteria mostra 3 barre e non lampeggia, significa che la batteria è completamente carica.

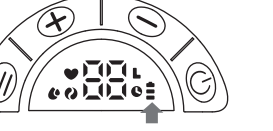

4. Dopo ogni utilizzo, premere il pulsante di accensione per controllare l'indicatore della batteria. Se il display indica che il livello della batteria è basso, caricarla con un caricatore da 5 V CC  1A.


Porta di ricarica Type-C



Istruzioni per l'allattamento al seno

10

Rilassatevi e sedetevi su una sedia comoda, quindi piegatevi leggermente in avanti (usate un cuscino per sostenere la schiena). Assicuratevi che il vostro corpo e il tiralatte siano allineati.

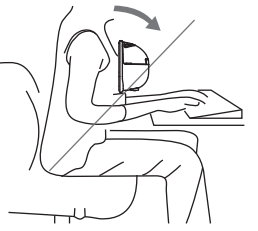

Posizione di allattamento

Istruzioni per la fibbia di regolazione del reggiseno

Regolare la lunghezza delle spalline del reggiseno per rendere più confortevole l'aspirazione. Agganciare un'estremità della fibbia di regolazione del reggiseno alla fibbia interna del reggiseno per l'allattamento. La lunghezza della fibbia del reggiseno può essere regolata agganciando la fibbia del reggiseno da allattamento all'altra estremità della fibbia di regolazione del reggiseno.

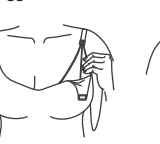


Immagine 1

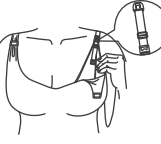


Immagine 2

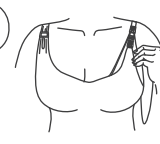



Immagine 3

Fine della sessione di estrazione


11

Al termine all'estrazione, rimuovere il tiralatte dal seno. Tenere il tiralatte in posizione verticale e rimuovere la parte del latte nel biberon. Assicurarsi che la fessura della coppa raccogli latte del latte della coppa del seno sia allineata con l'imboccatura del biberon per evitare di versare il latte materno.


1. Al termine dell'estrazione, premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo e rompere con un dito il sigillo tra il seno e l'imbuto del tiralatte, quindi rimuovere con cautela il tiralatte dal seno.

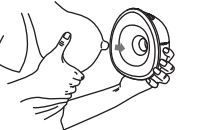

2. Separare il coppa raccogli latte del latte dal motore del tiralatte per prepararlo all'alimentazione/stoccaggio. Pulire le altre parti utilizzate seguendo le istruzioni.

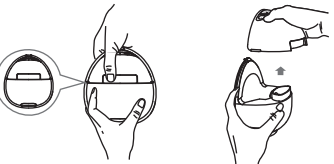

3. Versare il latte nel biberon; assicurarsi che la fessura sia allineata con l'imboccatura del biberon.

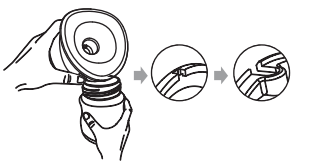

Pulizia

12

Pulizia e manutenzione

	Primo utilizzo	Dopo ogni utilizzo
Corpo principale	-	Se necessario, pulire con un panno pulito e umido con alcol etilico al 70% o alcol isopropilico. Non immergere il tiralatte in acqua.
Flangia, diaframma in silicone, valvola e coppa raccogli latte	Bollire in acqua per 5 minuti. Non inserire i seguenti componenti in un forno a microonde: Flangia, diaframma in silicone, valvola e coppa raccogli latte.	Pulire con un detergente delicato per piatti o con acqua pulita.

Pulizia

13

ATTENZIONE!

- Prestare attenzione quando si smonta e si pulisce la valvola; se la valvola è danneggiata, il tiralatte non funzionerà correttamente.
- Per pulire la valvola, strofinarla delicatamente in acqua calda con qualche goccia di detergente. Non inserire oggetti nella valvola per non danneggiare il dispositivo.

Pulizia a mano

- Collocare le parti del tiralatte in una bacinella pulita utilizzata solo per l'alimentazione dei bambini. Non mettere le parti del tiralatte direttamente nel lavandino.
- Aggiungere il detersivo e l'acqua calda nella bacinella.
- Pulire gli articoli con una spazzola pulita usata solo per gli articoli per l'alimentazione dei bambini.
- Sciacquare gli oggetti sotto l'acqua corrente o immergerli in acqua pulita in una bacinella separata.
- Asciugare accuratamente all'aria. Posizionare le parti del tiralatte, la bacinella e lo spazzolino per biberon su un canovaccio pulito e inutilizzato o su un tovagliolo di carta in un'area protetta da sporco e polvere. Non utilizzare l'asciugapiatti per strofinare o tamponare gli oggetti.
- Pulire la bacinella e lo spazzolino per biberon. Sciacquarli bene e lasciarli asciugare all'aria dopo ogni utilizzo. Lavarli a mano almeno ogni pochi giorni.

Conservazione del latte materno

14

Conservazione del latte materno

1. Conservare solo il latte materno raccolto con tiralatte sterilizzati.
2. Il latte estratto può essere messo in un sacchetto per la conservazione del latte pulito e sterilizzato o in un biberon per il latte con un cuscinetto di chiusura e posto immediatamente in frigorifero.

Attenzione

1. Non congelare il latte materno più di una volta.
2. Non mescolare il latte materno fresco con quello congelato.
3. Assicurarsi di gettare il latte materno avanzato dopo la poppata.
4. Il latte estratto può essere conservato in frigorifero per 48 ore o nel congelatore per un massimo di tre mesi. Etichettare il biberon o il sacchetto di conservazione del latte con una data e un'ora chiaramente indicate.

Come scongelare il latte materno

Mettere il latte materno congelato nello scomparto del frigorifero per una notte per scongelarlo. Se è necessario utilizzare il latte congelato con urgenza, è possibile utilizzare una bacinella o dell'acqua calda per scongelare il latte materno. Una volta scongelato, il latte materno deve essere consumato entro 24 ore.

Come scaldare il latte materno

1. Mettete il biberon in una ciotola di acqua calda o riscaldate il latte materno in modo sicuro e veloce utilizzando uno scaldabiberon e uno scaldavivande.
2. Attenzione! Prima di allattare il vostro bambino, controllate la temperatura del latte materno.

3. Non usare il forno o il microonde per scaldare il latte materno, perché potrebbe distruggere importanti sostanze nutritive e anticorpi.
4. Inoltre, un riscaldamento non uniforme può causare un parziale surriscaldamento del liquido, con conseguenti ustioni.
5. Non immergere il biberon di conservazione del latte in acqua bollente per riscaldarla, perché potrebbe rompersi o incrinarsi.

innogIO

Prodotto in Cina per INNOGIO sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia

www.innogio.com

 @innogIO.official  @innogio_com

