

VAGINÁLNY TRENAŽÉR INTIMINA KEGELSMART



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Odskrutkujte uzáver, vložte batériu s plusovým pólom smerom von a zaskrutkujte späť.
- 2) Krátkym stlačením bočného tlačidla so symbolom krúžku ho zapnete.
- 3) LED dióda vám blikne v závislosti na predchádzajúcom cvičení, akú úroveň nastaví.
- 4) Potom máte 30 sekúnd na zavedenie vajíčka do pošvy.
- 5) Po tridsiatich sekundách sa spustí sám automaticky.
- 6) Najprv 3x za sebou trikrát zavibruje, čím oznámi začiatok relácie.
- 7) Následne začne vibrovať. V tejto chvíli stlačte svoje svaly.
- 8) V momente kedy vibrácie ustanú svaly povoľte a relaxujte.
- 9) Koniec programu vám oznámi opätovne tromi rýchlymi vibráciami.
- 10) Potom sa sám automaticky vypne.

Cvičenie by nemalo byť dlhšie ako 60 minút denne. Pri nepohodlí či bolestiach ho prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.

ÚDRŽBA

Po každom použití tranažér opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Trenažér je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na tranažér môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný jedným akumulátorom typu AAA.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vaginálny trenažér.