


Elektrická odsávačka mléka


Elektrická odsávačka mlieka

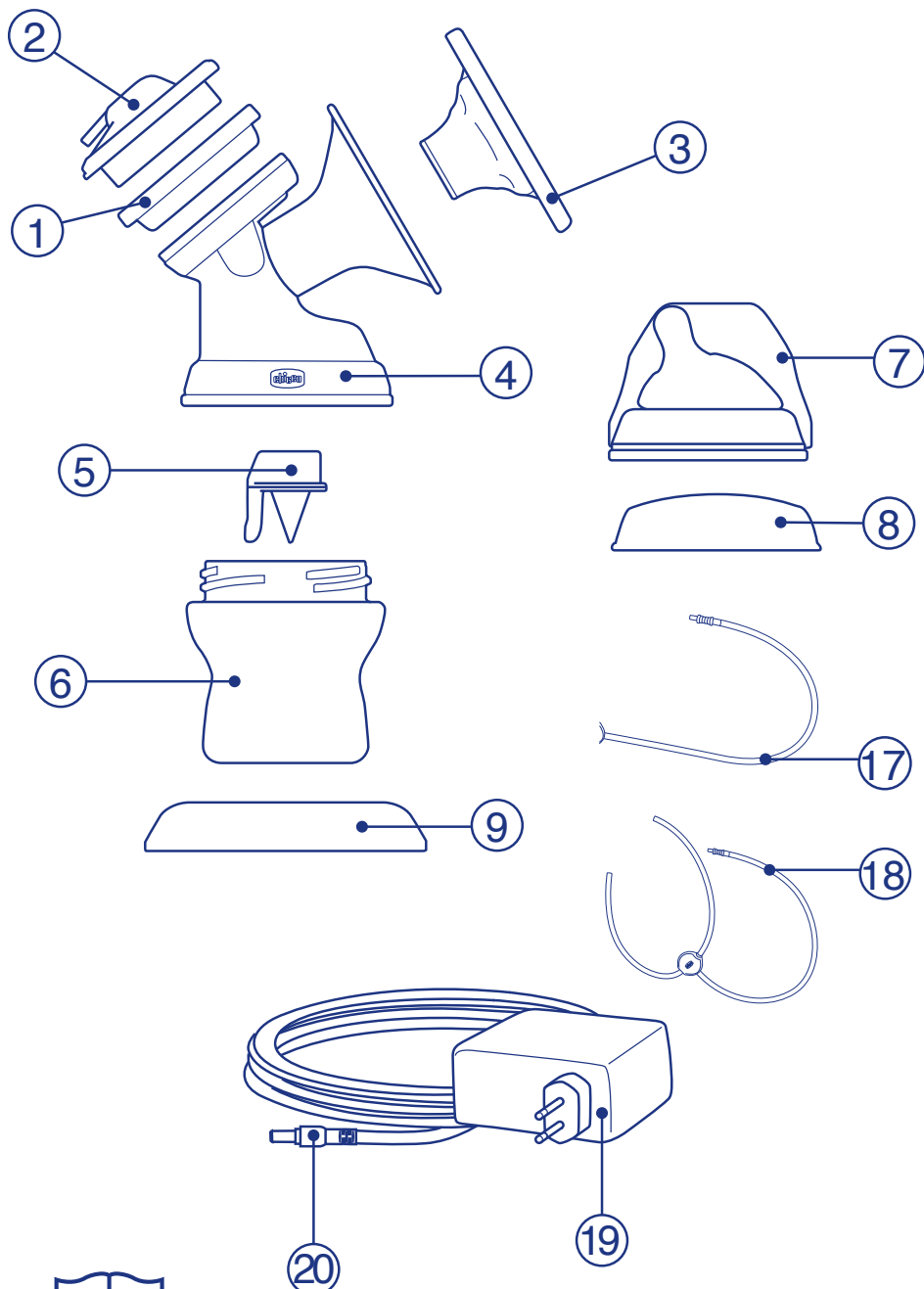


A




B

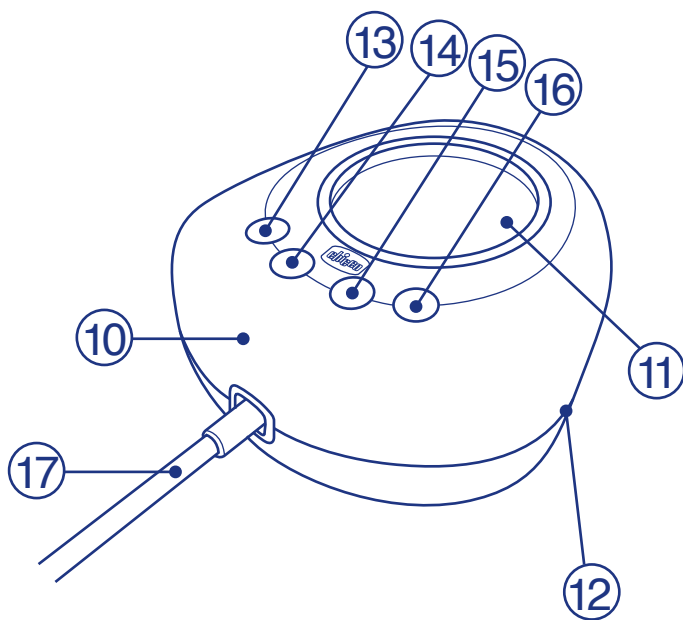


C

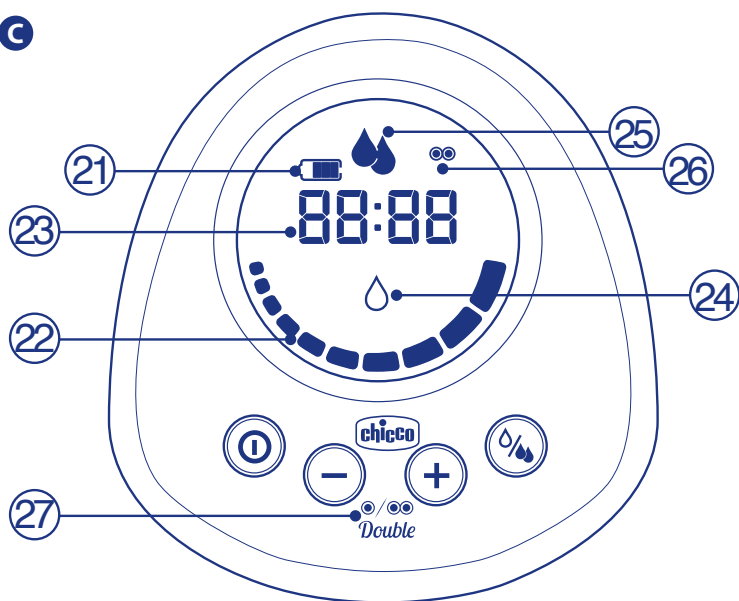


1

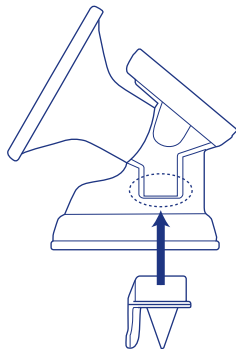


2

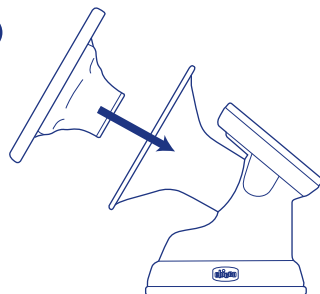


3

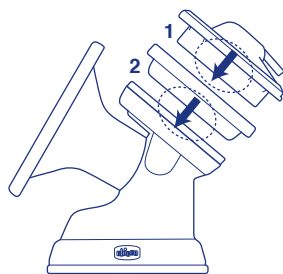


4

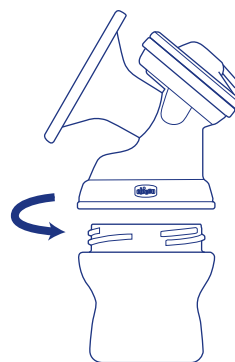


5

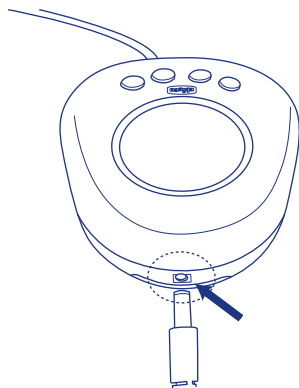

6

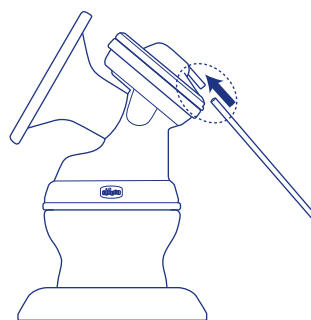

7

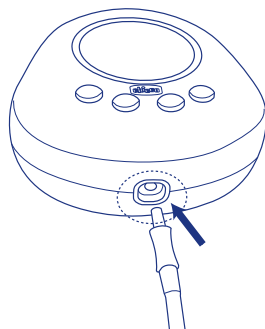

SK Návod na použitie



Elektrická odsávačka mlieka.

Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Predpokladané použitie a informácie o elektrickej odsávačky

Účel použitia a informácie o elektrickej odsávačke mlieka.

UPOZORNENIE PRE BEZPEČNOSŤ!

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a mal by sa používať v súlade s návodom na použitie. Akékoľvek iné použitie je nevhodné a preto nebezpečné. Spoločnosť Artsana nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym alebo neprimeraným používaním zariadenia.
- Zariadenie je určené na osobné použitie a kupujúci ho nemôže stiahnuť alebo zveriť iným osobám.
- Zariadenie a jeho súčasti nesmú zostať na miestach vystavených slnečnému žiareniu, nechránené pred dažďom a inými poveternostnými podmienkami. Sieťový adaptér je určený len na vnútorné použitie, takže ho nemôžete nechávať na priamom slnečnom svetle, nechránený pred dažďom a inými poveternostnými podmienkami.
- Ak sa prístroj používa vonku, musí byť napájaný len s internými batériami a nesmie byť ponechaný na priamom slnku, nechránený pred dažďom a inými poveternostnými podmienkami. Nedodržanie tohto pravidla môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Toto zariadenie nie je hračka. Nemôžu byť zverené deťom alebo osobám s obmedzenými mentálnymi schopnosťami, neskúsenými alebo bez potrebných vedomostí. Výrobok môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými alebo senzorickými schopnosťami, ak ich niekto dohliada, alebo dostal pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a zrozumiteľných súvisiacich rizikách.
- Prístroj, jeho súčasti a sieťový adaptér udržiavajte spolu s káblom na pripojenie ku krytu motora mimo dosahu detí. Udržiavajte napájacie káble mimo dosahu detí, ktoré pripájajú sieťový adaptér k telu motora, a trubica, ktorá spája telo motora so sacím zariadením, hrozí udusením dieťaťa. Prístroj navyše obsahuje malé časti, ktoré pri požití môžu dieťa zadusiť.
- Zabezpečte, aby deti nemali možnosť hrať sa so zariadením, jeho časťami alebo sieťovým adaptérom.
- Prístroj vždy umiestnite na rovný a stabilný povrch, mimo kolísky a postieľky.

- Pred pripojením sieťového adaptéra k sieťovej zásuvke sa uistite, že napájanie a zástrčka sieťového adaptéra sú kompatibilné s dostupným sieťovým napájaním a zásuvkou, ktorú používate. Typový štítok je umiestnený v sieťovom adaptéri.
- Ak zástrčka sieťového adaptéra dodávaného so zariadením nie je kompatibilná so zásuvkou, v prípade, že príslušné predpisy umožňujú používať iba certifikované adaptéry sa obráťte na špecialistu.
- Sieťový adaptér vložte do zásuvky, ktorý je ľahko dostupný len dospelým.
- Ak chcete prístroj odpojiť od siete, odpojte zástrčku sieťového adaptéra od zásuvky a odpojte kábel, ktorý pripája sieťový adaptér k telu motora. Neodpájajte napájací adaptér zo zásuvky vytiahnutím kábla adaptéra alebo pripojeného zariadenia.
- Nečistite ani nedezinfikujte odsávačku pri použití, keď je napájaná alkalickými batériami (nie sú súčasťou prístroja) alebo keď je pripojená k elektrickej sieti pomocou napájacieho adaptéra. Čistite a dezinfikujte podľa popisu v tejto príručke.
- Aby sa zabránilo šíreniu baktérií, odporúča sa dať získané jedlo ihneď po jeho odsatí okamžite odložiť na miesto, kde sa môže správne skladovať.
- Pred každým použitím očistite a vydezinfikujte silikónovú vložku (3), telo odsávačky(4) a ventil (5). Vyčistite a dezinfikujte fľašu (6) a príslušenstvo (7) - (8), ako je to popísané v pokynoch, ktoré sú k nej dodávané.
- Pred každým použitím skontrolujte, či membrána nie je poškodená: nesmie byť prasknutá alebo narezaná. V prípade praskania alebo rozrezania nepoužívajte výrobok.
- Čistenie a dezinfekcia sú úkony, ktoré musí používateľ vykonať. Tieto činnosti nezverujte deťom alebo ľuďom s obmedzenými mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností bez potrebných znalostí.
- V žiadnom prípade nesmiete ponoriť alebo navlhčiť zariadenie alebo napájací adaptér vo vode alebo iných kvapalinách. Nedávajte ich pod tečúcu vodu. Ak sa zariadenie alebo sieťový adaptér namočí, pred pokračovaním v používaní výrobku kontaktujte špecialistu.
- Ak zariadenie, napájací adaptér alebo zástrčka adaptéra vykazujú známky poškodenia, nepoužívajte ho. Ak je zariadenie alebo sieťový adaptér poškodený, pred pokračovaním v používaní výrobku kontaktujte špecialistu.

- Poznámka: Nepoužívajte iné sieťové adaptéry, ako poskytuje spoločnosť Artsana S.p.A. spolu s výrobkom (model GQ07-060100-DG, výrobca: Dong Guan City GangQi Electronic Co., pretože potom by zariadenie nevyhovovalo technickým špecifikáciám a príslušným smerniciam CE, čo by znížilo úroveň bezpečnosti a jej rozsah. V prípade poruchy treba volať na číslo (800-188-898).
- V prípade chyby alebo poškodenia zariadenia alebo sieťového adaptéra sa ho nepokúšajte rozoberať alebo opravovať. V prípade poruchy alebo poškodenia stroja, krytu motora alebo sieťového adaptéra zavolajte na bezplatné telefónne číslo (800-188-898). Akékoľvek opravy / iné práce vykonávané užívateľom môžu ohroziť jeho osobu a ostatné osoby, ako aj nenávratne poškodiť zariadenie. Okrem toho spôsobujú okamžitú neplatnosť záruky.
- Ak je balenie poškodené, skontrolujte stav všetkých komponentov a častí výrobku. Ak je napájací adaptér a teleso motora nepoškodené, umyte všetky časti, ako je popísané v časti "ČISTENIE".
- Pred použitím odstráňte a vyhodte všetky plastové vrecká a všetky prvky, ktoré sú súčasťou balenia výrobku. Odložte na miesto nedostupné deťom ; zariadenie môže predstavovať hrozbu.
- Po vybratí zariadenia z obalu skontrolujte, či je neporušené a či nie je viditeľne poškodené. Ak máte pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a kontaktujte iba príslušného špecialistu, miesto nákupu alebo zavolajte na bezplatné číslo (800-188-898).
- Skontrolujte, či zariadenie počas používania stojí na rovnom a stabilnom povrchu, aby sa zabránilo pádu alebo prevráteniu z výšky.
- Neumiestňujte zariadenie na jemné alebo vlhké povrchy alebo na teplé miesta.
- Nepoužívajte pri kúpaní alebo sprchovaní, alebo vo vlhkom prostredí, v blízkosti vane, umývadiel, drezov, alebo v inej situácii, kde niektoré tekutiny môžu prísť do kontaktu s prístrojom.
- Uistite sa, že súprava je umiestnená tak ďaleko od zostavy motora, že nespôsobuje pádu.
- Použitie akéhokoľvek elektrického zariadenia vyžaduje niekoľko základných pravidiel:
 - Nikdy sa nedotýkajte prístroja vlhkými alebo vlhkými rukami.
 - Udržujte zariadenie a sieťový adaptér mimo zdrojov tepla.
 - Nedotýkajte sa zariadenia alebo adaptéra: ak ste náhodou spadne do vody alebo náhodne namočí, okamžite vypnite hlavný vypínač svojho domu a pred dotykom s prístrojom odpojte adaptér zo zásuvky v stene. Potom zariadenie nepoužívajte, ale kontaktujte špecialistu.
 - V prípade poruchy a / alebo zlého fungovania a / alebo adaptéra a / alebo pripojovací kábel adaptéra na tele motora,

vypnite okamžite, odpojte adaptér zo zásuvky a nesnažte sa ich opraviť používať alebo opraviť, ale obráťte sa na odborníka.

V prípade poruchy a / alebo zlej prevádzky zariadenia a / alebo napájacieho adaptéra a / alebo kábla spájajúceho napájací adaptér s telesom motora zariadenie okamžite vypnite, odpojte zástrčku sieťového adaptéra zo zásuvky nesnažte sa ich opraviť, ale obráťte sa na špecialistu alebo zavolajte na bezplatné číslo (800-188-898).

- Po každom použití musí byť prístroj dôkladne vyčistený a vysušený.
- Ak sa prístroj nepoužíva po dlhšiu dobu, treba ho dôkladne vyčistiť a vybrať batérie (ak boli vložené), je potrebné dať na čisté a suché miesto, chránené pred svetlom, oddelené od zdrojov tepla, tak ako je uvedené v informáciách o skladovaní a cestovaní.
- Ak sa rozhodneme, že zariadenie už nebudeme používať, vyberte batérie, ak sú, a odpojte kábel od sieťového adaptéra (po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky), aby sa už nemohol používať. Zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ho na segregáciu, pretože ide o elektrické / elektronické zariadenie (OEEZ), v súlade s požiadavkami 2012/19 / EU alebo predpismi platnými v krajine, v ktorej sa zariadenie nachádza bol predaný.
- Ak sa prístroj nebude dlhší čas používať, vždy vyberte alkalické batérie. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úniku a poškodeniu a chemickej kontaminácii zariadenia.
- Aby ste predišli vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte kábel, ktorý pripája napájací adaptér a zariadenie pod koberce alebo v blízkosti ohrievačov, kachlí alebo radiátorov.
- Používajte prístroj pri teplote od + 5 ° C do + 40 ° C. Prevádzka prístroja za podmienok nepresahujúcich špecifikované rozsahy, najmä horný rozsah, môže spôsobiť prehriatie zariadenia a jeho poškodenie a / alebo ohrozenie popáleninami a predstavuje riziko pre časti pod napätím.
- Zariadenie je navrhnuté tak, aby pracovalo iba s časťami dodanými v pôvodnom balení a so 150 ml fľašami. Použitie iných dielov alebo fliaš s väčšou kapacitou nemusí zaručiť dané parametre.
- Zariadenie sa nesmie používať nepretržite dlhšie ako 30 minút. Po použití ich treba odložiť na 30 minút. Akékoľvek prekročenie maximálneho povoleného prevádzkového času (zariadenie sa automaticky vypne po 40 minútach) môže spôsobiť jeho prehriatie a poškodenie a môže spôsobiť užívateľovi popáleniny a prístup k živým častiam.
- Parametre produktu sa môžu neočakávane zmeniť.
- Ak máte pochybnosti o porozumení tejto príručky, kontaktujte svojho predajcu alebo bezplatné číslo (800-188-898).

ODSTRÁNENIE A VLOŽENIE BATÉRIÍ - UPOZORNENIA

- Batériu smú meniť iba dospelí.
- Ak chcete vymeniť batériu: otvorte kryt, vytiahnite použité batérie z priestoru pre batérie, vložte nové batérie v požadovanom smere pólov a zatvorte kryt. Ak sú batérie vložené v opačnom smere, môžu sa prehriať, poškodiť výrobok a spôsobiť únik kyseliny.
- Používajte iba alkalické batérie, ktoré sú rovnaké alebo ekvivalentné s odporúčanými.
- Nekombinujte rôzne typy batérií ani nové s použitými.
- Neskratujte póly / konce batérii.
- Ak sa prístroj nebude dlhší čas používať, vždy vyberte batérie.
- Do tohto zariadenia nekladajte dobíjateľné batérie, pretože môžu znížiť alebo zabrániť správnej prevádzke.
- Nepoužívajte lítiové batérie alebo nabíjateľné batérie: toto zariadenie nie je určené pre akumulátory tohto typu.
- Používanie lítiových batérií alebo dobíjanie môže byť nebezpečné.
- Vždy používajte batérie z výrobku, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo predmetov v blízkosti. Vytečená kvapalina môže chemicky kontaminovať časti, ktoré sú v kontakte s jedlom.
- Ak tekutina uniká z batérie, ihneď ju vymeňte, pamätajte na jej vyčistenie a dôkladne umyte ruky, ak ste unikli. Skontrolujte, či je akýkoľvek únik akýmkoľvek spôsobom v kontakte s časťami súpravy, najmä s časťami, ktoré sú v kontakte s mliekom.
- Nevhadzujte použité batérie do ohňa alebo do okolia ani nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Batérie musia byť odstránené v súlade s platnými predpismi v krajine predaja výrobku.
- Pred uskladnením zariadenia vyberte batérie.

POPIS SYMBOLOV



Kód v katalógu produktov



Upozornenie!



Prečítajte si návod na použitie - Postupujte podľa pokynov na použitie



Iba pre domáce použitie



ON / OFF (zapnúť -vypnúť)

IP 21

Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných predmetov (veľkosť / priemer > = 12 mm) a kvapalín.
Zariadenie je chránené pred vertikálne padajúcimi kvapkami vody.



Striedavý prúd



Stály prúd



V súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ



Strany pólov sieťového adaptéra



Strany pólov vložených batérií



Zariadenie vyhovuje základným požiadavkám príslušných smerníc ES



Zariadenie triedy II

Odsávačka mlieka a dojčenie

Dojčenie je veľmi dôležitým štádiom života dieťaťa a matky. Pre novorodenca, prítulenie sa k prsiam a sanie nie je len záležitosťou splnenia pôvodnej fyzickej potreby, ale predovšetkým chvíle strávené s mamou, bohaté na emócie a hmatové, zvukové, chuťové a čuchové pocity. Napĺňanie tejto potreby prináša hlboký pocit pohody a pokoja. Materské mlieko obsahuje všetky živiny potrebné na zabezpečenie denných výživových potrieb a psychologických požiadaviek dieťaťa minimálne do veku 6 mesiacov.

Chicco Elektrická odsávačka je cenná pomôcka pri predlžovaní dojčenia v prípade prebytku mlieka alebo nutnosti opustiť dieťa. V takýchto prípadoch môžete odsať jedlo a uskladniť ho a potom ho dať svojmu dieťaťu v prípade potreby. Aby sa zabezpečila najvyššia všestrannosť a praktickosť, elektrická odsávačka pracuje na alkalických batériách typu AA 1,5V (nie sú súčasťou balenia) a pri pripojení k vhodnému napájaciemu adaptéru (model GQ07-060100-DG, producent: Dong Guan City GangQi Electronic Co.

ZOZNAM ČASTÍ

- 1- membrána
- 2 - membránový kryt
- 3- mäkká silikónová vložka
- 4.telo odsávačky
- 5- ventil
- 6-NF fľaša
- 7- cumef 0 m s uzáverom a viečkom
- 8 - pevný uzáver
- 9- podstavec
- 10- zostava motora
- 11- display
- 12 - priestor pre batérie
- 13 - tlačidlo zapnutia / vypnutia
- 14 - tlačidlo na zvýšenie sily odsávania / stimuláciu
- 15 - tlačidlo na zníženie sily odsávania / stimuláciu
- 16 - tlačidlo stimulácie / odsávania
- 17- silikónová trubica na používanie odsávačky mlieka v jednej konfigurácii (00009199300000 a 00009199400000)
- 18-silikónová trubica s dvojitou súpravou na používanie. V prípade elektrickej odsávačky 000091993000000 000091994000000)
- 19- sieťový adaptér
- 20- zástrčka napájacieho kábla zariadenia
- 21-indikátor stavu batérie
- 22-indikátor sily stimulácie/odsávania
- 23-hodiny
- 24-indikátor stimulácie
- 25-indikátor odsávania
- 26- 000091994000000)
- 27- (iba pre 000091994000000)

* Časti (1) až (9), ktoré sú súčasťou sady produktov dvojité 000091994000000 odsávačka materského mlieka, prichádzajú v dvojnásobnom množstve (2x), aby ste ju mohli ľahko používať

výrobok použiť v konfigurácii dvojitého odsávania / stimulácie. **PRÍPRAVA**

- Pred prvým použitím odsávačky dôkladne umyte všetky časti *ako je písané v časti "ČIŠTENIE".
- Potom zložte odsávačku nasledujúcim spôsobom:
- Nasadte ventil (5) úplne do kruhového tela odsávačky(4). (Obrázok 1)
- Utiahnite vonkajší okraj tak, aby nedošlo k poškodeniu ventilu a zabezpečte, aby boli pripojené oba okraje inštalovaného ventilu. Ak tomu tak nie je, nasadte ventil znova, dbajte na správne zarovnanie okrajov.
- Pre väčšie pohodlie sa na telo odsávačky (4) môže aplikovať silikónová vložka (3). Silikónový kryt dobre vložte do kužela telesa čerpadla a zaistite ho okolo vonkajšieho okraja čerpadla (obr. 2).Stlačením vybrúsených vrstiev na výstupe odstránite zostávajúci vzduch.
- Vložte silikónovú membránu (1) na kryt (2) a nasuňte membrána s vankúšikom (zloženým) pre tele odsávačky (4) (obr. 3)

Pripojte fľašu NaturalFeeling (6) na závitovú základňu tela (4) odsávačky. (Obr.4)

- Zmontované zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch a umiestnite ho na praktický stojan (9), čo zvýši jeho stabilitu.
- Ak chcete použiť odsávačku so sieťovým adaptérom (18), zástrčku zasunúť (19) do diery na kryte motora (10) a potom zapojte adaptér do elektrickej zásuvky. (Obrázok 5)

Na použitie odsávačky s alkalickými batériami, otvorte kryt priestoru pre batérie (12) a vložte 4 batérie AA1,5 V (nie je súčasťou balenia), s ohľadom na správnu polaritu. Zatvorte kryt. Trvanlivosť alkalických batérií sa môže líšiť v závislosti od značky a úrovne nabíjania.

- UPOZORNENIE: V prípade, že je odsávačka napájaná zo sieťového adaptéra (18) alebo ak sa nepoužíva dlhší čas, vyberte batérie z krytu motora (10)
- V prípade elektrickej odsávačky 000091993000000 pripojte silikónové hadičky (17) k viečku membrány (2) (obr. 6), pre elektrické dvojité odsávačky 000091994000000 silikónové hadičky dvojitej sady (18) spojte s viečkami membrány.

• Pevný silikónový trubcový konektor (17) elektrickej odsávačky 000091993000000 alebo (18) v prípade elektrickej dvojitej odsávačky 000091994000000 do príslušnej štrbiny v telese motora (10) (obr. 7).

• Dávajte pozor, aby ste neprišli o napájací kábel, pretože zariadenie by sa potom stalo nepoužiteľným.

* Okrem telesa motora (10), sieťového adaptéra (19) a silikónových rúrok (17) alebo (18).

OBSLUHA ODSÁVAČKY

- Pred každým použitím dezinfikujte všetky súčasti * pomocou studenej sterilizačnej tekutiny (podľa odporúčania výrobcu) alebo

horúcej (pary), použitím príslušného zariadenia alebo varením (5 minút) pred použitím nechajte všetky vydezinfikované časti úplne vychladnúť.

• Umyte si ruky a sklopte odsávačku podľa popisu v časti "PRÍPRAVA".

• Dôkladne umyte prsia vodou alebo praktickými hygienickými obrúsky Chicco na hygienu prsníkov.

Posaďte sa pohodlne a voľne.

Poznámka: Pri používaní odsávačky mlieka, aby bola zaistená jej správna činnosť, nezabúdajte nezakrývať otvor na ľavej strane odsávačky mlieka (4) rukou.

Poznámka: keď je odsávačka mlieka zapnutá, vždy sa zapne v stimulačnom režime, aby sa uľahčilo odsávanie jedľa; potom sa aktivujú výrobné nastavenia (úroveň 5). Na displeji sa zobrazí indikátor stimulácie (24). Poznámka: Aby sa predišlo rizikám spôsobeným pretečením tekutín (potravín), odporúča sa nikdy neplniť fľašu nad maximálnu úroveň uvedenú na stupnici.

Režim

REF 000091993000000 i REF 000091994000000

• Odsávačku mlieka priložte tesne k prsníku a uistite sa, že je bradavka presne v strede. Odsávačku mlieka môžete používať s mäkkým silikónovým krytom alebo bez neho (3); odporúčame vám vyskúšať obidva spôsoby a vybrať si ten, ktorý je príjemnejší a pohodlnejší • Zapnite odsávačku mlieka tlačidlom zapnutia / vypnutia (13) na telese motora (10). Displej (11) sa potom rozsvieti iba 000091994000000 - skontrolujte ikonu (26) zobrazujúcu prevádzkový režim čerpadla. V jednom režime musí ikona zobrazovať jeden kruh. V opačnom prípade stlačte a podržte súčasne tlačidlá „+“ (15) a „-“ (14), aby ste zmenili režim prevádzky odsávačky z dvojitého (dve kolieska) na jednoduché (jedno koliesko).

Ak používate odsávačku mlieka napájanú alkalickými batériami, indikátor na displeji ukazuje úroveň ich nabitia (21). Ak je zariadenie napájané pomocou sieťového adaptéra, indikátor sa nezobrazí. Indikátor stavu batérie má 4 úrovne. Asi po 2 minútach stimulácie sa automaticky prepnete na pumpovanie na úrovni 5 (výrobné nastavenie). Na displeji sa zobrazí indikátor odsávania (25). Krok stimulácie môžete prerušiť a prejsť k pumpovaniu. Za týmto účelom krátko stlačte tlačidlo stimulácie / odsávania (16). Ak je potrebné stimuláciu zopakovať, znova stlačte tlačidlo stimulácie / odsávania (16). Potom stlačením tlačidla stimulácie / odsávania (16) zadajte úkon.

• Tlačidlami „+“ (15) i „-“ (14) klávesnica môže regulovať stimuláciu / odsávanie na základe sily pociťovanej na prsia a / alebo na základe množstva vytekajúceho mlieka. Odporúča sa regulovať stimuláciu / expresiu postupne, kým sa nedosiahne požadovaná úroveň. Ak zvolená stimulácia / výrazová sila spôsobuje nepohodlie alebo bolesť, odporúča sa ju vhodne znížiť pomocou tlačidla „-“ (14).

Odsávanie môžete nastaviť pre obidva prsníky.

• Odsávačku mlieka zapnete stlačením vypínača (13). - Pri ďalšom zapnutí pumpa ponúka rovnakú úroveň stimulácie / odsávania, aké boli uložené po poslednom použití.

Dvojitý režim - iba odsávačka 00091994000000

• Odsávačku mlieka zapnete vypínačom (13) na kryte motora (10). Potom sa zapne displej (11). Súčasným stlačením tlačidiel „+“ (15) a „-“ (14) zmeníte prevádzkový režim čerpadla z jednoduchého (výrobné nastavenie) na duálny. Ikona (26) znázorňujúca režim činnosti odsávačky mlieka musí zobrazovať dva kruhy, čím indikuje dvojitý režim. Odsávačku mlieka priložte tesne k prsníku a uistite sa, že je bradavka presne v strede. Druhé telo pohárika odsávačky mlieka priložte pevne k prsníku a skontrolujte, či je bradavka presne v strede. Asi po 2 minútach stimulácie sa automaticky presuniete na pumpovanie na úrovni 5 (výrobné nastavenie). Na displeji sa zobrazí indikátor odsávania (25). Krok stimulácie môžete prerušiť a prejsť k pumpovaniu. Za týmto účelom krátko stlačte tlačidlo stimulácie / odsávania (16). Ak je potrebné stimuláciu zopakovať, znova stlačte tlačidlo stimulácie / odsávania (16). Potom stlačením tlačidla stimulácie / odsávania (16) zadajte odsávanie. Pomocou tlačidiel „+“ (15) a „-“ (14) na klávesnici môžete nastaviť stimuláciu / odsávanie na základe sily pociťovanej na prsiach a / alebo na základe množstva vytekajúceho mlieka. Odporúča sa regulovať stimuláciu / expresiu postupne, kým sa nedosiahne požadovaná úroveň. Ak zvolená stimulačná / ťahovacia sila spôsobuje nepríjemné pocity alebo bolesť, odporúča sa primerane ju znížiť pomocou tlačidla „-“ (14). Stlačením vypínača (13) zapnete odsávačku mlieka, pri ďalšom zapnutí vám pumpa navrhne rovnakú úroveň stimulácie / odsávania, aké boli uložené po poslednom použití. UPOZORNENIE: Bezprostredne po použití dôkladne umyte všetky diely * podľa popisu v časti „ČISTENIE“.

Ak chcete dať dieťaťu mlieko ihneď, odskrutkujte fľašu z telesa pumpy (4) a vyberte ju. Na flaštičku naskrutkujte uzáver s cumľom (7) (súčasť balenia). Takýmto spôsobom získame praktickú fľašu na kŕmenie (NaturalFeeling), pripravenú na použitie. Ak je však fľaša uzavretá praktickým tesným uzáverom (8) (súčasť balenia), odsaté mlieko môžete v chladničke skladovať maximálne 48 hodín pri 4 ° C alebo 3 mesiace v mrazničke pri -18 ° C UPOZORNENIE: Vždy, keď odsávačku nepoužívate, vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky, s výnimkou telesa motora (10), sieťového adaptéra (19) a silikónových rúrok (17) alebo (18).

• ČISTENIE

Pred čistením odpojte sieťový adaptér zo zásuvky (ak je k dispozícii) a sieťovú zástrčku zo zásuvky (20) na kryte motora.

- Rozložte všetky časti odsávačky mlieka.

Poznámka: odstráňte ventil (5) umiestnený na obehovom potrubí vo vnútri telesa uzáveru (4); Za týmto účelom jemne zatiahnite za úchytku na strane ventilu **UPOZORNENIE:** Ventil jemne vyberte a nečistite ho žiadnymi nástrojmi, pretože poškodenie bráni ďalšiemu používaniu odsávačky. Poznámka: Ak chcete odpojiť silikónovú trubicu, najskôr vyberte membránu (1) s uzáverom z púzdra, aby sa nič nemohlo prevrátiť. Potom uchopíte koniec pripravený k uzáveru membrány a jemne ho potiahnite.

Všetky diely * dôkladne umyte horúcou vodou a saponátom, dôkladne opláchnite a dôkladne osušte mäkkou a čistou handričkou. Nečistite odsávačku mlieka alebo jej časti abrazívmi. Kryt motora a napájací adaptér čistíte mäkkou, čistou a suchou handričkou. Upozornenie! Zariadenie nenamáčajte ani neponárajte do vody alebo iných tekutín. Hadičku je možné opláchnuť a dobre vysušiť. Všetky časti okrem telesa motora (10), sieťového adaptéra (19), ventilu (5), membrány (1), silikónového uzáveru (3) a hadičiek (17) je možné umývať v umývačke riadu. delikátny program. Pretože je tento spôsob umývania agresívnejší, môže časom materiál odfarbiť alebo poškvrniť a znížiť jeho parametre. Flašu (6) a pripojené príslušenstvo (7) - (8) vyčistite a dezinfikujte podľa pokynov v balení. Po každom čistení umiestnite zariadenie na čisté a suché miesto. Okrem telesa motora (10), sieťového adaptéra (19) a trubice (17).

PRÍSLUŠENSTVO:

Flaša na kŕmenie NaturalFeeling 150 ML

00080711000xxx / 00080811000xxx.

REF

- Nádoba na mlieko NaturalFeeling 00002257200000 - Kde XXX = variabilný identifikačný kód krajiny predaja. - Zariadenie sa dodáva s dvoma bezplatnými vložkami do prsníkov, ktoré sú určené na zber prebytočného mlieka

20061770000).

- Odporúča sa nepoužívať žiadne ďalšie príslušenstvo než je odporúčané tu.



Problem	Prčina	Rada
Odsávačka odsáva alebo čerpá malé množstvá. .	Ventil nie je nainštalovaný alebo nie je nainštalovaný správne.	Nainštalujte ventil správne.
	Teleso čerpadla a teleso motora nie sú správne zostavené.	Skontrolujte, či bol postup popísaný v časti „PRÍPRAVA“ vykonaný správne. Uistite sa, že silikónová hadička je pevne spojená so zostavou motora a krytom membrány. Skontrolujte, či nie je trubica poškodená. Pri čerpaní neskrúčajte hadičku.
	Odsávačka mlieka nepasuje dobre na prsník. .	Odsávačku mlieka priložte tesne k prsníku a uistite sa, že je bradavka presne v strede. Skúste s mäkkým silikónovým uzáverom aj bez neho.
	Nastavte nesprávne nastavenú silu spätného tahu.	Zmeňte silu odsávania tak, aby ste našli najpohodlnejší spôsob stimulácie a odsávania. Zmeňte silu pomocou tlačidiel „+“ alebo „-“.
	Vybité a / alebo slabo nabité batérie.	Vymeňte batérie. .
Odsávanie je bolestivé.	Príliš veľká sila odsávania.	Zmeňte silu odsávania tak, aby ste našli najpohodlnejší spôsob stimulácie a odsávania. Zmeňte silu pomocou tlačidiel „+“ alebo „-“.
Odsávačka sa nezapne	Porucha sieťového adaptéra a / alebo zariadenia.	Skontrolujte, či je napájanie zo siete. Skontrolujte zarovnanie batérií v priehradke.
	Zle prepojené komponenty.	Skontrolujte všetky pripojenia.
	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie.

Technické informácie

- [REF](#) 00009199300000 ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA Mlieka Mod. N0041 i N0000

- Maximálna hodnota vákuu v režime čerpania: $-0,35 \pm 0,03$ baru **

(** hodnoty namerané pomocou kalibračného opatrenia - úroveň presnosti 95%). - Typ zariadenia: prerušovaná prevádzka; 30 minút ZAPNUTÝ - 30 minút VYPNUTÝ

- Hmotnosť tela motora: 325 g bez batérií

- Rozmery: 98x70x105h mm

- Vyrobené v Číne

Napájanie pomocou batérií: 6V

dc – 4x1,5V typ AA (LR06)

[REF](#)

00009199400000 ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA

Vyhlasenie o zhode CE

Zariadenia značky Chicco Elektrická odsávačka mod. 000091993000000 Mod. N0041 a dvojita elektrická odsávačka 000091994000000 Mod. N0000 vyhovuje základným požiadavkám a ďalším relevantným požiadavkám smerníc 2014/30 / EU (elektromagnetická kompatibilita), 2014/35 / EU (nízke napätie) a 2011/65 / EU (RoHS). Kópiu vyhlásenia o zhode E5 môžete získať od výrobcu: Artsana S.p.A cez Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (Como) Taliansko.



Tento výrobok je v súlade so smernicou 2012/19 / EÚ.

Symbol preškrtnutej nádoby na spotrebiči naznačuje, že výrobok po skončení jeho životnosti musí byť zlikvidovaný oddelene od domáceho odpadu buď jeho odovzdaním na samostatné miesto na

zneškodňovanie elektrických a elektronických zariadení alebo jeho vrátením vášmu predajcovi keď si kúpite ďalšie podobné zariadenie. Užívateľ je zodpovedný za prevzatie spotrebiča na špeciálne miesto na likvidáciu odpadu na konci jeho životnosti. Ak je nepoužívaný spotrebič správne oddelený





odpad, môže sa recyklovať, spracovať a ekologicky zlikvidovať; týmto sa zabraňuje negatívnemu vplyvu na životné prostredie a zdravie a prispieva k recyklácii materiálov výrobku. Ďalšie informácie o dostupných službách likvidácie odpadu získate od miestnej spoločnosti na odstraňovanie odpadu alebo od predajne, kde ste zariadenie kúpili.

ZÁRUKA

Výrobok je za normálnych podmienok používania zaručený proti akémukoľvek nedostatku zhody, ako je uvedené v návode na použitie. Záruka sa preto nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, opotrebovaním alebo náhodnými udalosťami. Počas trvania záruky na porušenie zhody si prosím prečítajte osobitné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov.

Distributor/ Distribútor pre SR/CZ : ags 92, s.r.o., Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9

Elektrická odsávačka mléka.

Před použitím si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. Předpokládáné použití a informace o elektrické odsávačce. Účel použití a informace o elektrické odsávačce mléka.

Bezpečnostní varování!



- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití a měl by být používán v souladu s návodem k použití. Jakékoli jiné použití je nevhodné a proto nebezpečné. Společnost Artsana nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím tohoto zařízení.
- Přístroj je určen pro osobní potřebu a kupující jej nemůže svěřit jiným osobám..
- Přístroj a jeho součásti nesmí zůstat na místech vystavenému přímému slunečnímu záření, nechráněného před deštěm a jinými povětrnostními vlivy. Síťový adaptér je určen pro interní použití, takže jej nemůžete nechat na přímém slunečním světle, nechráněného před deštěm a jinými povětrnostními vlivy.
- Pokud je zařízení používáno venku, musí být napájeno pouze interními bateriemi a nesmí být ponecháno na přímém slunečním světle, nechráněný před deštěm a jinými povětrnostními vlivy. Nedodržení tohoto pravidla může způsobit zásah elektrickým proudem.
- Toto zařízení není hračka. Nesmí být svěřeno dětem nebo osobám s omezenými duševními schopnostmi, nezkušené nebo bez potřebných znalostí. Výrobek mohou používat osoby s omezenými fyzickými nebo smyslovými schopnostmi, jsou-li pod dohledem někoho, kdo byl poučen o bezpečném používání zařízení a se souvisejícími riziky.
- Uchovávejte zařízení, jeho součásti a síťový adaptér spolu s kabelem k připojení ke krytu motoru mimo dosah dětí. Mimo dosah dětí uchovávejte také napájecí kabely, které připojují síťový adapter k tělu motoru a trubice, která spojuje tělo motoru se sacím zařízením, hrozí zadušení. Přístroj obsahuje také malé části, které při použití mohou dítě zadusit.
- Zajistěte, aby děti neměli možnost hrát si se zařízením, jeho částmi a síťovým adaptérem.
- Přístroj vždy umístěte na rovný a stabilní povrch, mimo kolébky a postýlky.

- Před připojením síťového adaptéru k elektrické zásuvce se ujistěte, že napájecí zdroj a zástrčka síťového adaptéru jsou kompatibilní s dostupným síťovým napájením a zásuvkou, kterou používáte. Typový štítek je umístěn na síťovém adaptéru.
- Pokud zástrčka síťového adaptéru dodávaného se zařízením není kompatibilní se zásuvkou a příslušné předpisy to umožňují používejte pouze certifikované adaptéry, obraťte se na odborníka.
- Vložte napájecí adaptér do zásuvky, která je snadno přístupná pouze dospělím.
- Chcete-li zařízení odpojit od sítě, odpojte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte kabel, který připojuje síťový adaptér k tělu motoru. Neodpojujte napájecí adaptér z elektrické zásuvky vytáhnutím kabelu adaptéru nebo připojeného zařízení.
- Nečistěte ani nedezinfikujte odsávačku při použití, když je nabíjena alkalickými bateriemi (nejsou součástí přístroje) nebo pokud je připojení k elektrické síti pomocí napájecího adaptéru. Čistěte a dezinfikujte dle popisu v této příručce.
- Za účelem zabránění šíření bakterií se doporučuje získané mléko bezprostředně po odsání uložit na místo, kde je možno ho správně skladovat.
- Před každým použitím vyčistěte a dezinfikujte silikonovou vložku (3), tělo odsávačky (4) a ventil (5). Lahvičku očistěte a dezinfikujte (6) a příslušenství (7) - (8), jak je popsáno v pokynech.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není membrána poškozena: nesmí být popraskaná nebo nařezaná. V případě popraskání nebo rozřezání výrobek nepoužívejte.
- Čištění a dezinfekce jsou úkony, které musí provádět uživatel. Tyto činnosti nesvěřujte dětem nebo osobám s omezenými duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a bez potřebných znalostí.
- Za žádných okolností nesmíte přístroj ani napájecí adaptér ponořit nebo navlhčit ve vodě nebo jiných kapalinách. Nedávat je pod tekoucí vodu. Pokud se zařízení nebo adaptér namočí, tak se před jeho dalším užíváním obraťte na odborníka.
- Pokud zařízení, napájecí adaptér nebo zástrčka adaptéru vykazují známky poškození, nepoužívejte je. Je-li výrobek nebo síťový adaptér poškozen, tak před jeho dalším použitím kontaktujte odborníka.



- Poznámka: Nepoužívejte jiné síťové adaptéry, než které poskytuje společnost Artsana S.p.A. spolu s výrobkem (model GQ07-060100-DG, Výrobce: Dong Guan City GangQi Electronic Co., protože potom by zařízení nesplňovalo technické specifikace a příslušné směrnice, což by snížilo úroveň bezpečnosti a její rozsah. V případě potřeby volejte (800-188-898).
- V případě závady, poškození zařízení nebo síťového adaptéru se ho nepokoušejte rozebrat nebo opravit. V případě poruchy nebo poškození přístroje, krytu motoru nebo adaptéru volejte bezplatně na telefonní číslo (800-188-898). Jakékoli opravy/ jiné práce prováděné uživatelem mohou ohrozit jeho samotného i další osoby, jakož i nevratně poškodit zařízení. Kromě toho způsobí okamžitou neplatnost záruky.
- Pokud je balení poškozeno, zkontrolujte stav všech součástí a části výrobku. Pokud je napájecí adaptér a kryt motoru nepoškozen, umyjte všechny části, jak je popsáno v části "ČIŠTĚNÍ".
- Před použitím odstraňte všechny plastové sáčky a všechny prvky, které jsou součástí balení výrobku. Dejte je na místo nepřístupné dětem; zařízení může představovat hrozbu.
- Po vyjmutí zařízení z obalu se ujistěte, že je neporušené a viditelně nepoškozené. V případě pochybností zařízení nepoužívejte a kontaktujte pouze příslušného specialistu, místo nákupu nebo zavolejte bezplatně na telefonní číslo (800-188-898).
- Zkontrolujte, zda je zařízení při používání na rovném a stabilním povrchu tak, aby se zabránilo pádu nebo převrácení z výšky.
- Přístroj neumísťujte na měkké nebo vlhké povrchy nebo na teplá místa.
- Nepoužívejte při kúpaní alebo sprchovaní, alebo vo vlhkom prostredí, v blízkosti vane, umývadiel, drezov, alebo v inej situácii, kde niektoré tekutiny môžu prísť do kontaktu s prístrojom.
- Ujistěte se, že je souprava umístěna tak daleko od sestavy motoru, že nezpůsobuje pád.
- Použití jakéhokoli elektrického zařízení vyžaduje několik základních pravidel:
 - Nikdy se nedotýkejte přístroje vlhkýma rukama.
 - Udržujte přístroj a adaptér mimo zdroje tepla.
 - Nedotýkejte se zařízení nebo adaptéru: pokud náhodou spadnete do vody nebo se náhodně namočí, okamžitě vypněte hlavní vypínač svého domu a před dotykem přístroje odpojte adaptér ze zásuvky.
 - Poté zařízení nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
 - V případě poruchy a/nebo špatného fungování a/nebo adaptéru a / nebo připojovacího kabelu adaptéru na těle motoru,

okamžitě vypněte, odpojte adaptér ze zásuvky a nepokoušejte se je používat nebo opravit,

V případě poruchy a/nebo špatného provozu zařízení a/nebo napájecího adaptéru a/nebo kabelu připojeného k napájecímu adaptéru ke krytu motoru, okamžitě vypněte zařízení, odpojte síťovou zástrčku adaptéru ze zásuvky, nepokoušejte se je opravit, obraťte se na odborníka nebo volejte na bezplatnou linku (800-188-898).).

- Po každém použití musí být přístroj důkladně vyčištěn a vysušen.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, je třeba jej důkladně vyčistit a vyjmout baterie (pokud jsou vložené), je nutné umístit na čisté a suché místo, chráněné od světla, mimo zdroje tepla tak, jak je uvedeno v informacích o skladování a cestování.
- Pokud se rozhodneme, že zařízení nebudete používat, vyjměte baterie, pokud byly vloženy a odpojte kabel od napájecího adaptéru (po vytažení zástrčky ze zásuvky), aby jej již nebylo možné používat. Nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu, ale předejte jej k segregaci, protože jde o elektrické /elektronické zařízení (OEE), v souladu s požadavky 2012/19 / EU nebo předpisy platné v zemi, kde se zařízení nachází a kde bylo prodáno.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vždy vyjměte alkalické baterie. Nedodržení tohoto pokynu může vést k úniku, poškození a chemické kontaminace zařízení.
- Aby se zabránilo požáru a úrazu elektrickým proudem, neukládejte kabel, který připojujete k napájecímu adaptéru a zařízení pod koberce nebo v blízkosti ohřívačů, kamen nebo radiátorů.
- Přístroj používejte při teplotě od + 5 ° C do + 40 ° C. Při podmínkách přesahujících stanovené rozsahy, zejména horní, může dojít k přehřátí zařízení a jeho poškození a/nebo ohrožení popáleninami a představuje riziko pro části pod napětím.
- Zařízení je navrženo tak, aby pracovalo pouze s díly dodávanými v originálním balení a 150 ml lahví. Použití jiných dílů nebo lahví s větší kapacitou nemusí zaručit dané parametry.
- Přístroj nesmí být používán nepřetržitě po dobu delší než 30 minut. Po jeho použití by měly být pauza na 30 minut. Jakékoli překročení maximální povolené provozní doby (zařízení se automaticky vypne po 40 minutách) může způsobit přehřátí a poškození a může uživateli způsobit popáleniny.
- Parametry produktu se mohou neočekávaně změnit. Máte-li pochybnosti o pochopení této příručky, kontaktujte svého prodejce nebo se volejte bezplatně na číslo (800-188-898).

ODSTRANĚNÍ A VLOŽENÍ BATERIÍ – UPOZORNĚNÍ

- Baterie mohou vyměnit pouze dospělí.
- Chcete-li vyměnit baterii: otevřete kryt, vyjměte použité baterie z přihrádky na baterie, vložte nové baterie v požadovaném směru pólů a zavřete kryt. Pokud jsou baterie vloženy v opačném směru, mohou se přehřát, poškodit výrobek a způsobit únik kyseliny.
- Používejte pouze alkalické baterie, které jsou stejné nebo rovnocenné těm doporučeným.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo nové s použitými bateriemi.
- Nezkratujte póly/konce baterií.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vždy vyjměte.
- Do tohoto zařízení nevkládejte dobíjecí baterie, protože mohou omezit nebo zabránit správnému provozu.
- Nepoužívejte litinové baterie ani dobíjecí baterie: tento přístroj není určen pro baterie tohoto typu.
- Používání litinových baterií nebo jejich dobíjení může být nebezpečné.
- Vždy používejte baterie z výrobku, aby nedošlo k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.
Vytečená kapalina může chemicky kontaminovat části, které jsou v kontaktu s mlékem.
- Pokud z baterie kapalina uniká, okamžitě ji vyměňte, nezapomeňte ji vyčistit a důkladně si umýt ruce.
Zkontrolujte, zda je jakýkoli únik v jakémkoliv v kontaktu s částmi soupravy, zejména s díly, které jsou v kontaktu s mlékem.
- Nevyhazujte použité baterie do ohně ani v jeho okolí ani je nelikvidujte v komunálním odpadu. Baterie musí být odstraněny v souladu s platnými předpisy v zemi prodeje výrobku.
- Před uskladněním zařízení vyjměte baterie.

POPIS SYMBOLŮ



Kód v katalogu produktů



Upozornění!



Přečtěte si návod k použití – postupujte podle pokynů k použití



Pouze k domácímu užití



On/off – zapnout-vypnout

IP 21

Zařízení je chráněné před vniknutím pevných předmětů (velikost / průměr > = 12 mm) a kapalin.

Zařízení je chráněno před vertikálně padajícími kapkami vody.



Střídavý proud



Stálý proud



V souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU



Strany pólu síťového adaptéru



Strany pólů vložených baterií



Zařízení splňuje základní požadavky příslušných směrnic ES



Zařízení třídy II

Odsávačka mléka a kojení

Kojení je velmi důležitou etapou života dítěte a matky. Pro novorozence přitulení se k prsům a sání není jen záležitostí ukojení původní fyzické potřeby, ale zejména okamžiky strávené s mámou, bohaté na emoce a hmatové, zvukové, chuťové a čichové pocity.

Naplnění této potřeby přináší hluboký pocit pohody a uspokojení. Mateřské mléko obsahuje všechny živiny nezbytné pro zabezpečení každodenních nutričních a psychologických potřeb dítěte nejméně do 6 měsíců věku.

Chicco elektrická odsávačka mléka je cennou pomůckou pro prodloužení kojení a to i v případě přebytku mléka nebo v případě nutnosti odejít na určitou dobu od dítěte. V takových případech můžete odsáté mléko uskladnit a následně ho podat svému dítěti.

Za účelem zajištění nejvyšší všestrannosti a praktičnosti tak elektrická odsávačka funguje na alkalické baterie typu AA 1,5V (nejsou součástí balení) a při připojení k vhodnému napájecímu zdroji (model GQ07-060100-DG, výrobce: Dong Guan Město GangQi Electronic Co)

SEZNAM DÍLŮ

- 1- membrána
- 2 - membránový kryt
- 3- měkká silikonová vložka
- 4.tělo odsávačky
- 5- ventil
- 6-NF fľaša
- 7- dudlík 0 m s víčkem a víkem
- 8 - pevný uzávěr
- 9- podstavec
- 10- sestava motoru
- 11- displej
- 12 - přihrádka na baterie
- 13 - tlačítko Zapnutí/Vypnutí
- 14 - tlačítko na zvýšení síly odsávání/stimulační síly
- 15 - tlačítko na snížení síly odsávání/stimulační síly
- 16 - tlačítko stimulace/odsávání
- 17- Silikonová trubice pro použití odsávání mléka v jediné konfiguraci (00009199300000 a 00009199400000)
- 18-silikonová trubice s dvojitou soupravou k používání. Odsávačky mléka ve dvojité konfiguraci ve dvojí konfiguraci (pouze 00009199400000)
- 19- síťový adaptér
- 20- zástrčka napájecího kabelu výrobku
- 21-indikátor stavu baterie
- 22-indikátor síly stimulace/odsávání
- 23-hodiny
- 24-stimulační indikátor
- 25-sací indikátor
- 26- 00009199400000)
- 27- (pouze pro 00009199400000)

* * Díly (1) až (9), které jsou součástí sady produktů dvojitá 00009199400000 odsávačka mateřského mléka, jsou k dispozici v dvojnásobném množství (2x), aby byla lehkou použitelná.

Výrobek, který má být použit v konfiguraci dvojitého sání / stimulace.

PŘÍPRAVA

Před prvním použitím odsávačky důkladně umyjte všechny části *jak je popsáno v době "ČIŠTĚNÍ".

- Poté složte odsávačku následujícím způsobem
Nasaďte ventil (5) úplně do kruhového těla odsávačky (4). (Obrázek 1)
- Utáhněte vnější okraj tak, aby nedošlo k poškození ventilu a ujistěte se, že jsou obě hrany instalovaného ventilu připojeny. Pokud tomu tak není, nasaďte ventil znovu a dbejte na správné zarovnání hran.

Pro větší pohodlí se může na tělo odsávačky (4) aplikovat silikonová vložka (3). Silikonový kryt dobře vložte do odsávačky a zajistěte okolo vnějšího okraje odsávačky (obr. 2). Stlačením vrstev na výstupu, abyste odstranili zbývající vzduch.

- Umístěte silikonovou membránu (1) na kryt (2) a vložte membránu s podložkou (složenou) do těla odsávačky (4) (Obr. 3)
- Připojte lahvičku NaturalFeeling (6) k závitové základně těla (4) odsávačky. (Obr.4)
- Sestavené zařízení postavte na plochý a stabilní povrch a umístěte jej na praktický stojan (9), který zvýší jeho stabilitu.
- Chcete-li používat odsávačku s napájecím adaptérem (18), vložte zástrčku (19) do otvoru v krytu motoru (10) a poté zapojte adaptér do elektrické zásuvky. (Obrázek 5)
- Chcete-li odsávačku používat s alkalickými bateriemi, otevřete kryt a vložte 4 baterie AA1.5 V (nejsou součástí balení) s přihlédnutím ke správné polaritě. Zavřete kryt. Životnost alkalických baterií se může lišit v závislosti na značce a úrovni nabíjení.
- VAROVÁNÍ: Pokud je odsávačka připojena k adaptéru (18) nebo pokud se delší dobu nepoužívá, vyjměte baterie z krytu motoru (10)
V případě elektrické odsávačky 000091993000000 připojte silikonové hadičky (17) k víčku membrány (2) (obr. 6), pro elektrické dvojitě odsávačky 000091994000000 silikonové hadičky dvojitě sady (18) spojte s víčky membrány.
Pevný silikonový trubcový konektor (17) elektrické odsávačky 000091993000000 nebo (18) v případě elektrické dvojitě odsávačky 000091994000000 odpovídající otvor v krytu motoru (10) (Obr. 7).

- Dávejte pozor, abyste neztratili napájecí kabel, protože zařízení by se pak stalo nepoužitelným.

* Kromě krytu motoru (10), síťového adaptéru (19) a silikonové trubice (17) nebo (18).

OBSLUHA ODSÁVAČKY

- Před každým použitím dezinfikujte všechny komponenty * pomocí studené sterilizační tekutiny (podle doporučení výrobce)



nebo pomocí horké (páry) za použití vhodného vybavení nebo vyvařením (5 minut) před použitím ponechte všechny dezinfikované části se zcela vychladnout.

- Umyjte si ruce a sklopte odsávačku, jak je popsáno v části "PŘÍPRAVA". Důkladně umyjte prsa vodou nebo praktickými Chicco ubrousky na hygienu prsou. Pohodlně se posaďte.

Poznámka: Pro zajištění správné činnosti odsávačky mléka nezapomeňte nezakrývat rukou otvor na levé straně odsávačky mléka (4)

Poznámka: když je odsávačka mléka zapnutá, vždy se zapne ve stimulačním režimu, aby se usnadnilo odsávání mléka; poté se aktivuje tovární nastavení (úroveň 5).

Na displeji se zobrazí indikátor stimulace (24).

Poznámka: Aby se předešlo rizikům způsobeným přetečením tekutiny (potraviny), doporučuje se nikdy nenaplnňovat láhev nad maximální limit uvedený na stupnici.

Režim

REF000091993000000 i REF000091994000000

- Odsávačku mléka přiložte těsně k prsu a ujistěte se, že je bradavka přesně uprostřed. Odsávačku mléka můžete používat s měkkým silikonovým krytem nebo bez něj. (3); doporučujeme vyzkoušet obě metody a zvolit tu, která je příjemnější a pohodlnější. Zapněte odsávačku mléka tlačítkem zapnutí/vypnutí (13) na krytu motoru (10). Displej (11) se pak rozsvítí pouze 000091994000000 - zkontrolujte ikonu (26) zobrazující provozní režim čerpadla.
- V jednom režimu musí ikona zobrazit jeden kruh. V opačném případě stiskněte a podržte současně tlačítka "+" (15) a "-" (14) abyste změnili režim provozu odsávačky z dvojitého (dva kruhy) na jednoduchý (jeden kruh).

Pokud používáte odsávačku mléka nabíjenou alkalickými bateriemi, indikátor na displeji úroveň jejich nabití (21). Pokud je zařízení napájeno pomocí síťového adaptéru, tak se indikátor nezobrazí. Indikátor stavu baterie má 4 úrovně. Po asi 2 minutách stimulace se automaticky přepne na úroveň 5 (výrobní nastavení). Na displeji se objeví indikátor odsávání (25). Můžete přerušit krok stimulace a přejít na sání. Chcete-li to provést, krátce stiskněte tlačítko stimulace / sání (16). Pokud je nutná stimulace, znovu stiskněte tlačítko stimulace/sání (16). Poté stiskněte tlačítko stimulace / sání (16)

- Pomocí tlačítek "+" (15) a "-" (14) může klávesnice regulovat stimulaci / sání na základě pocitové síly na prsou a / nebo na základě množství mléka. Doporučuje se regulovat stimulaci / expresi postupně, dokud není dosaženo požadované úrovně. Pokud vybraná stimulace způsobuje nepohodlí nebo bolest, doporučuje se ji snížit "-" (14)

- Sání můžete nastavit pro obě prsa. Odsávačku zapnete stisknutím tlačítka (13). - Při dalším zapnutí odsávačky nabízí stejné úrovně stimulace/sání, jako bylo při posledním použití.

Duální režim - iba odsávačka 00091994000000

- Zapněte odsávačku mléka vypínačem (13) na krytu odsávačky (10). Poté se displej zapne (11). Současným stisknutím tlačítek "+" (15) a "-" (14) změňte provozní režim odsávačky z jednoduchého (výrobní nastavení) na duální. Ikona (26) zobrazující režim činnosti odsávačky mléka musí zobrazovat dva kruhy, označující dvojité režim. Odsávačku mléka přiložte těsně k prsu a ujistěte se, že bradavka je přesně ve středu. Druhé pohárky přiložte pevně k prsu a zkontrolujte, zda je bradavka ve středu. Po asi 2 minutách stimulace se automaticky přepne na úroveň 5 (výrobní nastavení). Na displeji se objeví indikátor sání (25). Můžete přerušit stimulační krok a přesunout se k samotnému sání. Chcete-li to provést, krátce stiskněte tlačítko stimulace / sání (16). Pokud je nutná stimulace, opět stiskněte stimulaci / sání (16). Pak stiskněte tlačítko stimulace / sání (16) a zadejte sání.

Pomocí tlačítek "+" (15) a "-" (14) na klávesnici lze nastavit na stimulace / odsávání na základě pocitové síly na prsou a/nebo na základě množství mléka. Doporučuje se regulovat stimulaci / sání postupně, dokud není dosaženo požadované úrovně. Pokud zvolená stimulace způsobuje nepohodlí nebo bolest, doporučuje se odpovídajícím způsobem jej snížit tlačítkem "-" (14) Stisknutím spínače (13) zapnete odsávačku mléka, při dalším zapnutí vám odsávačka navrhne stejnou úroveň stimulace/sání, jak byla uložena po posledním použití. VAROVÁNÍ: Ihned po použití důkladně umyjte všechny části * jak je popsáno v "ČISTĚNÍ".

Chcete-li dát dítěti mléko okamžitě, odšroubujte láhev z těla odsávačky (4) a vyjměte jej. Na láhev našroubujte víčko s dudlíkem (7) (součástí dodávky). Tímto způsobem získáme praktickou láhev na krmení (NaturalFeeling). Pokud je láhev uzavřena praktickým těsným víčkem (8) (součást balení) tak odsáté mléko můžete skladovat v chladničce po dobu maximálně 48 hodin při teplotě 4 °C nebo 3 měsíce v mrazničce při -18 °C

VAROVÁNÍ: vždy když odsávačku nepoužíváte, odpojte síťový adaptér ze zásuvky, s výjimkou krytu motoru (10), napájecí adaptér (19) a silikonové trubice (17) nebo (18).

- ČISTĚNÍ Před čišťením odpojte síťový adaptér ze zásuvky (pokud je k dispozici) a síťovou zástrčku ze zásuvky (20) na krytu motoru.

- Rozložte všechny části odsávačky mléka
Poznámka: odstraňte ventil (5) umístěný na oběhovém potrubí uvnitř krytu uzávěru (4); Za tímto účelem jemně zatáhněte zástrčku na boku ventilu
VAROVÁNÍ: Jemně vyjměte ventil a nečistěte jej žádnými nástroji, protože poškození zabraňuje dalšímu použití odsávačky. Poznámka: Pokud chcete odpojit silikonovou trubici, nejprve odstraňte membránu (1) s víčkem pouzdra, aby se nic nepřevrátilo. Pak uchopte konec připevněný k uzávěru membrány a jemně ji vytáhněte. Umyjte všechny části * důkladně horkou vodou a saponátem, důkladně opláchněte a důkladně osušte měkkým a s čistým hadříkem. Nečistěte odsávačku mléka ani jeho části hrubými povrchy. Kryt motoru a napájecí adaptér čistěte měkkým, čistým a suchým hadříkem.
Varování! Přístroj nenamáchejte ani neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Hadici je možné opláchnout a dobře vysušit. Všechny části kromě krytu motoru (10), napájecí adaptér (19), ventil (5), membrána (1), silikonové víčko (3) a trubice (17) lze mýt v myčce na nádobí. Vzhledem k tomu, že tento způsob čištění je agresivnější, může materiál časem ztrácet barevnost nebo se mohou snížit jeho parametry. Láhev (6) a přiložené příslušenství (7) - (8) vyčistěte a dezinfikujte podle pokynů v balení. Po každém čištění umístěte zařízení na čisté a suché místo. Kromě krytu motoru (10), síťový adaptér (19) a trubice (17).

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Láhev na krmení NaturalFeeling 150 ML

00080711000xxx / 00080811000xxx.

REF

Nádoba na mléko NaturalFeeling 00002257200000 - kde XXX = variabilní identifikační kód země prodeje. Zařízení je dodáváno se dvěma prsní vložkami určených k odběru přebytečného mléka 20061770000).

- Doporučuje se nepoužívat žádné jiné příslušenství, než které je doporučeno zde.

Problém	Příčina	Rada
Odsávačka odsává nebo čerpá malé množství. .	Ventil není nainstalovaný nebo je nainstalovaný špatně	Nainstalujte ventil správně
	Tělo odsávačky a kryt motoru nejsou správně sestavené.	Ujistěte se, že je postup, který je popsán v oddíle "PŘÍPRAVA" provádíte správně. Ujistěte se, že silikonová hadička je pevně připojena k sestavě motoru a krytu membrány. Ujistěte se, že trubice není poškozena. Při sání nekrutě hadičkou.
	Odsávačka mléka dobře nesedí na prsu	Umístěte odsávačku mléka těsně k prsu a ujistěte se, že bradavka je přímo uprostřed. Zkuste to s měkkým silikonovým uzávěrem i bez něho.
	Nastavte nesprávně nastavenou sílu zpětného tahu.	Změňte sací výkon tak, abyste našli nejpohodlnější způsob stimulace a sání. Změna výkonu pomocí tlačítek "+" nebo "-". "-".
	Vybité nebo slabě nabité baterie	Vyměňte baterie
Bolestivé odsávání.	Příliš velká síla odsávání.	Změňte sací výkon tak, abyste našli nejpohodlnější způsob stimulace a sání. Změna výkonu pomocí tlačítek "+" nebo "-". "-".
Odsávačka se nezapne	Porucha síťového adaptéru nebo zařízení	Zkontrolujte, zda je napájení ze sítě. Zkontrolujte baterie
	Špatně spojené komponenty	Zkontrolujte všechna připojení
	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie.

Technické parametry

- REF 00009199300000 ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA MLIEKA Mod. N0041 i N0000

REF 00009199400000 ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA

- Maximální hodnota vakua v režimu čerpání: $-0,35 \pm 0,03$ bar **
(** hodnoty měřené kalibračním měřením - úroveň přesnosti 95 %).

- Typ zařízení: přerušovaný provoz; 30 minut

ZAPNUTO -30 MINUT VYPNUTO

- Hmotnost motoru: 325 g bez baterií

- Rozměry: 98x70x105h mm

- Vyrobeno v Číně

Napájení baterie MI: 6V

dc – 4x1.5V typ AA (LR06)

CE prohlášení o shodě

Zařízení značky Chicco Elektrická odsávačka mod. 000091993000000 Mod. N0041 a dvojité elektrická odsávačka

000091994000000 Mod. N0000 splňuje základní požadavky a další příslušné požadavky 2014/30 / EU

(elektromagnetická kompatibilita), 2014/35 / EU (nízké napětí) a 2011/65 / EU (RoHS). Kopii prohlášení o shodě můžete získat od výrobce: Artsana S.p.A přes Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (Como) Itálie.



Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2012/19/EU. Symbol přeškrtnané nádoby na přístroji indikuje, že výrobek s ukončenou životností musí být likvidován odděleně od komunálního odpadu, buď jeho předáním na místo pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo jejich vrácení prodejci, za předpokladu, že si koupíte jiné podobné zařízení.

Na konci životnosti přístroje je uživatel zodpovědný za jeho převoz na místo, kde zajistí likvidaci tohoto druhu odpadu. Pokud je nepoužívaný přístroj řádně likvidován, může být recyklován, zpracováván a likvidován ekologicky; tím se zabrání negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví a přispívá se k recyklaci produktových materiálů.

Další informace o dostupných službách likvidace odpadu získáte od společnosti pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

ZÁRUKA

Výrobek je v záruce proti jakékoli vadě za běžných podmínek použití tak, jak je stanoveno v pokynech k používání.

Záruka se proto nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, opotřebením nebo náhodnými událostmi.

Informace o záruční době výrobku naleznete ve zvláštních ustanoveních vnitrostátních právních předpisů.

Distributor/ Distribútor pre SR/CZ : ags 92, s.r.o., Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9

REF 00009199300000

REF 00009199400000

Rev. 00_2108

Made in China - Fabricado en China - Fabricado na China
Fabriqué en Chine - Gefabriceerd in China - Wyprodukowano w Chinach
Κατασκευασμένο στην Κίνα - Произведено в Китае

