

Milyen termékhez készült ez a használati útmutató?

Smart Sock 3 okos zokni

Smart Sock Plus okos zokni

A csomag tartalma

1, 2, 3 méretű zokni, minden méretben jobb és bal lábra egyaránt

Smart Sock okos zokni érzékelő Alapzat

Az alapzat kábele

Tápadapter

Bevezető kézikönyv

* 3-as méretű zoknik csak Smart Sock Plus okos zokni csomagolásban érhetők el.

Hogyan működik az Owlet Smart Sock okos zoknija?



A Smart Sock okos zokni érzékelője a pulzoximetriát használja az alvó gyermek zoknijából érkező adatok vételére. A zokni fénye átvilágítja a bőrt, és a véráramlást és az oxigénszintet az alapján becsüli meg, becslése az alapján történik, hogy az érzékelő mennyi fényt fog fel.

A Smart Sock okos zokni érzékelője adatokat gyűjt és elküldi az alapzatba. Ezen adatok alapján az alapzat szükség esetén figyelmezteti Önt. Az alapzat feladata, hogy vörös riasztás esetén időben figyelmeztessen, ezért úgy javasolt elhelyezni, hogy mindig hallja.

Hogyan működik az alkalmazás


Ha a Smart Sock okos zokni csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz:

Az alapzat a Wi-Fi hálózaton keresztül felküldi az információt az Owlet felhőjébe. Az Owlet felhője ezeket az adatokat megjeleníthetővé teszi az Owlet alkalmazásban.

Ennek köszönhetően minden adatot valós időben áttekinthet és értesítést kaphat az alkalmazástól, bárhol is legyen éppen.

LAN (helyi hálózat) üzemmód:

Ha LAN üzemmódot kíván használni, a telefont és az alapzatot ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. Az alkalmazás a Wi-Fi hálózat segítségével kezdeti kapcsolatot létesít az Owlet felhővel és addig veszi az adatokat, míg az alkalmazást be nem zárja, és az alkalmazás vagy az alapzat Wi-Fi hálózatát nem módosítja.

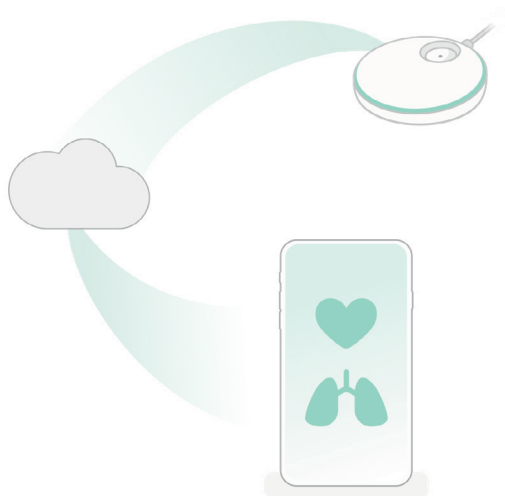

Hogyan kell beállítani és használni az Owlet Smart Sock okos zokniját.

Követelmények

Az Owlet Smart Sock okos zoknija hozzáférést igényel egy iOS vagy Android készülékhez, amelyre fel van telepítve az Owlet Care alkalmazás. Az operációs rendszerek minimális verziójáról az alkalmazásboltban talál információt.

A Smart Sock Plus okos zokni legfeljebb 24,9 kg (55 font) súlyú gyermekeknek való.

A mért értékek valós időben történő leolvasása, a távoli hozzáférés az alkalmazáshoz és az alkalmazás néhány más funkciója 2,4 GHz-es hálózathoz történő vezeték nélküli csatlakozást igényel. A Wi-Fi hotspot és az 5 GHz-es hálózat nem támogatott.

Ha szeretné beállítani az Owlet Smart Sock okos zokniját:

- ① Töltse le az Owlet alkalmazást.

Az alkalmazás iOS-os és androidos készülékekre is elérhető.



Hi there! Let's make you an account.

E-mail

Password (+6 characters long)

Re-enter password

- ② Hozzon létre fiókot

Ha fiókot szeretne létrehozni, kövesse az alkalmazás utasításait.



'Hoo' are you?

First Name

Last Name

Phone

Your Birthday

Zip



An email with a
confirmation code has just
been sent to you.

Resend email



Your account has been
confirmed. Welcome to the
Owlet family!

To home >

Add a child profile or device

Get started



Learn more about the Owlet Smart Sock >



Do you have an Owlet device to set up?

No >

Yes >

Which device would you like to set up?



Smart Sock 3



Smart Sock 2




Cam




③ Állítsa be a készüléket

MEGJEGYZÉS: Ha már van Owlet fiókja és új Owlet készüléket akar hozzáadni, kövesse az alkalmazás utasításait és adja hozzá az új készüléket.

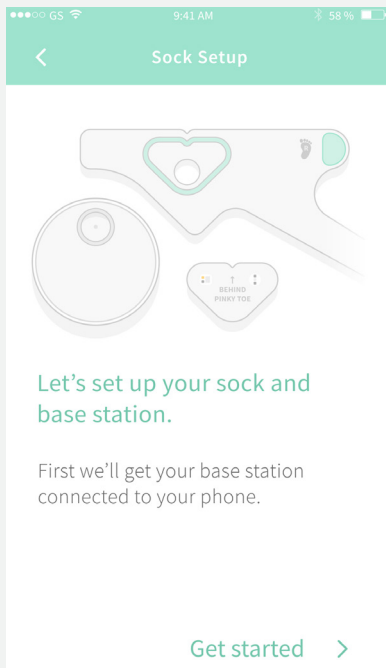


④ Csatlakoztassa az alapot a tápforráshoz és a Smart Sock okos zoknit az alapzathoz.

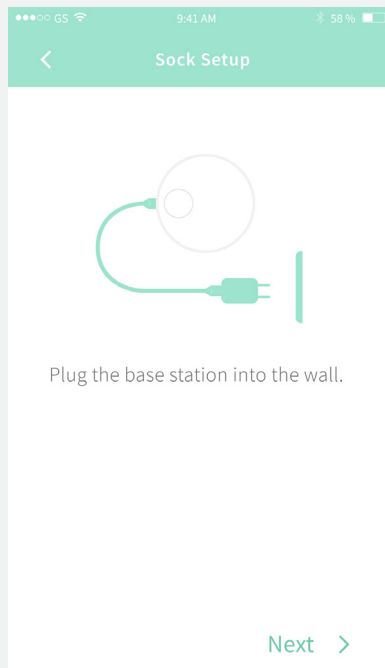


Let's connect your base station to Wi-Fi, so you can see readings on your phone.

1. Go to your phone's Wi-Fi settings and select the "Owlet" network

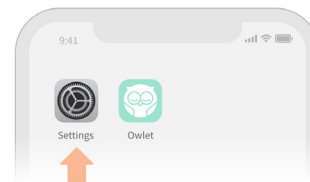

2. Come back to the Owlet App

If you are redirected or see a "failed to redirect" message, that's okay! Just come back to the Owlet app.

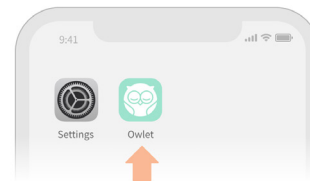

(Ez a képernyőkép csak iOS-ra érvényes.)



Your account has been confirmed. Welcome to the Owlet family!

[To home >](#)

(Ez a képernyőkép csak androidos készülékekre érvényes.)

Az alkalmazás utasításait követve csatlakoztathatja a Smart Sock okoszoknit a Wi-Fi hálózathoz, regisztrálhatja és párosíthatja, és szükség esetén frissítheti a zoknit.

< Wi-Fi Setup

Select the Owlet device you want to set up.

 Owlet - 383G9f65

(Ez a képernyőkép csak androidos készülékekre érvényes.)

< Wifi Setup

Select Wi-Fi router

(Does not work with 5.0GHz networks yet.)

 JohnsonFamilyWifi

 Your Neighbors Weird Wifi Name

 Jurassic House

 The Petersons



GS 9:41 AM 58 %




< Wifi Setup


Enter the Wi-Fi Password for JohnsonFamilyWifi

Password

Connect

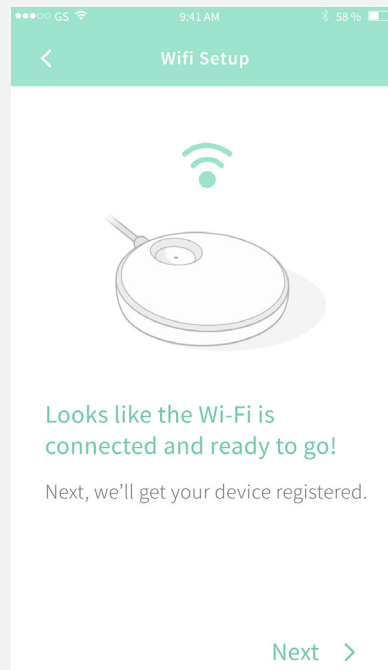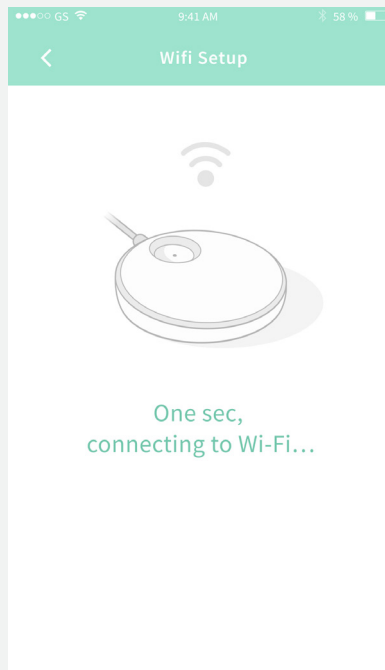

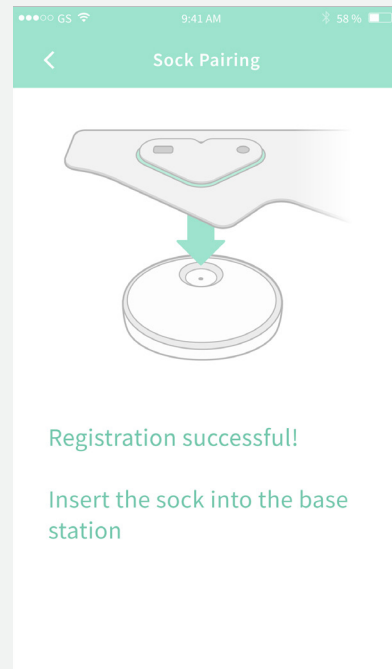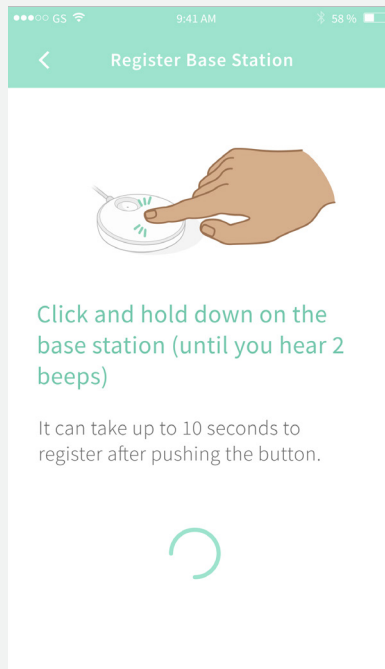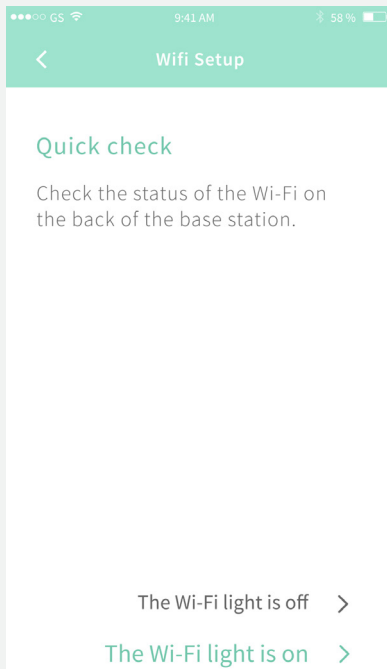


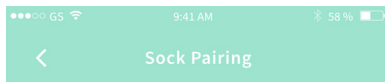

The sock has successfully paired!

Your base station should now be pulsing white, indicating that your sock is charging.

Next we'll make sure your device is up to date.

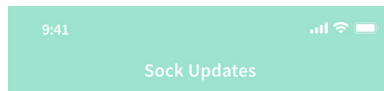


Updating your Owlet Sock 3

Please don't unplug your base station while it's updating.



Finishing up...

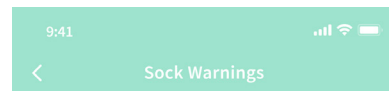

Important Safety Information

Correct sock fit

Your baby's safety is our top priority and we know it's yours too.

We want you to be aware that incorrect use of the sock could result in discomfort, potentially leading to red marks, pressure sores, or blisters on your baby's foot. Keep your baby's foot dry, and use the correct sock size and follow our placement guidelines.

Sock Hygiene

Gently hand wash the sock and sensor at least once every week with a mild detergent. Wait until the sock is completely dry before continuing use.

Safe sleep practices

Remember to always practice safe sleep practices and avoid unsafe sleep surfaces including swings, car seats and co-sleeping.

The Owlet Sock is not a replacement for safe sleep and parental care. Please ensure you are following safe sleep guidelines and are using the Owlet Sock as an aid to know how your baby is doing in addition to all the care, safety and love they receive from you.

Assign Child Profile



Your Smart Sock device is ready to be assigned to your child.

Create Child Profile >

Child Profile

Has your child been born yet?

No >

Yes >

Child Profile

Tell us about your child

This helps determine relevant HR and O2 ranges, and produce smarter insights.

First Name *

First Name

Birth Date *

07/26/91

Gender

Male

Relationship

Biological Child

Due Date

⑤ Hozza létre gyermeke profilját. Az alkalmazás segít létrehozni gyermeke profilját és hozzárendelni az Owlet készülékhez.



Child profile



Add a picture of Áron

Or, do it later from the home screen if you'd rather.


A Smart Sock okos zokni megfelelő mérete és felhelyezése

A Smart Sock okos zokni kétféle méretben érhető el, és mindkét méretben mind jobb- mind ballás zokni rendelkezésre áll:

Az 1. méret max. 5,4 kg súlyú gyermeknek való.

A 2. méret max. 5,4 - 13,5 kg súlyú gyermeknek való.

A 3. méret max. 13,5 - 24,9 kg súlyú gyermeknek való.*

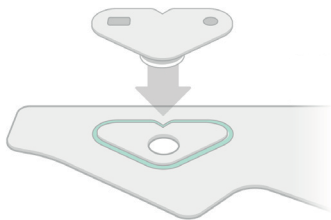

**3-as méretű zoknik csak a Smart Sock Plus okos zokni csomagolásában érhetőek el.*



Rögzítse az érzékelőt a szövetzoknihoz

Igazítsa az érzékelő körvonalát a szöveten lévő vonalhoz, nyomja az érzékelőt a zoknihoz, hogy rögzítse, és pattintsa be a helyére.

TIPP:

Ha nem biztos benne, melyik a legmegfelelőbb méret, kezdje a kisebb zoknival.



Adja fel a zoknit

Tegye a zoknit a láb oldalához úgy, hogy az érzékelő a kisujj mögött legyen.

Rögzítse a pántot a lábujjak alatt, majd tekerje a bokapántot a boka



hátsó része köré, és rögzítse a lábfejnél.

Megfelelő elhelyezés esetén a pántnak a lábfejen a hüvelykujj felé kell néznie, az érzékelőnek pedig a láb kisujjának peremén kell lennie úgy, hogy a kis bagoly feje az ujjak felé nézzen.



TIPPEK A SMART SOCK 3 OKOS ZOKNI HASZNÁLATÁRA TIPEGŐK ÉS ÓVODÁSOK LÁBÁN:

A tipegők és az óvodások sokkal mozgékonyabbak és aktívabbak, mint a csecsemők, ezért velük kapcsolatban adnánk néhány hasznos tanácsot:

1. A Smart Sock okos zoknit csak a gyerek lefektetése után adja fel, hogy minél kevesebbet járkáljon benne. A zokniban való járkálás árthat az érzékelőnek.

2. Várja meg, míg a gyermek elalszik, és csak ezután kapcsolja be az alapzatot. Ezzel megelőzheti, hogy a készülék feleslegesen sárga riasztással figyelmeztessen, miközben a gyermek elalvás közben forgolódik. Az alapzatot az alkalmazáson keresztül vagy közvetlenül az egyszerűen kapcsolhatja be.

3. Ha gyermeke korábban még soha nem hordott Smart Sock okos zoknit, húzódozhat és kérdéseket tehet fel. Engedje meg neki, hogy a zokni feladása előtt nézegesse és szokjon hozzá.

Adatgyűjtés és értesítések

Mielőtt gyermeke elaludna, vegye le a Smart Sock okos zoknit az alaplzatról és adja fel rá.

Az alaplzat fényei elkezdenek zölden villogni, ami azt jelenti, hogy a készülék megpróbálja venni az értékeket. Amikor az alaplzat elkezdi kapni az adatokat, zölden pulzál.

Sárga riasztás

A sárga riasztás során az alaplzat sárgán villog, altatódalt játszik és az alkalmazás push-üzenetet küld Önnek. A sárga szín azt jelzi, ha a zokni rosszul van feladva vagy leesett a gyermek lábáról és a készülék legalább 60 másodpercig nem tudott jó adatokhoz jutni.

Kék riasztás

A kék riasztás során az alaplzat kéken villog, altatódalt játszik és az alkalmazás push-üzenetet küld Önnek. A kék szín azt jelzi, hogy a zokni legalább 60 másodpercig az alaplzat hatótávolságán kívül volt, figyelmeztet a lemerült akkumulátorra, vagy hogy valami blokkolja a jelet.

Az emberi test meg tudja szakítani a jelet az alaplzat és a zokni között. Ha a gyerekkel foglalkozik, ne fordítson hátat az alaplzatnak, hogy elkerülje a felesleges értesítéseket. Ha a kék riasztás többször beindul, tegye a zoknit és az alaplzatot közelebb egymáshoz, hogy elkerülje az ismételt értesítéseket.

Vörös riasztás

A vörös riasztás a legmagasabb prioritású figyelmeztetést jelzi. Az alaplzat háromféle vörös figyelmeztetésre képes, amelyek során pirosan villog és egy magas hangot ad ki.

Alacsony véroxigénszint:

Figyelmezteti, ha a gyerek véroxigénszintje 80 % alá süllyed.

Alacsony pulzus: Figyelmezteti, ha a gyerek pulzusa percenként 60 szívverés, a véroxigénszint pedig 85 % alá süllyed.

Magas pulzus: Figyelmezteti, ha a gyerek pulzusa meghaladja a percenként 220 szívverést.

TIPP:

Ha a gyermekén etetés közben rajta van a zokni, előfordulhat, hogy beindul a vörös riasztás, mivel evés közben természetes módon csökken a véroxigénszint és emelkedik a pulzus.

A figyelmeztető hang szüneteltetése

Bármelyik aktív riasztás hangját 60 másodpercre szüneteltetheti az alapzat gombjának rövid megnyomásával vagy az alkalmazáson keresztül.

A szüneteltetés szünetelteti az alapzat és az alkalmazás hangját – az alapzaton lévő fénykör továbbra is világít és a részletek rendelkezésre állnak az alkalmazásban. A riasztás mindaddig aktív marad, míg a helyzet meg nem oldódik.

Ha a kiváltó ok (alacsony véroxigénszint, alacsony vagy magas pulzus) a szüneteltetés alatt elhárul, a riasztás kikapcsol.

Ha a szüneteltetés alatt egy azonos vagy magasabb prioritású másik riasztásra kerül sor, ez a riasztás a szüneteltetéstől függetlenül felhangzik.

Alapzat

A Smart Sock okos zokni alapzata az alábbi színű fényekkel jelzi a különböző üzemi állapotokat:

Fokozatosan zölden villog:

Adatok fogadása

Zölden pulzál:

Az értékek normálisak.

Kéken villog:

A Smart Sock okos zokni az alapzat hatótávolságán kívül van, az akkumulátor lemerült vagy valami blokkolja a jelet.

Sárgán villog:

A Smart Sock okos zokni nincs jól feladva vagy leesett a lábacsikáról.

Pirosan villog:

A pulzus vagy a véroxigénszint a megadott tartományon kívül esik.

Fehéren pulzál:

A Smart Sock okos zokni töltődik.

Fehéren világít:

A Smart Sock okos zokni fel van töltve.

Fokozatosan fehéren villog:

A Smart Sock okos zokni nincs párosítva.

Hogyan kapcsolhatom be a megfigyelést és az alapzatot?

Ha az érzékelő töltődik, vegye le a töltőportról, vagy nyomja meg az alapzatot és oldja ki. Az alapzat megnyomása után egy sípoló hangot hall, és az alapzat zölden világítani kezd.

Hogyan kapcsolhatom ki a megfigyelést és az alapzatot?

Nyomja meg az alapzatot és tartsa lenyomva, míg ki nem alszik a zöld fény, és egy sípoló hangot nem hall.

A Smart Sock okos zokni töltése

Tegye a Smart Sock okos zoknit az alapzat alján lévő töltőportra és győződjön meg róla, hogy az alapzat fehéren világít.


A Smart Sock okos zokni töltöttségi szintje

A Smart Sock okos zokni töltöttségi szintjét az alkalmazásban ellenőrizheti.


Ha az alapzat fénye fehéren pulzál, a zokni töltődik. Ha fehéren világít, a zokni teljesen fel van töltve.

Figyelmeztetés a Smart Sock okos zokni akkumulátorának lemerülésére

Ha az alkalmazás észleli, hogy a Smart Sock okos zokni akkumulátora egy órán belül lemerül, kék riasztással figyelmezteti Önt.

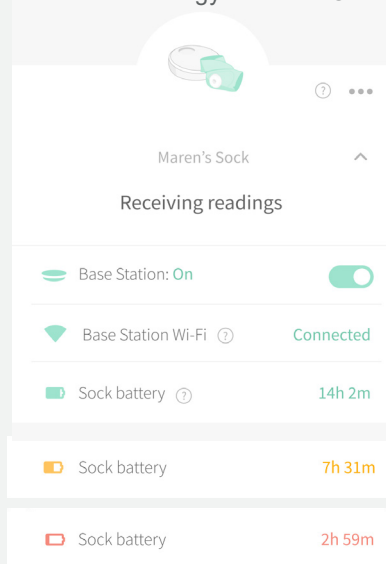


Ebben az esetben az alapzat nem ad ki hangot és nem is villog. Az akkumulátor állapotát bármikor megjelenítheti a készülék állapotjelző képernyőjén.

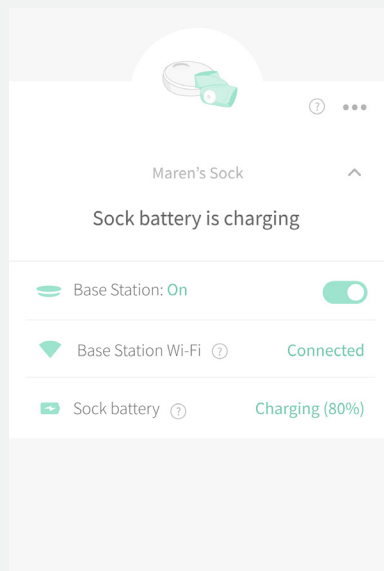


Előzmények


Az alkalmazásban az Előzmények lapon láthatók a legutóbbi alvási adatok és riasztások. Az alapzatnak és az alkalmazásnak az Előzmények megjelenítéséhez Wi-Fi kapcsolatra van szüksége.

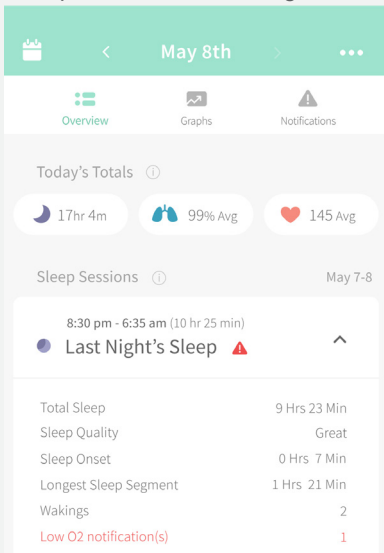

A grafikonok megjelenítik az elmúlt 10 perc átlagos pulzus, véroxigén és alvási adatait és minden alvás során 10 percenként frissítik ezeket.

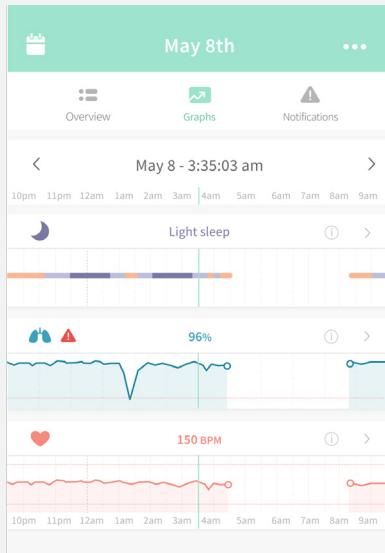

A grafikonok lehúzásával frissítheti az adatokat, vagy kikapcsolhatja és újra bekapcsolhatja az alkalmazást. Az Előzmények az utolsó 30 alvás adatait őrzik meg.

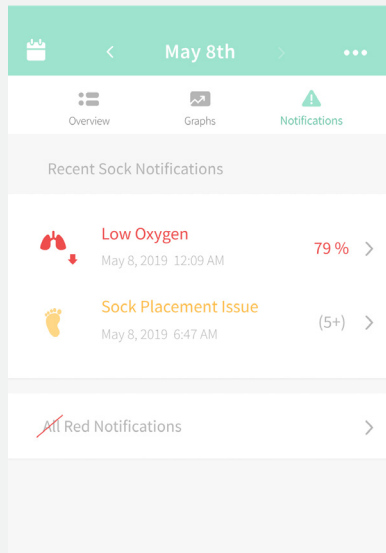

Ébredés után

Amikor a gyermekről leveszi a Smart Sock okos zoknit, tegye vissza az alapzatra, hogy töltődni tudjon.

A Smart Sock okos zokni gondozása és tárolása

A másik azonos méretű Smart Sock okos zoknit egy könnyen elérhető helyen tárolja, hogy rendszeresen cserélgetni tudja a zoknikat a két lábon. A másik méretet tegye el későbbi használatra.

Az Owlet azt javasolja, hogy a zoknit és az érzékelőt legalább kéthetente egyszer mossa ki, nehogy a szennyezett zokni és érzékelő irritálja a bőrt. A zoknit és az érzékelőt kézzel mossa hideg vízben, kímélő mosószerrel. A további használat előtt várja meg, míg megszárad.

Hogyan kapcsolhatja ki a Smart Sock okos zokni érzékelőjét

Vegye ki az érzékelőt az alapzathoz. Húzza ki a tápkábelt az alapzathoz. Tartsa lenyomva az alapzat gombját és ezzel egyidőben dugja be a tápkábelt. Addig tartsa az alapzat gombját, míg az alapzat lámpája narancssárgán világítani nem kezd és négy sípolást nem hall. Nyomja meg a gombot. A fény a zokniban kialszik. Ha újra be akarja kapcsolni a zoknit, tegye be az érzékelőt az alapzat töltőportjába.

Tippek és trükkök

A Smart Sock okos zokni felhelyezése

A rosszul feladott zokni gyermeke számára kényelmetlen lehet és a lábán piros foltok vagy hólyagok jelenhetnek meg. Győződjön meg róla, hogy a gyermek megfelelő méretű zoknit visel: fontos, hogy a zokni jól illeszkedjen, de ne legyen szűk sem az ujjaknál, sem a bokánál. Javasoljuk, hogy rendszeresen cserélje fel a jobb és bal zoknit.

Ha a láb bőre kipirosodik, ne adjon arra a lábra zoknit, és a másik lábon használja, amíg a vörös folt teljesen el nem tűnik.

Hová helyezzem az alapzatot?

Az alapzatnak a használt Smart Sock okos zokni hatótávolságán belül kell lennie, nehogy feleslegesen aktiválódjon a kék riasztás. A Bluetooth hatótávolsága max. 30 m. Az alapzat feladata,

hogy vörös riasztás esetén időben figyelmeztesse, ezért úgy javasolt elhelyezni, hogy mindig hallja.

Hogyan tesztelheti a riasztásokat

Vörös

Vegye ki az érzékelőt az alapzatból és hagyja bekapcsolva a megfigyelést. Tartsa lenyomva az alapzatot, amíg három sípolást nem hall, ekkor engedje el. Ha szüneteltetni akarja a hangot, nyomja meg újra az alapzatot vagy szüneteltesse az alkalmazásban. Ha resetelni akarja a készüléket, tartsa lenyomva az alapzatot, míg az alapzat fénye ki nem alszik és egy sípoló hangot nem hall. Az alapzat következő megnyomásával újra bekapcsolja.

Kék riasztás

Vegye ki az érzékelőt az alapzatból és hagyja bekapcsolva a megfigyelést. Tartsa az érzékelőt, és távolodjon el az alapzattól.

Sárga riasztás

Vegye ki az érzékelőt az alapzatból és hagyja bekapcsolva a megfigyelést. Tegye fel a Smart Sock okos zoknit a gyermek lábára vagy egy felnőtt ujjára, míg az alkalmazás nem észlel adatot. Ezután vegye le a zoknit és várjon egy kicsit. Ez akár 60 másodpercig is eltarthat.


Hogyan szakíthatja meg a Wi-Fi csatlakozást

Az alapzaton keresztül

Vegye ki az érzékelőt az alapzatból. Tartsa lenyomva az alapzat gombját és ezzel egyidőben dugja be az alapzatba a tápkábelt. Addig tartsa az alapzat gombját, míg az alapzat lámpája narancssárgán világítani nem kezd és négy sípolást nem hall. Ezután háromszor nyomja meg az alapzat gombját. Ellenőrizze, hogy nem világít-e a Wi-Fi hálózat kontroll-lámpája az alapzat alján.

Egy kis örökmozgója van otthon?

Igyekszünk gyermekét minden helyzetben megfigyelni, de néha annyit forgolódik, hogy az érzékelő nem tudja megszerezni a szükséges adatokat. Ebben az esetben az alkalmazásban remegő lábak jelennek meg. A mozgás befolyásolja a megszerzendő adatok minőségét, ezért felesleges figyelmeztetés helyett a felvétel és a jelzés egy időre megáll, amíg nem sikerül értékelhető adatokat nyerni.

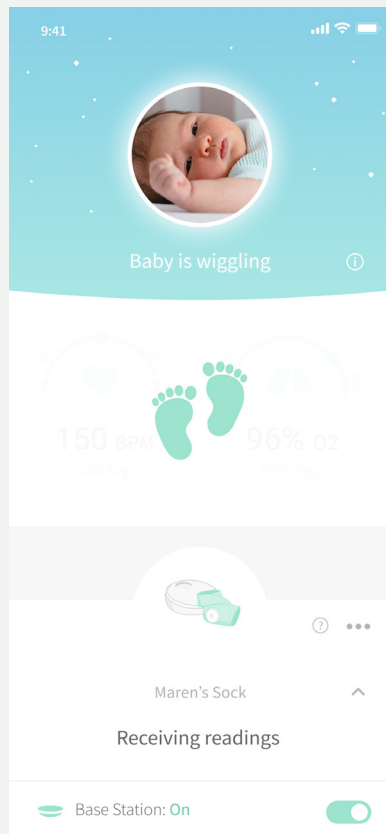


A Smart Sock okos zokni a ruha alatt is működik?

A Smart Sock okos zoknit úgy tervezték, hogy kényelmesen beférjen a pizsama, a pólya vagy a zokni alá, így zavartalan alvást biztosítson a gyermeknek.

Az alkalmazáshoz való hozzáférés megosztása

Az Owlet dolgozik azon a lehetőségen, hogy több fiókot lehessen hozzáadni, és így meg lehessen osztani az alkalmazáshoz való hozzáférést. Egyelőre, ha meg akarja osztani az alkalmazást egy barátjával vagy a családjával, ossza meg velük fiókja bejelentkezési adatait.

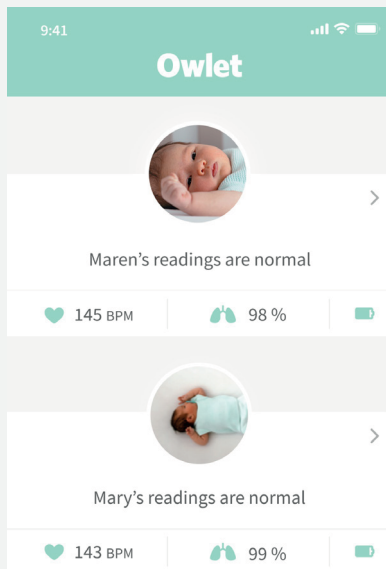

Több gyermek? Semmi baj!

Az Owlet alkalmazásban több gyermek profilját is létrehozhatja és a mindegyik gyermekhez bármelyik készüléket hozzárendelheti. Ügyeljen rá, hogy minden gyermeknek saját Smart Sock okos zoknija és hozzátartozó alapzata legyen, hogy riasztás esetén ne tévessze el.

Az alapzat fényereje

Az alapzat fényérzékelővel van ellátva, és automatikusan módosítja lámpáinak fényerejét a helyiség fénye szerint.

Súgó és támogató központ

Az alkalmazásban lépjen be a Fiók > Súgó és támogatás opcióba és lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal chaten, e-mailben vagy telefonon, vagy keresse fel a <http://support.owletcare.com/> weboldalt. További ötleteket és trükköket az alkalmazáson belüli Útmutató lapon talál.

A Smart Sock okos zokni tárolása

A Smart Sock okos zokni érzékelője olyan akkumulátort tartalmaz, amely hosszabb idő után lemerül. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, az érzékelő meghibásodik.

6 lépés, hogy tárolja a Smart Sock okos zokni érzékelőjét:

- 1. Teljesen töltsse fel az érzékelőt.**
- 2. Vegye ki az érzékelőt az alapzathoz.**
- 3. Kapcsolja ki a zoknit a 98. oldalon található utasítások szerint.**
- 4. Húzza ki az alapzathoz a tápellátásból.**
- 5. Az érzékelőt, az alapzathoz, a kábeleket, a csatlakozódugót és a Smart Sock okos zoknija hűvös és száraz helyen tárolja.**
- 6. 6-havonta töltsse fel az érzékelőt, majd ismételje meg az 1-5 lépést.**

HU Figyelmeztetések / Fontos biztonsági információk



FIGYELMEZTETÉS: Az Owlet Smart Sock okoszkoknia nem orvostechnikai eszköz.

Nem használható orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz helyettesítésére. Nem szolgál és nem is célja bármiféle megbetegedés vagy egészségi állapot diagnosztizálása, gyógyítása, kezelése, enyhítése vagy megelőzése, sem az anatómia vagy bármely élettani folyamat vizsgálata, helyettesítése vagy módosítása.

Az Owlet Smart Sock okoszkoknia legfeljebb 18 hónapos egészséges gyermekek számára készült, ezért az Owlet Smart Sock okoszkokni figyelmeztetési küszöbértékei nem olyan szigorúak, mint az orvosi monitoroké.

Ne feledje: Ez a termék kizárólag arra szolgál, hogy segítsen követni gyermeke állapotát, és nem helyettesíti a gyermekről történő gondoskodást. Felelős gyermeke egészségéért és jó életkörülményeier, és azért is, hogy betartsa a biztonságos alvás, egészség és gondoskodás alapelveit.

- Ne használja az Owlet Smart Sock okoszkokniát diagnosztikai eszközként.
- Ne használja az Owlet Smart Sock okoszkokniát, ha orvosa kórházi pulzoximéter vagy kórházi légzésleállás-monitor használatát javasolja.
- Ne használja az Owlet Smart Sock okoszkokniát kifogásként a veszélyes alvási szokásokra.
- Ne használja az Owlet Smart Sock okoszkokniát a gyermek felnőtt általi gondozásának helyettesítésére vagy pótlására.

Jótállás

Az Owlet büszke a termékeire. Garanciáinkat a www.owletcare.hu weboldalon találja.

Üzleti feltételek

Az Owlet vállalat termékének használata megkövetel bizonyos feltételeket, amelyeket a www.owletcare.hu weboldalon talál. Az Owlet vállalat termékének használatával elfogadja ezeket

a feltételeket.

A régiójára vonatkozó kapcsolattartási adatokat a www.owletcare.hu weboldalon találja.

Biztonság

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos számunkra. Ebben az útmutatóban és az Owlet Baby Care alkalmazásban sok fontos biztonsági utasítást talál. Mindig olvasson el és tartson be minden biztonsági figyelmeztetést.



AZ ÖN ÉS GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN:

HA MEGSZÓLAL A RIASZTÓ, AZONNAL REAGÁLJON.



FIGYELMEZTETÉS: AZ ALAPZAT MINDIG LEGALÁBB 1 MÉTER TÁVOLSÁGBAN LEGYEN A GYERMEK ÁGYÁTÓL, MIVEL A KÁBEL FULLDÁST OKOZHAT.

AZ OWLET SMART SOCK OKOSZKOKNIA CSAK SEGÉSZKÖZ.

NEM HELYETTESÍTI FELNÖTT FELÜGYELETÉT.

KORASZÜLÖTTEK, OXIGÉNELLÁTÁST KAPÓ GYERMEKEK VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK ESETÉBEN KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL AZ OWLET SMART SOCK OKOSZKOKNI HASZNÁLATÁRÓL.



A készüléken végzett olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket az előírások betartásáért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának elvesztését eredményezhetik. KIZÁRÓLAG a mellékelt tápadaptert használja. Ellenkező esetben korlátozott garanciánk érvényét veszíti. Ez a készülék vizsgálatokon ment keresztül, és megfelel a digitális eszközök B osztályára vonatkozó határértékeknek, az FCC irányelv 15. része alapján. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy lakóépületben.

Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó utasításainak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt.

IC: 21386-OBL3A (alapzat)

IC: 21386-OSS3A (érzékelő Q)

Ez a készülék teljesíti az FCC szabályzat 15. részét, és megfelel a nem engedélyköteles kanadai RSS szabványoknak az innovációs, tudományos és gazdasági fejlődésre vonatkozó kivételek nélkül. A készülék üzemeltetése a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát és (2) ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Az Owlet Baby Care vállalat ezúton kijelenti, hogy a Smart Sock okoszkokni megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésére áll a www.owletcare.hu weboldalon

2 402-2 480 MHz (kimenő teljesítmény 63 mW)

Az alapzat Bluetooth-a

2 412-2 462 MHz (kimenő teljesítmény 75 mW)

Az alapzat Wi-Fi hálózata

2 402-2 480 MHz (kimenő teljesítmény 6,3 mW)

Az érzékelő bluetooth-a



Az Owlet vállalta, hogy teljesíti a hulladék elektromos és elektronikus készülékekről szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelv követelményeit. Az Owlet termékek Európai Unió és az Egyesült Királyságon belüli helyes megsemmisítésével kapcsolatos további információkért látogasson el weboldalunkra.

BEMENET: 100-240 V~0,2 A 50-60 Hz

KIMENET: 5 V, 1 A



800433

Teljesíti az UL 62368-1

a CAN/CSA-C22.2

Szám 62368-1 szabvány követelményeit


9,693,730 és 10,449,837 sz. amerikai szabadalom.

További szabadalmak folyamatban.



A Smart Sock okos zokni rövid leírása

Az Owlet Smart Sock™ 3 okos zoknija két érzékelővel figyeli gyermeke életfunkcióit.

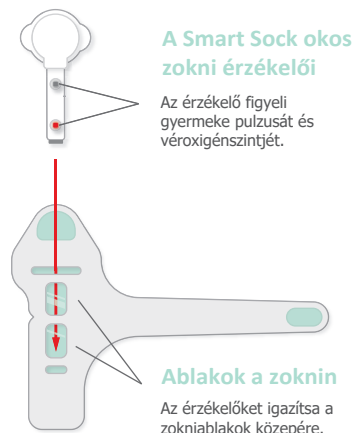

Minden lábacskára illik

Az Owlet Smart Sock okos zoknija a bal- és a jobb lábra is felhelyezhető. Ügyeljen rá, hogy az érzékelő körvonala és az érzékelő is a lábfej külső oldalán, a kislábujj mögött legyen, csak így illeszkedik megfelelően a zokni, és csak így tudja megszerezni a szükséges adatokat.





Jobb láb

Az okos zokni a lábfejen domborodik ki.

Bal láb

Az okos zokni a talpon domborodik ki.

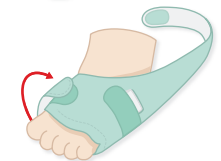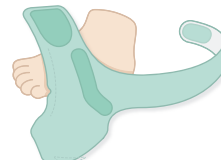

A Smart Sock okos zokni felhelyezése

Ne húzza meg túl szorosan az okos zoknit. Ha a szalag túlnyúlik a tépőzáron, próbáljon kisebb méretű zoknit.

Az alapzat rövid leírása

Elég egy pillantás az alapzatra és tudni fogja, hogy van a gyermeke

A Smart Sock okos zokni kontroll-lámpája

A zöld lámpa azt jelzi, hogy a Smart Sock okos zokni csatlakoztatva van az alapzathoz.

Regisztráció

A termék beállításakor az alkalmazás kéri, hogy nyomja meg egyszer ezt a gombot.

A Wi-Fi hálózat kontroll-lámpája

A zöld lámpa azt jelzi, hogy az alapzat csatlakoztatva van a Wi-Fi hálózathoz.

Bekapcsolás/kikapcsolás


Ha az alapzatot ki akarja kapcsolni, nyomja meg és engedje el. Az alapzat sípol egyet és a fény kialszik.

Állapotjelző

A fénykör tájékoztatja gyermeke állapotáról. Részleteket az alkalmazásban talál.

A fény tompítása


Az alapzatot hosszan megnyomva válthat a világos nappali és a tompa éjszakai üzemmód között.

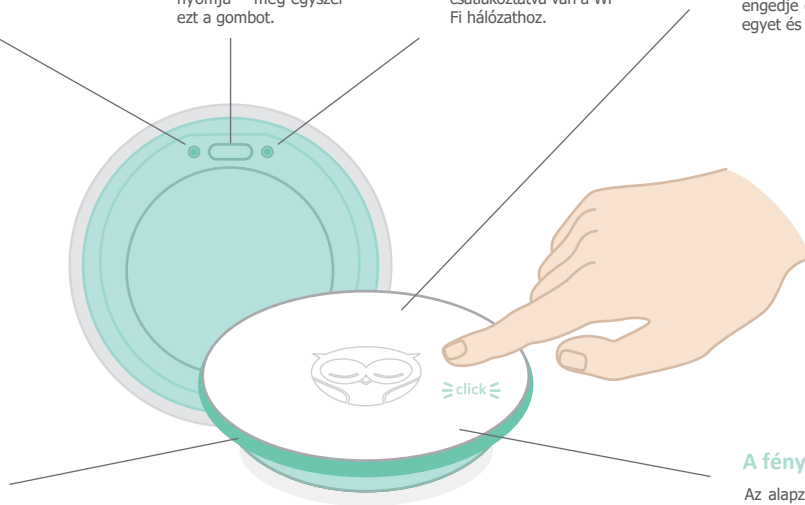

Az alapzat fényének színei


Az alapzat ötféle - különböző állapotokat jelző - színnel világíthat és hangjelzéseket adhat ki. A példák meghallgatásához lépjen be az alkalmazásba.

Állapot

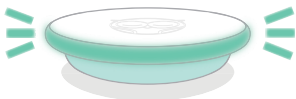


Zölden villog

A pulzusszám és véroxigénszint értékeinek első mérése

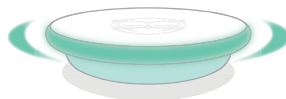

Lassan pulzál zöld színben


A pulzusszám és a véroxigénszint értéke normális.

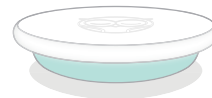

Fehéren világít

A Smart Sock okos zokni csatlakoztatva van és töltődik.


Riasztások

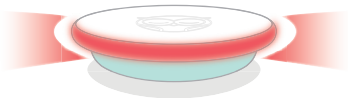

Pirosan villog




A pulzus vagy a véroxigénszint a megadott tartományon kívül mozog.

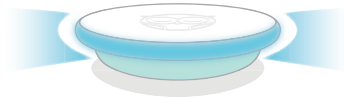

Kéken villog



A Smart Sock okos zokni ki van húzva az alapzattól.

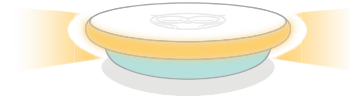

Sárgán villog



A Smart Sock okos zokni leesett a baba lábáról, rosszul van felhelyezve vagy elcsúszott.


Az első lépések

1

A MicroUSB csatlakozó segítségével csatlakoztassa a Smart Sock okos zokni elektronikus alkatrészét az alapzathoz.

2

Dugja be az alapzatot a konnektorba. A Smart Sock okos zokni tölteni kezd.

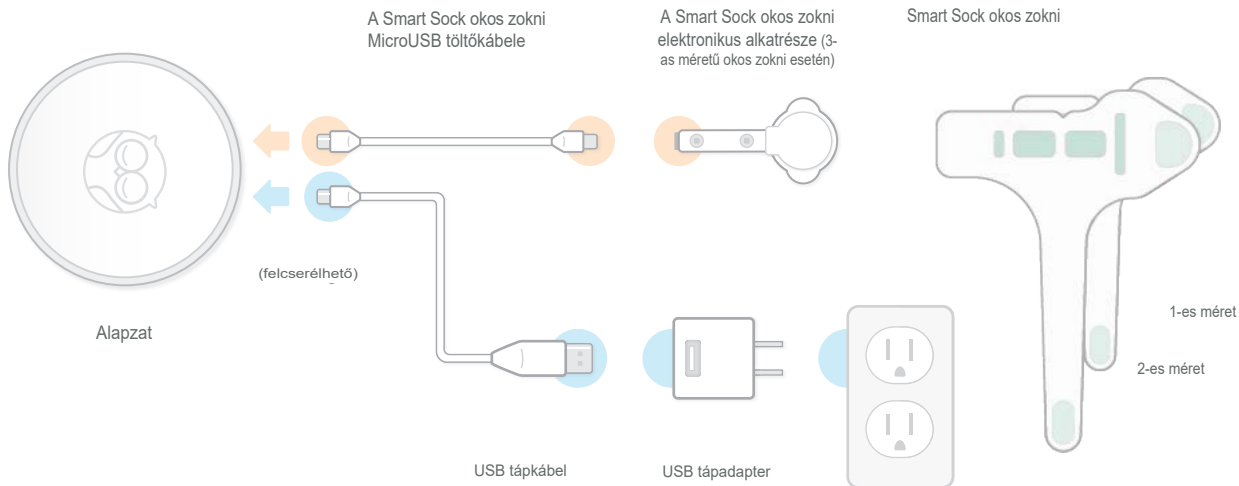


3

Töltse le az Owlet alkalmazást és állítsa be Smart Sock™ okos zokniját és az alapzatot.

4

Az Owlet bébiőrnek köszönhetően, amely segít gyermekét felügyelni, ismét nyugodtan alhat. Az alapzatot használja elsődleges, az alkalmazást pedig másodlagos értesítési rendszerként.

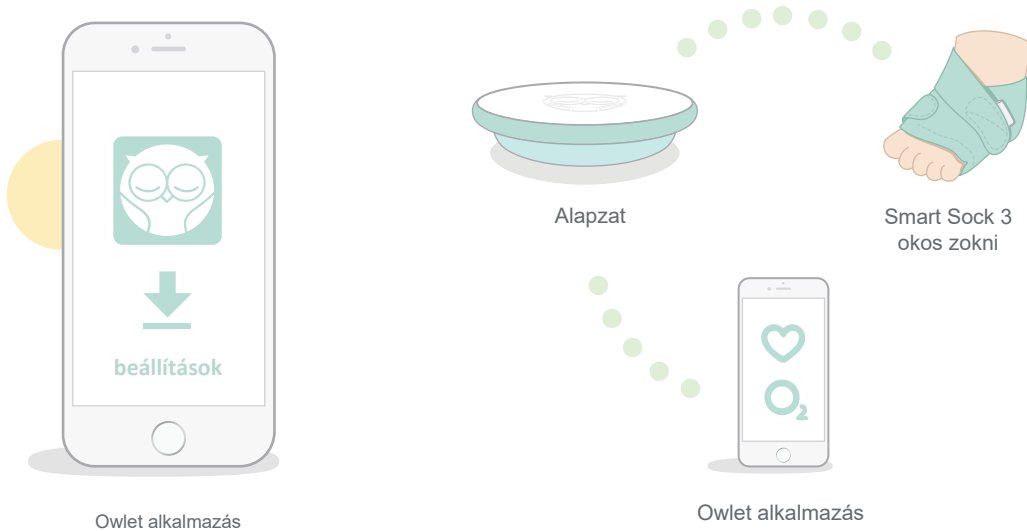

Információ a jótállásról

Az Owlet vállalat garantálja, hogy az Owlet Smart Sock™ 3 okos zoknya normál használat és kezelés mellett a vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetett dátumtól számított egy (1) évig anyag- és gyártási hibáktól mentes.

Biztonsági információk

Az Owlet Smart Sock okos zoknya és az Owlet alkalmazás gyermekgondozási segédeszközként szolgál és nem arra való, hogy felelős felnőtt felügyeletét helyettesítse vagy anélkül használják.

Az Owlet Smart Sock 3 okos zoknya egészséges gyermekek számára készült, ezért az Owlet Smart Sock 3 okos zokni riasztási küszöbértékei nem olyan szigorúak, mint az orvosi monitoroké.

- Ne használja az Owlet Smart Sock 3 okos zokniját diagnosztikai eszközként.
- Ne használja az Owlet Smart Sock 3 okos zokniját, ha orvosa kórházi pulzoximéter használatát javasolja.
- Ne használja az Owlet Smart Sock 3 okos zokniját, ha orvosa kórházi légzésleállás-monitor használatát javasolja.
- Ne használja az Owlet Smart Sock 3 okos zokniját kifogásként a nem biztonságos alvási szokásokra.

OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

A használati útmutatóban sok hasznos tanácsot talál az Owlet Smart Sock 3 okos zoknijának helyes használatával és kezelésével kapcsolatban. Egyes problémák megoldását megtalálja a Problémamegoldás részben. Ha először elolvassa a problémák megoldására vonatkozó tippeket, lehet, hogy nem kell hozzánk fordulnia segítségért. A termék beállításairól és használatáról a www.owletcare.hu weboldalon talál teljes körű tájékoztatást.

Ügyfélszolgálat elérhetősége: owletcare.hu@certus-mercatus.com

OLVASSA EL A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos számunkra. Ebben az útmutatóban és az Owlet Baby Care alkalmazásban sok fontos biztonsági utasítást talál. Mindig olvasson el és tartson be minden biztonsági utasítást.



Ez a jelzés az útmutatóban fontos biztonsági információkra figyelmeztet!

Minden biztonsági információ mellett figyelmeztető jelzés és a „VESZÉLY”, „FIGYELMEZTETÉS”, „VIGYÁZAT” vagy „FIGYELEM” szó található. Ezen szavak jelentése:

VESZÉLY = Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS = Potenciálisan veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.

VIGYÁZAT = Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYELEM = Veszélyes helyzet, amely a személyi sérülésen kívül más következményekkel járhat, pl. vagyoni kár.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



FIGYELMEZTETÉS: A Smart Sock 3 okos zokni nem orvostechnikai eszköz. Az Owlet Smart Sock 3 okos zokniját figyelmezteteli, ha gyermekének pulzusszáma vagy véroxigénszintje a meghatározott tartományon kívül van. A Smart Sock 3 zokni tizennyolc (18) hónaposnál fiatalabb csecsemők számára készült, tizennyolc (18) hónaposnál idősebb gyermekek számára nem való.

Az Owlet Smart Sock 3 okos zokni nem orvostechnikai eszköz. A Smart Sock 3 okos zokni:

- Nem szolgál betegség vagy sérülések diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, nyomon követésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
- Nincs hatással a test működésére vagy szerkezetére.
- Előldleges rendeltetését nem vegyi anyagok hatására éri el.
- Nem akadályozza meg a hirtelen csecsemőhalál szindrómát (SIDS).

Ezen használati útmutató elsődleges célja: Az Owlet Smart Sock 3 okos zoknijának megfelelő felhasználásához és használatához szükséges alapvető utasítások és ajánlások megadása a felhasználók számára, valamint az Owlet Smart Sock 3 okos zokni funkcióinak, kezelésének, biztonsági óvintézkedéseinek, karbantartásának és hibaelhárításának ismertetése. Elengedhetetlen, hogy mindenki, aki ezt a Smart Sock 3 okos zokni használni vagy bedílni fogja, figyelmen kívül a használati útmutatót, hogy megértse, hogyan kell helyesen használni az Owlet Smart Sock 3 okos zokniját, és hogy ezeket az utasításokat betartsa.

Ha nem érti ezeket az utasításokat, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a owletcare.hu@certus-mercatus.com e-mailcímen vagy.

AZ ŐN ÉS GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN



- AZ ALAPZAT MINDIG LEGALÁBB 1 MÉTER TÁVOLSÁGBAN LEGYEN A GYERMEK ÁGYÁTÓL, MIVEL A KÁBEL FÜLLADÁST OKOZHAT.
- AZ OWLET SMART SOCK 3 okos zokniját CSAK SEGÉSGESZKÖZ. NEM HELYETTESÍTI FELNŐTT FELÜGYELETÉT.
- KORASZÜLÖTTEK, OXIGÉNELLÁTÁST KAPÓ GYERMEKEK VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK ESETÉBEN KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL AZ OWLET SMART SOCK 2 okos zokni HASZNÁLATÁRÓL.
- HA MEGSZÓLAL A RIASZTÓ, MINDIG AZONNAL REAGÁLJON.

FCC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A készüléken végzett olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket az előírások betartásáért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosságának elvesztését eredményezhetik. KIZÁRÓLAG a mellékelt tápadaptart használja. Ellenkező esetben korlátozott garanciánk érvényét veszítheti. Ez a készülék vizsgálaton ment keresztül, és megfelel a digitális eszközök B osztályára vonatkozó határértékeknek, az FCC irányelv 15. része alapján.

Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy lakóépületben. Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát termel, használ el sugározhat, és ha nem a gyártó utasításainak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt.



Ez a készülék megfelel a nem engedélyköteles kanadai RSS szabványoknak az innovációs, tudományos és gazdasági fejlődésre vonatkozó kivételek nélkül. A készülék üzemeltetése a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát és (2) ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Az Owlet Baby Care Inc. ezennel kijelenti, hogy az Owlet Smart Sock 2 elnevezésű okos zokni megfelel az EU rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvnek, az elektromos berendezések forgalmazásáról szóló 2014/35/EU irányelvnek, a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelvnek, az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelvnek és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival szembe 2012/19/EU irányelvnek.

Az EU-s megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

www.owletcare.hu



A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad vegyes háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Végfelhasználóként az Ön felelőssége, hogy az elhasznált hulladékot környezetbarát módon ártalmatlanítsa a következők szerint: (1) juttassa vissza a kereskedőnek, akitől megvásárolta a terméket; vagy (2) ártalmatlanítsa egy kijelölt gyűjtőponton. A termék megfelelő megsemmisítése értékes erőforrások megtakarításában segít, valamint abban, hogy megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből eredhetnek. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi kijelölt gyűjtőponthoz. Szanciók alkalmazhatók a hulladék helytelen elhelyezése miatt, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Problémamegoldás

Alapbeállítások | Riasztások | Csatlakozás

Alapbeállítások

Probléma	Okok	Megoldás
■ Beállításakor nem látom a Smart Sock 3 okos zokni Wi-Fi hálózatait.	■ Az alapzat nincs bekapcsolva. ■ Az alapzat már csatlakoztatva van a Smart Sock 3 okos zokni Wi-Fi hálózathoz. ■ Az alapzat a hatótávolságon kívül van.	■ Dugja be az alapzatot a konnektorba. ■ Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi hálózati kontroll-lámpája az alapzat alján. Ha igen, ugorja át ezt a lépést és folytassa fiókjának létrehozását az alkalmazásban. ■ Tegye közelebb az alapzatot a Wi-Fi routerhez.
■ Az Owlet alkalmazásban nem látom az otthoni Wi-Fi hálózatainkat.	■ Routerre 5 GHz-es frekvenciasávot használ (az Owlet termék csak a 2,4 GHz-es sávot támogatja). ■ Lehet, hogy rejtett routert használ.	■ Ellenőrizze, hogy iOS-eszköze 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik-e (a legtöbb 5 GHz-es router támogatja a 2,4 GHz-es hálózati is). ■ A rejtett routerekre vonatkozó utasításokat az owletcare.com/support oldalon talál.
■ Az alapzatot nem lehet csatlakoztatni az otthoni Wi-Fi hálózathoz.	■ Hibaüzenet ■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán. ■ Otthoni Wi-Fi hálózata nem működik.	■ Ellenőrizze hálózata jelszavát. ■ Beállítás előtt helyezze az alapzatot közelebb a routerhez, majd a beállítás befejezése után vigye vissza az alapzatot a gyerekszobába. ■ Próbálja újraindítani a telefont és újra csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz. ■ Resetelje a Wi-Fi routerét.
■ Az alapzat a Smart Sock okos zokni leválasztása után féhéren világít.	■ Szoftverfrissítés van folyamatban.	■ Csatlakoztassa a Smart Sock okos zoknit újra az alapzathoz, amíg a frissítés be nem fejeződik.
■ Az alapzatot nem lehet párosítani az Owlet fiókomhoz.	■ Az alapzat és az Ön iOS-eszköze nem ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. ■ A kis Regisztráció gomb nyomva tartása	■ Ellenőrizze, hogy az alapzat és az Ön iOS-eszköze ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik-e. ■ Nyomja meg és engedje el (ne tartsa lenyomva) a kis Regisztráció gombot az alapzat alsó részén és várjon néhány másodpercig, mielőtt újra megkísérelje Owlet fiókjának párosítását. ■ Csatlakoztassa iOS-eszközét ugyanahhoz a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz, amelyhez az alapzat csatlakozik.

*Műszaki támogatásra van szüksége?

Lépjön kapcsolatban velünk az owletcare.hu@certus-mercatus.com email címen vagy az owletcare.hu weboldalon keressen rá az információra.

Riasztások

Probléma	Okok	Megoldás
■ Az alapzat kéken villog és sípol.	■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán. ■ A szülő vagy a gyermekről gondoskodó másik személy teste akadályozza a kapcsolatot a Smart Sock okos zokni és az alapzat között. Ez gyakran előfordul etetéskor, pelenkázáskor, ölelgetéskor stb. ■ Gyenge vagy lemerült akkumulátor	■ Tegye az alapzatot közelebb a Smart Sock okos zoknihoz. ■ Módosítsa a baba helyzetét vagy fontolja meg a monitor kikapcsolását etetés, pelenkázás, ölelgetés stb. közben. ■ Töltsse fel a Smart Sock okos zoknit.
■ Az alapzat pirosan villog és sípol.	■ Alacsony vagy magas pulzusszám ■ Alacsony véroxigénszint ■ A Smart Sock okos zokni nem illeszkedik a baba lábához.	■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelő körvonala a baba talpának külső oldalán 1-2 mm-rel a kislábujj mögött legyen. ■ Ügyeljen rá, hogy a Smart Sock okos zokni jól illeszkedjen a lábfejhez (ellenkező esetben az okos zokni nehezen tudja érzékelni az adatokat. Ezenkívül hamis riasztást is beindíthat.) ■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelők egy vonalban legyenek a szövetzokni ablakaival. ■ Fontolja meg más méretű szövetzokni használatát.
■ Az alapzat sárgán villog és sípol.	■ Problémák az adatgyűjtéssel ■ A Smart Sock okos zokni nincs megfelelően felhelyezve. ■ Túl erős a fény a helyiségben.	■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelő körvonala a baba talpának külső oldalán 1-2 mm-rel a kislábujj mögött legyen. ■ Ügyeljen rá, hogy a Smart Sock okos zokni jól illeszkedjen a lábfejhez (ellenkező esetben az okos zokni nehezen tudja érzékelni az adatokat és hamis riasztást is beindíthat). ■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelők egy vonalban legyenek a szövetzokni ablakaival. ■ Tompítsa a fényt a helyiségben.

Csatlakozás

Probléma	Okok	Megoldás
■ Az alapzat nem csatlakozik az internethez.	■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán. ■ Onthíro Wi-Fi hálózata nem működik.	■ Tegye közelebb egymáshoz az alapzatot és a Wi-Fi routert (Wi-Fi erősítő vagy további routerek nem oldják meg ezt a problémát). ■ Resetelje a Wi-Fi routert.
■ A Smart Sock okos zokni nem töltődik fel.	■ A Smart Sock okos zokni nincs teljesen csatlakoztatva. ■ A Smart Sock okos zoknit resetelni kell.	■ Töltsse a Smart Sock okos zoknit addig, amíg kattanást nem hall és zölden villogni nem ■ Kapcsolja ki és újra be a Smart Sock okos zokni elektronikus alkatrészét.
■ A pulzusszám és a véroxigénszint adatai helyén gondolatjelek láthatók.	■ A Smart Sock okos zokni igyekszik megbízható adatot szerezni. ■ A baba túlzottan mozgatja a lábcsakját. ■ A Smart Sock okos zokni rosszul van felhelyezve ■ Rosszul illeszkedő szövetzokni	■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelők a szövetzokni ablakainak közepén legyenek. ■ Ne tegye a babát bőcsőbe vagy regző alátétre, mert ezek megzavarhatják a készülék működését. ■ Ellenőrizze, hogy a Smart Sock okos zokni megfelelően van-e ■ Ellenőrizze, hogy megfelelő méretű szövetzoknit használ-e.

Tippek az egészséges alvási környezethez

Szeretnénk Önnel megosztani néhány tippet azzal kapcsolatban, hogyan gondoskodhat gyermeke egészséges és biztonságos alvásáról.

- A baba egyedül legyen a kiságyban és a hátán fekjön. Ha a csecsemő az oldalán vagy hason fekszik, az veszélyes lehet.
- Olyan kiságyat szerezzen be a gyermekének, amely megfelel a hatályos biztonsági szabványoknak. A kiságyhoz jól illeszkedő, stabil matracot vegyen és jól simuló lepedővel takarja le.
- Ne tegyen a kiságyba puha, szabadon levő vagy bolyhos tárgyakat. Ide tartoznak a párnák, plédek, takarók, védőpárnák, plüssállatok, játékok és egyéb puha tárgyak.
- A hagyományos takaró helyett használjon olyan csecsemőtakarót, amelyet be lehet gombolni, mint egy ruhadarabot, vagy egy hasonló takarót, amely melegen és biztonságban tartja a babát.
- Ossza meg a babával a szobáját, de az ágyát ne. Babája külön kiságyban, az Ön ágyának közelében aludjon. Így biztonságban lesz és az etetés is egyszerűbb. Ha a baba Önnel alszik, a Smart Sock okos zokni nem működne megfelelően. Az Ön teste ugyanis zavarná a zokni vezetékek nélküli jelét.
- Ügyeljen rá, hogy ne aludjon el a babával az Ön ágyában, a kanapén vagy a fotelban.
- Soha ne hagyja a csecsemőt puha felületen aludni, mint pl. felnőttek vagy gyerekek ágya, kanapé, fotel, vízágy, párna, kispárna, takaró, birkabőr vagy hasonló.
- Ne használjon párnákat, ékpárnákat vagy rögzítő alátéteket a baba megtámasztására, háton tartására vagy elfordulásának megakadályozására.
- Ügyeljen rá, hogy a baba ne hevüljön fel túlságosan. Könnyű pizsamát adjon rá és tartsa a szobát olyan hőmérsékleten, amely egy könnyen öltözött felnőtt számára kényelmes.
- Fontolja meg, hogy a délutáni és esti alvás alatt cumit kínál a babának. A csecsemőknek csak 3-4 hetes korban kínáljon cumit, amikor már hozzászoktak a szoptatáshoz.
- A biztonságos alvás ezen szabályaival ismertessen meg mindenkit, aki a babájáról gondoskodik!



OWLET MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: Owlet Baby Care Inc.

Címe: 2500 Executive PKWY Lehi, Utah 84043, Amerikai

Egyesült Államok

Telefonszám: + 1 844 334 5330

Termék megnevezése: Owlet Okos Zokni 3

Modell száma: OBL 3.0., OSS 3.0 Owlet Sock 3rd Generation (3. generációs Owlet Zokni)

Termék leírása: A 3. generációs Owlet Okos Zokni két részből áll – a bázisállomásból (OBL) és az érzékelő zokniból (OSS). Az érzékelő zokni egy átviteli mechanizmuson alapuló PPG szenzor segítségével méri fel a gyermek pulzusát és oxigénszintjét, amikor azt a gyermek, mint felhasználó a lábán viseli. A készülék akkumulátorral működik, mely újratölthető Litium-ion akkumulátor. A szenzor a pulzus és véroxigén adatokat alacsony energiaigényű Bluetooth kapcsolaton (Low Energy Bluetooth [BLE]) keresztül továbbítja a bázisállomásnak. A szabványos BLE modulációs és kommunikációs technikai elemeket Nordic nRF52840 IC típusú félvezetők támogatják. Az érzékelő műanyag házba foglalt 3D hajtogatott fémantennát használ.

Képviselő megnevezése: Obelis S.A.

Képviselő címe és elérhetőségei: Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brüsszel, Belgium

Telefonszám: +32 (0) 2 732 5954 Fax: +32 (0) 2 732 60 03

E-mail: mail@obelis.net

Képviseli: Gideon Elkayam

Alulírott, az Owlet Baby Care Inc. képviselőjében ezennel kijelentem, hogy a fent megjelölt termékért, amelyhez jelen megfelelőségi nyilatkozat tartozik, kizárólag az Owlet Baby Care Inc. tartozik felelősséggel, továbbá kijelentem, hogy a termék az alábbi Európai Uniói jogszabályoknak megfelel:

• Az e a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami

jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU (2014. április 16.) irányelv

• a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU (2014. február 26.) irányelv

• egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU (2011. június 8.) irányelv

• az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU (2014. február 26.) irányelv

• az általános termékbiztonságról szóló Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK (2001. december 3.) irányelv

• az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU (2012. július 4.) irányelv

A fenti irányelveknek való megfelelést alátámasztó technikai dokumentációt az Owlet Baby Care Inc.központjában a 2500 Executive PKWY Lehi, Utah 84043, Amerikai Egyesült Államok címen tárolják.

Kiállítás dátuma: 2021. december 8.

Tammy Lavery

igazgató

Mínőség Mérnöki és Szabályozási Ügyek


Az első lépések

Töltse le az Owlet alkalmazást.



Csatlakoztassa a kamerát, kövesse az alkalmazás utasításait és párosítsa az Owlet fiókjával.

Ha már le van töltve az Owlet alkalmazás, koppintson a Fiók lapra és adja hozzá az új készüléket.

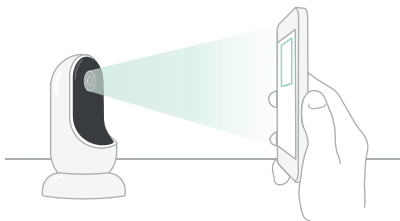

Felhívjuk figyelmét, hogy a kamera biztonságos és titkosított Wi-Fi hálózaton keresztül képes videót és hangot továbbítani. A kamerát csak jelszóval biztosított magánhálózathoz csatlakoztassa.

Az Owlet Cam 2 kamera állapotjelző kontroll-lámpái

- ● (pirosan/kéken villog) A kamerát most párosítani lehet az alkalmazással.
- (pirosan világít) A felhasználó az alkalmazáson keresztül streamel.
- ● (kéken villog) A kamera csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
- (kéken világít) A kamera csatlakozik az internethez. Az alkalmazás nem streamel.

Válassza meg a kívánt látószöveget


Helyezze a kamerát és minden kábelt a kiságy szélétől 1 m-en belüli távolságba. A kiságy szélétől 1 m-en belül lévő kábeleket le kell takarni.

A kamerát kétféleképpen telepítheti:



① Állítsa a mágneses alapzatot a kamerával egy sima felületre és állítsa be a kívánt dőlésszöveget.

② Ha a kiságyat vagy az egész szobát madártávlatból szeretné felvenni, az alapzatot használja faltartóként és rögzítse a kamerát a falra a kiságy fölé.

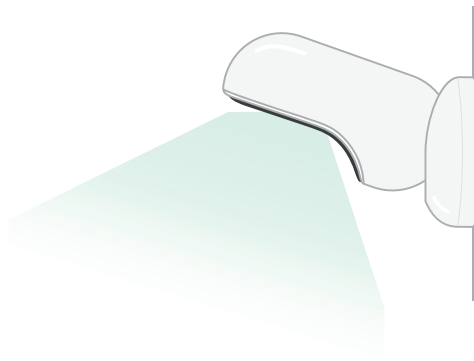

A további lépések megmutatják, hogyan szerelje a kamerát a kiságy feletti falra.

Elindíthatja a support.owletcare.com weboldalon található telepítő videónkat is.

A csomag tartalma



Owlet Cam 2
kamera



Kábelek Owlet
szalagokkal*
és szobahőmérséklet-érzékelő




Mágneses alapzat



Tápadapter

A kamera falra rögzítésére szolgáló készlet

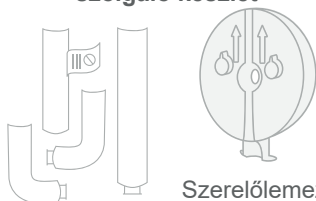

21x kábelvédő

18x hosszú kábelvédő
1x végelem
2x L-alakú kábelvédő

Szerelőlemez



1x csavar

A kamera rögzítéséhez szükséges szerszámok




Mérőszalag
(nem a csomag része)



Kis keresztfejes
csavarhúzó
(nem a csomag része)

*A korábbi modellek kábelrendezőt
tartalmazhatnak.

1. Mérje ki és jelölje meg a megfelelő távolságokat

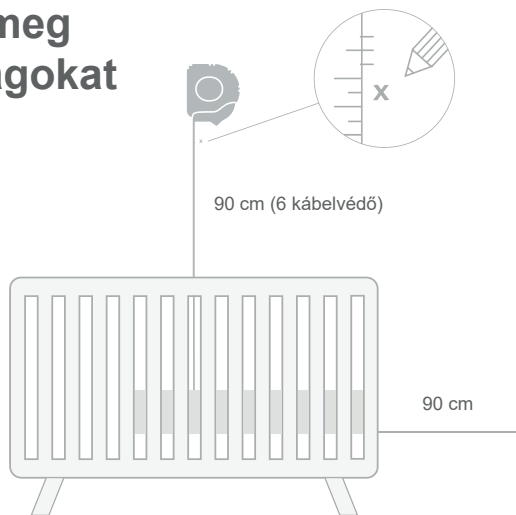


Mérjen ki 90 cm-t a gyerekmattac felső részétől, és jelölje be a falon azt a helyet, ahová a kamerát fogja rögzíteni. Ennek a jelnek a kiságy közepe fölött kell lennie, így gondoskodhat a kamera lehető legjobb betekintési szögéről.

Fontolja meg, melyik konnektort érdemes használni. A konnektornak legalább 90 cm távolságra kell lennie a kiságytól, hogy a gyerek közelében ne legyenek szabadon lévő kábelek. A további lépésekben megtudhatja, hogyan kell minden kábelt letakarni.

A hőérzékelő elhelyezése is fontos. A hőérzékelőt az okoskábelnek azon a végén találja, amely a tápadapterhez csatlakozik.

2. Igazítsa össze és rögzítse a szerelőlemezt

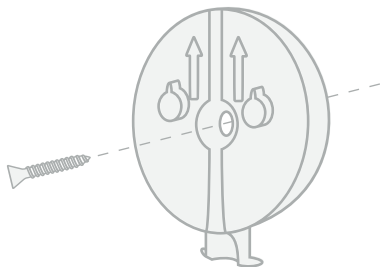


Igazítsa a szerelőlemez közepén lévő nyílást a falra rajzolt jelre. A mellékelt csavar segítségével rögzítse a szerelőlemezt a falra úgy, hogy a nyilak felfelé mutassanak.

3. Tekerje ki a kábelt



Távolítsa el a kábelszalagokat, és tekerje ki a kábelt.

4. Vezesse át a kábelt

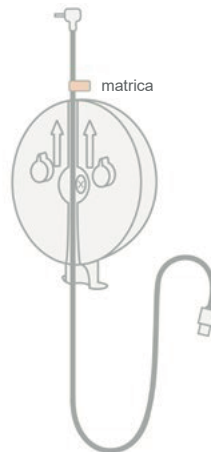


Húzza át a kábelt a szerelőlemez nyílásán és igazítsa a kábelben lévő narancssárga matricát a szerelőlemez felső részéhez.

5. Szerelje fel az alapzatot



Helyezze a mágneses alapzat nagy nyílásait a rögzítőlemezen lévő fűlekre és csúsztassa az alapzatot lefelé, amíg be nem kattannak a helyére.

6. Rögzítse a kamerát

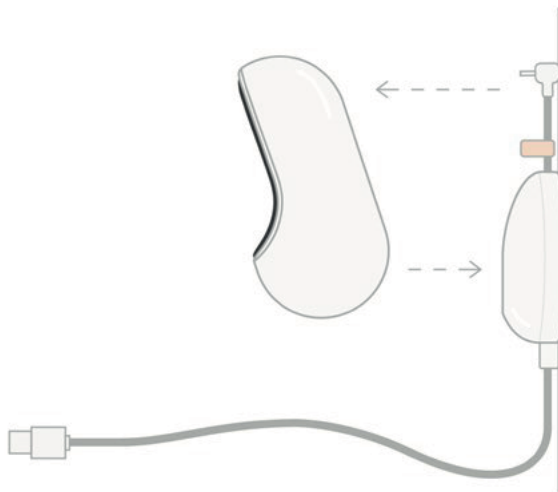


Erősítse a kamerát a mágneses alapzatra. Csatlakoztassa a kábelt a kamerába.

A narancsszínű matricát szorosan a szerelőlemez fölé kell helyezni, hogy a kábelnek elég mozgása legyen a kamera kívánt szögbe állításához.

7. Szerelje fel a kábelvédőket

A kábelvédők nagy szilárdságú ragasztóval tapadnak a falra. A telepítésnél ne siessen, gondosan válassza ki a megfelelő helyet.


- ① Vegye le az öntapadó fóliát a hosszú kábelvédő hátoldaláról.
- ② Húzza át a kábelt a hosszú kábelvédő közepén.
- ③ A hosszú kábelvédőt kattintsa rá a szerelőlemez aljára.
- ④ Erősen nyomja rá a falra.
- ⑤ Ismételje meg az 1-4 lépést a többi hosszú kábelvédővel és fedje le a kábel teljes hosszát egészen a konnektorig.

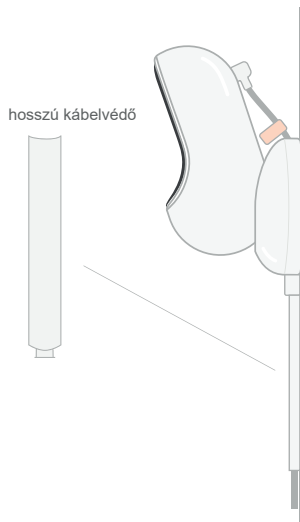

8. L-alakú kábelvédő

A jobbos vagy a balos L-alakú kábelvédő segítségével vezesse a kábelt a konnektorhoz.

Tegye fel a többi hosszú kábelvédőt, míg minden kábel le nincs fedve a kisággy körül 90 mm távolságban. Tegye fel a hosszú kábelvédőket, és egészen a konnektorig fedje le a kábeleket. Amikor már csak 15-25 cm-re van a konnektortól, tegye fel a végelemet (ezután a felesleges kábelt könnyen összekötheti a tépőzáras szalaggal).

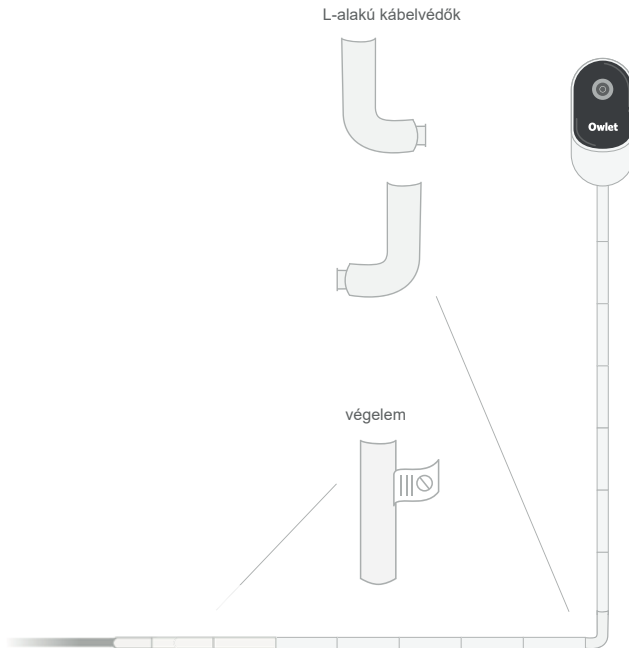


9. Rögzítse a kábel felesleges részét a tépőzáras szalaggal

A kábel felesleges részét tekerje fel egy laza hurokba. Vezesse át a kábelszalagot az első nyíláson, így rögzítse a hurok felső részét. Az Owlet logó kifelé nézzen. Vezesse át a kábelszalagot a második nyíláson, így rögzítse a hurok alsó részét a felsőhöz (a hurok most úgy néz ki, mint egy masni). Rögzítse a szalag fennmaradó részét.

Miután megfelelően feltekerte a kábel felesleges részét, csatlakoztassa a tápkábelt a tápadapterhez és dugja be a konnektorba.

Most az alkalmazás segítségével beállíthatja a kamerát a kívánt látószögre.

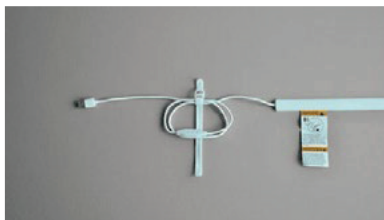

Tanácsra van szüksége?

További információkat, tippeket, tanácsokat a www.owletcare.hu oldalon talál.

Az Owlet Kamera 2 használata az alkalmazásban

A használati útmutató ezen része segít megérteni, hogyan kell használni a Kamera 2 és annak minden funkcióját az alkalmazásban

Kamera 2 kezdőképernyője

Megnézheti a Kamera 2 adatfolyamát iOS vagy Android készülékeken, 4 készülék csatlakoztatható egy eszközhez egyidőben a streameléshez.

- Válassza ki a [] ikont, vagy forgassa el a telefont vízszintesen a megtekintéshez Teljes képernyő.
- Az akár 4x nagyításhoz kattintson kétszer a képernyőre, vagy használja ujjait a közelítéshez/távolításához.

Kétirányú beszélgetés

Használja ezt a funkciót, hogy beszéljen a babához a másik szobából.



Gomb – BE

A baba hall téged


(a mikrofonon zöld háttér van)

Ha ez a funkció engedélyezve van akkor nem hogy hallja a hangot a Kamera, úgyhogy győződjön meg róla nyomja meg újra a gombot, amikor nem beszélnek.



Gomb – KI

A gyerek nem hall téged

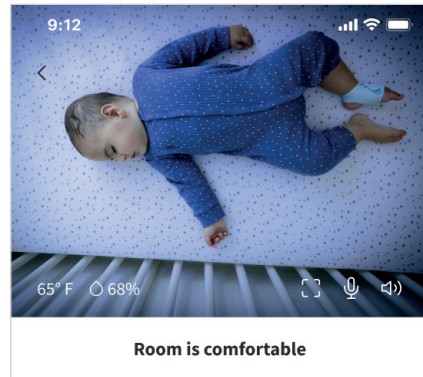

Audio lehetőségek



Be

Amikor az Owlet applikáció nyitva van, mindent hall a babáról a másik szobából. Ha átkapcsolja vagy bezárja az alkalmazást, ez a funkció megszűnik, Nem hallja a másik szobát.



Ki

Ha a ki gombot választja nem fogja hallani a kamera hangját. Video folytatja a streamelést.



Audio háttér

Ha a ki gombot választja a hangot újra hallani fogja a Kamera 2 verzióban még akkor is, ha az alkalmazás nincs nyitva, vagy az eszközt másra használja. Ez megengedi Önnek, hogy hallja a babát, akkor is ha más célra használja a telefont.

Videó minőség

A kamera 2, 1080 p minőségben streamel, magas minőségű videót biztosítva. A videó streaming minősége azonban számos tényező befolyásolhatja. A Kamera 2 "Automatára" van állítva, amely automatikusan beállítja a stream minőségét, hogy biztosítsa az egyenletes sugárzást. Kiválaszthat más megtekintési felbontást (1080p, 480p vagy 360p) is. Az Owlet az Automatikus beállítás használatát javasolja az egyenletes sugárzás érdekében.

- Ahhoz, hogy lássa, hogy a Kamera 2 mire van beállítva koppintson háromszor az "Auto" szó bal oldalára.




Szoba állapota

Alapértelmezés szerint a Kamera 2 feed arról tájékoztatja Önt, hogy a szobában nem megfelelő a hőmérséklet és páratartalom. Az állapotfrissítés mutatja az alapértelmezett vagy testreszabott beállításokat az Értésítések menüpont alatt.

- Szoba megfelelő
- Szoba nem megfelelő

Hőmérséklet és páratartalom adatok

Az Owlet Kamera beépített hőmérséklet és páratartalom érzékelővel rendelkezik, amely mutatja a hőmérsékletet Fahrenheit vagy Celsius fokban, valamint a páratartalmat százalékban kifejezve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hol helyezkedik el a termosztát a helyiségben a pontos leolvasás érdekében.

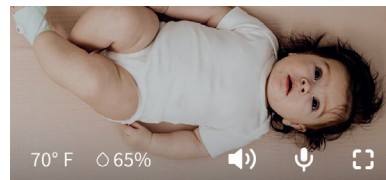

Értesítések és videoklipek

Kamera 2 értesítések

Értesítések érkeznek, ha a Kamera 2 eseményt észlel (sírás, hang, mozgás). Háromféle értesítést tud küldeni:

- Sírásérzékelés: értesítést kap, ha az eszköz sírást észlel.
- Hang érzékelés: értesítést kap, amikor a szobában hangot érzékel a beállított küszöbérték felett.
- Mozgás érzékelés: értesítést kap, ha mozgást érzékel a Kamera 2 látóterében.
- Szobakomfort / Alvássegítő: Értesítést kap, ha a szoba hőmérséklete vagy a páratartalma a megadott küszöbértékeken kívül van.


Küszöbértékek

- Sírás, hang és mozgás: a küszöbértékek beállításával szabályozhatja a az értesítések érzékenységet.
- Szobakomfort/alvássegítő: állítható tartományokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a személyre szabható beállításokat az Ön igényei szerint.

Hőmérséklet: bárhol beállítható 40 F-90 F között állítható be, tartományokkal 5 fokos lépésekben. Az alapértelmezett érték 60 F (16 °C) és 80 F (28 °C)

A Kamera 2 a hőmérsékletet Celsiusban olvassa le, és átváltja Fahrenheitre, így a leolvasott érték átlagosan 1-3 fokot térhet el.

Páratartalom: az alapértelmezett értékek 10-90% RH (relatív páratartalom)

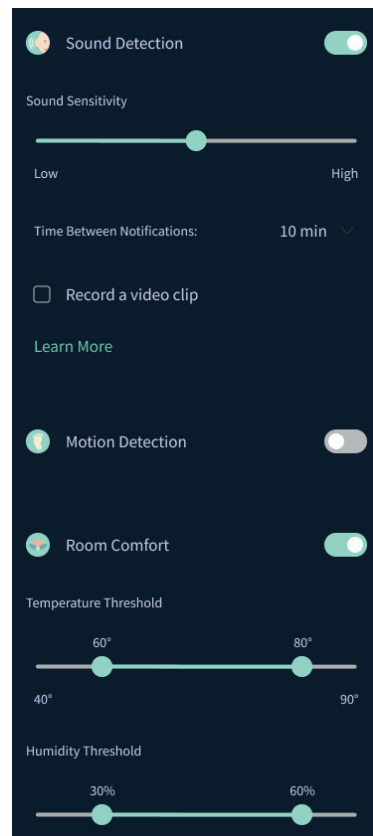

Értesítések közötti idő

Ezzel a beállítással határozhatja meg, milyen gyakran szeretne értesítéseket kapni. A mobil eszköz a meghatározott értesítéseket csak egyszer kapja meg a beállított időtartam alatt.

- Például, ha az értesítések közötti idő 5 percre van beállítva, akkor csak egyszer kap értesítést arról, hogy a baba sír az eltelt 5 perc alatt. Ha a 6. percben még mindig sír, akkor kap egy újabb értesítést.


A gyakoriság beállítható 1 percenként, vagy akár 1 óra időtartamra Szobai komfortfokozatok 30/60 percenként vagy akár 24 órán keresztül.

Küszöbértékek és az értesítések között eltelt idő ugyanazok lesznek minden, a fiókhöz társított, mobil eszközön.

Kamera 2 értesítések - BE

Annak érdekében, hogy egy adott mobil eszköz értesítéseket kapjon, Kamera 2 értesítéseket engedélyezni kell az ON-ra állítva a kezdőlapon.

Ez lehetővé teszi több eszköz csatlakoztatását a Kamera 2 készülékhez, de csak azok amelyekre értesítést szeretnének kapni.

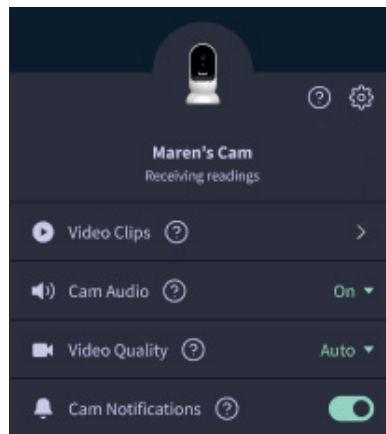

Videoklipek

Videoklipek rögzíthetők, amikor hangot, mozgást vagy sírást érzékel az eszköz a Baba szobájából. Ezek a kis klipek mentésre kerülnek az Owlet alkalmazásban 7 napra és saját eszközére is lementheti őket. A videoklip az esemény előtti és utáni néhány másodpercet is rögzítik.

- Videoklip rögzíthető amikor sírás, hang vagy mozgás érzékelés van a Kamera 2 közelében.

Videoklip lejátszása

Kattintson a lejátszani kívánt videoklipre. A video teljes képernyőn megjelenik és elfordítható vízszintesen is.

Lejátszhatja, megállíthatja, előre és hátra tekerheti (~4 másodpercet)



Lenémíthatja, teljes képernyőre teheti vagy meg is oszthatja a Megosztás gombra kattintva.

A Megosztás gombbal az alábbi lehetőségei vannak:

- Törölheti a videót a fiókból
- Megoszthatja a videót
- Lementheti a videót az eszközre


Videoklipek kezelése

- Elérhetőség: a videoklipek a felhasználó számára 7 napig elérhetőek és kezelhetőek.
- Rendezés és szűrés. Kiválaszthatja és szűrheti a videókat tulajdonságaik szerint.
- Videoklip törlése: Törölheti azokat a videókat, amelyekre már nincs szüksége. A videoklip törléséhez érintse meg a "Kiválasztás" gombot és jelölje ki, melyik videót szeretné törölni.
Szintén átállíthatja a teljes képernyős nézetet, ha a "Megosztás" gombra kattint. Ha egyszer a video az alkalmazásból törlésre került, más felhasználók sem láthatják azt, akik ugyanebbe a fiókba regisztrált felhasználók.

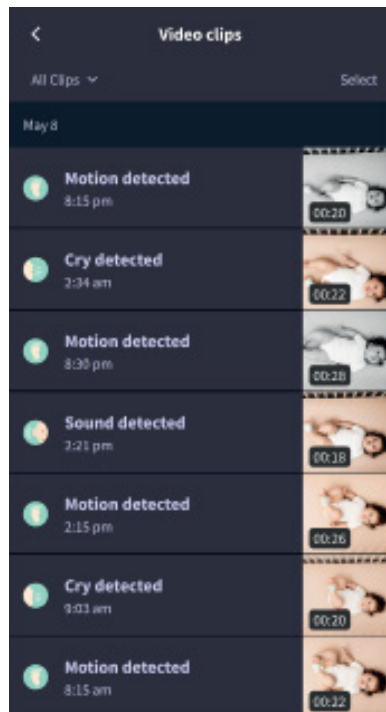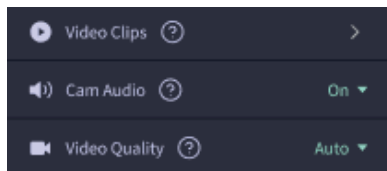

Történelem

A videoklipek szintén megtalálhatók az Előzmények fül alatt, és az adott naphoz kapcsolódó egyéb előzményekkel együtt jelennek meg. A listaelem nézet megnyomásakor megjelenik az adott napon rögzített összes videoklip listája.

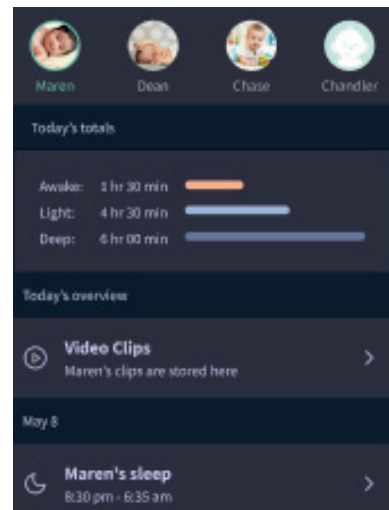

FIGYELMEZTETÉS:

Fulladásveszély!



A gyermekek beegabalyodhatnak a kábelbe és MEGFULADHATNAK. Ha a terméket a kiságytól 90 cm távolságra használja, mindig használjon kábelvédőt. Minden használat előtt ellenőrizze, nem tud-e a gyermek közvetlenül hozzáférni a kábelhez. Ha a kábelvédő bármilyen módon sérült, azonnal hagyja abba a használatát. Ne távolítsa el a címkét a kábelről vagy a kábelvédőről.

HU FIGYELMEZTETÉSEK / Fontos biztonsági információk

- FIGYELEM: Az Owlet Cam 2 kamera nem orvostechnikai eszköz.** Nem használható orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz helyettesítésére. Nem szolgál és nem is célja bármiféle megbetegedés vagy egészségi állapot diagnosztizálása, gyógyítása, kezelése, enyhítése vagy megelőzése, sem az anatómia vagy bármely élettani folyamat vizsgálata, helyettesítése vagy módosítása.
 - Csak beltéri használatra. Tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket ÖVJA esőtől és nedvességtől. NE HASZNÁLJA a kamerát víz (pl. kád, mosdó stb.) közelében és ne merítse vízbe.
 - A kamera használata nem helyettesíti felnőtt/szülő alapos felügyeletét. Rendszeres időközönként ellenőrizze a gyermeket, mivel a kamera a gyermek csendes tevékenységére nem figyelmeztet.
 - SOHA ne próbálja a terméket szétszedni. Veszélynek teszi ki magát, és elveszíti a jótállást. A felhasználó ne próbálja a kamerát szervizelni vagy javítani.
 - Csak a termékhez mellékelt adaptert használja. Az adapter nem megfelelő polaritása vagy feszültsége súlyos kárt okozhat a termékben.
 - Az összekapcsolódás és túlelégedés elkerülése érdekében NE HASZNÁLJON hosszabbító kábelt.
 - Az adapter üzemelés közben tapintásra enyhén meleg lehet. Ez teljesen normális.
- Ellenőrizze, nem túl meleg-e tapintásra a fali konnektorok borításai

- Ellenőrizze, nem túl meleg-e tapintásra a konnektorok borításai. Ha igen, ezekből azonnal húzza ki a kábelt. Ellenőrizze, minden konnektorcsatlakozás jó állapotban van-e, nem csúszott-e ki az adapter vagy nincs-e fedetlen kábel. Kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, ellenőrizze, nem fedetlen-e valamelyik kábel.
- NE TEGYE az adaptert/csatlakozót az ablak alá, ahol a gyermek ráléphet vagy hozzáérhet a szerelvény felszerelés részéhez.
- A termék felszerelését csak felnőtt végezheti. A szerelés során a termék apró részeit tartsa távol a gyermekektől. A termék kicsomagolása során legyen rendkívül óvatos.
- Ez a termék nem játék. NE HAGYJA, hogy a gyermekek játsszanak vele.
- A kamera az FCC által meghatározott követelményeknek megfelelő frekvenciákon titkosított átvitelt használ. Mindig biztosítsa jelszót a Wi-Fi routert.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- SZELLŐZÉS: NE BLOKKOLJA a készülék szellőzőnyílásait. NE TEGYE ágyra, heverőre, szőnyegre vagy hasonló felületre. NE TEGYE könyvszekrény vagy más szekrény polcára, ami korlátozhatja a szellőzést.
- HŐFORRÁSOK: A kamerát hőforrásoktól, pl. radiátor, fűtőtest, kandalló vagy más hőbocsátó készüléktől megfelelő távolságot kell elhelyezni. A terméket óvja a közvetlen napsugárzástól is.
- A TÁPKÁBEL VÉDELME: A tápkábel úgy kell elvezetni, hogy ne lehessen rálepní vagy tárgyakkal becsípni. Különös figyelmet szenteljen a kábel csatlakozó felület végének, valamint annak a részének, ahol kijön a kamerából.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

- Az Owlet büszke a termékeire. A jótállással kapcsolatos információkat a weboldalunkon találja: www.owletcare.hu.

FCC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülékben végzett olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket az előírások betartásáért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, azt eredményezhetik, hogy a felhasználó elveszíti a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. KIZÁRÓLAG a mellékelt tápadaptert használja. Ellenkező esetben

korlátozott garanciánk érvényét veszítheti. Ez a készülék vizsgálatokon ment keresztül, és megfelel a digitális eszközök B osztályára vonatkozó határértékeknek, az FCC irányelv 15. része alapján. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy lakóépületben. Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó utasításainak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt.



WEEE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Owlet vállalta, hogy teljesíti a hulladék elektromos és elektronikus készülékekről szóló (WEEE) 2014/19/EU irányelv követelményeit. Az Owlet termékek Európai Unió és az Egyesült Királyságon belüli helyes megsemmisítésével kapcsolatos további információért látogasson el weboldalunkra.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Owlet Baby Care vállalat ezúton kijelenti, hogy a Owlet Cam kamera megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésére áll a www.owletcare.hu.

FREKVENCIAARTOMÁNY ÉS MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

2 412-2 472 MHz (kimenő teljesítmény 0,0249 W) Ez a készülék teljesíti az FCC szabályzat 15. részét és megfelel a nem engedélyköteles kanadai RSS szabványoknak az innovációs, tudományos és gazdasági fejlődésre vonatkozó kivételek nélkül. A készülék üzemeltetése a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát és (2) ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
D864147 a D864148 sz. amerikai szabadalom. További szabadalom folyamatban.

A gyártás helye: Kína.



Információ a jótállásról

Az Owlet vállalat garantálja, hogy az Owlet Kamera normál használat és kezelés mellett a vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetett dátumtól számított 2 évig anyag- és gyártási hibáktól mentes.

Biztonsági információk

Az Owlet Cam 2 okos zoknija és az Owlet alkalmazás gyermekgondozási segédeszközként szolgál és nem arra való, hogy felelős felnőtt felügyeletét helyettesítse vagy anélkül használják.

OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

A használati útmutatóban sok hasznos tanácsot talál az Owlet Kamera helyes használatával és kezelésével kapcsolatban. Egyes problémák megoldását megtalálja a Problémamegoldás részben. Ha először elolvassa a problémák megoldására

vonatkozó tippeket, lehet, hogy nem kell hozzánk fordulnia segítségért. A termék beállításairól és használatáról a www.owletcare.hu weboldalon talál teljes körű tájékoztatást.

Ügyfélszolgálat elérhetősége: owletcare.hu@certus-mercatus.com

OLVASSA EL A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos számunkra. Ebben az útmutatóban és az Owlet Baby Care alkalmazásban sok fontos biztonsági utasítást talál. Mindig olvasson el és tartson be minden biztonsági utasítást.



Ez a jelzés az útmutatóban fontos biztonsági információkra figyelmeztet!

Minden biztonsági információ mellett figyelmeztető jelzés és a „VESZÉLY”, „FIGYELMEZTETÉS”, „VIGYÁZAT” vagy „FIGYELEM” szó található. Ezen szavak jelentése:

VESZÉLY = Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS = Potenciálisan veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

VIGYÁZAT = Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYELEM = Veszélyes helyzet, amely a személyi sérülésen kívül más következményekkel járhat, pl. anyagi kár.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



FIGYELMEZTETÉS: A Cam 2 okos zokni nem orvostechnikai eszköz. Az Owlet Cam 2 okos zokniját figyelmezteti, ha gyermekének pulzusszáma vagy véroxigénszintje a meghatározott tartományon kívül van. A Cam 2 zokni tízennyolc (18) hónaposnál fiatalabb csecsemők számára készült, tízennyolc (18) hónaposnál idősebb gyermekek számára nem való. Az Owlet Cam 2 okos zokniját nem orvostechnikai eszköz. A Cam 2 okos zokni:

- Nem szolgál betegségek vagy sérülések diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, nyomon követésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
- Nincs hatással a test működésére vagy szerkezetére.
- Elsődleges rendeltetését nem vegyi anyagok hatására éri el.
- Nem akadályozza meg a hirtelen csecsemőhalál szindrómát (SIDS).

Ezen használati útmutató elsődleges célja: Az Owlet Cam 2 okos zoknijának megfelelő felhelyezéséhez és használatához szükséges alapvető utasítások és ajánlások megadása a felhasználó számára, valamint az Owlet Cam 2 okos zokni funkcióinak, kezelésének, biztonsági óvintézkedéseinek, karbantartásának és hibaelhárításának ismertetése. Elengedhetetlen, hogy mindenki, aki ezt a Cam 2 okos zoknit használni vagy beállítani fogja, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy megértse, hogyan kell helyesen használni az Owlet Cam 2 okos zokniját, és hogy ezeket az utasításokat betartsa.

Ha nem érti ezeket az utasításokat, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a owletcare.hu@certus-mercatus.com e-mailcímen vagy.

AZ ÖN ÉS GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN



- AZ ALAPZAT MINDIG LEGALÁBB 1 MÉTER TÁVOLSÁGBAN LEGYEN A GYERMEK ÁGYÁTÓL, MIVEL A KÁBEL FÜLLADÁST OKOZHAT.
- AZ OWLET CAM 2 okos zokniját CSAK SEGÉSGESZKÖZ. NEM HELYETTESÍTŐ FELNŐTT FELÜGYELETÉT.
- KORASZÜLÖTTEK, OXIGÉNELLÁTÁST KAPÓ GYERMEKEK VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK ESETÉBEN KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL AZ OWLET CAM okos zokni HASZNÁLATÁRÓL.
- HA MEGSZÓLAL A RIASZTÓ, MINDIG AZONNAL REAGÁLJON.

FCC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A készüléken végzett olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket az előírások betartásáért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának elvesztését eredményezhetik. KIZÁRÓLAG a mellékelt tápadaptert használja. Ellenkező esetben korlátozott garanciánk érvényét veszítheti. Ez a készülék vizsgálatokon ment keresztül, és megfelel a digitális eszközök B osztályára vonatkozó határértékeknek, az FCC irányelv 15. része alapján.

Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy lakóépületben. Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó utasításainak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt.



Ez a készülék megfelel a nem engedélyköteles kanadai RSS szabványoknak az innovációs, tudományos és gazdasági fejlődésre vonatkozó kivételek nélkül. A készülék üzemeltetése a következő két feltétellez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát és (2) ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Az Owlet Baby Care Inc. ezennel kijelenti, hogy az Owlet Cam 2 elnevezésű okos zokni megfelel az EU rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvnek, az elektromos berendezések forgalmazásáról szóló 2014/35/EU irányelvnek, a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelvnek, az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelvnek és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival szembeni 2012/19/EU irányelvnek.

Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

www.owletcare.hu



A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad vegyes háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Végfelhasználóként az Ön felelőssége, hogy az elhasználtodott készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa a következők szerint: (1) juttassa vissza a kereskedőnek, akitől megvásárolta a terméket; vagy (2) ártalmatlanítsa egy kijelölt gyűjtőponton. A termék megfelelő megsemmisítése értékes erőforrások megtakarításában segít, valamint abban, hogy megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékezelésből eredhetnek. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi kijelölt gyűjtőponthoz. Szankciók alkalmazhatók a hulladék helytelen elhelyezése miatt, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

Problémamegoldás

Alapbeállítások | Riasztások | Csatlakozás

Alapbeállítások

Probléma	Okok	Megoldás
■ Beállításkor nem látom a Smart Sock 3 okos zokni Wi-Fi hálózatát.	■ Az alapzat nincs bekapcsolva. ■ Az alapzat már csatlakoztatva van a Smart Sock 3 okos zokni Wi-Fi hálózat ■ Az alapzat a hatótávolságon kívül van.	■ Dugja be az alapzatot a konnektorba. ■ Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi hálózat kontroll-lámpája az alapzat alján. Ha igen, ugorja át ezt a lépést és folytassa fiókjának létrehozását az alkalmazásban. ■ Tegye közelebb az alapzatot a Wi-Fi routerhez.
■ Az Owlet alkalmazásban nem látom az otthoni Wi-Fi hálózatunkat.	■ Routers 5 Ghz-es frekvenciasávot használ (az Owlet termék csak a 2,4 Ghz-es sávot támogatja). ■ Lehet, hogy rejtett routert használ.	■ Ellenőrizze, hogy iOS-eszköze 2,4 Ghz-es hálózathoz csatlakozik-e (a legtöbb 5 Ghz-es router támogatja a 2,4 Ghz-es hálózatot is). ■ A rejtett routerekre vonatkozó utasításokat az owletcare.com/support oldalon talál.
■ Az alapzatot nem lehet csatlakoztatni az otthoni Wi-Fi hálózatunkhoz.	■ Hibaüzenet ■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán. ■ Otthoni Wi-Fi hálózata nem működik.	■ Ellenőrizze hálózata jelszavát. ■ Beállítás előtt helyezze az alapzatot közelebb a routerhez, majd a beállítás befejezése után vigye vissza az alapzatot a gyerekszobába. ■ Próbálja újraindítani a telefont és újra csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz. ■ Resetelje a Wi-Fi routert.
■ Az alapzat a Smart Sock okos zokni leválasztása után fehéren világít.	■ Szoftverfrissítés van folyamatban.	■ Csatlakoztassa a Smart Sock okos zoknit újra az alapzathoz, amíg a frissítés be nem fejeződik.
■ Az alapzatot nem lehet párosítani az Owlet fiókhoz.	■ Az alapzat és az Ön iOS-eszköze nem ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. ■ A kis Regisztráció gomb nyomva tartása	■ Ellenőrizze, hogy az alapzat és az Ön iOS-eszköze ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik-e. ■ Nyomja meg és engedje el (ne tartsa lenyomva) a kis Regisztráció gombot az alapzat alsó részén és várjon néhány másodpercig, mielőtt újra megkísérli Owlet fiókjának párosítását. ■ Csatlakoztassa iOS-eszközét ugyanahhoz a 2,4 Ghz-es Wi-Fi hálózathoz, amelyhez az alapzat csatlakozik.

*Műszaki támogatásra van szüksége?

Lépjön kapcsolatban velünk az owletcare.hu@certus-mercatus.com email címen
vagy az owletcare.hu weboldalon keresztül rá az információra.

Riasztások

Probléma	Okok	Megoldás
■ Az alapzat kéken villog és sípol.	■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán. ■ A szülő vagy a gyermekről gondoskodó másik személy teste akadályozza a kapcsolatot a Smart Sock okos zokni és az alapzat között. Ez gyakran előfordul etetéskor, pelenkázáskor, ölelgetéskor stb. ■ Gyenge vagy lemerült akkumulátor	■ Tegye az alapzatot közelebb a Smart Sock okos zoknihoz. ■ Módosítsa a baba helyzetét vagy fontolja meg a monitor kikapcsolását etetés, pelenkázás, ölelgetés stb. közben. ■ Töltse fel a Smart Sock okos zoknit.
■ Az alapzat pirosan villog és sípol.	■ Alacsony vagy magas pulzusszám ■ Alacsony véroxigénszint ■ A Smart Sock okos zokni nem illeszkedik a baba lábához.	■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelő körvonala a baba talpának külső oldalán 1-2 mm-rel a kislábujj mögött legyen. ■ Ügyeljen rá, hogy a Smart Sock okos zokni jól illeszkedjen a lábfejhez (ellenkező esetben az okos zokni nehezen tudja érzékelni az adatokat. Ezenkívül hamis riasztást is beindíthat.) ■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelők egy vonalban legyenek a szövetzokni ablakaival. ■ Fontolja meg más méretű szövetzokni használatát.
■ Az alapzat sárgán villog és sípol.	■ Problémák az adatgyűjtéssel ■ A Smart Sock okos zokni nincs megfelelően felhelyezve. ■ Túl erős a fény a helyiségben.	■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelő körvonala a baba talpának külső oldalán 1-2 mm-rel a kislábujj mögött legyen. ■ Ügyeljen rá, hogy a Smart Sock okos zokni jól illeszkedjen a lábfejhez (ellenkező esetben az okos zokni nehezen tudja érzékelni az adatokat és hamis riasztást is beindíthat). ■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelők egy vonalban legyenek a szövetzokni ablakaival. ■ Tompítsa a fényt a helyiségben.

Csatlakozás

Probléma	Okok	Megoldás
■ Az alapzat nem csatlakozik az internethez.	■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán. ■ Oththoni Wi-Fi hálózata nem működik.	■ Tegye közelebb egymáshoz az alapzatot és a Wi-Fi routert (Wi-Fi erősítő vagy további routerek nem oldják meg ezt a problémát). ■ Resetelje a Wi-Fi routert.
■ A Smart Sock okos zokni nem töltődik fel.	■ A Smart Sock okos zokni nincs teljesen csatlakoztatva. ■ A Smart Sock okos zoknit resetelni kell.	■ Töltse a Smart Sock okos zoknit addig, amíg kattandó nem hall és zölden villogni nem ■ Kapcsolja ki és újra be a Smart Sock okos zokni elektronikus alkatrészét.
■ A pulzusszám és a véroxigénszint adatai helyén gondolatjelek láthatók.	■ A Smart Sock okos zokni igyekszik megbízható adatot szerezni. ■ A baba túlzottan mozgatja a lábcskáját. ■ A Smart Sock okos zokni rosszul van felhelyezve ■ Rosszul illeszkedő szövetzokni	■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelők a szövetzokni ablakainak közepén legyenek. ■ Ne tegye a babát bölcsőbe vagy reggő alátétre, mert ezek megzavarhatják a készülék működését. ■ Ellenőrizze, hogy a Smart Sock okos zokni megfelelően van-e ■ Ellenőrizze, hogy megfelelő méretű szövetzoknit használ-e.

Tippek az egészséges alvási környezethez

Szeretnénk Önnel megosztani néhány tippet azzal kapcsolatban, hogyan gondoskodhat gyermeke egészséges és biztonságos alvásáról.

- A baba egyedül legyen a kiságyban és a hátán feküdjön. Ha a csecsemő az oldalán vagy hason fekszik, az veszélyes lehet.
- Olyan kiságyat szerezzen be a gyermekének, amely megfelel a hatályos biztonsági szabványoknak. A kiságyhoz jól illeszkedő, stabil matracot vegyen és jól simuló lepedővel takarja le.
- Ne tegyen a kiságyba puha, szabadon levő vagy bolyhos tárgyakat. Ide tartoznak a párnák, plédek, takarók, védőpárnák, plüssállatok, játékok és egyéb puha tárgyak.
- A hagyományos takaró helyett használjon olyan csecsemőtakarót, amelyet be lehet gombolni, mint egy ruhadarabot, vagy egy hasonló takarót, amely melegen és biztonságban tartja a babát.
- Ossza meg a babával a szobáját, de az ágyát ne. Babája külön kiságyban, az Ön ágyának közelében aludjon. Így biztonságban lesz és az etetés is egyszerűbb. Ha a baba Önnel alszik, a Smart Sock okos zokni nem működne megfelelően. Az Ön teste ugyanis zavarná a zokni vezetékek nélküli jelét.
- Ügyeljen rá, hogy ne aludjon el a babával az Ön ágyában, a kanapén vagy a fotelban.
- Soha ne hagyja a csecsemőt puha felületen aludni, mint pl. felhőtek vagy gyerekek ágya, kanapé, fotel, vízágy, párna, kispárna, takaró, birkabőr vagy hasonló.
- Ne használjon párnákat, ékpárnákat vagy rögzítő alátéteket a baba megtámasztására, háton tartására vagy elfordulásának megakadályozására.
- Ügyeljen rá, hogy a baba ne hevüljön fel túlságosan. Könnyű pizsamát adjon rá és tartsa a szobát olyan hőmérsékleten, amely egy könnyen öltözött felnőtt számára kényelmes.
- Fontolja meg, hogy a délutáni és esti alvás alatt cumit kínál a babának. A csecsemőknek csak 3-4 hetes korban kínáljon cumit, amikor már hozzászoktak a szoptatáshoz.
- A biztonságos alvás ezen szabályaival ismertessen meg mindenkit, aki a babájáról gondoskodik!

OWLET MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: Owlet Baby Care Inc.

Címe: 2500 Executive PKWY Lehi, Utah 84043, Amerikai

Egyesült Államok

Telefonszám: + 1 844 334 5330

Termék megnevezése: Owlet Cam 2 (Bébiőr kamera)

Modell száma: OC2A

Termék leírása: Az Owlet Cam bébiőr kamera elsődleges célja, hogy lehetővé tegye azt, hogy a babát lássuk és hallhassuk. A készülék a következőket tartalmazza: nagyfelbontású kamera nagy látószögű objektívvel és képi érzékelést ellátó vezérlőeszköz (firmware), amely képes figyelni azt, hogy van-e érzékelhető mozgás vagy sem, mikrofon és egy hangérzékelést vezérlő egység (firmware), amely képes figyelni azt, hogy van-e érzékelhető hanghatás vagy sem, hangszóró, fényérzékelő és ehhez kapcsolódó vezérlőeszköz (firmware), amely automatikusan képes beállítani a kameraképet az infravörös és a normál nézet között a rendelkezésre álló környezeti fénytől függően, tápkábel beépített hőmérséklet-érzékelővel, amely lehetővé teszi a kamera számára, hogy jelentést készítsen a szoba hőmérsékletéről és tápegység. Az egység tartalmaz még egy mágneses talpat a kamera számára, amely lehetővé teszi a kamera fizikai beállítását a kívánt irányba és a kívánt szögben, valamint fali tartót és csavart a kamera felszereléséhez, kábelvédőket, mely elzárja a babát a kábelekhöz való hozzáféréstől, ha a kamera a kiságytól körülbelül 1 méteres körzeten belül van felszerelve, valamint egy kábeldoboz, amely lehetővé teszi a felesleges kábel tárolását.

Képviselő megnevezése: Obelis S.A.

Képviselő címe és elérhetőségei: Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brüsszel, Belgium

Telefonszám: +32 (0) 2 732 5954 Fax: +32 (0) 2 732 60 03

E-mail: mail@obelis.net


Képviseli: Gideon Elkayam

Alulírott, az Owlet Baby Care Inc. képviselőjében ezzel kijelentem, hogy a fent megjelölt termékért, amelyhez jelen megfelelőségi nyilatkozat tartozik, kizárólag az Owlet Baby Care Inc. tartozik felelősséggel, továbbá kijelentem, hogy a termék az alábbi Európai Unió jogszabályoknak megfelel:

- Az e a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU (2014. április 16.) irányelv
- a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU (2014. február 26.) irányelv
- egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU (2011. június 8.) irányelv
- az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU (2014. február 26.) irányelv
- az általános termékbiztonságról szóló Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK (2001. december 3.) irányelv
- az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU (2012. július 4.) irányelv

A fenti irányelveknek való megfelelést alátámasztó technikai dokumentációt az Owlet Baby Care Inc. központjában a 2500 Executive PKWY Lehi, Utah 84043, Amerikai Egyesült Államok címen tárolják.

Kiállítás dátuma: 2021. december 8.

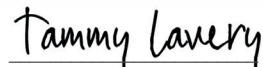

Tammy Lavery

igazgató

Minőség Mérnöki és Szabályozási Ügyek