

Pro jaký výrobek je tento návod k použití určen?

Chytrá ponožka Smart Sock 3

Chytrá ponožka Smart Sock Plus

Co naleznete v balení

Ponožky velikosti 1, 2 a 3, pro každou velikost ponožka na pravou i levou nožičku

Senzor chytré ponožky Smart Sock

Základna

Kabel základny

Napájecí adaptér

Úvodní příručka

* Ponožky velikosti 3 jsou pouze v balení Smart Sock Plus.

Jak chytrá ponožka Smart Sock od Owlet funguje?



Senzor chytré ponožky Smart Sock využívá pulzní oxymetrii k získávání dat z nožičky vašeho spícího miminka. Světélko ponožky svítí přes kůži a průtok krve a hladiny kyslíku jsou odhadovány na základě toho, kolik světla zachytí senzor.

Senzor chytré ponožky Smart Sock sbírá data a odesílá je do základny. Na základě těchto dat vás základna v případě potřeby upozorní. Základna má za úkol vás v případě červeného alarmu včas upozornit, a proto ji doporučujeme umístit tak, abyste ji mohli vždy zaslechnout.


Jak funguje aplikace

Pokud je chytrá ponožka Smart Sock připojena k Wi-Fi síti:

Základna prostřednictvím Wi-Fi sítě odesílá informace na cloud Owlet. Cloud Owlet tyto údaje umožňuje zobrazit v aplikaci Owlet. Díky tomu si můžete veškeré údaje prohlížet v reálném čase a dostávat oznámení z aplikace, ať už jste kdekoli.

Režim LAN (lokální síť):

Chcete-li používat režim LAN, musí být telefon připojen ke stejné Wi-Fi síti jako základna. Aplikace pomocí Wi-Fi sítě naváže počáteční spojení s cloudem Owlet a bude přijímat data, dokud aplikaci nezavřete a dokud nedojde ke změně Wi-Fi sítě aplikace nebo základny.

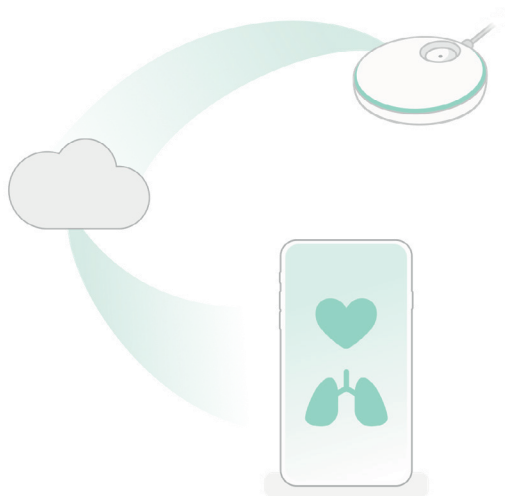

Jak nastavit a používat chytrou ponožku Smart Sock od Owlet

Požadavky

Chytrá ponožka Smart Sock od Owlet vyžaduje přístup k iOS nebo Android zařízení, na kterém je nainstalovaná aplikace Owlet Care. Informace o minimálních verzích operačních systémů naleznete v obchodě s aplikacemi.

Chytrá ponožka Smart Sock Plus je vhodná pro děti s maximální hmotností 24,9 kg (55 lbs).

Čtení naměřených hodnot v reálném čase, vzdálený přístup k aplikaci a některé funkce aplikace vyžadují připojení k bezdrátové 2,4GHz síti. Hotspot Wi-Fi sítě a 5GHz síť nejsou podporovány.

Chcete-li nastavit chytrou ponožku Smart Sock od Owlet:

① Stáhněte si aplikaci Owlet.

Aplikace je dostupná pro zařízení iOS i Android.



Dobrý den! Pojdme založit účet.

E-mail

Heslo (minimálně 6 znaků)

Znovu zadejte heslo

② Založte si účet

Chcete-li si založit účet, postupujte podle pokynů aplikace.



Kdo jste?

Jméno

Příjmení

Telefonní číslo

Datum narození

PSČ



Právě vám byl zaslán e-mail
s potvrzovacím kódem.

Znovu zaslat e-mail.



Váš účet byl potvrzen. Vítejte
v rodině Owllet.

Domů



Přidat profil miminka nebo zařízení

Začínáme



Více informací o chytré ponožce Smart Sock od Owlet >

Máte zařízení Owlet, které si přejete nastavit?

Chytrá ponožka Smart Sock 3

Ne >

Ano >

Jaká zařízení si přejete nastavit



Chytrá ponožka Smart Sock 3 >



Chytrá ponožka Smart Sock 2 >




Kamera >

③ Nastavte zařízení

POZNÁMKA: Pokud již máte účet Owlet a přidáváte další zařízení Owlet, postupujte podle pokynů aplikace a přidejte nové zařízení.




④ Připojte základnu ke zdroji napájení a chytrou ponožku Smart Sock k základně.

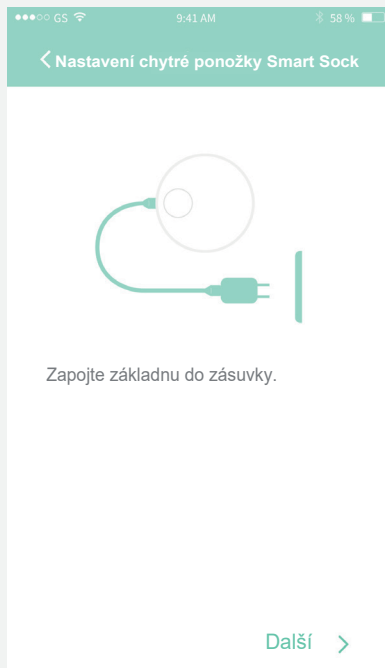


Pojďme vaši základnu připojit k Wi-Fi síti, abyste si mohli zobrazit údaje v telefonu.

1. Přejděte do nastavení Wi-Fi sítě ve vašem telefonu a vyberte síť „Owlet“.

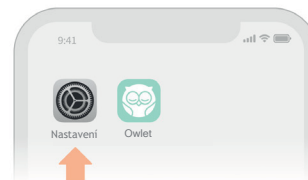

2. Vraťte se do aplikace Owlet.

Pokud budete přesměrováni nebo se zobrazí zpráva „Přesměrování se nezdařilo“, je to v pořádku! Stačí se vrátit do aplikace Owlet.

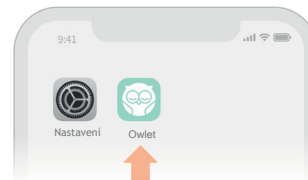

(Tato obrazovka platí pouze pro iOS zařízení.)



Váš účet byl potvrzen.
Vítejte v rodině Owlet!

Domů >

(Tato obrazovka platí pouze pro zařízení Android.)

< Nastavení Wi-Fi sítě

Zvolte zařízení Owlet, které si přejete nastavit.

 Owlet - 383G9f65

(Tato obrazovka platí pouze pro zařízení Android.)

< Nastavení Wi-Fi sítě

Zvolte router Wi-Fi sítě.

(Zatím není kompatibilní s 5,0GHz sítěmi.)

 Wi-Fi síť Johnsonových

 Wi-Fi síť vašeho souseda s divným názvem

 Jurský dům

 Petersonovi

Podle pokynů aplikace můžete připojit chytrou ponožku Smart Sock k Wi-Fi síti, zaregistrovat a spárovat ponožku a v případě potřeby ponožku aktualizovat.



Nastavení Wi-Fi sítě

Zadejte heslo k Wi-Fi síti
Johnsonových.

Heslo

Připojit



Nastavení Wi-Fi sítě



Vteřinku, připojuji se
k Wi-Fi síti...



Nastavení Wi-Fi sítě



Vypadá to, že Wi-Fi síť je
připojena a připravena!

Nyní zaregistrujeme vaše zařízení.

Další >

Nastavení Wi-Fi sítě

Rychlá kontrola

Podívejte se na zadní stranu základny a zkontrolujte stav Wi-Fi sítě.

Kontrolka Wi-fi sítě nesvítí. >

Kontrolka Wi-fi sítě svítí. >

Registrace základny




Stiskněte a podržte tlačítko na základně (dokud neuslyšíte dvě pípnutí).

Registrace může po stisknutí tlačítka trvat až 10 sekund.




Párování chytré ponožky Smart Sock

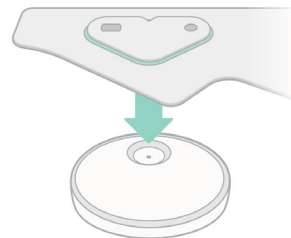

Registrace proběhla úspěšně!

Připojte chytrou ponožku Smart Sock k základně.

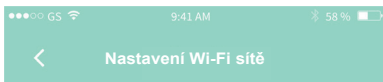

Chytrá ponožka Smart Sock byla úspěšně spárována!

Vaše základna by měla bíle blikat, což znamená, že se chytrá ponožka Smart Sock nabíjí.

Dále se ujistíme, že je vaše zařízení aktualizováno.




Aktualizace chytré ponožky Smart Sock 3

Během aktualizace neodpojujte základnu od napájení.



Už to bude...

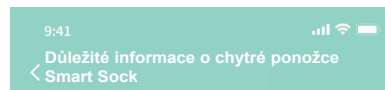

Důležité bezpečnostní pokyny

Správné nasazení chytré ponožky Smart Sock

Bezpečnost vašeho miminka je pro nás na prvním místě a víme, že i pro vás.

Uvědomte si prosím, že nesprávně nasazená ponožka může být pro vaše miminko nepohodlná a na nožičce se mohou objevit zarudlé skvrny, otlačky nebo puchýře. Udržujte nožičku vašeho miminka v suchu, používejte správnou velikost ponožky a dodržujte naše pokyny pro její správné nasazení.




Péče o chytrou ponožku Smart Sock

Chytrou ponožku Smart Sock a senzor alespoň jednou za týden vyperte v ruce v jemném pracím prostředku. Před dalším použitím nechte ponožku zcela uschnout.

Zásady bezpečného spánku

Nezapomeňte vždy dodržovat zásady bezpečného spánku a vyhýbat se nebezpečným plochám pro spaní (včetně houpaček, autosedaček a spaní ve společné posteli).

Chytrá ponožka Smart Sock od Owllet nenahrazuje bezpečný spánek a rodičovskou péči. Ujistěte se, že dodržujete zásady bezpečného spánku a používáte chytrou ponožku Smart Sock od Owllet jako pomůcku, která vám kromě veškeré péče, bezpečí a lásky, které se vašemu miminku dostává, pomůže zjistit, jak se mu daří.

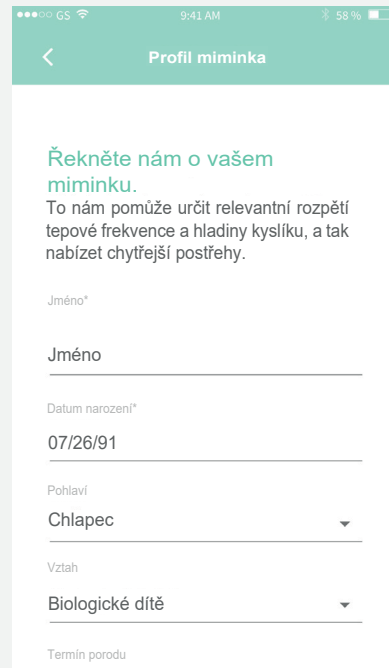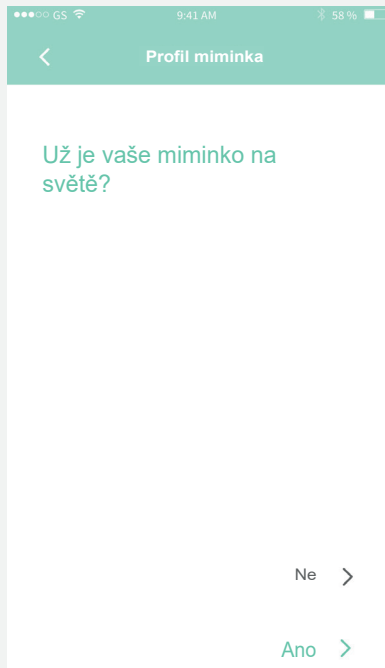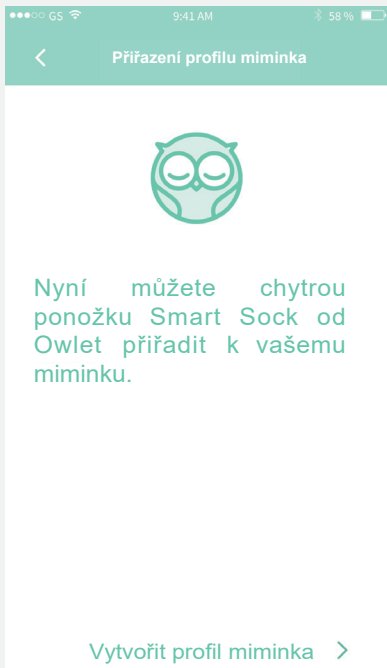

⑤ Vytvořte profil vašeho miminka. Aplikace vám pomůže vytvořit profil vašeho miminka a přiřadit jej k zařízení Owlet.



Profil miminka



Přidejte fotografii Aarona.

Nebo to můžete udělat později
z domovské obrazovky, pokud
chcete.


Správná velikost chytré ponožky Smart Sock a její nasazení

Chytrá ponožka Smart Sock je dostupná ve dvou velikostech a pro každou velikost je k dispozici ponožka na pravou i levou nožičku:

Velikost 1 je vhodná pro miminka o hmotnosti do 5,4 kg (12 lbs).

Velikost 2 je vhodná pro miminka o hmotnosti mezi 5,4-13,5 kg (12-30 lbs).

Velikost 3 je vhodná pro děti o hmotnosti 13,5-24,9 kg (30-55 lbs).*

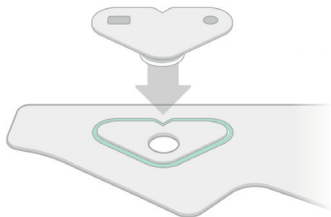

**Ponožky velikosti 3 jsou pouze v balení chytré ponožky Smart Sock Plus.*



Přípevněte senzor k látkové ponožce

Zarovnejte obrys senzoru s linií na látce, přitiskněte senzor k ponožce, aby se připevnil, a zacvakněte jej na místo.

TIP:

Pokud si nejste jistí vhodnou velikostí, začněte s menší ponožkou.



Nasaďte ponožku

Přiložte ponožku ke straně nožičky tak, aby se senzor nacházel za malíčkem.

Zajistěte pásek pod prsty nohou, následně omotejte pásek kotníku kolem



zadní části kotníku a zajistěte jej na nártu.

Při správném umístění by měl pásek na nártu směřovat k palci a senzor by se měl nacházet na malíkové hraně nožičky miminka tak, aby hlava sovičky směřovala k prstům.



TIPY PRO POUŽITÍ CHYTRÉ PONOŽKY SMART SOCK 3 NA NOŽIČKÁCH BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU:

Batolata a děti předškolního věku jsou mnohem pohyblivější a aktivnější než kojenci, a proto bychom se s vámi rádi podělili o několik užitečných rad:

1. Chytrou ponožku Smart Sock nasadíte až poté, co dítě uložíte do postele, aby v ní co nejméně chodilo. Chůze s nasazenou ponožkou může poškodit senzor.
2. Počkejte, až dítě usne, a až poté zapnete základnu. Tím zamezíte žlutým alarmům, které by vás zbytečně upozorňovaly na převalování dítěte při usínání. Základnu můžete zapnout prostřednictvím aplikace nebo přímo na jednotce.
3. Pokud vaše dítě chytrou ponožku Smart Sock nikdy předtím nenosilo, může váhat a klást vám otázky. Dovolte mu, aby si předtím, než mu ponožku nasadíte, zařízení prohlédl a zvyklo si na něj.

Získávání údajů a alarmy

Předtím, než si vaše dítě půjde zdřímnout nebo spát, vyjměte chytrou ponožku Smart Sock ze základny a nasadte mu ji.

Světla základny začnou zeleně blikat, což znamená, že se zařízení pokouší snímat hodnoty. Jakmile začne základna získávat dané údaje, bude zeleně pulzovat.

Žlutý alarm

Během žlutého alarmu bude základna stanice žlutě blikat, hrát ukolébavku a aplikace vám zašle push oznámení. Žlutá barva signalizuje, že je ponožka špatně nasazená nebo spadla z nožičky dítěte a zařízení nebylo schopno po dobu minimálně 60 sekund získat dobré údaje.

Modrý alarm

Během modrého alarmu bude základna stanice modře blikat, hrát ukolébavku a aplikace vám zašle push oznámení. Modrá barva signalizuje, že se ponožka nachází po dobu minimálně 60 sekund mimo dosah základny, upozorňuje na vybitou baterii nebo blokování signálu.

Lidské tělo může rušit signál mezi základnou a ponožkou. Když dítě chováte, neotáčejte se k základně zády, abyste předešli zbytečným oznámením. Pokud se modrý alarm spouští opakovaně, posuňte ponožku a základnu blíže k sobě, abyste předešli opakovaným oznámením.

Červený alarm

Červená barva signalizuje oznámení té nejvyšší priority. Základna má k dispozici tři druhy červených oznámení, při kterých bliká červeně a vydává vysoký zvuk.

Nízká hladina kyslíku: Upozorní vás, pokud hladina kyslíku dítěte klesne pod 80 %.

Nízká tepová frekvence: Upozorní vás, pokud tepová frekvence dítěte klesne pod 60 tepů za minutu a hladina kyslíku klesne pod 85 %.

Vysoká tepová frekvence: Upozorní vás, pokud tepová frekvence dítěte překročí 220 tepů za minutu.

TIP:

Pokud má dítě nasazenou ponožku během krmení, může se stát, že spustí červený alarm, jelikož při jídle přirozeně klesá obsah kyslíku a zvyšuje se tepová frekvence.

Pozastavení zvuku alarmu

Zvuk jakéhokoli aktivního alarmu můžete krátkým stisknutím tlačítka základny nebo prostřednictvím aplikace na 60 sekund pozastavit.

Pozastavení pozastaví zvuk základny a aplikace – světelný kroužek bude na základně nadále svítit a podrobnosti budou k dispozici v aplikaci. Alarm zůstane aktivní, dokud se stav nevyřeší. Pokud spouštěč (nízká hladina kyslíku, nízká nebo vysoká srdeční frekvence) během pozastavení ustane, alarm se zastaví.

Pokud během pozastavení dojde ke spuštění nového alarmu se stejnou nebo vyšší prioritou, tento alarm se spustí bez ohledu na pozastavení.

Základna

Základna chytré ponožky Smart Sock pomocí následujících barevných světél signalizuje různé provozní stavy:

Postupně bliká zeleně: Získávání údajů

Pulzuje zeleně: Hodnoty jsou v normě.

Bliká modře: Chytrá ponožka Smart Sock je mimo dosah základny, baterie je vybitá nebo něco blokuje signál.

Bliká žlutě: Chytrá ponožka Smart Sock není správně nasazená nebo spadla z nožičky.

Bliká červeně: Tepová frekvence nebo hladiny kyslíku jsou mimo stanovený rozsah.

Pulzuje bíle: Chytrá ponožka Smart Sock se nabíjí.

Svítil bíle: Chytrá ponožka Smart Sock je plně nabitá.

Postupně bliká bíle: Chytrá ponožka Smart Sock není spárována.

Jak zapnu monitorování a základnu?

Pokud se senzor nabíjí, vyjměte jej z nabíjecího portu, nebo stlačte základnu a uvolněte ji. Po stlačení základny uslyšíte pípnutí a základna se rozsvítí zeleně.

Jak základnu a monitorování vypnu?

Stlačte základnu a podržte ji, dokud nezhasne zelené světlo a neuslyšíte pípnutí.

Nabíjení chytré ponožky Smart Sock

Položte chytrou ponožku Smart Sock na nabíjecí port, který se nachází na horní straně základny a ujistěte se, že světlo základny svítí bíle.


Úroveň nabití chytré ponožky Smart Sock

Úroveň nabití baterie chytré ponožky Smart Sock můžete zkontrolovat v aplikaci.


Pokud světlo základny pulzuje bíle, ponožka se nabíjí. Pokud svítí bíle, ponožka je plně nabitá.

Upozornění na slabou baterii chytré ponožky Smart Sock

Pokud aplikace zjistí, že baterie chytré ponožky Smart Sock se za méně než hodinu vybije, upozorní vás na to modrým alarmem. V tomto případě však základna nebude vydávat žádný zvuk ani blikat.

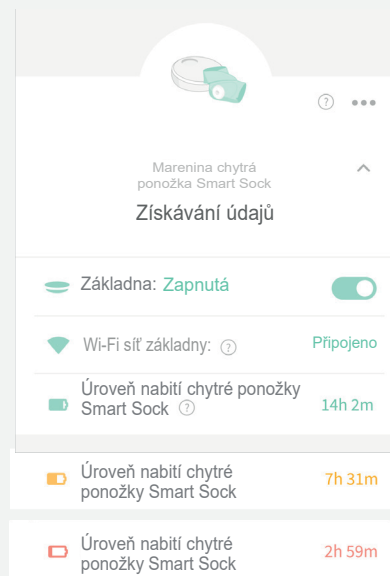

Stav baterie můžete rovněž kdykoli zobrazit na stavové obrazovce zařízení.



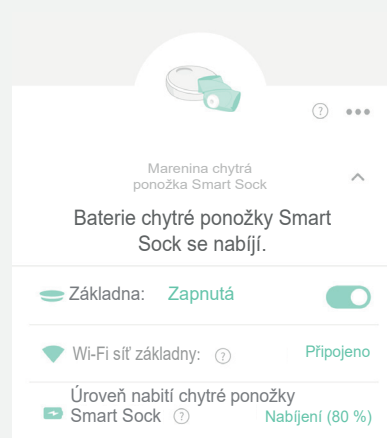


Historie

Na kartě Historie v aplikaci se zobrazují poslední relace spánku, údaje a alarmy. Základna a aplikace vyžadují k zobrazení Historie připojení k Wi-Fi síti.

Grafy zobrazují průměrné hodnoty tepové frekvence, kyslíku a spánku za uplynulých 10 minut a aktualizují se každých 10 minut během každého spánku.

Stažením grafů dolů obnovíte data, nebo zavřete a znovu otevřete aplikaci. Historie uchovává údaje o posledních 30 relacích spánku.

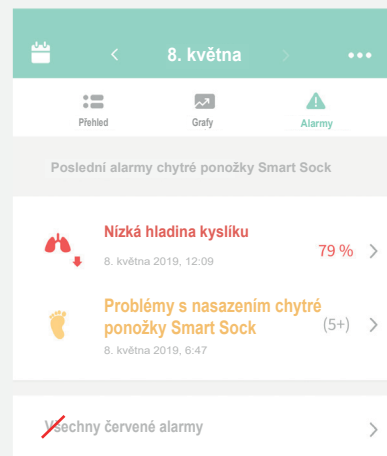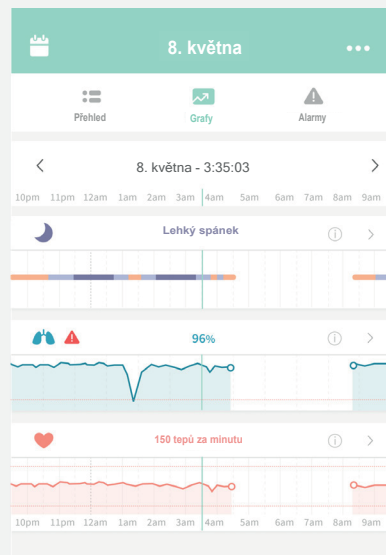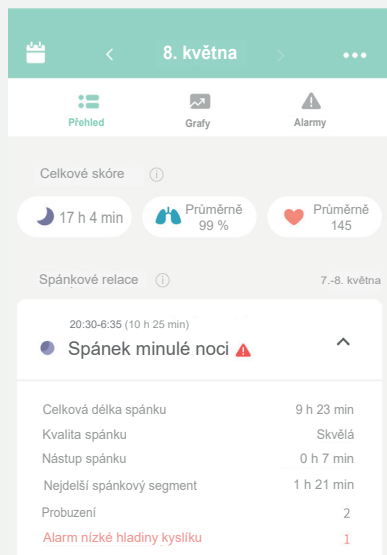

Po probuzení

Jakmile dítěti chytrou ponožku Smart Sock sundáte, vraťte ji do základny, aby se mohla nabíjet.

Péče a uskladnění

Druhou chytrou ponožku Smart Sock velikosti, kterou právě používáte, uchovávejte na snadno přístupném místě, abyste ponožky mohli pravidelně střídat na obou nožičkách. Druhou velikost uschovejte pro budoucí použití.

Společnost Owlet doporučuje prát ponožku a senzor minimálně jednou za dva týdny, aby se zabránilo podráždění pokožky způsobenému znečištěnou ponožkou a senzorem. Ponožku a senzor perte ručně v jemném pracím prostředku a studené vodě. Před dalším použitím je nechte zcela uschnout.

Jak vypnout senzor chytré ponožky Smart Sock

Vyjměte senzor ze základny. Odpojte napájecí kabel od základny. Stiskněte a podržte tlačítko základny a současně zasuňte napájecí kabel. Držte tlačítko základny, dokud se světlo základny nerozsvítí oranžově a neuslyšíte čtyři pípnutí. Stiskněte tlačítko. Světlo v ponožce zhasne. Chcete-li ponožku opět zapnout, vložte senzor do nabíjecího portu základny.

Tipy a triky

Nasazení chytré ponožky Smart Sock

Nesprávně nasazená ponožka může být pro vaše dítě nepohodlná a na nožičce se mohou objevit zarudlé skvrny, otlačky nebo puchýře. Ujistěte se, že dítě nosí správnou velikost ponožky: je důležité, aby ponožka dobře seděla, ale nebyla těsná kolem prstů ani kotníku. Doporučujeme pravidelně střídat pravou a levou ponožku.

Pokud se na pokožce nožičky objeví zarudnutí, přestaňte na této nožičce ponožku používat a používejte ji na druhé nožičce, dokud zarudnutí zcela nezmizí.

Kam mám umístit základnu?

Základna musí být umístěna v dosahu používané chytré ponožky Smart Sock, aby nedocházelo ke zbytečnému spouštění modrého alarmu. Dosah Bluetooth je až 30 m. Základna má za úkol vás v případě červeného alarmu včas upozornit, a proto ji doporučujeme umístit tak, abyste ji mohli vždy zaslechnout.

Jak otestovat alarmy

Červený alarm

Vyjměte senzor ze základny a nechte zapnuté monitorování. Stiskněte a podržte základnu, dokud neuslyšíte tři pípnutí, a pak ji uvolněte. Chcete-li zvuk pozastavit, znovu stiskněte základnu nebo jej pozastavte v aplikaci. Chcete-li zařízení resetovat, stiskněte a podržte základnu, dokud světlo základny nezhasne a neuslyšíte pípnutí. Následným stisknutím základnu opět zapnete.

Modrý alarm

Vyjměte senzor ze základny a nechte zapnuté monitorování. Držte senzor a vzdalte se od základny.

Žlutý alarm

Vyjměte senzor ze základny a nechte zapnuté monitorování. Nasaďte chytrou ponožku Smart Sock na nožičku dítěte nebo prst dospělého, dokud zařízení nezíská údaj. Poté ponožku sejměte a chvíli počkejte. To může trvat až 60 sekund.


Jak zrušit připojení k Wi-Fi síti

Prostřednictvím základny

Vyjměte senzor ze základny. Stiskněte a podržte tlačítko základny a současně do základny zasuněte napájecí kabel. Držte tlačítko základny, dokud se světlo základny nerozsvítí oranžově a neuslyšíte čtyři pípnutí. Poté třikrát stiskněte tlačítko základny. Zkontrolujte, zda kontrolka Wi-Fi na spodní straně základny nesvítí.

Máte doma neposedu?

Snažíme se vaše dítě hlídat za každé situace, ale někdy sebou tolik vrtí, že senzor nedokáže získat potřebné údaje. V tomto případě se v aplikaci zobrazí kmitající nožičky. Pohyb má vliv na kvalitu získaných údajů, takže místo zbytečného upozornění se snímání a oznámení na chvíli pozastaví, dokud nebudou opět zjištěny kvalitní hodnoty.

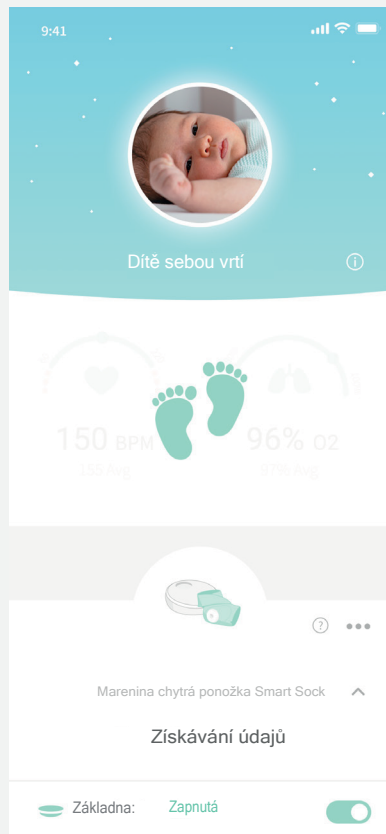


Funguje chytrá ponožka Smart Sock i pod dětským oblečením?

Chytrá ponožka Smart Sock je navržena tak, aby se pohodlně vešla pod pyžama, zavinovačky a ponožky, a zajistila tak dítěti ničím nerušený spánek.

Sdílení přístupu k aplikaci

Společnost Owlet pracuje na možnosti přidání více účtů pro sdílení přístupu k aplikaci. Chcete-li zatím aplikaci sdílet s přáteli nebo rodinou, stačí jim sdělit přihlašovací údaje k vašemu účtu.

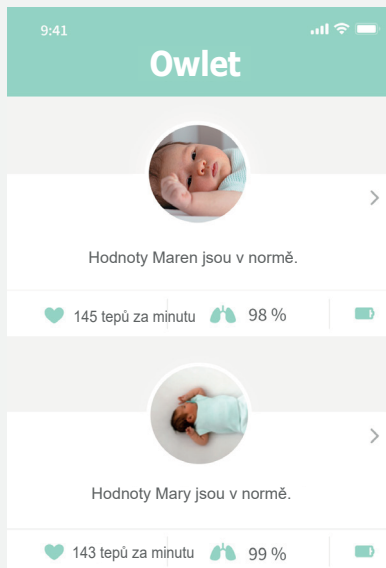

Více dětí? Žádný problém!

Aplikace Owlet podporuje založení několika dětských profilů a umožňuje vám ke každému dítěti přiřadit libovolné zařízení. Dbejte na to, aby každé dítě mělo svou chytrou ponožku Smart Sock a příslušnou základnu, aby v případě alarmu nedošlo k záměně.

Jas základny

Základna je vybavena senzorem okolního světla a automaticky upravuje jas svého světla podle světla v místnosti.

Centrum pro nápovědu a podporu

V aplikaci přejděte do části Účet > Nápověda a podpora a kontaktujte náš tým zákaznického servisu prostřednictvím chatu v aplikaci, emailu a telefonu, nebo přejděte na stránku www.owletcare.cz. Další tipy a triky najdete na kartě Průvodce v aplikaci.

Uskladnění chytré ponožky Smart Sock

Senzor chytré ponožky Smart Sock obsahuje baterii, která se po delší době vybije. Pokud se baterie zcela vybije, dojde k poškození senzoru.

6 kroků, jak uložit senzor chytré ponožky Smart Sock:

1. **Plně nabijte senzor.**
2. **Vyjměte senzor ze základny.**
3. **Vypněte ponožku podle pokynů na straně 20.**
4. **Odpojte základnu od napájení.**
5. **Senzor, základnu, kabely, zástrčku a chytré ponožky Smart Sock uložte na chladné a suché místo.**
6. **Každých 6 měsíců senzor dobijte a následně zopakujte kroky 1–5.**



Prohlášení o shodě

Výrobce: Owlet Baby Care
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043
Telefon: 844.334.5330

Výrobek: Owlet Smart sock 3

Číslo výrobku:

OBL 3.0, OSS 3.0 Owlet Sock 3rd Generation

Popis výrobku: Owlet Smart Sock 3 se skládá ze dvou součástí – základna (OBL) a ponožka se senzorem (OSS). Senzor používá přenos PPG k získání hodnot srdečního rytmu a hladiny kyslíku dítěte nasazením ponožky na nohu. Zařízení je napájeno nabíjecí Li-Ion baterií. Přenáší pomocí pulzní oxymetrie data do základny přes Bluetooth Low energy (BLE). Využívá Nordic nRF52840 IC, které podporuje standardní BLE modifikace a komunikační techniky.

Název zástupce: Obelis S.A

Adresa registrovaného zástupce:

Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.
Tel: 32 (0) 2 732 5954
Fax: 32 (0) 2 732 60 03
Email: mail@obelis.net
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení Owlet Baby Care of Lehi, Utah, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
 - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
 - Council Directive 2011/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
 - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
 - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001) – General Product Safety
 - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021

Tammy Lavery
Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs

CZ Varování / Důležité bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ: Chytrá ponožka Smart Sock od Owlet není zdravotnický prostředek.

Není určena k použití jako zdravotnický prostředek nebo k nahrazení zdravotnického prostředku. Neslouží a není určena k diagnostice, léčbě, ošetřování, zmírňování nebo předcházení jakýmkoli onemocněním nebo zdravotním stavům, ani k vyšetřování, nahrazování nebo úpravě anatomie nebo jakéhokoli fyziologického procesu.

Chytrá ponožka Smart Sock od Owlet je určena pro zdravé děti do 18 měsíců věku a prahové hodnoty oznamování na chytré ponožce Smart Sock od Owlet nejsou tak přísné jako u lékařských monitorů.

Mějte na paměti, že: Tento výrobek je určen pouze k tomu, aby vám pomáhal sledovat stav vašeho dítěte, a není určen k tomu, aby nahradil vaši péči o dítě. Jste zodpovědní za zdraví a dobré životní podmínky svého dítěte a dodržování zásad bezpečného spánku, zdraví a péče.

- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock od Owlet jako diagnostický nástroj.
- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock od Owlet, pokud vám lékař doporučí použití nemocničního pulzního oxymetru nebo nemocničního monitoru zástavy dechu.
- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock od Owlet jako výmluvu pro nebezpečné spánkové návyky.
- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock od Owlet jako náhradu nebo místo péče dospělé osoby o dítě.

Záruka

Společnost Owlet si za svými výrobky hrdě stojí. Naše záruky naleznete na webové stránce: www.owletcare.cz

Obchodní podmínky

Používání výrobků společnosti Owlet podléhá podmínkám, které naleznete na webové stránce: www.owletcare.cz. Používáním výrobku společnosti Owlet vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Kontaktní informace pro váš region naleznete na www.owletcare.cz

Bezpečnost

Vaše bezpečnost i bezpečnost jiných osob je pro nás velmi důležitá. V tomto návodu a v aplikaci Owlet Baby Care naleznete mnoho důležitých bezpečnostních pokynů. Vždy si přečtete všechna bezpečnostní upozornění a dodržujte je.



PRO BEZPEČNOST VÁS A VAŠEHO DÍTĚTE:

KDYKOLI SE OZVE ALARM, OKAMŽITĚ ZAREAGUJTE.



VAROVÁNÍ: ZÁKLADNU VŽDY UDRŽUJTE VE VZDÁLENOSTI ALESPŮN 1 METRU OD POSTÝLKY DÍTĚTE, JELIKOŽ KABEL MŮŽE PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČÍ ÚŠKRCENÍ.

CHYTRÁ PONOŽKA SMART SOCK OD OWLET JE POUZE POMŮCKOU. NEHAHAZUJE DOZOR DOPĚLÉ OSOBY.

U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ, DĚTÍ NA PODPŮRNÉM KYSLÍKU NEBO DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZKONZULTUJTE POUŽITÍ CHYTRÉ PONOŽKY SMART SOCK OD OWLET S VAŠÍM LÉKAŘEM.



Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Používejte POUZE dodaný napájecí adaptér. V opačném případě může dojít ke zrušení naší omezené záruky. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné budově. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může narušovat rádiovou komunikaci.

IC: 21386-OBL3A (základna)

IC: 21386-OSS3A (senzor)

Toto zařízení splňuje části 15 pravidel FCC a vyhovuje bezlicenčním kanadským RSS bez výjimek pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Společnost Owlet Baby Care prohlašuje, že chytrá ponožka Smart Sock od Owlet je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové stránce: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

2 402-2 480 MHz (výstupní výkon 63 mW)
Bluetooth základny

2 412-2 462 MHz (výstupní výkon 75 mW)
Wi-Fi síť základny

2 402-2 480 MHz (výstupní výkon 6,3 mW)
Bluetooth senzorů



Společnost Owlet se zavázala plnit požadavky směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Více informací o správné likvidaci výrobků Owlet v rámci Evropské unie a ve Velké Británii naleznete na našich webových stránkách.

VSTUP: 100-240 V~0,2 A

50-60 Hz

VÝSTUP: 5 V ~ 1 A



800433

Splňuje požadavky normy UL 62368-1

a CAN/CSA-C22.2

č. 62368-1

Americký patent č. 9,693,730 a 10,449,837.

Další patenty v řízení.




Začínáme

Stáhněte si aplikaci Owlet.



Zapojte kameru, postupujte podle pokynů aplikace a spárujte ji s účtem Owlet.

Pokud již máte aplikaci Owlet staženou, klikněte na kartu Účet a přidejte nové zařízení.

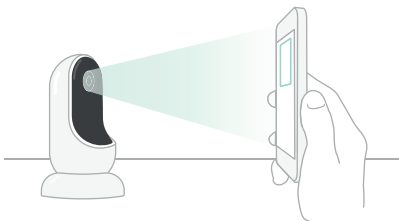

Mějte prosím na paměti, že kamera umožňuje přenos obrazu a zvuku prostřednictvím zabezpečené a zašifrované Wi-Fi sítě. Kameru připojujte pouze k soukromé síti, která je zabezpečená heslem.


Stavové kontrolky kamery Owlet Cam 2

- ● (bliká červeně/modře) Kameru je nyní možné spárovat s aplikací.
- (svítí červeně) Uživatel streamuje prostřednictvím aplikace.
- ● (bliká modře) Kamera se připojuje k Wi-Fi síti.
- (svítí modře) Kamera je připojena k internetu. Aplikace nestreamuje.

Zvolte požadovaný záběr

Umístěte kameru a všechny kabely do vzdálenosti 1 m od okraje postýlky. Kabely ve vzdálenosti do 1 m od okraje postýlky by měly být zakryté.

Kameru můžete nainstalovat dvěma způsoby:

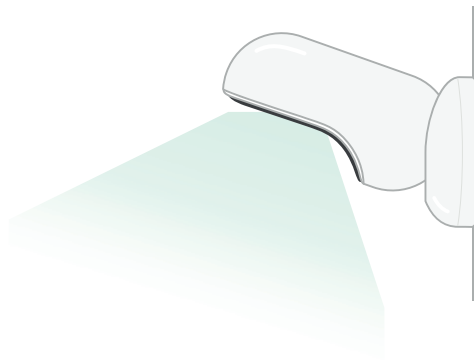

① Postavte magnetickou základnu s kamerou na rovný povrch a nastavte požadovaný úhel sklonu.

② Chcete-li zabírat dětskou postýlku nebo celý pokoj z ptačí perspektivy, použijte základnu jako nástěnný držák a připevněte kameru na stěnu nad dětskou postýlku.

Další kroky vás provedou montáží kamery na stěnu nad postýlku.

Co naleznete v balení



Kamera
Owlet Cam 2



Kabely s páskami Owlet*
a senzor pokojové teploty



Magnetická základna



Napájecí adaptér

Sada pro připevnění kamery na stěnu



21x kabelový
chránič

18x dlouhý chránič
1x koncovka
2x kabelový chránič ve
tvaru L



Montážní
deska



1x šroubek

Nářadí potřebné pro připevnění kamery




Metr
(není součástí balení)



Malý křížový šroubovák
(není součástí balení)

*Předchozí modely mohou obsahovat
organizér kabelů.

1. Změřte a vyznačte příslušné vzdálenosti

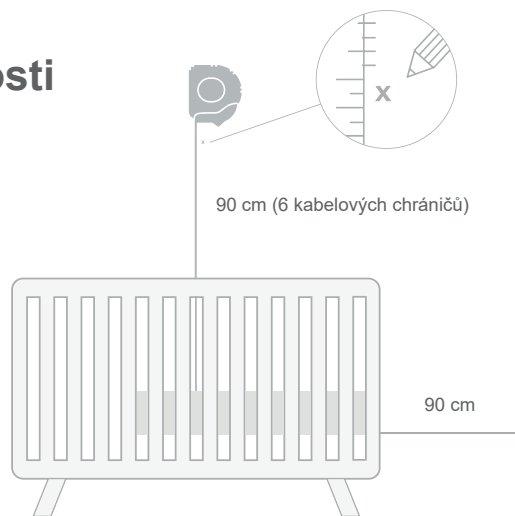


Odměřte 90 cm od horní části dětské matrace a vyznačte si na stěně místo, kde bude kamera připevněna. Tato značka by měla být nad středem postýlky, zajistíte tak optimální pozorovací úhel kamery.

Zvažte, kterou zásuvku použít. Zásuvka by měla být ve vzdálenosti alespoň 90 cm od postýlky, aby se v dosahu dítěte nenacházely žádné odkryté kabely. V dalších krocích se dozvíte, jak zakrýt všechny kabely.

Umístění teplotního senzoru je rovněž důležité. Teplotní senzor naleznete u konce chytrého kabelu na straně, která se připojuje k napájecímu adaptéru.

2. Zarovnejte a připevněte montážní desku

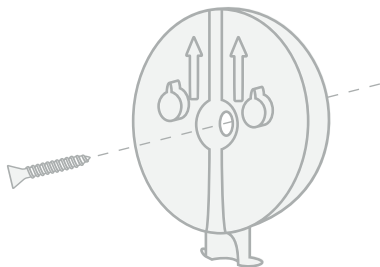


Vyrovnejte otvor ve středu montážní desky se značkou, kterou jste vyznačili na stěně. Pomocí dodaného šroubku připevněte montážní desku ke stěně tak, **aby šipky směřovaly nahoru.**

3. Odviňte kabel




Odstraňte kabelové pásy a odviňte kabel.

4. Provlékněte kabel

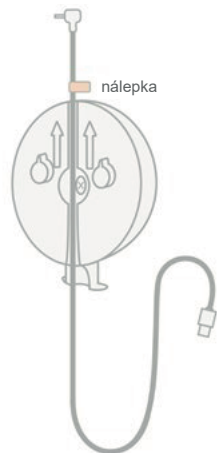


Provlékněte kabel otvorem montážní desky a zarovnejte oranžovou nálepkou na kabelu s horní částí montážní desky.

5. Namontujte základnu

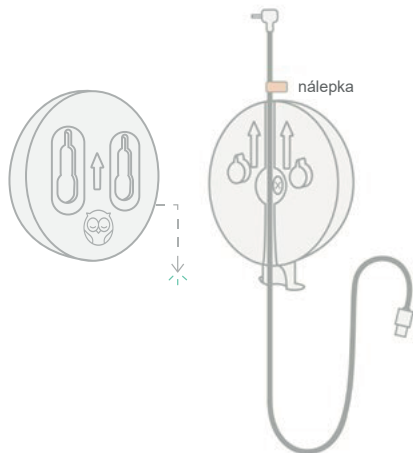

Umístěte velké otvory magnetické základny na výstupky na montážní desce a posuňte základnu směrem dolů, dokud nezacvakne na své místo.

6. Připevněte kameru

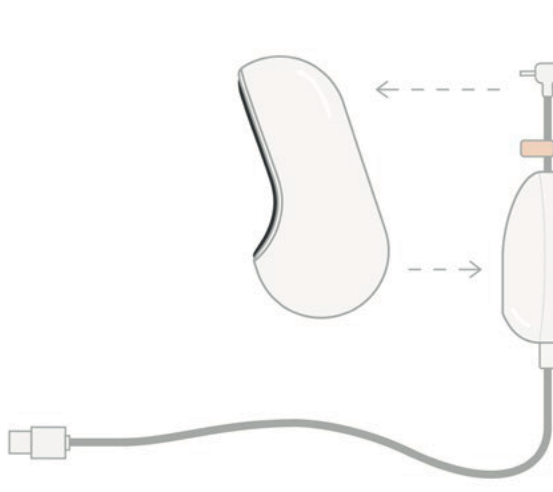


Připevněte kameru na magnetickou základnu. Zapojte do kamery kabel.

Oranžová nálepka by měla být umístěna těsně nad montážní deskou, abyste měli dostatečnou vůli kabelu pro nastavení kamery do požadovaného úhlu.

7. Nainstalujte kabelové chrániče

Kabelové chrániče se ke stěně přilepují pomocí vysokopevnostního lepidla. Při instalaci nespěchejte a pečlivě zvolte to správné umístění.


- ① Odlepte samolepicí fólii ze zadní strany dlouhého chrániče.
- ② Provlékněte kabel středem dlouhého chrániče.
- ③ Dlouhý chránič nacvakněte na spodní část montážní desky.
- ④ Pevně jej přitiskněte ke stěně.
- ⑤ Zopakujte kroky 1–4 se zbývajících dlouhými chrániči a zakryjte celou délku kabelu až k zásuvce.

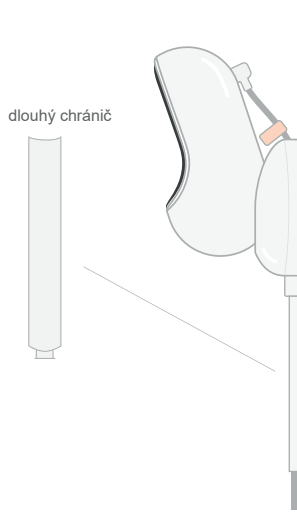

8. Kabelový chránič ve tvaru L

Pomocí pravého nebo levého kabelového chrániče ve tvaru L ved'te kabel směrem k zásuvce.

Nainstalujte další dlouhé chrániče, dokud nebudou zakryté všechny kabely ve vzdálenosti do 90 cm od okraje postýlky. Přidávejte dlouhé chrániče a zakryjte kabel až k zásuvce. Jakmile budete 15-25 cm od zásuvky, nainstalujte koncovku (následně můžete přebytečný kabel snadno svázat pomocí pásky se suchým zipem).

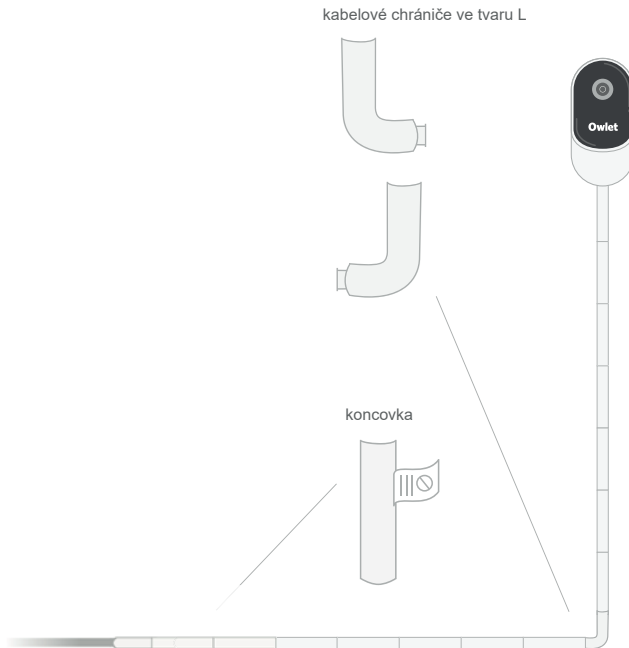


9. Zajistěte přebytečnou část kabelu páskou se suchým zipem

Smotejte přebytečnou část kabelu do volné smyčky. Provlečte kabelovou pásku prvním otvorem a zajistěte tak horní část smyčky. Logo Owlet by mělo směřovat ven. Provlečte kabelovou pásku druhým otvorem a připevněte tak spodní část smyčky k horní části (smyčka by nyní měla vypadat jako mašle). Zajistěte zbývající část pásky.

Jakmile řádně omotáte přebytečnou část kabelu, připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru a zapojte jej do zásuvky.

Hotovo! Nyní můžete s pomocí aplikace nastavit úhel kamery, dokud nedosáhnete požadovaného záběru.

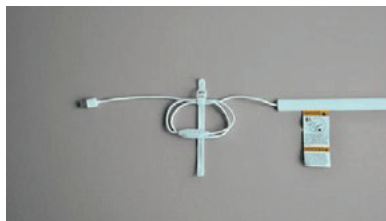

Potřebujete poradit?

Kontaktní informace pro váš region naleznete na

www.owletcare.cz

Jak používat Aplikaci Owlet Cam 2

Tyto informace vám pomohou porozumět jak používat Cam 2 a její funkce v aplikaci.

Cam 2 Domovská stránka

Cam 2 je kompatibilní se systémy IOS nebo Android. Lze použít až 4 zařízení současně..

- Zvolte ikonu [] nebo otočte váš telefon tak, aby jste viděli celou obrazovku.
- Obraz zvětšíte 4x kliknutím na obrazovku nebo posunutím prstu.

Obousměrná komunikace

Použitím této funkce můžete hovořit k vašemu dítěti z jiné místnosti.



Tlačítko - ON


Dítě vás slyší (mikrofon má zelenou ikonu)

Pokud nezapnete tuto funkci nebudete moci slyšet zvuk z kamery, proto se ujistěte že máte tlačítko zapnuté.



Tlačítko - ON

Dítě vás neslyší

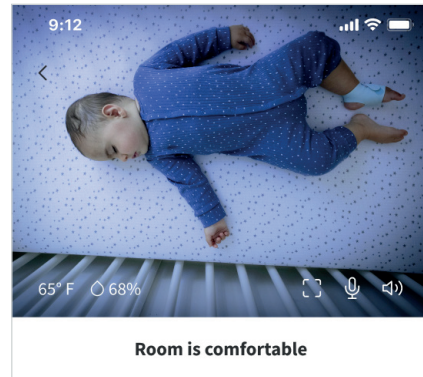

Možnosti zvuku



On

Pokud máte spuštěnou aplikaci Owlet, můžete slyšet zvuk z dětského pokoje. Pokud vypnete telefon nebo aplikaci, neuslyšíte zvuk z dětského pokoje.



Off

Pokud zvolíte "OFF" neuslyšíte zvuk z kamery, video pokračuje.



Zvuk na pozadí

Pokud zvolíte tuto možnost, uslyšíte zvuk z kamery i když je aplikace zavřená nebo používáte telefon k jinému účelu.

Kvalita videa

Cam 2 funguje až do 1080p, poskytuje vysoce kvalitní přenos. Přesto může být kvalita přenosu ovlivněna různými faktory. Cam 2 funguje automaticky tzv "Auto", což znamená že automaticky přizpůsobuje kvalitu přenosu. Můžete zvolit jiné rozlišení videa (1080p, 480p nebo 360p).

- Pro informaci jakou kvalitu videa používáte, 3x klikněte na levo na slovo "Auto".




Room Status

Tato funkce vás upozorní pomocí Oznámení, pokud teplota nebo vlhkost v místnosti je nevyhovující.

- Pokoj je pro miminko komfortní
- Pokoj není pro miminko komfortní

Teplota a vlhkost vzduchu

Kamera má zabudovaný senzor pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a to teplotu v F/C a vlhkost v procentech..

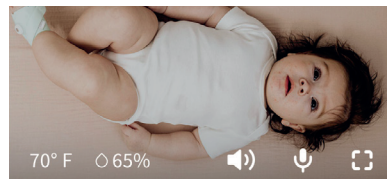

Oznámení a video klipy

Cam 2 Oznámení

Oznámení jsou odeslána když kamera zaznamená specifickou událost jako pláč, zvuk, pohyb.


- Detekce pláče: oznámí když kamera zaznamená pláč
- Detekce zvuku: oznámí když kamera zaznamená zvuk
- Detekce pohybu: oznámí když kamera zaznamená pohyb
- Pohodlí pokoje/ Asistence spánku: oznámí když teplota a vlhkost v místnosti dítěte je mimo normu

Nastavení norem:

- Detekce pláče: možnost nastavení požadované citlivosti a oznámení.
- Pohodlí pokoje/asistence spánku: možnost nastavení teploty a oznámení.

Teplota 40 - 90 F nebo 16 - 28 C.

Vlhkost lze nastavit mezi 10 - 90% RH.

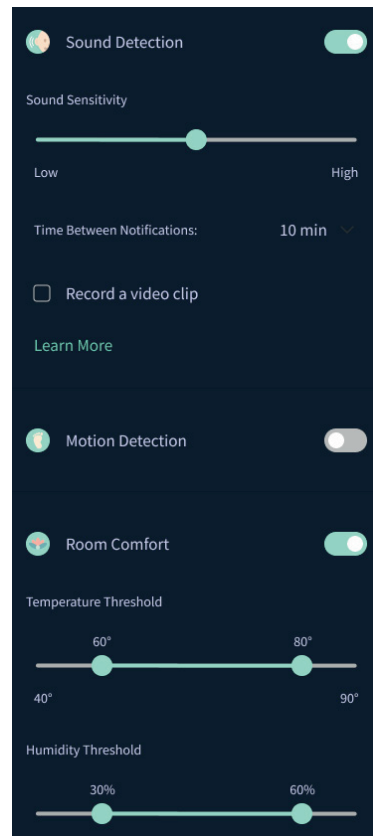

Nastavení času mezi oznámeními

Použitím tohoto nastavení můžete určit jak často chcete obdržet oznámení. Mobilní zařízení obdrží pouze jednou specifikované oznámení.

- Například když nastavíte čas mezi oznámeními na 5 minut, obdržíte pouze jedno oznámení na dětský pláč během 5ti minut. Pokud pláče i v 6 té minutě, obdržíte další oznámení.


Oznámení může být nastaveno od 1 minuty do 1 hodiny na pláč, zvuk a pohyb. Uroveň Pohodlí pokoje je 30minut, 60 minut nebo až 24hodin.

Nastavení času mezi oznámeními je pro všechna mobilní zařízení připojené k účtu totožné.

Cam 2 Oznámení - ON

K tomu, aby zařízení přijímalo Oznámení, musí být tato povolena přepnutím na ON na domovské stránce.

To umožňuje více zařízením být připojeno ke Cam 2, ale umožňuje zvolit, které chtějí Oznámení obdržet.

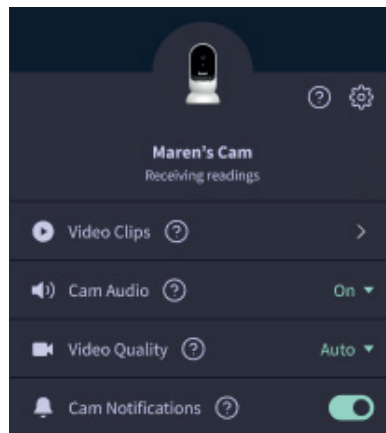

Video klipy

Video klipy mohou být nahrávány, když zvuk, pohyb nebo dětský pláč jsou detekovány v místnosti dítěte. Klipy budou uloženy v Owlet Aplikaci po 7 dní a mohou být uloženy do Vašeho mobilního zařízení. Video klipy zaznamenají několik okamžiků před a po nahrávané události.

- Video klipy mohou zaznamenávat pláč, zvuk a pohyb až do jejich ukončení.

Přehrání video klipu

Klikněte na vybrané video. Video se přehraje v celé obrazovce a může být otočeno na šířku.

Můžete přehrát, pozastavit či zrychleně posunout video vpřed i vzad (- 4 vteřiny).

Také můžete vypnout zvuk, přejít na plnou obrazovku nebo stisknout tlačítko pro více možností.

V Možnostech můžete nastavit :

- vymazání videa
- sdílení videa
- uložení videa do Vašeho mobilního zařízení



Videa a práce s nimi

- Dostupnost: Video klipy jsou dostupné pro uživatele po 7 dní po nahrání videa.
- Vybrání a filtrování: Můžete vybrat a filtrovat klipy dle typu
- Detekce video klipů: Můžete vymazat klipy, které nepotřebujete.

K vymazání videí, stiskněte "Vybrat" a zkontrolujte videa, které chcete vymazat.


Video klipy můžete také vymazat z celé obrazovky, kliknutím na příslušné tlačítko.

Jakmile jsou video klipy vymazány z aplikace, ostatní uživatelé přihlášení do aplikace k nim ztratí přístup.

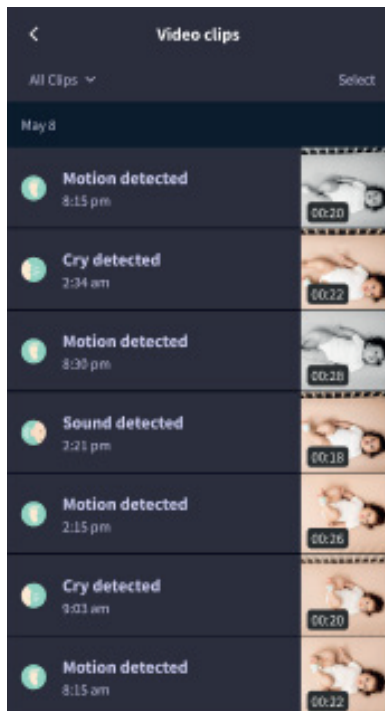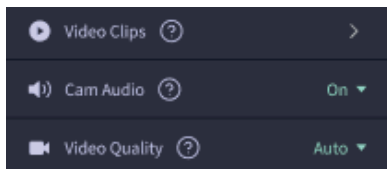

Historie

Video klipy můžete také nalézt v tabulce Historie a budou obsaženy s dalšími videy nahrány tentýž den. Když kliknete na seznam položek, ukáže se Vám seznam všech videí nahraných ten den.

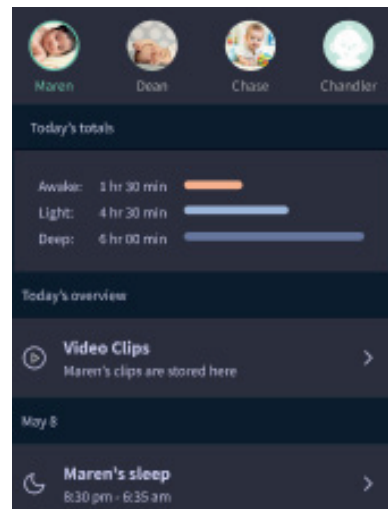



VAROVÁNÍ:



Nebezpečí uškrcení!

Děti by se mohly do kabelů zamotat a UŠKRTIT SE. Pokud výrobek používáte ve vzdálenosti 90 cm od postýlky, vždy používejte kabelové chrániče. Před každým použitím zkontrolujte, zda není kabel volně přístupný dítěti. Pokud je kabelový chránič jakkoli poškozený, okamžitě výrobek přestaňte používat. Neodstraňujte štítek z kabelu nebo kabelového chrániče.

CZ Varování / Důležité bezpečnostní pokyny

• **VAROVÁNÍ: Kamera Owlet Cam 2 není zdravotnický prostředek.** Není určena k použití jako zdravotnický prostředek nebo k nahrazení zdravotnického prostředku. Neslouží a není určena k diagnostice, léčení, ošetřování, zmírňování nebo předcházení jakýmkoli onemocněním nebo zdravotním stavům, ani k vyšetřování, nahrazování nebo úpravě anatomie nebo jakéhokoli fyziologického procesu.

• Pouze pro vnitřní použití. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, NEVYSTAVUJTE tento výrobek vodě nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE kameru v blízkosti vody (např. vany, umyvadla apod.) ani jej neponořujte do vody.

• Použití kamery by nemělo nahrazovat řádný dohled dospělé osoby/rodičů. V pravidelných intervalech dítěte zkontrolujte, jelikož kamera na tichou činnost dítěte neupozorní.

• NIKDY se výrobek nepokoušejte rozebrat. Vystavujete se nebezpečí a zanikne vám záruka.

Uživatel by se neměl pokoušet o servis ani opravu kamery. • Používejte pouze adaptér dodaný s tímto výrobkem. Neprávná polarita nebo napětí adaptéru může výrobek vážně poškodit.

• Abyste zabránili zamotání a přehřátí, NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabely.

• Adaptér může být během provozu mírně teplý na dotek. To je zcela normální.

Zkontrolujte, zda nejsou kryty zásuvek ve zdi neobvykle horké na dotek.

• Zkontrolujte, zda nejsou kryty zásuvek neobvykle horké na dotek. Pokud ano, okamžitě z těchto zásuvek odpojte kabely. Zkontrolujte, zda jsou všechna zásuvková spojení v dobrém stavu, aby se adaptér neuvolnil nebo aby nebyly odhalené kabely. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby zkontroloval, zda nejsou odhalené žádné kabely.

• NEUMISŤUJTE adaptér/zástrčku pod okno, kde by na něj dítě mohlo slápnout a/nebo dosáhnout na potenciálně nebezpečnou část instalace.

• Montáž výrobku mohou provádět pouze dospělé osoby. Při montáži udržujte malé části výrobku mimo dosah dětí. Při vybalování výrobku dbejte zvýšené opatrnosti.

• Tento výrobek není hračka. NEDOVOLTE dětem, aby si s ním hrály.

• Kamera používá šifrovaný přenos na frekvencích v souladu s požadavky stanovené FCC. Vždy zabezpečte Wi-Fi router heslem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• **VENTILACE:** NEBLOKUJTE větrací otvory výrobku. NEUMISŤUJTE jej na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. NEUMISŤUJTE jej na polici knihovny nebo skříňky, která by mohla omezovat proudění vzduchu.

• **ZDROJ TEPLA:** Kamera by měla být umístěna mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné spotřebiče, které produkují teplo. Výrobek rovněž uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.

• **OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU:** Napájecí kabel by měl být veden tak, aby na něj nemohl nikdo slápnout a aby nebyl přiskřípnutý předměty. Zvláštní pozornost věnujte části kabelu u zástrčky a v místě, kde vychází z kamery.

• Společnost Owlet si za svými výrobky hrdě stojí. Informace o našich zárukách naleznete na webové stránce: www.owletcare.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S FCC

• Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování

předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Používejte POUZE dodaný napájecí adaptér. V opačném případě může dojít ke zrušení naší omezené záruky. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné budově. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může narušovat rádiovou komunikaci.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S OEEZ

Společnost Owlet se zavázala plnit požadavky směrnice 2014/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Více informací o správné likvidaci výrobků Owlet v rámci Evropské unie a ve Velké Británii naleznete na našich webových stránkách.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Owlet Baby Care prohlašuje, že kamera Owlet Cam je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové stránce: www.owletcare.cz

FREKVENČNÍ ROZSAH A MAXIMÁLNÍ VÝKON

2 412-2 472 MHz (výstupní výkon 0,0249 W)

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC a vyhovuje bezlicenčním kanadským RSS bez výjimek pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Americký patent č. D864147
a D864148. Další patenty v řízení.

Vyrobeno v Číně.



FSC
www.fsc.org

MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C153924

Informace o záruce

Společnost Owlet poskytuje záruku kamery Owlet Cam 2 při běžném používání a servisu bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu, který je uveden na dokladu o koupi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Owlet Cam 2 a aplikace Owlet mají sloužit jako pomůcky při péči o dítě a nejsou určeny k tomu, aby nahradily nebo se používaly bez dohledu zodpovědné dospělé osoby.

Kamera Owlet Cam 2 je určena pro zdravé děti a prahové hodnoty pro spuštění alarmu na kameře Owlet Cam proto nejsou tak přísné jako u lékařských monitorů.

Upozornění:

- Nepoužívejte Owlet Cam 2 jako diagnostický nástroj.
- Nepoužívejte Owlet Cam 2 pokud vám lékař doporučí použití nemocničního pulzního oxymetru.
- Nepoužívejte Owlet Cam 2, pokud vám lékař doporučí použití nemocničního monitoru zástavy dechu.
- Nepoužívejte Owlet Cam 2 jako výmluvu pro nebezpečné spánkové návyky.



Tento symbol v tomto návodu k použití upozorňuje na důležité bezpečnostní informace!

Všechny bezpečnostní informace budou následovány výstražným symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“, „POZOR“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:

NEBEZPEČÍ = Bezprostředně hrozící nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.

VAROVÁNÍ = Potenciálně nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob a/nebo poškození majetku.

POZOR = Bezprostředně hrozící nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.

UPOZORNĚNÍ = Nebezpečná situace, která by mohla vést k jiným následkům než zranění osob, např. poškození majetku.

PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD K POUŽITÍ

V návodu k použití naleznete mnoho užitečných rad, jak Owlet Cam 2 správně používat a udržovat. Řešení některých problémů naleznete v sekci Řešení problémů. Pokud si nejprve přečtete tipy pro řešení problémů, možná se na nás nebudete muset obracet s žádostí o pomoc. Kompletní informace o nastavení a používání výrobku naleznete na webové stránce www.owletcare.cz.

PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vaše bezpečnost i bezpečnost jiných osob je pro nás velmi důležitá. V tomto návodu a v aplikaci Owlet Baby Care naleznete mnoho důležitých bezpečnostních pokynů. Vždy si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je.

VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



VAROVÁNÍ: Owlet Cam 2 není zdravotnický prostředek.

Owlet Cam 2 vás upozorní, pokud se tepová frekvence nebo hladina kyslíku v krvi vašeho dítěte pohybují mimo stanovený rozsah. Owlet Cam 2 je určena pro novorozence do osmnácti (18) měsíců, nikoli pro děti starší osmnácti (18) měsíců. Owlet Cam 2 není zdravotnický prostředek. Owlet Cam 2:

- Není určena k diagnostice, léčbě, zmírňování, monitorování, léčení ani předcházení jakéhokoliv onemocnění nebo zranění.
- Neovlivňuje funkci nebo strukturu těla.
- Nedosahuje primárních určených účelů prostřednictvím působení chemických látek.
- Nezabráňuje syndromu náhlého úmrtí kojenců (SNÚK).

Primárním účelem tohoto návodu k použití je: Poskytnout uživateli základní pokyny a doporučení pro správnou instalaci a používání Owlet Cam 2 a vysvětlit funkce, obsluhu, bezpečnostní opatření, údržbu a řešení problémů s Owlet Cam 2. Je nezbytné, aby si všechny osoby, které mají tuto Owlet Cam 2 používat nebo nastavovat, pečlivě přečetly návod k použití, aby pochopily, jak Owlet Cam 2 správně používat, a aby tyto pokyny dodržovaly.

Pokud těmto pokynům nerozumíte, neprodleně nás kontaktujte na emailové adrese:
info@owlet-care.cz

PRO BEZPEČNOST VÁS A VAŠEHO DÍTĚTE



- ZÁKLADNU VŽDY UDRŽUJTE VE VZDÁLENOSTI ALESPŮ 1 METRU OD DĚTSKÉ POSTYLKY, JELIKOŽ KABEL MŮŽE PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČÍ ÚŠKRCENÍ.
- OWLET CAM 2 JE POUZE POMŮCKOU. NENAHRAŽUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.
- U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ, DĚTÍ NA PODPŮRNÉM KYSLÍKU NEBO DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZKONZULTUJTE POUŽITÍ CHYTŘE PONOŽKY SMART SOCK 3 OD OWLET S VAŠÍM LÉKAŘEM.
- KDYKOLI SE OZVE ALARM, OKAMŽITĚ ZAREAGUJTE.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S FCC



Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Používejte POUZE dodaný napájecí adaptér. V opačném případě může dojít ke zrušení naší omezené záruky. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné budově. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může narušovat rádiovou komunikaci.



Toto zařízení vyhovuje bezlicenčním kanadským RSS bez výjimky pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Reklama a servis

Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
190 00 Praha 9

Informace

email: info@irobot.cz
telefon: +420 245 001 740

Otevírací doba

Pondělí - Pátek: 7.30 - 15.30

Řešení problémů

Počáteční nastavení | Alarmy | Připojení

Počáteční nastavení

Problém	Příčiny	Řešení
■ Během nastavení nevidím Wi-Fi síť chytré ponožky Smart Sock 3.	■ Základna není zapnutá. ■ Základna je již připojena k Wi-Fi síti chytré ponožky Smart Sock 3. ■ Základna je mimo dosah.	■ Zapojte základnu do zásuvky. ■ Zkontrolujte, zda kontrolka Wi-Fi síťe na spodní straně základny svítí. Pokud ano, tento krok přeskočte a pokračujte v založení vašeho účtu v aplikaci. ■ Umístěte základnu blíže k vašemu Wi-Fi routeru.
■ V aplikaci Owlet nevidím naši domácí Wi-Fi síť.	■ Váš router využívá frekvenční pásmo 5 GHz (výrobek Owlet podporuje pouze 2,4GHz pásmo). ■ Možná máte skrytý router.	■ Zkontrolujte, zda je zařízení iOS připojeno k 2,4GHz síti (většina 5GHz routerů podporuje i 2,4GHz síť). ■ Pokyny týkající se skrytých routerů naleznete na owletcare.com/support.
■ Základnu nelze připojit k naší domácí Wi-Fi síti.	■ Nesprávné heslo ■ Základna je mimo dosah vašeho Wi-Fi routeru. ■ Vaše domácí Wi-Fi síť nefunguje.	■ Zkontrolujte heslo k vaší síti. ■ Před nastavením umístěte základnu blíže k routeru a po dokončení nastavení základnu odnesete zpět do dětského pokoje. ■ Zkuste restartovat telefon a znovu se připojit k Wi-Fi síti. ■ Resetujte váš Wi-Fi router.
■ Základna po odpojení chytré ponožky Smart Sock svítí bíle.	■ Probíhá aktualizace softwaru.	■ Připojte chytrou ponožku Smart Sock zpět k základně, dokud nebude aktualizace dokončena.
■ Základnu nelze spárovat s mým účtem Owlet.	■ Základna a vaše zařízení iOS nejsou připojeny ke stejné Wi-Fi síti. ■ Podržení malého tlačítka Registrace	■ Ověřte, zda jsou základna a vaše zařízení iOS připojeny ke stejné Wi-Fi síti. ■ Stiskněte a uvolněte (nedržte) malé tlačítko Registrace na spodní straně základny a počkejte několik sekund, než se znovu pokusíte spárovat váš účet Owlet. ■ Připojte vaše zařízení iOS ke stejné 2,4GHz Wi-Fi síti, ke které je připojena základna.

*Potřebujete technickou podporu? Kontaktujte nás na emailové adrese info@owlet-care.cz

Alarmy

Problém	Příčiny	Řešení
■ Základna bliká modře a pípá.	■ Základna je mimo dosah chytré ponožky Smart Sock. ■ Tělo rodiče či jiné osoby starající se o miminko blokuje spojení mezi chytrou ponožkou Smart Sock a základnou. To se běžně stává při krmení, výměně plenek, mazlení apod. ■ Slabá nebo vybitá baterie	■ Umístěte základnu blíže k chytré ponožce Smart Sock. ■ Změňte polohu miminka nebo zvažte, zda při krmení, výměně plenek, mazlení apod. monitorování nevypnout. ■ Nabijte chytrou ponožku Smart Sock.
■ Základna bliká červeně a pípá.	■ Nízká nebo vysoká tepová frekvence ■ Nízká hladina kyslíku ■ Chytrá ponožka Smart Sock na nožičce nesedí.	■ Ujistěte se, že obrys senzoru na vnější straně chodidla miminka je 1-2 mm za malíčkem. ■ Ujistěte se, že chytrá ponožka Smart Sock přiléhá k nožičce (pokud ne, chytrá ponožka obtížně získává údaje. Může se rovněž zbytečně spustit alarm.) ■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnané v okénkách látkové ponožky. ■ Zvažte, zda nepoužít jinou velikost látkové ponožky.
■ Základna bliká žlutě a pípá.	■ Problémy se získáváním údajů ■ Chytrá ponožka Smart Sock není správně nasazena. ■ Světlo v místnosti je příliš jasné.	■ Ujistěte se, že obrys senzoru na vnější straně chodidla miminka je 1-2 mm za malíčkem. ■ Ujistěte se, že chytrá ponožka Smart Sock přiléhá k nožičce (pokud ne, chytrá ponožka obtížně získává údaje a může se rovněž zbytečně spustit alarm). ■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnané v okénkách látkové ponožky. ■ Ztlumte světlo v místnosti.

Připojení

Problém	Příčiny	Řešení
■ Základna není připojena k internetu.	■ Základna je mimo dosah vašeho Wi-Fi routeru. ■ Vaše domácí Wi-Fi síť nefunguje.	■ Umístěte základnu a Wi-Fi router blíže k sobě (zesilovače Wi-Fi ani další routery problém nevyřeší). ■ Resetujte váš Wi-Fi router.
■ Chytrá ponožka Smart Sock se nenabíjí.	■ Chytrá ponožka Smart Sock není úplně zapojena. ■ Chytrá ponožka Smart Sock vyžaduje resetování.	■ Nechte chytrou ponožku Smart Sock nabíjet, dokud neustyšíte cvaknutí a nezačne zeleně blikat. ■ Vypněte a znovu zapněte elektronickou součástku chytré ponožky Smart Sock.
■ Místo údajů o tepové frekvenci a hladině kyslíku jsou vidět pomlčky.	■ Chytrá ponožka Smart Sock se snaží získat spolehlivý údaj. ■ Miminko příliš pohybuje nožičkou. ■ Špatně nasazená chytrá ponožka Smart Sock ■ Špatně padnoucí látková ponožka	■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnané ve středu okének látkové ponožky. ■ Nedávejte dítě do kolébky ani na vibrační podložky, protože by mohly narušit správnou funkci zařízení. ■ Zkontrolujte, zda je chytrá ponožka Smart Sock správně nasazená. ■ Zkontrolujte, zda jste použili vhodnou velikost látkové ponožky.

Tipy pro zdravé prostředí pro spánek

Rádi bychom se s vámi podělili o několik tipů, jak vašemu miminku zajistit zdravý a bezpečný spánek.

- Miminko by mělo být v postýlce samotné a ležet na zádech. Spání na boku nebo na břiše není pro miminko bezpečné.
- Pořiďte pro miminko postýlku, která splňuje platné bezpečnostní normy. Rovněž zakupte pevnou matraci, která do postýlky dobře padne a povlečte ji dobře přiléhajícím prostěradlem.
- Do postýlky neumísťujte žádné měkké, volné ležící nebo načebrané předměty. To zahrnuje polštáře, deky, přikrývky, ochranné obložení do dětských postýlek, plyšáky, hračky a jakékoli jiné měkké předměty.
- Místo klasické přikrývky použijte kojeneckou přikrývku, kterou je možné zapnout jako oděv, nebo podobnou přikrývku, která vaše miminko udrží v teple a bezpečí.
- Sdílejte s vaším miminkem pokoj, ale ne postel. Vaše miminko by mělo spát v oddělené postýlce blízko vaší postele. Bude tak v bezpečí a krmení bude snazší. Pokud by miminko spalo s vámi, chytrá ponožka Smart Sock nebude správně fungovat. Vaše tělo by totiž rušilo bezdrátový signál ponožky.
- Dbejte na to, abyste s miminkem neusnuli ve vaší posteli, na pohovce nebo v křesle.
- Nikdy nenechávejte miminko spát na měkkých površích, jako jsou postele pro dospělé nebo pro děti, pohovky, křesla, vodní postele, polštáře, polštářky, přikrývky, ovčí kůže a podobné předměty.
- Nepoužívejte polštáře, polohovací klíny ani fixační podložky, abyste miminko podepřeli, udrželi na zádech nebo mu zabránili v otočení.
- Dbejte na to, aby se miminko nadměrně nezahřálo. Oblékejte jej do lehkého pyžamka a v místnosti udržujte teplotu, která je příjemná pro lehce oblečeného dospělého.
- Zvažte, zda miminku během odpoledního a večerního spánku nenabídnout dudlík. Kojencům dudlík nabídněte až ve věku 3–4 týdnů, až si zvyknou na kojení.
- Poučte o těchto zásadách bezpečného spánku všechny, kdo se o vaše miminko starají!



Prohlášení o shodě

Výrobce: *Owlet Baby Care*
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043
Telefon: 844.334.5330

Výrobek: *Owlet Cam 2*
Číslo výrobku: *OC2A*

Popis výrobku: *Owlet Cam umožňuje sledovat a slyšet dítě. Zařízení obsahuje: kameru s vysokým rozlišením a širokým úhlem záběru a zabudovaným mikrofonom, umožňuje obousměrný přenos zvuku, noční vidění, má senzor na měření teploty v místnosti. Balení dále obsahuje magnetickou základnu, napájecí adapter, USB kabel s teplotním senzorem, sadu pro připevnění na stěnu a chrániče na kabely.*

Název zástupce: *Obelis S.A*

Adresa registrovaného zástupce:
Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.
Tel: 32 (0) 2 732 5954
Fax: 32 (0) 2 732 60 03
Email: mail@obelis.net
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení *Owlet Baby Care of Lehi, Utah*, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
 - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
 - Council Directive 2011/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
 - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
 - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001) – General Product Safety
 - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti *Owlet Baby Care*, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021

Tammy Lavery
Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs