

Turinys

Išvadas	2
Saugos taisyklės ir svarbios pastabos	3
Aprašas	5
Pientraukio surinkimas ir išardymas	7
Energijos šaltinis	8
Pientraukio naudojimas	8
Naudingi patarimai, kaip naudotis pientraukiu	9
Motinos pieno laikymas ir šildymas	9
Trikčių šalinimas	10
Valymas ir sterilizavimas	11
Laikymas	12
Techninės specifikacijos	12
Ant gaminio, jo priedų ir pakuotės esančių ženklų paaiškinimas	12
Panaudotų baterijų išmetimas	13
Nurodymai ir informacija, susijusi su panaudotų pakuočių išmetimu	13

Įvadas

- Visuotinai pripažinta, kad motinos pienas yra natūralus kūdikio maistas, užtikrinantis augimui būtinas maistines medžiagas ir apsaugą nuo infekcijų. Pientraukis yra tinkamas papildomas priedas maitinančioms motinoms. Jis ypač naudingas tokiomis aplinkybėmis, kai motina negali reguliariai žindyti arba kai kūdikio neįmanoma žindyti tiesiogiai, pvz. dėl skausmingų arba įtrūkusių krūtų spenelių; galiausiai, bet ne mažiau svarbu – jis padeda sumažinti krūtų tvinkimą, skausmingumą, kai krūtys yra perpildytos pienu ir tam tikrą pieno kiekį reikia ištraukti.
- Pientraukis „BBP 1010 Bayby“ turi dviejų etapų sistemą, kuri imituoja kūdikio natūralų kūdikio žindymo veiksmą. Pirmajame etape pamėgdžiojamas greitas žindymas, stimuliuojant krūties spenelį, kad pagerėtų laktacija iš pieno liaukų. Tai po, antro etapo metu, imituojamas gilesnis ir lėtesnis kūdikio žindymo veiksmas. Šiame etape motinos pienas ištraukiamas iš krūties spenelio ir pumpuojamas į buteliuką. Stimuliavimo ir ištraukimo intensyvumo lygį galima atitinkamai reguliuoti, pasirenkant vieną iš 9 lygių.
- Aiškiai išdėstytame skystųjų kristalų ekrane rodomas naudojimo režimas, siurbimo intensyvumas, pumpavimo greitis ir kiek laiko liko iki automatinio išjungimo. Atminties funkcija automatiškai išsaugo paskutinį kartą naudotas darbo režimo ir ištraukimo intensyvumo nuostatas.
- Silikoninė krūtų užmova atlieka tris funkcijas: krūtų masažo, krūtų spaudimo ir pieno ištraukimo. Visi šie veiksmai yra vyksta vienu metu, sukeliant natūralaus žindymo pojūtį. Specialios formos krūtų užmova atskiria pieną nuo oro ir neleidžia pienui tekėti atgal.
- Pagrindiniai pientraukio priedai: kūdikių buteliukas plačiu kakleliu ir adapteris, leidžiantis naudoti kūdikių buteliukus siaurais kakleliais.
- Pientraukis yra kompaktiškas, todėl jį visada galėsite turėti po ranka. Jį galima naudoti ir namuose, ir keliaujant, nes jis veikia tyliai ir jį galima naudoti su baterija arba maitinimo adapteriu.


Saugos taisyklės ir svarbios pastabos

- Šį pientraukį naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Nesilaikant šių nurodymų, pientraukis gali veikti netinkamai arba sugesti. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
- Šį pientraukį galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir vyresniems arba asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių, arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo pientraukiu ir jo priedais.
- Naudokite pientraukį tik su originaliu maitinimo adapteriu ir priedais.
- Prieš prijungdamos prietaisą prie maitinimo adapterio, įsitikinkite, ar ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka elektros tinklo lizdo įtampą.
- Higienos sumetimais, pientraukis skirtas naudoti vienai žindyvei.
- Neįjunkite pientraukio, jeigu silikoniniame vamzdyje **A⑩** yra vandens.
- Nenaudokite pientraukio lauke, saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nedėkite jo ant elektrinės arba dujinės viryklės.
- Šis pientraukis nėra skirtas naudoti duše arba vonioje.
- Nenaudokite pientraukio, kai esate labai pavargusios arba mieguistos, arba vairuodamos motorinę transporto priemonę.
- Nerekomenduojame naudoti pientraukio nėštumo metu, nes tai gali sukelti priešlaikinį gimdymą.
- Nebandykite atjungti pientraukio nuo krūties tuo metu, kai pienas yra ištraukiamas. Pirmiausiai išjunkite pientraukį ir tik pasui atjunkite pientraukį nuo krūtų užmovos **A②**.
- Jeigu ištraukiant pieną pajustumėte nemalonų arba skausmingą spaudimą, išjunkite pientraukį ir atjunkite krūtį nuo krūtų užmovos **A②**. Švelniai pamasazuokite ir pašildykite krūtį duše, paskui pakartokite pieno ištraukimo procesą. Jei problemos pašalinti nepavyktų, kreipkitės į žindymo konsultantę arba savo gydytoją.
- Nepalikite pientraukio be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.

- Jeigu pientraukis naudojamas jį prijungus prie išorinio energijos šaltinio, po naudojimo visada atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Išplaukite ir sterilizuokite pientraukį, atsižvelgdamos į skyriuje „Valymas ir sterilizavimas“ pateiktus nurodymus. Niekada nenardinkite siurbliuko arba maitinimo adapterio į vandenį ar kitokius skysčius, arba sterilizuokite šias dalis, nes jos tiesiogiai liečiasi su motinos pienu arba krūtimi.
- Prietaisą plauti gali vaikai, jeigu jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi suaugusiųjų. Vis dėlto, jiems draudžiama atlikti sterilizavimą dėl pavojaus nusiplikyti.
- Nenaudokite pientraukio, jeigu jis netinkamai veikia, jeigu pažeistas jo maitinimo adapteris arba jeigu kokia nors jo dalis, kurios negalima kišti į vandenį, buvo įkritusi į vandenį arba kitą skystį.
- Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžutę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tol, kol galioja garantija. Pientraukį reikėtų laikyti jo originalioje dėžutėje.

Aprašas

Priedų aprašas

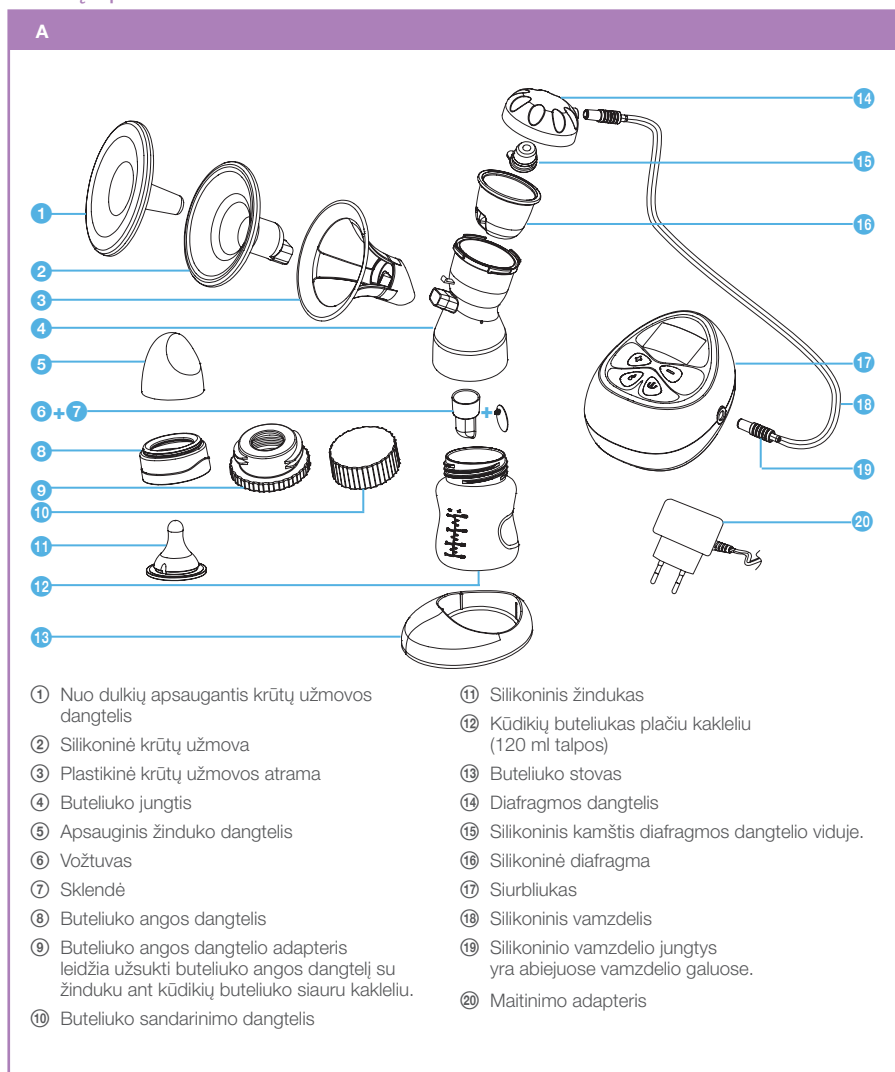


Atsarginiai priedai, esantys originalioje pientraukio pakuotėje:

1 silikoniinis vamzdelis A18 + 2 silikoniinės vamzdelių jungtys A19, 2 sklendės A7.

Detalės A1–19 yra pagamintos iš medžiagos, kurios sudėtyje nėra (bisfenolio A). Kalbant apie siurbliuką A17 tai taikytina dangteliui ir valdymo skydeliui.

Siurbliuko aprašas

B

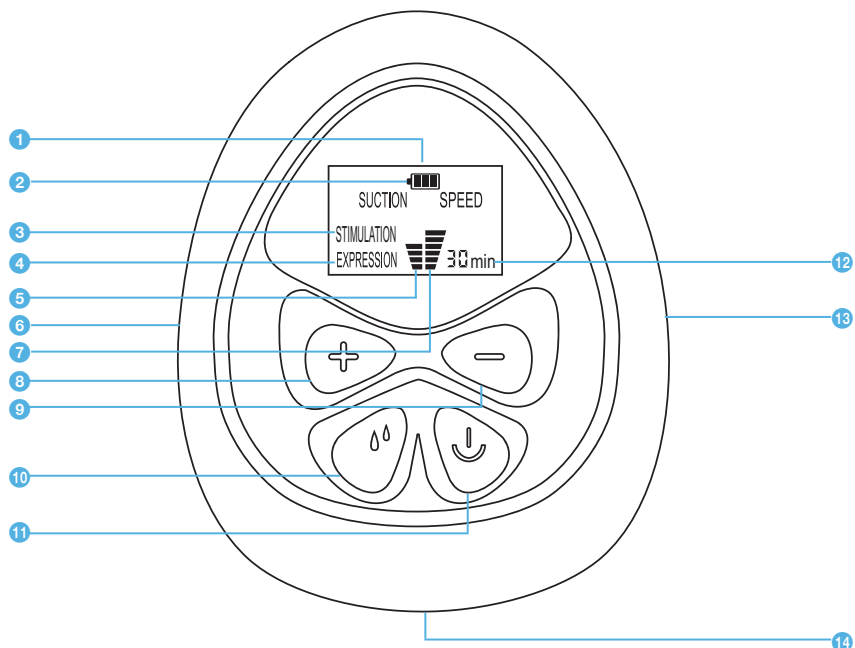

- | | |
|--|--|
| ① Skystųjų kristalų ekranas | ⑧ Ištraukimo intensyvumo didinimo mygtukas |
| ② Baterijų energijos lygio indikatorius | ⑨ Ištraukimo intensyvumo mažinimo mygtukas |
| ③ Stimuliacijos režimo indikatorius
Veikiant stimuliacijos režimui, ekrane rodoma „STIMULATION“ (stimuliacija). | ⑩ Stimuliacijos ir ištraukimo režimų perjungimo mygtukas |
| ④ Ištraukimo režimo indikatorius
Veikiant ištraukimo režimui, ekrane rodoma „EXPRESSION“ (pieno ištraukimas). | ⑪ Jungiklis pientraukiui įjungti ir išjungti |
| ⑤ „SUCTION“ (ištraukimo) skalėje rodoma ištraukimo intensyvumo nuostata. | ⑫ Laikas, likęs iki pientraukio automatinio išjungimo |
| ⑥ Maitinimo adapterio lizdas | ⑬ Silikoninio vamzdelio lizdas silikoniniam vamzdeliui prijungti |
| ⑦ „SPEED“ (greičio) skalėje rodomas stimuliacijos / ištraukimo greitis. | ⑭ Baterijų skyrius yra pientraukio galinėje pusėje. |

Pientraukio surinkimas ir išardymas

- Prieš surinkdami pientraukį, išplaukite ir sterilizuokite atskirtas dalis, atsižvelgdamos į skyriuje „Valymas ir sterilizavimas“ pateiktus nurodymus, ir kruopščiai nusiplaukite rankas.



Dėmesio!

Niekada nenardinkite siurbliuko **A17** arba maitinimo adapterio **A20** į vandenį ar kitokius skysčius, arba sterilizuokite šias dalis, nes jos tiesiogiai liečiasi su motinos pienu arba krūtimi.

- Visada surinkite pientraukį, atsižvelgdamos į toliau pateiktus nurodymus. Antraip gali sumažėti ištraukimo intensyvumas.
- Patikrinkite, ar nepažeista arba nenusidėvėjusi jokia pientraukio dalis, ir ar visos dalys, kurios bus naudojamos surinkimo metu, yra sausas. Pažeistas arba nusidėvėjusias dalis privaloma pakeisti naujomis. Norėdamos užsisakyti keičiamąsias dalis, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Iki galo įkiškite krūtų užmovą **A2** į plastikinę atramą **A3**. Pirštais užspauskite plastikinės atramos **A3** kraštus, kad ji būtų tinkamai užfiksuota.
- Uždėkite plastikinę atramą **A3** su krūtų užmova **A2** ant antgalio, kuris yra buteliuko jungties **A4** priekinėje pusėje. Siek tiek pakreipkite plastikinę atramą **A3** su krūtų užmova **A2** aukštyn, kad pirmiausiai vidun įslystų ant antgalio esanti briauna. Tada atsargiai užspauskite plastikinę atramą **A3** ant buteliuko jungties **A4**, kad šios dalys būtų sujungtos.
- Į viršutinę buteliuko jungties **A4** dalį įkiškite diafragmą **A18** ir dėkite ant jos diafragmos dangtelį **A19**. Sukite diafragmos dangtelį **A19** pagal laikrodžio rodyklę, kad jis būtų tinkamai prijungtas prie buteliuko jungties **A4**. Diafragmos dangtelyje **A19** esanti skylė, skirta silikoniniam vamzdeliui **A18** prie vamzdelio jungties **A19** prijungti, turi būti nukreipta į priešingą pusę nei plastikinės atrama **A3** su krūtų užmova **A2**. Prijunkite vamzdelio jungtį **A18** su silikoniniu vamzdeliu **A18** prie diafragmos dangtelyje **A19** esančios skylės.



Dėmesio!

Diafragmos dangtelio **A19** skylėse ir silikoninio vamzdelio **A18** su vamzdelio jungtimi **A19** viduje neturi būti vandens.

- Prijunkite sklendę **A7** prie vožtuvo **A6** taip, kad sklendės **A7** pusapskritimo formos galas tilptų vožtuvo **A6** tokios pat formos angoje. Norėdamos užtikrinti, kad sklendė **A7** būtų tinkamai prijungta prie vožtuvo **A6**, paspauskite ją nykščiu.
- Sumontuokite vožtuvą **A6** su sklende **A7** buteliuko jungties **A4** apatinėje pusėje.
- Užsukite buteliuką **A12** ant buteliuko jungties **A4** apačios. Padėkite buteliuką **A12** ant buteliuko stovo **A13**.
- Prijunkite laisvąjį silikoninio vamzdelio **A18** su vamzdelio jungtimi **A19** galą prie lizdo **B13**, esančio dešinėje siurbliuko **A17** pusėje.
- Norėdami išardyti pientraukį, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

Energijos šaltinis

Energijos šaltinio pasirinkimas

Išorinis energijos šaltinis

- Naudokite tik **A20** tipo maitinimo adapterį (6 V $\overline{---}$, 1A galios) pateiktą su šiuo pientraukiu.
- Įkiškite maitinimo adapterio **A20** kištuką į lizdą **B6**, esantį kairėje siurbliuko **A17** pusėje. Įjunkite maitinimo adapterio **A20** kištuką į el. srovės lizdą.

Vidinis energijos šaltinis

- Norėdami naudoti pientraukį, prijungtą prie vidinio energijos šaltinio, naudokite 4 šarmines LR6/AA tipo baterijas (4 x 1,5 V).
- Įsitikinkite, ar siurbliukas **A17** yra atjungtas nuo elektros tinklo lizdo. Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį **B14** nuo siurbliuko **A17** apatinės dalies. Baterijų skyrius **B14** turi medžiaginę juostelę, kad būtų lengviau išimti baterijas. Prieš įdėdamos baterijas, ištieskite šią juostelę skersai baterijų skyriaus **B14** ir nykščiu prilaikykite jos laisvąjį galą. Po vieną sudėkite baterijas į baterijų skyrių **B14**, atkreipdamos dėmesį į tinkamus jų polius. Atleiskite juostelę ir uždarykite dangtelį.

Pastaba.

Nemaišykite naujų baterijų su naudotomis arba įvairių tipų baterijų, pavyzdžiui, šarminių baterijų su įkraunamomis baterijomis.

Energijos šaltinių naudojimo instrukcija

- Prijungus siurbliuką **A17** prie išorinio el. srovės šaltinio arba įdėjus baterijas, ekrane **B1** trumpam pasirodys visi segmentai, o paskui siurbliukas **A17** pradės veikti parengties režimu.
- Jeigu pientraukis naudos vidinio energijos šaltinio energiją, ekrane **B1** bus rodomas baterijų energijos lygis **B2**.
- Įdėjus naujas baterijas, apytikslis pientraukio veikimo laikas yra 60 minučių. Maždaug po 60 veikimo minučių ištraukimo intensyvumas pradės mažėti, net jei baterijų energijos lygio indikatorius **B2** vis tiek rodytų 2 padalą; baterijos energija gali būti išseikvota ir jas reikės pakeisti naujomis. Jeigu baterijų energijos lygio indikatorius **B2** mirksi, baterija yra beveik išsikrovusi. Pakeiskite maitinimo elementus.
- Baterijas rekomenduojama išimti, jei pientraukis bus ilgai nenaudojamas.
- Prijungus siurbliuką **A17** su įdėtomis baterijomis prie elektros tinklo lizdo, pirmiausiai bus naudojama išorinio energijos šaltinio energija. Visgi, nerekomenduojame jungti siurbliuko **A17** prie elektros tinklo lizdo, kai jį yra įdėtos baterijos. Tokiu atveju kuo greičiau išimkite baterijas. Prieš išimdamos baterijas, atjunkite siurbliuką **A17** nuo elektros tinklo lizdo.

Pientraukio naudojimas

1. Prieš ištraukdamos savo pieną, kruopščiai nusiplaukite rankas ir nuvalykite krūtis švarių šiltu vandeniu sudrėkintu šluostuku (geriausia vienkartinu).
2. Patogiai įsitaisykite ant kėdės arba fotelyje, nugara atsiremkite į atlošą. Netraukite pieno susilenkusios. Išimkite pientraukį iš pientraukio stovo **A3**. Dėkite krūtų užmovą **A2** ant krūties taip, kad spenelis būtų krūtų užmovos **A2** viduryje. Nykščiu ir smiliumi prispauskite krūtų užmovą **A2** prie krūties, tos pačios rankos delnu prilaikydamos krūtį. Krūtų užmova **A2** turi idealiai prisispauti prie krūties.

3. Siurbliuko **A17** nuotolinio valdymo pulte paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką **B19**. Įjungus pirmą kartą, ekrane **B1** pasirodys indikatorius **B3** – „Stimulation“ (stimuliavimas) ir pientraukis pradės veikti stimuliavimo režimu. Stimuliavimo etapas trunka 2 minutes. Ištraukimo intensyvumas stimuliavimo etapo metu yra nustatytas ties žemiausiu, 1 lygiu. Jį rodo atitinkamas padalų skaičius skalėje **B5**. Ekrane **B1** rodomas numatytasis, 30 minučių trukmės laikas. Skaičiuojamas likęs laikas, kol pientraukis automatiškai išsijungia. Ištraukimo intensyvumo lygį galite reguliuoti, atitinkamai pasirinkdami 1–9 lygius. Intensyvumo nuostata bus rodoma skalėje **B5**. Veikiant stimuliavimo režimui, nustatomas nekeitamas greitis, kuris atitinka 100 ciklų per minutę.
4. Stimuliavimo etapui pasibaigus, pientraukis automatiškai pradeda veikti ištraukimo režimu. Jeigu pienas pradėtų tekėti greičiau, perjunkite pientraukį, kad jis veiktų ištraukimo režimu, paspausdamos mygtuką **B10**. Ekrane **B1** bus rodomas indikatorius **B4** – „Expression“ (ištraukimas). Veikiant ištraukimo režimui, ištraukimo intensyvumas yra iš anksto nustatytas tie 4 lygiu; jį galima pakeisti, atitinkamai pasirenkant 1–9 lygius. Skalėje **B5** bus rodomas atitinkamas padalų skaičius. Ištraukimo greitis keičiamas automatiškai, atsižvelgiant į ištraukimo intensyvumą; jis rodomas skalėje **B7**. Ekrane **B1** skaičiuojamas iki automatinio išjungimo likęs laikas.
5. Norėdamos sustabdyti ištraukimą, siurbliuko **A17** nuotolinio valdymo pulte paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką **B19**.

Pastaba.

Kitą kartą įjungus pientraukį, bus paleistas tas režimas, kuriam veikiant prietaisas buvo išjungtas, taip pat bus nustatyta paskutinį kartą naudota ištraukimo intensyvumo nuostata. Jeigu prieš pakartotinį naudojimą iš pientraukio bus išimtos baterijos arba jis bus atjungtas nuo išorinio energijos šaltinio, bus atitaisytos numatytosios nuostatos, buvusios naudojant pientraukį pirmą kartą.

6. Krūtį iš krūtų užmosvos **A2** visada ištraukite tik po to, kai išjungsite pientraukį **A17**. Padėkite buteliuką **A12** su ištrauktu pienu ant buteliuko stovo **A13**, kad jis nenuvirstų. Jeigu naudojate išorinį energijos šaltinį, atjunkite siurbliuką **A17** nuo elektros tinklo lizdo. Atsukite buteliuką **A12** nuo buteliuko jungties **A4** ir užsukite jį sandarinimo dangteliu **A10**.

Pastaba.

Buteliuke **A12** turi būti ne daugiau nei 120 ml pieno, kad pienas neišsilietų.

7. Pabaigę traukti pieną, išplaukite visas naudotas dalis, atsižvelgdamos į skyriuje „Valymas ir sterilizavimas“ pateiktus nurodymus. Vėliau, kai pienas bus suvartotas, išplaukite buteliuką **A12** ir jo sandarinimo dangtį **A10**.

Naudingų patarimų, kaip naudotis pientraukiu

- Jeigu jaučiate nemalonų spaudimą, sumažinkite ištraukimo intensyvumą.
- Galite pirma ištraukti pieną iš vienos krūties, o paskui – iš kitos. Prieš nuimant pientraukį nuo krūties, būtina išjungti siurbliuką **A17** ir tik tada ištraukti krūtį iš krūtų užmosvos **A2**. Tada galite traukti pieną iš kitos krūties.
- Jeigu maždaug per 5 minutes visai nepavyks ištraukti pieno, išjunkite pientraukį. Pirmiausia pabandykite atsipalaiduoti, o tada pašildykite krūtis šilame duše. Tada pabandykite dar kartą ištraukti pieną arba atidėkite tai vėlesniam laikui, kai prisikaups daugiau pieno.
- Paprastai pienui ištraukti pakanka 10 minučių. Šis laikas tėra apytikslis – kiekvienai žindyvei jis yra skirtingas.

Motinos pieno laikymas ir šildymas

- Laikyti galima tik švari, sterilizuotu pientraukiu ištrauktą motinos pieną. Laikykite pieną steriliuose induose arba specialiuose vienkartinuose maišeliuose, skirtuose motinos pienui laikyti.
- Norėdami, kad pienas neišsilietų arba neprisigertų aplinkinių kvapų, kruopščiai uždarykite indelius arba maišelius, prieš dėdami juos į šaldytuvą arba šaldiklį.

- Motinos pieną šaldytuve galima laikyti iki 48 valandų (bet ne durių skyrįje), o šaldiklyje, esant -18 °C temperatūrai, – iki 3 mėnesių.
- Jeigu pieną traukiate palaipsniui ir įvairiu metu ištrauktą pieną norite sumaišyti viename inde bei jį užšaldyti, tai padarykite per 24 valandų laikotarpį. Negalima maišyti pieno, atvėsinto iki vienodos temperatūros.
- Pažymėkite datą ant indelių arba maišelių, kuriuos dedate į šaldiklį.

Pastaba

Buteliuką **A12** su sandariu dangteliu **A10** galima laikyti ir šaldytuve, ir šaldiklyje.

- Prieš duodami pieno kūdikiui, jį reikia pašildyti maždaug iki 37 °C temperatūros. Užšaldytą pieną galima pernakt palikti šaldytuve, kad jis atšiltų. Visgi, atšildyti šaldytuve galima ne ilgiau nei 24 valandas. Atsargiai pašildykite pieną kūdikių buteliukų šildytuve arba inde su šiltu vandeniu. Nenaudokite verdančio vandens, nes esant aukštai temperatūrai gali suirti maistinės medžiagos. Mikrobangų krosnelės netinka motinos pienui šildyti, nes pienas sušildomas nevienodai.
- Visos buteliuko, iš kurios bus maitinamas kūdikis, dalys privalo būti sterilizuotos prieš supilant į jį motinos pieną. Norėdamos surinkti kūdikių buteliuką, kuris buvo prijungtas prie pientraukio, įkiškite žinduką **A11** į buteliuko angos dangtelį **A8**, tada užsukite buteliuko angos dangtelį **A8** prie buteliuko **A12**. Jeigu kūdikį norite maitinti iš buteliuko siauru kakleliu, prie buteliuko angos dangtelio **A8** apačios prisukite buteliuko adapterį **A9**, tada užsukite jį ant tinkamo buteliuko. Jeigu reikia, galite naudoti kitą kūdikių buteliuką su žinduku. Prieš maitindami, pirmiausiai visada pakratykite buteliuką ir patikrinkite pieno temperatūrą. Atšildytą arba pašildytą nesuvarotą pieną išpilkite.

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytos galimos problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamos pientraukį. Jeigu vadovaujantis toliau pateiktais nurodymais problemos pašalinti nepavyktų, kreipkitės į įgaliojimą techninės priežiūros centrą.

- Paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką **B11**, pientraukis neįsijungia.
 - Patikrinkite, ar siurbliukas **A17** yra prijungtas prie veikiančio elektros tinklo lizdo. Jeigu naudojate vidinį energijos šaltinį, patikrinkite, ar tinkamai įdėjote baterijas ir ar jos neišsikrovė.
- Pienas prastai ištraukiamas arba visai neištraukiamas
 - Patikrinkite, ar tinkamai surinkote pientraukį, ar tinkamai sujungtos atskiros jo dalys. Galbūt atsilaisvino atskirų pientraukio dalių jungtys.
 - Baterijos liko mažai energijos arba jos beveik išsikrovė. Net jei baterijų energijos lygio indikatorius **B2** vis dar rodo 2 padalas, baterijų energija gali būti išseikvota ir jas reikia pakeisti naujomis.
 - Įsitikinkite, ar krūtų užmova **A2** yra tinkamai prispausta prie krūties. Nelaikykite pientraukio už buteliuko jungties **A4**. Traukite pieną, sėdėdamos tiesiai. Laikykite krūtų užmovą **A2**, prispaudę ją prie krūties nykščiu ir smiliumi, o krūtį prilaukite delnu.
 - Patikrinkite, ar silikoninis vamzdelis **A19** nesuraizgytas ir jame nėra vandens. Prieš pradėdant traukti pieną, visos detalės privalo būti sausos, o silikoninis vamzdelis **A19** turi būti nesulenktas. Jeigu silikoniniame vamzdelyje **A19** yra vandens, galite naudoti sausą vamzdelį iš keičiamųjų priedų rinkinio.

Valymas ir sterilizavimas

Pientraukio valymas

- Įsitikinkite, ar pientraukis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Išardykite pientraukį; žr. skyrių „Pientraukio surinkimas ir išardymas“.

Pastaba.

Norint išplauti, sklendės A⑦ iš vožtuvo A⑥ išimti nebūtina.

- Prieš pirmą naudojimą ir po kiekvieno panaudojimo
 - Kruopščiai išplaukite nuo dulkių apsaugantį dangtelį A①, krūtų užmovą A②, plastikinę atramą A③, diafragmą A⑩, buteliuko jungtį A④, buteliuką A⑫, sandarinimo dangtelį A⑩, buteliuko stovą A⑬, buteliuko angos dangtelį A⑧, buteliuko adapterį A⑨, žinduką A⑪ ir žinduko dangtelį A⑤ šiltame geriamajame vandenyje su trupučiu indų ploviklio. Paskui kruopščiai išskalaukite visas šias dalis po tekančiu švari geriamuoju vandeniu ir sausai nušluostykite šluoste arba palaukite, kol jos natūraliai išdžius. Pirmiau minėtas dalis taip pat galima plauti indaplovėje (viršutiniame krepšyje).

Pastaba.

Jeigu buteliuko angos dangtelio A⑧, buteliuko adapterio A⑨ arba žinduko A⑪ nenaudojote, šias dalis pakanka išplauti prieš pat planuojamą jų panaudojimą.

- Kruopščiai išplaukite vožtuvą su sklende A⑥–⑦ švariame geriamajame vandenyje su trupučiu indų ploviklio. Paskui kruopščiai išskalaukite jį po tekančiu švari geriamuoju vandeniu ir sausai nušluostykite šluoste arba palikite jį ant šluostės, kad jis natūraliai išdžiūtų.
- Drėgnu šluostuku nuvalykite diafragmos dangtelį A⑭ ir vamzdelį A⑮ su prijungtomis vamzdelių jungtimis A⑯. Tada nusauskinkite abi dalis švari šluostuku. Šios dalys nesiliečia su motinos pienu ar krūtimi, todėl jų nebūtina plauti po tekančiu vandeniu. Visgi, jeigu šias dalis plausite, turėsite palaukti, kol į vamzdelį A⑮ arba diafragmos dangtelį A⑭ patekęs vanduo išdžius.
- Niekada neplaukite siurbliuko A⑰ ir maitinimo adapterio A⑲ po tekančiu vandeniu ir neikiškite jų į vandenį ar kokią nors kitą skystį. Jeigu jis susiteptų, nuvalykite siurbliuko A⑰ paviršių švaria drėgna šluoste, tada nusauskinkite.

Pientraukio sterilizavimas

- Prieš kiekvieną naudojimą ir po kiekvieno paskesnio panaudojimo:
 - Sterilizuokite nuo dulkių apsaugantį dangtelį A①, krūtų užmovą A②, plastikinę atramą A③, diafragmą A⑩, buteliuko jungtį A④, vožtuvą su sklende A⑥–⑦, buteliuką A⑫, sandarinimo dangtelį A⑩, buteliuko angos dangtelį A⑧, buteliuko adapterį A⑨, žinduką A⑪ ir žinduko dangtelį A⑤ gariniame sterilizatoriuje arba pavirinkite šias dalis maždaug 5 minutes.



Dėmesio!

Prieš sterilizuojant, visos detalės turi būti švarios. Valymo instrukcija yra pateikta ankstesniame poskyryje „Pientraukio valymas“.

- Buteliuko stovo A⑬ ir diafragmos dangtelio A⑭ sterilizuoti nereikia, nes jie nesiliečia su motinos pienu ar krūtimi.
- Nesterilizuokite siurbliuko A⑰, maitinimo adapterio A⑲, silikoninio vamzdelio A⑮ ir vamzdelių jungčių A⑯. Šios detalės nesiliečia su motinos pienu ar krūtimi. Sterilizuojant siurbliuką A⑰ ir maitinimo adapterį A⑲, jie bus sugadinti.

Laikymas

- Dėkite išplautą pientraukį, pavyzdžiui, į švarią dėžutę, arba suvyniokite jį į švarų šluostuką, kad apsaugotumėte jį nuo dulkių. Pientraukį galima laikyti surinktą arba išardytą. Norėdami apsaugoti jį nuo dulkių, ant krūtų užmosvos **A②** galima uždėti nuo dulkių apsaugantį dangtelį **A④**.

Techninės specifikacijos

Modelio numeris	BBP 1010
Įtampa ir maitinimas.....	6 V $\overline{\text{---}}$, 3,6 W
Energijos šaltinis	maitinimo adapteris, modelio numeris: GEO101T-0610, maitinimas: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A, galia: 6 V $\overline{\text{---}}$, 1 A arba 4 × LR6/AA tipo baterijos (komplekte nėra)
Apsaugos nuo sužalojimų dėl elektros smūgio klasė	Siurbliukas – III apsaugos klasė Maitinimo adapteris – II apsaugos klasė
Triukšmo lygis.....	60 dB(A)
Ištraukimo intensyvumas	Maks. –0,016 MPa (stimuliavimo režimas) Maks. –0,034 MPa (ištraukimo režimas)
Stimuliavimo / ištraukimo greitis	100 ciklų / min. (stimuliavimo režimas) 26–60 ciklų / min. (ištraukimo režimas)
Automatinio išjungimo laikmatis	30 minučių
Naudojimo sąlygos	Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 40 °C Santykinis oro drėgnumas: ≤90 %

Ant gaminio, jo priedų ir pakuotės esančių ženklų paaiškinimas



Šis ženklas reiškia, kad prieš naudojant gaminį, privaloma perskaityti jo naudojimo instrukciją.



Šis ženklas reiškia, kad šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.



Šis ženklas reiškia, kad gaminyje priskiriamas III apsaugos klasei.



Šis ženklas reiškia, kad gaminyje priskiriamas II apsaugos klasei.



Šis ženklas parodo maitinimo laido jungčių polius.



Šis ženklas reiškia, kad gaminį galima naudoti patalpose.



Šis ženklas reiškia gamybos serijos numerį.



Šis ženklas reiškia, kad privaloma sumokėti mokestį organizacijai, teikiančiai panaudotų pakuočių surinkimo ir utilizavimo paslaugas.



Šis ženklas reiškia medžiagą, iš kurios yra pagaminta pakuotė.



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Panaudotų baterijų išmetimas



Baterijose yra aplinkai žalingų cheminių junginių, todėl jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Nuneškite senas baterijas į tinkamą surinkimo punktą, kuris pasirūpins ekologišku jų šalinimu. Kur yra artimiausias surinkimo punktas, sužinosite iš savo miesto savivaldybės arba pardavėjo.

Nurodymai ir informacija, susijusi su panaudotų pakuočių išmetimu

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.